

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 03/02/2021 - MIS À JOUR LE 17/03/2021

## Sodas et test rapide antigénique COVID-19 - COVID-VIRO - AA7

Suite à la publication d'une vidéo mettant en scène un pharmacien obtenant un résultat positif en utilisant du soda sur un test rapide antigénique COVID-19, nous souhaitons apporter les précisions suivantes

- Le résultat positif du test n'est pas dû à la présence de virus dans le soda. L'acidité du soda a dégradé le test en détruisant ses composants ce qui a provoqué une réaction chimique rendant les deux bandes visibles (ce qui équivaut à un test positif).
- Le principe du test est une réaction immunologique qui doit se dérouler dans des conditions précises, notamment de pH, qui sont obtenues en suivant les indications de la notice d'utilisation fournie dans le coffret.

La société AAZ a envoyé le courrier ci-joint à l'attention des professionnels de santé.

Télécharger le courrier (03/02/2021)