

Défibrillateur (accessoires) – Cartouches d'électrodes adultes et pédiatriques Smart Pads (M5071A – M5072A) pour défibrillateurs externes Heartstart HS1 / Home / Onsite – Philips Medical Systems

Mise à jour concernant l'action de sécurité enregistrée sous le n° R2207100

Cette information de sécurité informe les utilisateurs du défaut de gel identifié sur les électrodes Smart Pads HS1 adulte et enfant ainsi que des mesures à suivre dans le cadre du remplacement des électrodes.

L'ANSM avait été informée début 2022 par la société Philips que certaines de ses électrodes utilisées uniquement pour les défibrillateurs automatisés externes (DAE) Heartstart HS1 pouvaient présenter un décollement/repliement du gel, entraînant un choc moins efficace ou inefficace en raison de la surface de contact réduite avec la peau.

Nous avons demandé à Philips de mettre à disposition des utilisateurs un document adapté pour leur expliquer la conduite à tenir lors de l'utilisation des électrodes concernées, en complément de l'information de sécurité. Nous avons souhaité que la diffusion de l'information soit étendue aux clients ayant reçu un DAE Heartstart HS1 il y a plus de 10 ans.

La distribution par Philips des électrodes de remplacement est en cours. Nous avons demandé à Philips de préciser les actions à mettre en œuvre une fois ces nouvelles électrodes reçues : remplacement puis élimination des anciennes cartouches avec un n° de lot commençant par « Y ».

Nous poursuivons nos investigations complémentaires.

Téléchargez le courrier de la société Philips

