

1/2-

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

ProGrade version 1x

Améliorations de la connectivité

Systèmes concernés	ProGrade version 1x
Description du problème	Si la connexion Wi-Fi entre le capteur-plan SkyPlate et le point de transfert HP est faible, le transfert d'une image du capteur-plan SkyPlate vers le système risque d'échouer. L'image reste dans la mémoire du capteur, mais ne peut pas être transférée par réseau sans fil ni à l'aide d'un câble de secours. Pour poursuivre, l'opérateur peut réinitialiser le capteur-plan SkyPlate en retirant ses batteries, mais l'image acquise est alors perdue et un nouveau cliché est nécessaire
Risques liés au problème	La corruption des informations et des données peut nécessiter une nouvelle acquisition de l'image.
Identification des systèmes concernés	Les systèmes ProGrade version 1x sont concernés.
Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur	Aucune action n'est requise de votre part. Le système ne fait l'objet d'aucune restriction d'utilisation. Les clients peuvent continuer à l'utiliser conformément à son usage prévu. En cas de doute ou d'incompréhension à la lecture des présentes instructions, contactez Philips.
Actions menées par Philips France Commercial	Philips prévoit de déployer un nouveau microprogramme HP sur la base installée. En outre, le matériel du point d'accès existant sur site doit faire l'objet d'un correctif. Un ingénieur de maintenance Philips vous contactera dès que le kit d'action sur site correspondant sera disponible. Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence d'action corrective 71200166.

DXR

2/2-

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

ProGrade version 1x

Améliorations de la connectivité

<p>Informations complémentaires et Assistance Technique</p>	<p>Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole.</p> <p>Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips</p>
--	---