

AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

Produit :

- Processeur vidéo VP-7000

Type de mesure : Passage du VP-7000 à la Ver. 1.011

Chers clients,

FUJIFILM publie cet avis concernant la sécurité sur le terrain de notre processeur vidéo VP-7000.

Cet avis au sujet de la sécurité sur le terrain vise à vous informer de ce qui suit :

- la nature du problème
- les mesures qui devraient être prises par le client/l'utilisateur

Ce document contient des informations importantes, vous permettant de continuer d'utiliser correctement et de façon sûre votre équipement.

Veuillez consulter les informations suivantes avec tous les membres de votre personnel qui ont besoin de connaître le contenu de ce message. Il est important d'en comprendre les implications.

Description du problème

Il a été signalé que lorsqu'un endoscope de la gamme 700 (avec du mucus ou du sang restant sur la lentille LG) était relié au système VP-7000/BL-7000, de la vapeur d'eau semblable à de la fumée se dégageait, ou que la substance se coagulait/séchait sur la lentille. Ce phénomène est dû au fait que de la substance reste sur la lentille LG de l'endoscope, ayant chauffé par absorption de la lumière provenant de la source lumineuse, et cela, presque au niveau maximum.

Si cela se produit, il est nécessaire d'enlever la substance restant sur l'extrémité distale de l'endoscope ou de changer d'endoscope. Cela entraîne l'annulation de l'examen ou un délai d'examen plus long.

Afin d'éviter ce phénomène, le logiciel est mis à niveau, afin que l'intensité lumineuse à l'extrémité distale de l'endoscope soit moindre.

Mesures à prendre par le client/l'utilisateur

(1) Selon la procédure du manuel d'utilisation, vérifiez tant visuellement que manuellement les points suivants :

- Les tubes (ou flexibles) sont exempts de rayures, de fissures, de taches ou ne sont pas désengagés.

(2) Selon la procédure du manuel de retraitement, à l'aide d'une brosse à dents propre, brossez l'extrémité distale de l'endoscope une fois complètement immergé dans une solution détergente, et enlevez tout résidu se trouvant sur la surface externe de l'extrémité distale de ce dernier.

MESURES PRÉVUES PAR FUJIFILM

Le personnel du service des révisions de FUJIFILM, communiquera avec tous les établissements

**Avis concernant la sécurité sur le terrain - Référence : Processeur vidéo FSN
20170905 VP-7000**

médicaux où les produits concernés ont été installés, pour organiser des visites et prendre les mesures correctives.

FUJIFILM s'engage à fournir des produits et des services de la plus grande qualité. Votre satisfaction des produits FUJIFILM et notre réaction face à ce problème, sont pour nous très importants.

En cas de questions concernant ce problème, contactez le bureau FUJIFILM près de chez vous.

Cordialement,

FUJIFILM

FUJIFILM Medical Systems Business, 2 rue Louis Armand- Immeuble Objectif II, 92607 Asnières
Cedex, France, Tel. : 0147 15 55 55 15

AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

Formulaire de commentaires provenant du client

Veillez remplir ce formulaire de commentaires et l'envoyer par fax ou e-mail.
Merci de votre collaboration.

Nom du client/de l'établissement :

Adresse :

Numéro de série de l'instrument :

Je confirme avoir reçu et compris l'avis ci-joint.

Cet avis ne concerne pas mon établissement.

L'appareil a été envoyé à une autre société.

Nom du client :

Fonction :

Signature :

Date :

Numéro de téléphone :

Si vos coordonnées sont incorrectes, veuillez les corriger ci-dessous :

Nom du client/de l'établissement :

Adresse :

Veillez envoyer par fax ou e-mail ce formulaire dûment rempli :

FUJIFILM Medical Systems Business

Charbel ABI-SAFI

2, rue Louis Armand- Immeuble Objectif II

92607 Asnières Cedex

France

FAX: +33 (0) 1 41 06 60 69

Email: -----