



**IMPORTANT**

A l'attention du  
Responsable de Laboratoire  
Directeur des Établissements de  
santé, Correspondant de  
Réactovigilance

Craponne, le 13 mars 2018  
Réf. : CA/im - 18 – FSCA 3816

**INFORMATION IMPORTANTE :**

**AVIS DE SECURITE**

**VIDAS® LH réf. 30406 – lots 1005940920,  
1006041540, 1006212740 et 1006274770**

Chère cliente, Cher client,

Nous avons le plaisir de vous compter parmi les utilisateurs du réactif VIDAS® LH réf. 30406 et nous vous remercions de votre fidélité.

**Description de l'anomalie :**

Plusieurs réclamations clients ont été reçues pour calibration invalide avec un calibrateur S1 faible lors de l'utilisation du coffret VIDAS LH.

Par ailleurs, des tests effectués en interne ont confirmé une diminution du signal des cartouches, au cours du temps, pour les lots suivants :

Nom du produit / référence	Numéro de lot	Date d'expiration
VIDAS LH Reference 30406	1005940920	06-AOU-2018
	1006041540	06-OCT-2018
	1006212740	21-DEC-2018
	1006274770	29-JAN-2019

L'anomalie a été mise en évidence par des réclamations portant sur une calibration invalide, mais elle concerne tous les tests effectués (calibration et échantillons patients). L'investigation a conclu que cela pourrait avoir un impact sur les résultats des patients.

**Impact patient :**

Deux situations peuvent se présenter:

- En cas de calibration invalide : un message d'erreur apparaît et il ne sera pas possible d'effectuer d'autres tests avec le lot concerné. Dans ce contexte, le risque pour le patient est un résultat retardé en raison d'une calibration invalide.
- En cas de calibration valide : de faux résultats pourraient se produire.



### **Actions requises :**

Nous vous demandons en conséquence de prendre les dispositions suivantes :

- Veuillez diffuser cette information aux personnels concernés de votre laboratoire, de conserver une copie de vos fichiers et de communiquer cette information à tous les utilisateurs de ce produit, incluant ceux à qui vous l'auriez transférée.
- **Détruire** les coffrets VIDAS® LH - réf 30406 des lots 1005940920, 1006041540, 1006212740 et 1006274770.
- Pour les tests précédemment effectués en utilisant les lots concernés de VIDAS LH (réf. 30406 lots 1005940920, 1006041540, 1006212740 et 1006274770), **nous vous demandons de revoir avec les cliniciens l'action appropriée à mener en cas de doute sur des résultats déjà rendus.**

**Les résultats devraient être revus et interprétés dans le contexte clinique global.**

- **Compléter l'accusé de réception de ce courrier**, ci-joint en Annexe A et nous le retourner :

par email à [atreia@biomerieux.com](mailto:atreia@biomerieux.com) ou par fax au **04 78 87 20 91**

A réception, nous effectuerons un avoir correspondant au nombre de coffrets que vous aurez détruits, si aucun échange n'a été fait précédemment .

**L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé** a été informée de cette communication.

bioMérieux s'engage à fournir des produits de qualité à ses clients. Nous vous prions sincèrement de nous excuser pour tout inconvénient que cette situation pourrait engendrer dans l'organisation de votre laboratoire.

Notre Centre de Relation Client se tient à votre disposition pour tout complément d'information au :

**☎ : 0 820 22 9090**

Nous vous remercions pour votre confiance en nos produits et vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'expression de nos salutations les meilleures.

Cynthia ALMIRALL  
Centre de Relation Client  
Support Applications

PJ : Accusé de réception du courrier (Annexe A)