

1/4-

URGENT – Notification de sécurité produit
Support patient

Mise à jour matérielle du support patient (référence 989001087431)

Systèmes concernés	Support patient (référence 989001087431)
Description du problème	<p>Le repose-pieds du support patient pour fusion peut être fixé en position haute. Lorsque le dispositif de fixation (crochet) n'est pas dans la position de verrouillage correcte, le repose-pieds n'est pas maintenu en toute sécurité. En cas de chute du repose-pieds, le pied ou la jambe de l'opérateur ou du patient risque d'être blessé(e) (par exemple, lors du déplacement du statif ou si l'opérateur ne le fixe pas correctement quand il soulève le repose-pieds).</p> <p>Cette situation se produit en présence des facteurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les charnières sont usées différemment des deux côtés ; • Le crochet ne maintient pas le repose-pieds ; • L'opérateur ne vérifie pas que le crochet maintient solidement le repose-pieds ; • Le repose-pieds chute de manière inattendue lorsqu'une personne le touche ou pendant le transport ; • Le pied ou la jambe du patient ou de l'opérateur se trouvent dans la "zone cible" ; <p>le pied du patient ou de l'opérateur se trouve dans la "zone à risque".</p>
Risques liés au problème	Le crochet ne maintient pas correctement le repose-pieds en position verticale. Le repose-pieds risque donc de tomber ou de se balancer et ainsi d'occasionner des blessures pour l'opérateur ou le patient.
Identification des systèmes concernés	Tous les supports patient (référence 989001087431) sont concernés par ce problème.

2/4-

URGENT – Notification de sécurité produit
Support patient

Mise à jour matérielle du support patient (référence 989001087431)

Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur

Le client/utilisateur doit toujours vérifier que le crochet est dans la bonne position et qu'il est bien verrouillé, conformément au manuel d'utilisation. (Appuyez sur le crochet jusqu'à ce qu'il s'enclenche) Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée sur la photo avec la flèche verte.



3/4-

URGENT – Notification de sécurité produit
Support patient

Mise à jour matérielle du support patient (référence 989001087431)



4/4-

URGENT – Notification de sécurité produit
Support patient***Mise à jour matérielle du support patient (référence 989001087431)***

Actions menées par Philips France Commercial	Philips prévoit de repenser la conception : <ul style="list-style-type: none">• Charnières de remplacement plus solides pour la plaque de base• Installation du crochet modifié pour la plaque de base (adapté aux nouvelles charnières)• Cylindre de frein sous la plaque de base pour minimiser l'énergie cinétique Un responsable technique Philips vous contactera dès la mise à disposition du kit d'action sur site correspondant. Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence FCO-71200185.
Informations complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole. Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips