



**medCOMP**

1499 Delp Drive

Harleysville, PA 19438

Tel:215-256-4201

Fax:215-256-1787

[www.medcompnet.com](http://www.medcompnet.com)

13 Juillet 2018

## **Importantes mesures correctives de sécurité sur le terrain - Rappel de produit**

Cher client,

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu certains des produits identifiés dans la gamme de produits d'hémodialyse à court terme. Veuillez consulter le document ci-joint pour obtenir la liste complète des codes de produits et des numéros de lot. Un rappel de produit a été lancé pour ces produits en raison de la possibilité que les ailes de suture se fissurent ou se brisent. **Aucune blessure de patient n'a été signalée.** Les cathéters implantés avec des ailes de suture intactes n'ont pas besoin d'être retirés. Cependant, une autre méthode de fixation du cathéter devrait être mise en place pour tous les cathéters implantés, en raison du risque de fissuration ou de rupture des ailes de suture. Les blessures potentielles du patient comprennent la dislocation du cathéter, les saignements et les embolies aériennes.

Le produit concerné a été expédié entre février 2016 et février 2018.

**Medcomp demande le retour de tous les produits affectés non utilisés.** Examinez immédiatement votre inventaire et mettez en quarantaine les produits objets de rappel. Pour tout produit ayant fait l'objet d'une distribution, veuillez identifier les destinataires et les aviser immédiatement de ce rappel de produit. Votre notification peut être renforcée en incluant une copie de cette lettre d'avis de rappel.

**Veuillez noter qu'aucun autre produit de la marque Medcomp n'est concerné par ce rappel.**

Contactez votre représentant du service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandises (RGA) si nécessaire.

Si vous avez des questions concernant cette communication, veuillez contacter votre distributeur.

(Informations sur le distributeur ici)

Nous apprécions votre aide à ce sujet et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter directement.

Meilleures salutations,

Beth Giammaruti, RN MSN

Analyste clinique / Affaires cliniques

Courriel : [complaints@medcompnet.com](mailto:complaints@medcompnet.com)

Fax : 215-256-9191

Cc : Dossier de conformité ; Service à la clientèle ; Gestion des produits.



**medCOMP**

1499 Delp Drive

Harleysville, PA 19438

Tel:215-256-4201

Fax:215-256-1787

www.medcompnet.com

## Rappel de produit - Élimination de produit

Nom de l'établissement : \_\_\_\_\_

Code du produit affecté : \_\_\_\_\_

Numéro(s) de lot : \_\_\_\_\_

Produit dans l'inventaire courant : *OUI*                      *NON (encercler)*

Élimination du produit (vérification) :

# retourné \_\_\_\_\_

RGA# pour le produit retourné \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Département/Titre : \_\_\_\_\_

*NOM EN CAPITALES* : \_\_\_\_\_

Retournez cette page à :

*Beth Giammaruti, RN MSN*

*Fax : 215-256-9191*

*Courriel : complaints@medcompnet.com*

Adresse :

*Medcom*

*p*

*1499 Delp Drive*

*Harleysville, PA 19438*

**ISO13485**  
Certified Quality System

MedComp Recall July2018 Austria

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MKAF320	T118M
MKAF320	T118M
MJGC620	T94M
MHXJ990	T96M
MLCT650	T96M
MCAZ660	XTP116IJSE
MCBF770	XTP116IJSE
MCBP860	XTP116IJSE
MCCD220	XTP116IJSE
MCCP770	XTP116IJSE
MCDC760	XTP116IJSE
MCDR390	XTP116IJSE
MCDW650	XTP116IJSE
MCFZ020	XTP116IJSE
MCFZ020	XTP116IJSE
MKAR610	XTP116IJSE
MCBM800	XTP118IJSE
MCBM800	XTP118IJSE
MCCN920	XTP118IJSE
MHNZ430	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE

MedComp Recall July2018 UK

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCCT830	T118ME
MJGX680	T94M
MJF710	T96M
MCCL210	XTP114IJS
MCCR210	XTP114IJS
MCCR210	XTP114IJS
MKAJ860	XTP114IJS
MKAJ860	XTP114IJS
MHPK450	XTP116IJS=
MHQA360	XTP116IJS=
MHQA360	XTP116IJS=
MHRY260	XTP116IJS=
MHSN360	XTP116IJS=
MHXD040	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MBC960	XTP116IJS
MCBP860	XTP116IJS
MCCA470	XTP116IJS
MCCB070	XTP116IJS
MCCD220	XTP116IJS
MCCF760	XTP116IJS
MCCH000	XTP116IJS
MCCN170	XTP116IJS
MCCQ400	XTP116IJS
MCD550	XTP116IJS
MCD760	XTP116IJS
MCDL290	XTP116IJS
MCDV880	XTP116IJS
MCFP380	XTP116IJS
MCFT510	XTP116IJS
MCFZ020	XTP116IJS

MCFZ040	XTP116IJSE
MKAG560	XTP116IJSE
MKAH630	XTP116IJSE
MKAL540	XTP116IJSE
MKAT730	XTP116IJSE
MKAW690	XTP116IJSE
MHQK920	XTP116MT=
MHTH960	XTP116MT=
MHTH960	XTP116MT=
MHTH960	XTP116MT=
MHTQ210	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHZX090	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MLBA580	XTP116MT=
MLBA580	XTP116MT=
MHSF290	XTP118IJS=
MHTQ190	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MHYK840	XTP118IJS=
MLAL360	XTP118IJS=
MLBH890	XTP118IJS=
MCAY020	XTP118IJSE
MCAY020	XTP118IJSE
MCBG920	XTP118IJSE
MCBM800	XTP118IJSE
MCBS830	XTP118IJSE
MCBS830	XTP118IJSE
MCBS840	XTP118IJSE
MCDL660	XTP118IJSE
MCDL660	XTP118IJSE
MCDR300	XTP118IJSE
MCFA560	XTP118IJSE
MCFA560	XTP118IJSE
MCFP400	XTP118IJSE
MCFY300	XTP118IJSE

MCFY300	XTP118IJSE
MHRM830	XTP118MT=
MHTR690	XTP118MT=
MHVL230	XTP118MT=
MHVL230	XTP118MT=
MHXA430	XTP118MT=
MHXA430	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXV200	XTP118MT=
MHZK690	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJBD090	XTP118MT=
MJJY720	XTP118MT=
MJJY720	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJLG700	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLBA590	XTP118MT=
MHVB690	XTP119MT=
MHVB690	XTP119MT=
MHVB690	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZT980	XTP119MT=
MJLP120	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MLBA610	XTP119MT=
MCFF180	XTP94MTE.
MCFT340	XTP96IJS



MedComp Recall July2018 Turkey

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCFA640	XTP114IJS
MJAC400	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MLBA580	XTP116MT=
MCBM710	XTP118IJS
MCBM710	XTP118IJS
MHSF290	XTP118IJS=
MHYK840	XTP118IJS=
MJLG700	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MCCJ970	XTP94IJS=
MCCZ050	XTP94MT=
MCCZ050	XTP94MT=
MCDA350	XTP94MT=
MCDA350	XTP94MT=
MCDA350	XTP94MT=
MCDA350	XTP94MT=
MCDA350	XTP94MT=
MCDM770	XTP94MT=
MCDN620	XTP94MT=
MCDW970	XTP94MT=
MHNZ630	XTP96MT=
MHNZ630	XTP96MT=
MHNZ630	XTP96MT=
MHNZ630	XTP96MT=
MHQC250	XTP96MT=
MHQC250	XTP96MT=
MHSN210	XTP96MT=
MJCV830	XTP96MT=
MLCL520	XTP96MT=





MedComp Recall July2018 Swiss

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCCP590	T116M
MJAZ020	T94M
MCFF580	XTP96MT



MedComp Recall July2018 Sweden

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MKAB620	XTP116IJC
MHYQ620	XTP116IJS=
MCFZ020	XTP116IUSE
MHXY000	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MKAG420	XTP118IJC
MHVV420	XTP118IJS=
MHXD480	XTP118MT=
MCBG700	XTP94MT
MCDC240	XTP94MT
MCDJ300	XTP94MT
MCFF150	XTP94MT
MKAH230	XTP94MT
MKAL500	XTP94MT
MCCN840	XTP96MT
MCFR440	XTP96MT



MedComp Recall July2018 Spain

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MKAD560	T116C
MCBM870	T116M
MCFS300	T116M
MCFT650	T116M
MCFX880	T116M
MCBX380	T118M
MCDL020	T118M
MCDX070	T118M
MCDX070	T118M
MCFA570	T118M
MCFH790	T118M
MKAG530	T118M
MKAK390	T118M
MKAL400	T118M
MKAM880	T118M
MKBA670	T118M
MKBA670	T118M
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MHZR170	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MJHR000	XTP116IJS=
MCBG170	XTP116IJS-1
MCBG420	XTP116IJS-1
MCBG420	XTP116IJS-1
MCCJ410	XTP116IJS-1
MCCJ410	XTP116IJS-1
MCCW200	XTP116IJS-1
MCCX810	XTP116IJS-1
MCCX810	XTP116IJS-1
MCDD860	XTP116IJS-1
MCDY020	XTP116IJS-1
MCFG010	XTP116IJS-1
MCFG010	XTP116IJS-1
MCFG010	XTP116IJS-1
MCFH800	XTP116IJS-1
MCFK720	XTP116IJS-1
MCFQ290	XTP116IJS-1
MKAA530	XTP116IJS-1
MKAA530	XTP116IJS-1
MKAD270	XTP116IJS-1
MKAJ960	XTP116IJS-1
MKAJ960	XTP116IJS-1

MKAJ960	XTP116IJS-1
MKAP800	XTP116IJS-1
MKAP800	XTP116IJS-1
MKAP800	XTP116IJS-1
MKAS100	XTP116IJS-1
MKAY900	XTP116IJS-1
MKBA590	XTP116IJS-1
MKBA590	XTP116IJS-1
MKBA590	XTP116IJS-1
MHTQ210	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHZX090	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJDC370	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MHXD480	XTP118MT=
MHZK690	XTP118MT=
MJCP440	XTP118MT=
MJGX700	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLCT020	XTP118MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZN980	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MLBA610	XTP119MT=





MedComp Recall July2018 Slovenia

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MH XK730	XTP114IJS=
MCBG090	XTP114IJS=
MH ZX910	XTP116IJS=
MCBF220	XTP116IJS=
MCBP860	XTP116IJS=
MCFT510	XTP116IJS=
MCCL040	XTP118CT
MCCL040	XTP118CT
MCCY680	XTP118CT
MKAA210	XTP118CT
MCDL670	XTP94IJS
MCCQ950	XTP96IJS
MCCQ950	XTP96IJS
MCCQ950	XTP96IJS
MCDB810	XTP96IJS
MCDB810	XTP96IJS
MCDB810	XTP96IJS
MCDW960	XTP96MT
MCCN530	XTP98IJS
MCDD430	XTP98IJS
MCDV950	XTP98IJS
MCFT260	XTP98IJS
MKAN470	XTP98MT



MedComp Recall July2018 Portugal

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MHYS090	T96M
MJDW030	T96M
MJGX690	T96M
MLBK460	T96M
MJL550	XTP114MT=
MJL550	XTP114MT=
MLAX320	XTP114MT=
MHPK450	XTP116IJS=
MHQA360	XTP116IJS=
MHSF280	XTP116IJS=
MHXD040	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MJAF850	XTP116IJS=
MJHR000	XTP116IJS=
MCBP870	XTP116IJS=
MCCB070	XTP116IJS=
MCCF350	XTP116IJS=
MCCF350	XTP116IJS=
MCCH000	XTP116IJS=
MCDC760	XTP116IJS=
MCDL080	XTP116IJS=
MCDL330	XTP116IJS=
MCDR390	XTP116IJS=
MKAH630	XTP116IJS=
MKAH630	XTP116IJS=
MHTH960	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=

MJDC370	XTP116MT=
MHSK920	XTP118IJS=
MHTQ190	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MCAY020	XTP118IJS=
MCBD380	XTP118IJS=
MCBM800	XTP118IJS=
MCBM800	XTP118IJS=
MCBM800	XTP118IJS=
MCBS830	XTP118IJS=
MCBS830	XTP118IJS=
MCDC500	XTP118IJS=
MCDC500	XTP118IJS=
MCDL660	XTP118IJS=
MCDL660	XTP118IJS=
MCDV530	XTP118IJS=
MCFA560	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY750	XTP118IJS=
MHPF920	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MHSM580	XTP118MT=
MHWP750	XTP118MT=
MHWP750	XTP118MT=
MHWP750	XTP118MT=
MHXA430	XTP118MT=
MHXD480	XTP118MT=
MHXD480	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXV200	XTP118MT=
MHZK690	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJBD090	XTP118MT=
MJBD090	XTP118MT=
MJBD090	XTP118MT=
MJGX700	XTP118MT=

MJHJ880	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJLG700	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLBA590	XTP118MT=
MLCT020	XTP118MT=
MLCT020	XTP118MT=
MHVB690	XTP119MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZT980	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MLBA610	XTP119MT=
MLBA610	XTP119MT=
MCFT850	XTP94IJS=
MCDN620	XTP94MT=



MedComp Recall July2018 Poland

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MHXG180	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MHTH960	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MHSF290	XTP118IJS=
MHSK920	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHXD470	XTP118IJS=
MLAL360	XTP118IJS=
MCAV020	XTP118IJS=
MHXA430	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MJGX700	XTP118MT=
MJHJ880	XTP118MT=
MJJY720	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MLBG470	XTP118MTE
MHPC950	XTP119MTE





MedComp Recall July2018 Netherlands

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCFF200	DL 11/15
MCFF620	DL 11/15
MCFK200	DL 11/15
MCFV440	DL 11/15
MCFV440	DL 11/15
MKAK310	DL 11/15
MKAK310	DL 11/15
MCFB450	DL 11/20
MCFF930	DL 11/20
MCFF930	DL 11/20
MCFF930	DL 11/20
MCFV450	DL 11/20
MCFV450	DL 11/20
MKAK320	DL 11/20
MKAK320	DL 11/20
MKAV210	DL 11/20
MKAV210	DL 11/20
MCAY080	DL 9/15
MCAY080	DL 9/15
M CBD600	DL 9/15
MCCA030	DL 9/15
MCCH330	DL 9/15
MJLP090	T94M
MCCP130	XTP114IJC
MCAW340	XTP114IUSE
M CBF100	XTP116IJC
MKAB620	XTP116IJC
MKAB620	XTP116IJC
MCAX300	XTP118IJC
MCCN520	XTP118IJC
MCFA560	XTP118IUSE
MCFA560	XTP118IUSE
MHQA380	XTP118MTE
MJGC640	XTP118MTE
M CBG700	XTP94MT
MCDC240	XTP94MT
MCDJ300	XTP94MT
MKAL500	XTP94MT



MedComp Recall July2018 Italy

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCAT660	XTP114IUSE
MCBF210	XTP114IUSE
MCBF210	XTP114IUSE
MCBG090	XTP114IUSE
MCBP540	XTP114IUSE
MCFB780	XTP114IUSE
MKBA780	XTP114IUSE
MHVB060	XTP116IJC=
MHZR140	XTP116IJC=
MHZR140	XTP116IJC=
MHPK450	XTP116IJS=
MHQA360	XTP116IJS=
MHRY260	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHXK740	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MJAC390	XTP116IJS=
MCBD800	XTP116IUSE
MCCB070	XTP116IUSE
MCCF760	XTP116IUSE
MCCJ090	XTP116IUSE
MCCP770	XTP116IUSE
MCD A550	XTP116IUSE
MCDC760	XTP116IUSE
MCDL080	XTP116IUSE
MCDR390	XTP116IUSE
MCDR390	XTP116IUSE
MCDW650	XTP116IUSE
MCDW650	XTP116IUSE
MCFP380	XTP116IUSE
MCFZ000	XTP116IUSE
MCFZ020	XTP116IUSE

MCFZ040	XTP116IUSE
MKAG560	XTP116IUSE
MKAH630	XTP116IUSE
MKAN430	XTP116IUSE
MKAR600	XTP116IUSE
MKAR610	XTP116IUSE
MHPF900	XTP116MT=
MHPF900	XTP116MT=
MHTH960	XTP116MT=
MHTH960	XTP116MT=
MHTQ210	XTP116MT=
MHTQ210	XTP116MT=
MHTQ210	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MHZX090	XTP116MT=
MHZX090	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJDC370	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MJGT620	XTP116MT=
MCAX300	XTP118IJC
MHQV880	XTP118IJS=
MHQV880	XTP118IJS=
MHSK920	XTP118IJS=
MHSK920	XTP118IJS=
MHTQ190	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MHYK840	XTP118IJS=
MCAY020	XTP118IUSE
MCAY020	XTP118IUSE
MCBM800	XTP118IUSE
MCBS830	XTP118IUSE
MCCN920	XTP118IUSE
MCCN920	XTP118IUSE
MCDL660	XTP118IUSE
MCDL660	XTP118IUSE

MCDR300	XTP118IUSE
MCDR300	XTP118IUSE
MCFA560	XTP118IUSE
MCFY300	XTP118IUSE
MCFY750	XTP118IUSE
MKAN460	XTP118IUSE
MHNC850	XTP118MT=
MHPF920	XTP118MT=
MHPY070	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MHVL230	XTP118MT=
MHVL230	XTP118MT=
MHWB750	XTP118MT=
MHWB750	XTP118MT=
MHXA430	XTP118MT=
MHXD480	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXV200	XTP118MT=
MHZK690	XTP118MT=
MHZK690	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJBD090	XTP118MT=
MJJY720	XTP118MT=
MJJY720	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLCT020	XTP118MT=
MHNZ430	XTP118MTE
MHQA380	XTP118MTE
MHSM610	XTP118MTE
MHSY580	XTP118MTE
MHXL910	XTP118MTE
MHXL910	XTP118MTE
MHYA320	XTP118MTE
MJFA360	XTP118MTE
MJGC640	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE

MJHR400	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE
MJJQ710	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MHVB690	XTP119MT=
MHVB690	XTP119MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHVS860	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXD650	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHXG200	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZT980	XTP119MT=
MJLP120	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=
MLBA610	XTP119MT=
MKAG870	XTP96MT



MedComp Recall July2018 Ireland

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCFG890	XTP114CT
MCBD000	XTP114IJC
MCBW980	XTP114IJC
MCBW980	XTP114IJC
MCCL620	XTP114IJC
MCCP130	XTP114IJC
MCCP130	XTP114IJC
MCDV260	XTP114IJC
MCDZ790	XTP114IJC
MCFP180	XTP114IJC
MCBG080	XTP116IJC
MCBG080	XTP116IJC
MCCQ320	XTP116IJC
MKAA090	XTP116IJC
MKAB620	XTP116IJC
MCBL750	XTP116IJS
MCFK070	XTP116IJS
MCFT480	XTP116IJS
MCCD220	XTP116IJSE
MCCF350	XTP116IJSE
MCCP880	XTP118IJC
MKAA220	XTP118IJC
MKAG420	XTP118IJC
MKAL580	XTP118IJC
MKAQ520	XTP118IJC
MCBM710	XTP118IJS
MCBM710	XTP118IJS
MCCD940	XTP118IJS
MKAL450	XTP118IJS
MKAN450	XTP118IJSE
MHSM610	XTP118MTE





MedComp Recall July2018 Hungary

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCAY730	XTP116IJC
MCBF100	XTP116IJC
MCBF100	XTP116IJC
MCBF100	XTP116IJC
MCBF100	XTP116IJC
MCBG080	XTP116IJC
MCBG080	XTP116IJC
MCBZ390	XTP116IJC
MCBZ390	XTP116IJC
MCBZ390	XTP116IJC
MCCQ320	XTP116IJC
MCCQ320	XTP116IJC
MCDL600	XTP116IJC
MCDW870	XTP116IJC
MCFA580	XTP116IJC
MCFA580	XTP116IJC
MCFT970	XTP116IJC
MKAA090	XTP116IJC
MKAA090	XTP116IJC
MKAB620	XTP116IJC
MKAG540	XTP116IJC
MKAT120	XTP116IJC
MKAT120	XTP116IJC
MCAZ660	XTP116IJC
MCBD800	XTP116IJC
MCBP870	XTP116IJC
MCCB070	XTP116IJC
MCCN170	XTP116IJC
MCDC750	XTP116IJC
MCDC760	XTP116IJC
MCDL290	XTP116IJC
MCDR730	XTP116IJC
MCFR490	XTP116IJC
MCFT510	XTP116IJC
MCFZ020	XTP116IJC
MKAH630	XTP116IJC
MKAN440	XTP116IJC
MKAW690	XTP116IJC
MCBF960	XTP118IJC
MCBQ940	XTP118IJC
MCBW990	XTP118IJC
MCBW990	XTP118IJC
MCCH780	XTP118IJC
MCCN520	XTP118IJC
MCCN520	XTP118IJC
MCCW320	XTP118IJC
MCDC140	XTP118IJC

MCDL640	XTP118IJC
MCDL640	XTP118IJC
MCDV270	XTP118IJC
MCDZ800	XTP118IJC
MCFJ110	XTP118IJC
MCFJ110	XTP118IJC
MCFV050	XTP118IJC
MCFV050	XTP118IJC
MKAA220	XTP118IJC
MKAG420	XTP118IJC
MCAV020	XTP118IJC
MCBM800	XTP118IJC
MCBM800	XTP118IJC
MCDC500	XTP118IJC
MCDV530	XTP118IJC
MCFA560	XTP118IJC
MCFP400	XTP118IJC
MCFY300	XTP118IJC
MCFY750	XTP118IJC
MKAN450	XTP118IJC
MCFF780	XTP94MT
MKAH230	XTP94MT
MCCQ950	XTP96IJC
MCDN010	XTP96MT
MCFF580	XTP96MT

MedComp Recall July2018 Greece

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MHYH530	XTP116IJS=
MCAZ660	XTP116IJE
MCCD220	XTP116IJE
MCDL080	XTP116IJE
MCFT510	XTP116IJE
MCFZ020	XTP116IJE
MKAH630	XTP116IJE
MJAL920	XTP116MT=
MJAL920	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MHSK920	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHTF170	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJCP440	XTP118MT=

MedComp Recall July2018 Germany

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MHYS090	T96M
MLCT650	T96M
MJBP190	T98M
MCCL210	XTP114IJS=
MLCT010	XTP114MT=
MHRY260	XTP116IJS=
MHSF280	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MHYW780	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MCCF760	XTP116IJS=
MCFP390	XTP116IJS=
MHXY000	XTP116MT=
MJAC400	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJBP200	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MHSF290	XTP118IJS=
MHSF290	XTP118IJS=
MHSK920	XTP118IJS=
MHWD520	XTP118IJS=
MHYK840	XTP118IJS=
MHRF770	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=
MHZF590	XTP119MT=
MJLP120	XTP119MT=
MJMD590	XTP119MT=

MedComp Recall July2018 France

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MLDH060	T116ME.
MHRX860	T118ME.
MHRX860	T118ME.
MJKJ070	T118ME.
MJKJ070	T118ME.
MJLP090	T94M
MLBK460	T96M
MLBK460	T96M
MHYH530	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MJHR000	XTP116IJS=
MCBB400	XTP116IJS=
MCBB400	XTP116IJS=
MCBL850	XTP116IJS=
MCBL850	XTP116IJS=
MCBL850	XTP116IJS=
MCBL850	XTP116IJS=
MCBT950	XTP116IJS=
MCBT950	XTP116IJS=
MHPF900	XTP116IJS=
MHPF900	XTP116IJS=
MHXY000	XTP116IJS=
MHXY000	XTP116IJS=
MHXY000	XTP116IJS=
MHZX090	XTP116IJS=
MJAC400	XTP116IJS=
MJAL920	XTP116IJS=
MJBG320	XTP116IJS=
MJBP200	XTP116IJS=
MJFP350	XTP116IJS=
MJFP350	XTP116IJS=
MHQV880	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MLAL360	XTP118IJS=
MCCR420	XTP118IJS=
MCFR820	XTP118IJS=
MCFR820	XTP118IJS=
MCFV870	XTP118IJS=
MKAB500	XTP118IJS=
MKAR390	XTP118IJS=
MHPF920	XTP118IJS=
MHPF920	XTP118IJS=
MHTR690	XTP118IJS=
MHXA430	XTP118IJS=
MHZK690	XTP118IJS=
MJAZ040	XTP118IJS=
MJBD090	XTP118IJS=

MJGX700	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=
MJLG700	XTP118MT=
MJLM270	XTP118MT=

MedComp Recall July2018 Czech Republic

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCDY970	XTP114IUSE
MCFA580	XTP116IJC
MCAZ660	XTP116IUSE
MCBF220	XTP116IUSE
MCBF770	XTP116IUSE
MCBG100	XTP116IUSE
MCDW650	XTP116IUSE
MCFP390	XTP116IUSE
MKAH630	XTP116IUSE
MCBM800	XTP118IUSE
MCBS830	XTP118IUSE
MCDL660	XTP118IUSE
MCFA560	XTP118IUSE
MCFY300	XTP118IUSE
MKAN450	XTP118IUSE
MKAN460	XTP118IUSE
MHSM610	XTP118MTE



MedComp Recall July2018 Croatia

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCAT660	XTP114IJS=
MKAD710	XTP114IJS=
MHPK450	XTP116IJS=
MHQA360	XTP116IJS=
MHXD040	XTP116IJS=
MHXD040	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MHXG180	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MH XK740	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYH530	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHYQ620	XTP116IJS=
MHZX910	XTP116IJS=
MCAZ660	XTP116IJS=
MCBC110	XTP116IJS=
MCBD800	XTP116IJS=
MCBG100	XTP116IJS=
MCCB070	XTP116IJS=
MCCD220	XTP116IJS=
MCCF350	XTP116IJS=
MCCH000	XTP116IJS=
MCCP770	XTP116IJS=
MCDA550	XTP116IJS=
MCDC750	XTP116IJS=
MCDR390	XTP116IJS=
MCDR730	XTP116IJS=
MCDR730	XTP116IJS=
MCDV880	XTP116IJS=
MCDW630	XTP116IJS=
MCFP380	XTP116IJS=
MCFR490	XTP116IJS=
MCFT510	XTP116IJS=
MCFZ020	XTP116IJS=
MCFZ020	XTP116IJS=
MKAG560	XTP116IJS=
MKAL440	XTP116IJS=
MKAX670	XTP116IJS=
MHTQ210	XTP116MT=
MHXY000	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJBG320	XTP116MT=
MJFP350	XTP116MT=
MHYR010	XTP116MTE
MHSF290	XTP118IJS=

MHSK920	XTP118IJS=
MHSK920	XTP118IJS=
MHTQ190	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHTR210	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHVV420	XTP118IJS=
MHWG700	XTP118IJS=
MHXD470	XTP118IJS=
MHYK840	XTP118IJS=
MHYW490	XTP118IJS=
MLAL360	XTP118IJS=
MLBH890	XTP118IJS=
MCAY020	XTP118IJS=
MCAY020	XTP118IJS=
MCBG920	XTP118IJS=
MCBG920	XTP118IJS=
MCBG920	XTP118IJS=
MCBM800	XTP118IJS=
MCBM800	XTP118IJS=
MCBS830	XTP118IJS=
MCBS830	XTP118IJS=
MCBS830	XTP118IJS=
MCBS840	XTP118IJS=
MCCN920	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFP400	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY300	XTP118IJS=
MCFY750	XTP118IJS=
MKAN450	XTP118IJS=
MKAN460	XTP118IJS=
MHNC850	XTP118MT=
MHNC850	XTP118MT=
MHRM830	XTP118MT=
MHTF170	XTP118MT=
MHTF170	XTP118MT=
MHXA430	XTP118MT=
MHXD480	XTP118MT=
MHXG190	XTP118MT=
MHXV200	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJAZ040	XTP118MT=
MJCP440	XTP118MT=
MJKN850	XTP118MT=

MJKN850	XTP118MT=
MJLG700	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MLAL930	XTP118MT=
MLBA590	XTP118MT=
MHQA380	XTP118MTE
MHQA380	XTP118MTE
MHSM610	XTP118MTE
MJGC640	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE
MJHR400	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MHVS860	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=
MHZF590	XTP119MT=

MedComp Recall July2018 Bulgaria

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MHKF330	XTP116MTE

MedComp Recall July2018 Belgium

<b>Batch/lot number</b>	<b>Item number</b>
MCAZ820	DL 11/15
MCAZ820	DL 11/15
MCAZ820	DL 11/15
MCCB890	DL 11/15
MCCB890	DL 11/15
MCCJ250	DL 11/15
MCDF160	DL 11/15
MCDQ630	DL 11/15
MCCJ690	DL 11/20
MCAZ080	DL 9/15
MCBD600	DL 9/15
MCBD600	DL 9/15
MCBD600	DL 9/15
MCBP740	DL 9/15
MCBP740	DL 9/15
MCBW440	DL 9/15
MCBW440	DL 9/15
MCCA030	DL 9/15
MCBB220	XTP116IJSE
MCDL290	XTP116IJSE
MCFP390	XTP116IJSE
MCFR490	XTP116IJSE
MHTQ210	XTP116MT=
MHZX090	XTP116MT=
MLAL360	XTP118IJS=
MCBG920	XTP118IJSE
MKAN450	XTP118IJSE
MKAN460	XTP118IJSE
MHRM830	XTP118MT=
MHXV200	XTP118MT=
MJAA880	XTP118MT=
MJMQ430	XTP118MT=
MHSM610	XTP118MTE
MHXL910	XTP118MTE
MHXL910	XTP118MTE
MHXL910	XTP118MTE
MHYA320	XTP118MTE
MHYA320	XTP118MTE
MHYA320	XTP118MTE
MJFA360	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MLBG470	XTP118MTE
MCDA800	XTP94MT