

Nom Johane Negrit
Entité SHS EMEA FBA FRA CS SO-TSC
DI&AT&US-SY

Téléphone 06 18 65 28 54
johane.negrit@siemens-healthineers.com

N/réf. SY060/20/P

Date 12 mars 2021

Lettre de sécurité SY060/20/P
Information relative au traitement des points temporels dans *syngo.via*

N° Installation :
Système concerné : *syngo.via* version inférieure à VB40A

Chère Cliente, Cher Client,

Cette lettre a pour objectif de vous informer d'un fonctionnement spécifique dans le traitement des points temporels de *syngo.via* :

Une étude ouverte en premier lieu, dans le cadre de workflow, est appelée étude en cours. Il se peut que cette étude ne soit pas la plus récente, si une étude plus récente est disponible dans la base de données. Il est recommandé de vérifier la date/heure de l'étude en tant que source d'identification principale pour savoir si toutes les données importantes sont prises en compte et/ou de vérifier les données du système d'information principal (tels que système d'information radiologique (SIR)) pour lequel l'étude doit être créée.

Contexte :

syngo.via applique la logique suivante au tri et au traitement des points temporels (voir le manuel utilisateur *syngo.via*, au chapitre pratique clinique avec *syngo.via*) :

Dès que les données sont chargées dans *syngo.via*, le panneau Series les trie par groupes de points temporels par « Actuel » / « Précédent » / « Suivant » en fonction de la date d'acquisition et de l'heure de l'étude.

- Les données les plus récentes sont chargées dans le point temporel « Actuel ».
- Les anciennes données sont chargées dans le groupe de points temporels « Précédent »
- Les données récentes (acquises après la date d'acquisition actuelle) sont triées dans le groupe « Suivant ».

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a été informée de cette communication.

Siemens Healthcare S.A.S

40, avenue des Fruitiers
SISLEY
93200 Saint-Denis
France

Tel.: +33 1 8557 0000
healthcare.siemens.fr

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 499 250,00 euros
Siège social : 40, avenue des Fruitiers – 93527 Saint-Denis Cedex
SIREN : 810 794 800 - Ident. T.V.A FR93 810 794 800 ; R.C.S. Bobigny B 810 794 800 - APE : 4618Z
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0123 34178 876 - BIC : BNPAFRPPAC

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez également contacter le centre de support client Siemens Healthcare SAS France au 0820 80 75 69 et indiquer votre n° d'installation.

Veillez agréer, Chère Cliente, Cher Client, nos respectueuses salutations.

Johane NEGRIT
Responsable d'Activité *Syngo*

Fanny HACHE
Responsable Affaires Réglementaires

—