

Mesures immédiates requises

A transmettre aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs de laboratoire et aux correspondants locaux de réactovigilance

Date

3 avril 2020

**Produit** 

Produit	Référence	Numéros de série	UDI
Accelerator a3600	06P50	Tous	N/A
c System Interface Module	00F30	Tous	IN/A

Objet

Abbott Diagnostics a reçu l'avis urgent de sécurité ci-joint de la part d'Inpeco, le fabricant de l'ACCELERATOR a3600. Parmi les cinq dysfonctionnements qui y sont décrits, seul celui présenté ci-dessous impacte votre système.

Module d'interface a3600 c System: Procédure de rétablissement de l'erreur *Délai d'attente total* expiré sur le module d'interface c8000/c16000

Des erreurs Délai d'attente total expiré (Total Timeout expired - code 7083) peuvent être générées si un tube échantillon se trouve en station d'échantillonnage sur le module d'interface de l'ARCHITECT cSystems (IM) et que l'un des scénarios suivants se produit :

- Le couvercle du carrousel échantillons de l'ARCHITECT cSystems reste ouvert pendant plus de 20 minutes alors que l'IM n'est pas Hors ligne
- Le traitement de plusieurs tubes ou des CQ est réalisé sur le carrousel échantillons d'un ARCHITECT cSystems pendant plus de 20 minutes alors que l'IM n'est pas Hors ligne

Le dépannage étape par étape actuel de l'erreur Délai d'attente total expiré affiché sur l'Interface Utilisateur Intégrée (IUI) du système automatisé n'est pas approprié puisqu'il permet la libération des tubes échantillons présents sur la piste secondaire de l'IM, tandis que l'analyseur peut continuer à effectuer des aspirations supplémentaires prévues pour le tube échantillon en position d'échantillonnage, alors que le traitement des tubes échantillons sur le système automatisé a été interrompu. Il est possible que l'aiguille aspire le contenu d'autres tubes dans la file d'attente de l'IM lors de leur passage en position d'échantillonnage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie **Dysfonctionnement 2** – Procédure de rétablissement de l'erreur Délai d'attente total expiré sur le module d'interface c8000/c16000 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco cijoint.

Impact sur les résultats de patients

Veuillez vous référer à la partie "Risques pour la santé" relative au dysfonctionnement 2 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

### Mesures requises

Veuillez vous référer à la partie "Mesures à prendre par l'utilisateur" pour le dysfonctionnement 2 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

Votre représentant Abbott vous contactera pour programmer une visite relative à la mise à jour de votre ACCELERATOR a3600 pour résoudre ces dysfonctionnements.

Veuillez compléter le formulaire de réponse client ci-joint. Il n'est pas nécessaire de compléter le formulaire de réponse client Inpeco car Abbott répondra à Inpeco.

Si vous avez transmis le produit mentionné ci-dessus à d'autres laboratoires, veuillez les informer de cette lettre de mesures correctives et leur en transmettre une copie.

Veuillez conserver cette lettre pour votre documentation.

L'ANSM a été informée de ces mesures.

#### Contact

Nous regrettons sincèrement les désagréments occasionnés par cette situation au sein de votre laboratoire. Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez contacter le service Clients Abbott au 01 45 60 25 50.



Mesures immédiates requises

A transmettre aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs de laboratoire et aux correspondants locaux de réactovigilance

**Date** 

3 avril 2020

**Produit** 

Produit	Référence	Numéros de série	UDI
Accelerator a3600 c System Interface Module	06P50	Tous	N/A
Accelerator a3600 Aliquoter Module	06P47	Tous	N/A

#### Objet

Abbott Diagnostics a reçu l'avis urgent de sécurité ci-joint de la part d'Inpeco, le fabricant de l'ACCELERATOR a3600. Parmi les cinq dysfonctionnements qui y sont décrits, seuls les deux présentés ci-dessous impactent votre système.

<u>Module d'interface a3600 c System : Procédure de rétablissement de l'erreur Délai d'attente total expiré sur le module d'interface c8000/c16000</u>

Des erreurs Délai d'attente total expiré (Total Timeout expired - code 7083) peuvent être générées si un tube échantillon se trouve en station d'échantillonnage sur le module d'interface de l'ARCHITECT cSystems (IM) et que l'un des scénarios suivants se produit :

- Le couvercle du carrousel échantillons de l'ARCHITECT cSystems reste ouvert pendant plus de 20 minutes
- Le traitement de plusieurs tubes ou des CQ est réalisé sur le carrousel échantillons d'un ARCHITECT cSystems pendant plus de 20 minutes alors que l'IM n'est pas Hors ligne

Le dépannage étape par étape actuel de l'erreur Délai d'attente total expiré affiché sur l'Interface Utilisateur Intégrée (IUI) du système automatisé n'est pas approprié puisqu'il permet la libération des tubes échantillons présents sur la piste secondaire de l'IM, tandis que l'analyseur peut continuer à effectuer des aspirations supplémentaires prévues pour le tube échantillon en position d'échantillonnage, alors que le traitement des tubes échantillons sur le système automatisé a été interrompu. Il est possible que l'aiguille aspire le contenu d'autres tubes dans la file d'attente de l'IM lors de leur passage en position d'échantillonnage. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie **Dysfonctionnement 2** – Procédure de rétablissement de l'erreur Délai d'attente total expiré sur le module d'interface c8000/c16000 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco.

### Aliquoter a3600: Dilution des tubes primaires sur le module Aliquoteur

Dans les versions de microprogramme indiquées dans l'avis émis par Inpeco, si une erreur Détection de caillot (Clot Detection - message d'erreur E0E0) est générée lors de l'aspiration de l'échantillon, la procédure de rétablissement actuelle prévoit la redistribution de 2/3 du volume échantillon dans le tube primaire. La connaissance de la situation sur le terrain a montré qu'en cas d'erreur Détection de caillot, cette gestion peut entraîner la dilution du tube primaire avec de l'eau distillée provenant

du circuit hydraulique du module Aliquoteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie **Dysfonctionnement 4** – Dilution des tubes primaires sur le module Aliquoteur dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

## Impact sur les résultats de patients

Veuillez vous référer à la partie "Risques pour la santé" relative aux dysfonctionnements 2 et 4 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

### Mesures requises

Veuillez vous référer à la partie "Mesures à prendre par l'utilisateur" pour les dysfonctionnements 2 et 4 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

Votre représentant Abbott vous contactera pour programmer une visite relative à la mise à jour de votre ACCELERATOR a3600 pour résoudre ces dysfonctionnements.

Veuillez compléter le formulaire de réponse client ci-joint. Il n'est pas nécessaire de compléter le formulaire de réponse client Inpeco car Abbott répondra à Inpeco.

Si vous avez transmis le produit mentionné ci-dessus à d'autres laboratoires, veuillez les informer de cette lettre de mesures correctives et leur en transmettre une copie.

Veuillez conserver cette lettre pour votre documentation.

L'ANSM a été informée de ces mesures.

#### **Contact**

Nous regrettons sincèrement les désagréments occasionnés par cette situation au sein de votre laboratoire. Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez contacter le service Clients Abbott au 01 45 60 25 50.



Mesures immédiates requises

A transmettre aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs de laboratoire et aux correspondants locaux de réactovigilance

**Date** 

3 avril 2020

**Produit** 

Produit	Référence	Numéros de série	UDI
Accelerator a3600 Aliquoter Module	06P47	Tous	N/A

### Objet

Abbott Diagnostics a reçu l'avis urgent de sécurité ci-joint de la part d'Inpeco, le fabricant de l'ACCELERATOR a3600. Parmi les cinq dysfonctionnements qui y sont décrits, seul celui présenté ci-dessous impacte votre système.

### Aliquoter a3600 : Dilution des tubes primaires sur le module Aliquoteur

Dans les versions de microprogramme indiquées dans l'avis émis par Inpeco, si une erreur de détection de caillot (Clot Detection - message d'erreur E0E0) est générée lors de l'aspiration de l'échantillon, la procédure de rétablissement actuelle prévoit la distribution de 2/3 du volume échantillon dans le tube primaire. La connaissance de la situation sur le terrain a montré qu'en cas d'erreur Détection de caillot, cette gestion peut entraîner la dilution du tube primaire avec de l'eau distillée provenant du circuit hydraulique du module Aliquoteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie Dysfonctionnement 4 — Dilution des tubes primaires sur le module Aliquoteur dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

## Impact sur les résultats de patients

Veuillez vous référer à la partie "Risques pour la santé" relative au dysfonctionnement 4 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

### Mesures requises

Veuillez vous référer à la partie "Mesures à prendre par l'utilisateur" pour le dysfonctionnement 4 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco.

Votre représentant Abbott vous contactera pour programmer une visite relative à la mise à jour de votre ACCELERATOR a3600 pour résoudre ces dysfonctionnements.

Veuillez compléter le formulaire de réponse client ci-joint. Il n'est pas nécessaire de compléter le formulaire de réponse client Inpeco car Abbott répondra à Inpeco.

Si vous avez transmis le produit mentionné ci-dessus à d'autres laboratoires, veuillez les informer de cette lettre de mesures correctives et leur en transmettre une copie.

Veuillez conserver cette lettre pour votre documentation.

L'ANSM a été informée de ces mesures.

### Contact

Nous regrettons sincèrement les désagréments occasionnés par cette situation au sein de votre laboratoire. Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez contacter le service Clients Abbott au 01 45 60 25 50.



Mesures immédiates requises

A transmettre aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs de laboratoire et aux correspondants locaux de réactovigilance

Date

3 avril 2020

**Produit** 

Produit	Référence	Numéros de série	UDI
Accelerator a3600 Centrifuge Module	06P37	Tous	N/A

Objet

Abbott Diagnostics a reçu l'avis urgent de sécurité ci-joint de la part d'Inpeco, le fabricant de l'ACCELERATOR a3600. Parmi les cinq dysfonctionnements qui y sont décrits, seul celui présenté ci-dessous impacte votre système.

Module de centrifugation Accelerator a3600 : algorithme de chargement du module de centrifugation

L'algorithme de chargement du tube du module de centrifugation pour les versions du microprogramme indiquées ci-dessus n'est pas conforme aux instructions d'équilibrage de la centrifugeuse Hettich.

La centrifugeuse est en mesure de détecter des charges mal équilibrées. Avec ces versions du microprogramme, l'algorithme de chargement est susceptible d'engendrer un chargement mal équilibré avec un degré de déséquilibre inférieur à celui que peut détecter la centrifugeuse. Dans le pire des cas (charges déséquilibrées à répétition), cela pourrait endommager la centrifugeuse. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie **Dysfonctionnement 1** – Algorithme de chargement du module de centrifugation dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

Impact sur les résultats de patients Veuillez vous référer à la partie "Risques pour la santé" relative au dysfonctionnement 1 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

Mesures requises

Veuillez vous référer à la partie "Mesures à prendre par l'utilisateur" pour le dysfonctionnement 1 dans l'avis urgent de sécurité émis par Inpeco ci-joint.

Votre représentant Abbott vous contactera pour programmer une visite relative à la mise à jour de votre ACCELERATOR a3600 pour résoudre ces dysfonctionnements.

Veuillez compléter le formulaire de réponse client ci-joint. Il n'est pas nécessaire de compléter le formulaire de réponse client Inpeco car Abbott répondra à Inpeco.

Si vous avez transmis le produit mentionné ci-dessus à d'autres laboratoires, veuillez les informer de cette lettre de mesures correctives et leur en transmettre une copie.

Veuillez conserver cette lettre pour votre documentation.

L'ANSM a été informée de ces mesures.

### **Contact**

Nous regrettons sincèrement les désagréments occasionnés par cette situation au sein de votre laboratoire. Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez contacter le service Clients Abbott au 01 45 60 25 50.



\_\_\_\_\_\_

### Avis de sécurité urgent

Nom commercial des produits concernés : Accelerator a3600

Identifiant FSCA: FSCA - ACP - 202003 - 02 Identifiant FSN: FSN - ACP - 202003 - 02 v.1

\_\_\_\_\_\_

Date: 03/23/2020

À l'attention de : à qui de droit,

Inpeco distribue cette lettre concernant les dysfonctionnements suivants sur le système d'automatisation Accelerator a3600.

D'après nos données, votre système est susceptible d'être concerné par l'un des éléments décrits ci-dessous.

### Dysfonctionnement 1 : algorithme de chargement du module de centrifugation

### Informations concernant les dispositifs concernés

Les modules concernés sont les modules de centrifugation (référence Inpeco FLX-202) avec l'une des versions du microprogramme suivantes :

- CM\_1-7-0.H86
- CM\_1-7-1.H86

La version du microprogramme installée sur le module de centrifugation peut être affichée sur l'Interface Utilisateur Intégrée (IUI) de l'Accelerator a3600 en suivant le chemin d'accès suivant : Automation/ System/ Software/Firmware.

### Description du dysfonctionnement

L'algorithme de chargement du tube du module de centrifugation pour les versions du microprogramme indiquées ci-dessus n'est pas conforme aux instructions d'équilibrage de la centrifugeuse Hettich.

La centrifugeuse est en mesure de détecter des charges mal équilibrées. Avec ces versions de microprogramme, l'algorithme de chargement est susceptible d'engendrer un chargement mal équilibré avec un degré de déséquilibre inférieur à celui que peut détecter la centrifugeuse. Dans le pire des cas (charges déséquilibrées à répétition), cela pourrait endommager la centrifugeuse.

#### Inpeco SA

Via Torraccia 26, 6883 Novazzano – Switzerland Numéro d'identification TVA : CHE-114.538.298 Tél. : +41 91 9118200

www.inpeco.com

MOD-FSN.02 Page 1 sur 7



Risques pour la santé	L'utilisateur se trouvant à proximité de la centrifugeuse risque d'être blessé dans l'éventualité d'une panne.
Mesures à prendre	Aucune. Actuellement, il n'y a pas de risque pour l'utilisateur puisque l'impact sur le
par l'utilisateur	système serait cumulatif au cours du temps. Votre représentant du Service Clients vous
	contactera afin de planifier la mise à jour du microprogramme.

Distanction noment Qui Dresédure de rétablissement de llerreux Délei diettente total eveiré eur le		
Dysfonctionnement 2 : Procédure de rétablissement de l'erreur Délai d'attente total expiré sur le module d'interface c8000/c16000		
Informations concernant les dispositifs concernés	Le module d'interface impacté est le module d'interface de l'ARCHITECT cSystem (c8000/c16000) (références Inpeco : FLX-208-00 et ACP-208-00).	
Description du dysfonctionnement	Des erreurs Délai d'attente total expiré (Total Timeout expired : message 7083) peuvent être générées si un tube échantillon se trouve en station d'échantillonnage sur le module d'interface de l'ARCHITECT cSystem (IM) et que l'un des scénarios suivants se produit :	
	<ul> <li>Le couvercle du carrousel échantillons de l'ARCHITECT cSystem reste ouvert pendant plus de 20 minutes alors que l'IM n'est pas Hors ligne.</li> <li>Le traitement de plusieurs tubes ou des CQ est réalisé sur le carrousel échantillons d'un ARCHITECT cSystem pendant plus de 20 minutes alors que l'IM n'est pas Hors ligne.</li> </ul>	
	Le dépannage étape par étape actuel de l'erreur Délai d'attente total expiré affiché sur l'Interface Utilisateur Intégrée (IUI) du système automatisé n'est pas approprié puisqu'il permet la libération des tubes échantillons présents sur la piste secondaire de l'IM, tandis que l'analyseur peut continuer à effectuer des aspirations supplémentaires prévues pour le tube échantillon en position d'échantillonnage, alors que le traitement des tubes échantillons sur le système automatisé a été interrompu. Il est possible que l'aiguille aspire le contenu d'autres tubes dans la file d'attente de l'IM lors de leur passage en position d'échantillonnage.	
Risques pour la santé	Les risques identifiés concernent une contamination croisée entre les tubes échantillonnés par erreur par l'aiguille ainsi que des résultats incorrects dus à l'association des résultats de tests obtenus pour d'autres tubes dans la file d'attente de l'IM au tube marqué du message d'erreur 7083. L'aiguille de l'analyseur peut en outre provoquer la chute de l'un des tubes échantillons passant, ce qui entraîne un délai de traitement de l'échantillon.	
Mesures à prendre par l'utilisateur	Afin d'éviter ce dysfonctionnement, prendre les précautions suivantes :  1) Avant de charger les échantillons sur le carrousel de l'ARCHITECT cSystem, passer l'ARCHITECT cSystem IM en statut Hors ligne ou Passage Hors ligne sur	

MOD-FSN.02 Page 2 sur 7



l'IUI du système d'automatisation (reportez-vous à la procédure *Changement de statut du module d'automatisation et des modules d'interface* du Chapitre 5 du Manuel Technique du système d'automatisation).

- 2) Vérifier que tous les tubes échantillons de l'ARCHITECT cSystem IM ont bien été échantillonnés et que le module d'interface est Hors ligne.
- 3) Charger les tubes échantillons dans le carrousel de l'ARCHITECT cSystem (reportez-vous à la procédure Gestion des échantillons du Chapitre 5 du Manuel Technique ARCHITECT) et fermer le capot.
- 4) Sur l'IUI du système d'automatisation, cliquer sur le bouton **En ligne** de l'ARCHITECT cSystem IM.

Le Chapitre Module d'interface ARCHITECT c8000/c16000 du Manuel Technique du système d'automatisation a été mis à jour en conséquence (reportez-vous à l'Annexe 1). Veuillez le conserver avec le manuel dont vous disposez actuellement pour vous y référer à l'avenir.

Si une erreur Délai d'attente total expiré se produit, veuillez prendre les précautions suivantes, conformément aux mesures validées avec le fabricant de l'ARCHITECT cSystem :

- 1) S'assurer de l'absence d'analyse en cours portant le statut « En cours » sur l'interface utilisateur du logiciel de l'analyseur cSystem.
- 2) Réaliser la procédure de rétablissement de l'erreur Délai d'attente total expiré affichée sur l'IUI du système d'automatisation :

REMARQUE: l'étape 1.4 « Se référer au Manuel Technique de l'analyseur pour résoudre le problème » comprend l'ensemble des opérations suivantes sur l'interface utilisateur du logiciel de l'ARCHITECT cSystem :

- A. Passer le module d'analyse du cSystem sur le statut STOP à l'aide du bouton F6-STOP figurant sur l'interface utilisateur du logiciel cSystem. Se reporter aux Statuts des analyseurs présentés au Chapitre 1 du Manuel Technique de l'ARCHITECT cSystem.
- B. Réaliser la procédure de maintenance occasionnelle 6052 Lavage des cuvettes décrite au Chapitre 9 Interventions et maintenance du Manuel Technique ARCHITECT cSystem.
- C. Passer le module d'analyse cSystem sur le statut EN COURS après le lavage des cuvettes.

REMARQUE : Ne pas reconnecter le module d'interface de l'ARCHITECT cSystem (étape 1.5 de la procédure de récupération de l'erreur) avant d'avoir terminé toutes les opérations de l'étape 1.4.

3) Charger de nouveau le tube échantillon marqué du message d'erreur 7083 sur un module d'entrée du système d'automatisation le cas échéant.

MOD-FSN.02 Page 3 sur 7



Informations concernant les	Le module d'interface (IM) impacté est le suivant :		
dispositifs	Module	Référence	
concernés	ImmunoCAP 1000 IM (également appelé Phadia 1000 IM)	FLX-226-01	
	Tableau 3.1		
Description du dysfonctionnement  Risques pour la santé	Le dysfonctionnement identifié repose sur une association erronée entre le portoir et le tube échantillon provoquée par une erreur de communication entre le microprogramme du module d'interface impacté et le logiciel d'automatisation. Ce dysfonctionnement n'apparaîtra que si le module d'interface est mis hors ligne après le retour physique d'un portoir de la piste secondaire sur la voie prioritaire puis remis en ligne lorsque le portoir est utilisé pour transporter un autre tube.  Le danger potentiel associé à cet événement réside dans la réalisation d'une demande de tests sur le mauvais tube et donc la communication de résultats erronés au patient.		
Mesures à prendre par l'utilisateur	Afin d'éviter ce dysfonctionnement, prendre l'une des précautions suivantes :  1) Vérifier visuellement que la piste secondaire du module d'interface impacté est vide avant d'envoyer la commande de passage au statut Hors ligne ; ou  2) Sélectionner la commande « Passage Hors ligne » pour le module d'interface impacté. Cela permet de garantir que le module finalise l'analyse des échantillons qui s'y trouvent, libère les tubes puis passe en statut Hors ligne.		

Dysfonctionnement 4 : dilution du tube primaire du module Aliquoteur		
Informations concernant les dispositifs	Les modules concernés sont les modules Aliquoteur (référence Inpeco FLX-212) avec une version du microprogramme inférieure aux versions suivantes :	
concernés	<ul><li>AQMb_3-3-0.H86</li><li>AQMa_3-1-1-8.H86 et AQMb_3-1-1-8.H86</li></ul>	
	La version du microprogramme installée sur le module Aliquoteur peut être aff sur l'Interface Utilisateur Intégrée (IUI) de l'Accelerator a3600 en suivant le ch d'accès suivant : Automation/ System/ Software/Firmware	
Dans les versions du microprogramme inférieures aux versions indiquées de dysfonctionnement  Dans les versions du microprogramme inférieures aux versions indiquées de si un message d'erreur Détection d'un caillot (message d'erreur E0E0) est génére de l'aspiration de l'échantillon, la procédure de rétablissement actuelle predistribution de 2/3 du volume échantillon dans le tube primaire. La cont de la situation sur le terrain a montré qu'en cas d'erreur de détection de cai gestion peut entraîner la dilution du tube primaire avec de l'eau distillée prediction du circuit hydraulique du module Aliquoteur.		

MOD-FSN.02 Page 4 sur 7



Risques pour la santé	Le risque sanitaire potentiel associé à cet événement concerne la contamination du tube primaire avec de l'eau provenant du circuit hydraulique du module Aliquoteur.		
Mesures à prendre par l'utilisateur	Afin d'éviter tout risque de contamination, veuillez prendre les précautions suivantes :		
	<ol> <li>Jeter le tube primaire marqué d'un message d'erreur Détection d'un caillot o le traiter conformément aux directives de votre laboratoire en tenant compt du fait qu'il peut être dilué.</li> <li>Appeler le Service Clients si la fréquence du message d'erreur Détection d'u caillot augmente (plus de 5 messages consécutifs).</li> </ol>		

Dysfonctionnement 5 : capteurs de sécurité de type STR-1 défectueux			
Informations	Le module suivant du système d'automatisation peut être impacté par ce		
concernant les	dysfonctionnement:		
dispositifs	F		
concernés	Module	Référence	
	Module d'interface HSQ	FLX-274	
	Tablea	au 5.1	
Description du dysfonctionnement	Sur le module impacté, des interrupteurs de sécurité de type STR-1 (références Inpeco STM0027 et STM0028) sont installés afin d'interrompre l'alimentation électrique des éléments en mouvement, et donc d'éviter leur mouvement (par exemple, chargement et déchargement automatisés des tubes échantillons), lorsque les capteurs sont activés.		
	Les capteurs sont activés lorsque le couvercle du module est retiré.		
	Inpeco a été informé que l'activation de certains capteurs de type STR-1 avec des numéros de série de 2018 est retardée. Dans 1 % des cas, le retard de réponse peut s'élever jusqu'à un maximum de 2 secondes, au lieu des 40 ms attendues.		
Risques pour la santé	Dans le cas où l'activation de l'interrupteur de sécurité est retardée, l'utilisateur ou l'ingénieur de maintenance (FSE) peuvent être exposés à des éléments en mouvement susceptibles de causer une blessure physique.		
Mesures à prendre par l'utilisateur	Après le retrait du couvercle de protection du module, attendre au minimum 2 secondes avant de manipuler le module impacté.		

Les dysfonctionnements n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 ont été corrigés par de nouvelles versions de logiciel. Le dysfonctionnement n° 5 sera corrigé par le remplacement d'une pièce matérielle.

Le Service Clients Inpeco vous contactera afin de planifier une visite pour corriger les dysfonctionnements dans votre laboratoire. Veuillez tenir compte de cette lettre jusqu'à la date de cette intervention.

MOD-FSN.02 Page 5 sur 7



Veuillez également transmettre cette notification à toutes les personnes concernées.

Veuillez compléter et retourner directement l'accusé de réception de l'avis urgent de sécurité joint à cette lettre sous **15 jours** à l'adresse e-mail indiquée dans notre communication électronique.

### Contact:

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter : Eva Balzarotti - Regulatory Affairs Manager E-mail : <u>Regulatory.Affairs@inpeco.com</u>

Téléphone: (+41) 91 9118 224

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés par cette situation. Nous vous remercions de votre coopération. Le signataire désigné confirme que cette notification a été transmise aux autorités réglementaires appropriées.

Meilleures salutations,

Eva Balzarotti - Regulatory Affairs Manager

MOD-FSN.02 Page 6 sur 7



## ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'AVIS DE SÉCURITÉ URGENT et VÉRIFICATION DE SA MISE EN ŒUVRE FSCA - ACP - 202003 - 02

Ce formulaire de réponse permet d'accuser réception de l'avis de sécurité urgent ci-joint en date du 23/03/2020 concernant FSCA- ACP - 202003 - 02.

Veuillez lire chaque question et répondre en conséquence 1. J'ai lu et compris les instructions fournies dans configuration [ ] OUI [ ] NON	
J'ai mis en œuvre toutes les mesures red dysfonctionnements qui concernent mon systèm [] OUI [] NON	
Veuillez compléter ce formulaire et envoyer une copie communication électronique.	e scannée à l'adresse e-mail indiquée dans la
Nom de la personne remplissant le formulaire :	
Titre:	
Établissement :	Numéro de série de la chaîne :
Rue:	
Ville:	État :
Téléphone :	Pays:
Signature	

MOD-FSN.02 Page 7 sur 7