

BM-2021AV2610

Date : Le 26 octobre 2021

Fiche d'avertissement

A l'attention de nos clients et utilisateurs : Correspondant matériovigilance, Directeur d'établissement, Personnel soignant, Directeurs des Systèmes d'Information.

Produit : Logiciel DIAMM utilisant le module de prescription, toutes versions incluses

Objet : Calcul de la dose théorique en fonction du poids erroné suite à une récupération incorrecte de la dernière valeur du poids

Madame, Monsieur

BOW MEDICAL et Micro6 vous informe d'un incident concernant la prescription en utilisant une unité de prise fonction du poids (exemple : mg/kg)

Description de l'évènement

- 1- Depuis le planning d'administration, accès au diagramme de soin et saisie du poids actuel du patient1
- 2- Retour au planning d'administration
- 3- Accès au planning individuel d'un patient2 pour administrer un médicament calculé en fonction du poids
- 4- Le poids affiché pour le patient2 est celui du patient1
- 5- Après relance du planning d'administration, le poids affiché du patient2 apparaît à nouveau correctement. Les calculs inhérents des posologies sont corrects.

Le risque est une erreur de calcul de posologie liée au poids et ainsi une administration d'une dose non adaptée au patient.

BM-2021AV2610

Mesure provisoire recommandée :

Pour éviter de rencontrer la situation décrite, veuillez-vous assurer d'éviter d'activer la proposition de dose théorique en fonction du poids. Pour ce faire, pour chaque unité de prise concernée, veuillez supprimer le texte dans le champ « Variable de dépendance » situé dans l'encadré rouge sur l'image ci-dessous :

Thesaurus 44 = Unités de prises (prescr.)

Code personnel	VUP_134750_M6	Validité Date création 26/05/2011 Date péremption 00/00/00 Date début validité 26/05/2011
Code officiel		
id de la BDM		
Libellé	mg/kg	
Libellé court	mg/kg	
☐ représente les milligrammes (nécessaire pour les PCA)		
Variable de dépendance :	[POIDS]	Code de l'UP liée : VUP_134750 Par exemple code des mg pour une UP en mg/kg ☐ Posologie conditionnelle
[Mot-clé] ou référence de l'objet dont dépend la posologie (ex : [POIDS], [CREAT], [GLYCEMIE]) Si mot-clé, alors utilisera l'objet défini dans les ppts du recueil		

Correction : Les investigations sont en cours pour corriger ce dysfonctionnement.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à prendre contact avec le service support de Micro6 (hotline@micro6.fr).

Veuillez diffuser cet avis de sécurité à tous les utilisateurs de la solution DIAMM de votre établissement.

Nous vous remercions de votre coopération.
Cordialement,

Adèle Lusson
Responsable Qualité et Affaires réglementaires

BM-2021AV2610

Formulaire d'accusé de réception et de réponse client

Nom et adresse du client :

.....
.....
.....

☐ J'accuse réception des informations contenues dans la fiche d'avertissement et certifie que ces informations ont été communiquées à l'ensemble des utilisateurs.

Rempli par :

NOM :

Titre :

Date (JJ/MM/AAAA) :

Nous vous remercions de nous envoyer le formulaire de confirmation dûment rempli par mail à l'adresse materiovigilance@bowmedical.com ou par courrier à BOW MEDICAL - Service Qualité 43 Avenue d'Italie, 80090 Amiens.