

À nos clients et utilisateurs de la
version plafonnière du Perseus A500 montée sur
les bras plafonniers Dräger

Décembre 2021

Consigne importante de sécurité

Chute potentielle du Perseus A500 des bras plafonniers Dräger si le système heurte un obstacle et est manipulé après la collision

Seuls les produits suivants sont concernés :

Version plafonnière du Perseus A500 lorsqu'elle est utilisée en association avec les bras plafonniers Dräger

Madame, Monsieur,

Au cours de nos activités globales de surveillance du marché, nous avons eu connaissance d'un cas dans lequel la version plafonnière de la station d'anesthésie Perseus A500 est tombée d'un bras plafonnier Movita Lift Strong de Dräger.

L'incident s'est déroulé de la manière suivante :

- L'utilisateur a abaissé la station d'anesthésie Perseus A500 qui était installée sur le Movita Lift Strong.
- Le Perseus A500 a heurté un obstacle qui se trouvait en dessous.
- Le Movita Lift Strong s'est arrêté automatiquement comme prévu grâce au dispositif d'arrêt d'urgence intégré.
- Après l'arrêt d'urgence du système, une manipulation mécanique a été effectuée au niveau du bras plafonnier. Cela a provoqué le détachement accidentel du Perseus A500 du bras plafonnier.

Aucun patient ni utilisateur n'a été blessé, mais si l'incident se reproduit, il ne peut être exclu que la station d'anesthésie puisse heurter des personnes situées à proximité de l'appareil.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
Adresse postale :
23542 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
N° de TVA DE135082211

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN : DE95 2304 0022 0014 6795 00
Code SWIFT : COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN : DE15 2305 0101 0001 0711 17
Code SWIFT : NOLADE21SPL

Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7903 HL
Commandité : Drägerwerk Verwaltungs AG
Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7395 HL

Président du conseil de surveillance
Pour Drägerwerk AG & Co. KGaA et
Drägerwerk Verwaltungs AG :
Stefan Lauer
Direction :
Stefan Dräger (Président)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr Reiner Piske
Anton Schrofner

Une investigation a été menée après l'événement, durant laquelle il a été confirmé que, dans tous les cas, lorsque le Perseus A500 heurte un objet pendant la descente du bras plafonnier Dräger, le dispositif d'arrêt d'urgence intégré du bras fonctionne correctement et interrompt le mouvement.


En cas d'arrêt d'urgence du bras plafonnier Movita, un voyant rouge s'allume sur le Perseus A500 ainsi que sur le bras plafonnier.

En combinaison avec un bras plafonnier Forta, il n'y a pas de voyant rouge qui s'allume sur le Perseus et Forta en cas d'arrêt d'urgence.

Figure 1 : Voyant LED rouge sur le Perseus A500 :



Figure 2 : Movita Lift/ Lift Strong

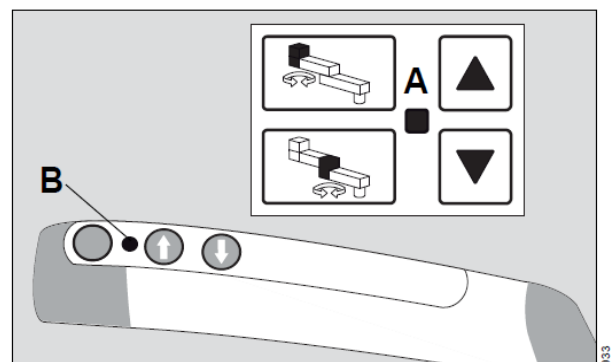

Un voyant LED situé au milieu du panneau de commande (A) ou sur les poignées de commande (B) indique l'état du système :

Nous reconnaissons toutefois que la séquence d'action spécifique devant être suivie par l'utilisateur, lorsqu'un Perseus A500 est coincé sur un objet sous la station de travail pendant l'abaissement du bras plafonnier, n'a pas été suffisamment décrite.

Mesures à prendre :

Pendant les réglages de la hauteur :

1. Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé sous la station d'anesthésie.
2. Vérifiez l'état des voyants susmentionnés (Movita).

Au cas où un Perseus A500 heurterait un objet placé sous l'appareil d'anesthésie :

3. Ne pas manipuler le bras plafonnier ni le Perseus A500, par exemple en connectant / déconnectant les appareils ; ne pas retirer les obstacles.
4. À l'aide de l'un des commutateurs situés sur le bras plafonnier ou le Perseus A500, faire remonter le bras plafonnier avec l'appareil d'anesthésie connecté.
5. Une fois le bras plafonnier en position haute et après avoir résolu la cause de la collision, retirer l'obstacle.

Si l'utilisateur suit ces recommandations, les appareils incluant la fonction de réglage en hauteur peuvent être utilisés en toute sécurité.

Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs des appareils susmentionnés et les autres personnes de votre établissement sont informés de cette consigne importante de sécurité et la respectent. Si vous avez fourni les appareils à des tiers, veuillez transmettre une copie du présent courrier.

Dräger étudie actuellement la manière dont l'interface de connexion peut être renforcée pour supporter le type de manipulation décrit plus haut. Dans ce cadre, nous vous offrons une mise à jour gratuite de la version plafonnière de votre station d'anesthésie Perseus A500 avec un aimant amélioré intégré au système d'arrêt d'urgence. En outre, nous vous fournirons une version modifiée de la notice d'utilisation pour les bras plafonniers.

Veuillez garder ces informations à disposition au moins jusqu'à ce que la mesure soit mise en œuvre.

Les autorités compétentes responsables ont été informées de cette action.

Identification des dispositifs médicaux concernés :

Nos enregistrements indiquent que vous avez reçu une version plafonnière du Perseus A500 fabriquée par Drägerwerk AG & Co. KGaA (numéro d'enregistrement unique européen : DE-MF-000005329). Vous êtes concerné par cette information sur la sécurité si vous utilisez la version plafonnière du Perseus A500 en association avec Movita Lift / Lift Strong (G16707), Forta (G16810) ou DVE 8080.

Seules ces combinaisons Dräger utilisent le système d'arrêt d'urgence susmentionné. Si votre Perseus A500 est installé sur un bras plafonnier tiers, veuillez contacter le fournisseur du bras plafonnier pour obtenir des conseils.

Contact :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Dräger local.

Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés par cette mesure, mais nous considérons qu'il s'agit d'une mesure indispensable pour améliorer la sécurité des patients et de votre personnel.

Nous vous remercions de votre coopération.

Cordialement,

Signé dans la version originale en Anglais

Hans Ulrich Schüller

Product Management
Business Area Anesthesiology
Business Unit Therapy

Sonja Hillmer

Post Market Surveillance
Quality & Regulatory Affairs
Medical Division

Pièce jointe :

Liste des dispositifs médicaux potentiellement concernés

Australia	Brunei Dar-es-S	China	China
ASHM-0115	ASHM-0030	ASMC-0181	ASNF-0097
Austria	ASHM-0037	ASMC-0182	ASNF-0111
ASHH-0015	ASKE-0007	ASMF-0018	ASNF-0112
ASHH-0016	ASKE-0009	ASMF-0019	ASNF-0113
ASHH-0017	Chile	ASMF-0020	ASNJ-0083
ASHH-0018	ASNH-0349	ASMF-0021	ASNJ-0084
ASKL-0017	ASNH-0350	ASMH-0248	ASNJ-0085
ASKL-0018	ASNH-0351	ASMH-0249	ASNJ-0086
ASKL-0026	ASNH-0352	ASMH-0250	Czech Republi
ASLJ-0084	ASNH-0353	ASMH-0251	ASJC-0069
ASLJ-0085	ASNH-0354	ASMH-0252	ASKM-0135
Belarus	ASNH-0355	ASMK-0010	ASKM-0136
ASKF-0048	ASNH-0356	ASMK-0011	ASPA-0174
ASKF-0049	China	ASMK-0012	ASPA-0175
ASKF-0050	ASFJ-0026	ASMK-0013	ASPA-0176
ASKF-0051	ASJH-0016	ASMK-0014	ASPA-0177
ASKF-0052	ASJL-0112	ASMK-0015	ASPA-0178
ASKL-0121	ASJN-0028	ASMK-0031	ASPB-0041
ASNC-0145	ASJN-0029	ASMK-0032	ASPB-0042
Belgium	ASJN-0114	ASMK-0033	ASPB-0043
ASEE-0049	ASJN-0115	ASMK-0034	ASPB-0044
ASEE-0050	ASJN-0116	ASMK-0035	ASPB-0045
ASEE-0051	ASJN-0117	ASMK-0036	Finland
ASEE-0052	ASJN-0118	ASMM-0030	ASHL-0041
ASEJ-0002	ASKD-0056	ASMM-0031	ASHL-0042
ASEJ-0003	ASKE-0079	ASMM-0045	ASHM-0038
ASEJ-0016	ASKE-0080	ASMM-0046	ASNA-0109
ASFC-0067	ASKF-0013	ASMM-0047	ASNA-0110
ASFH-0053	ASKM-0141	ASMM-0048	ASND-0121
ASFH-0055	ASKN-0020	ASNA-0183	ASND-0122
ASFH-0056	ASKN-0024	ASNB-0215	ASND-0123
ASFH-0057	ASKN-0060	ASNH-0187	ASND-0124
ASFJ-0038	ASLK-0022	ASNH-0188	ASND-0125
ASFJ-0039	ASLK-0056	ASNH-0189	ASND-0126
ASFJ-0040	ASLL-0188	ASNH-0190	ASND-0127
ASFJ-0041	ASLN-0043	ASNH-0191	ASND-0189
ASFJ-0042	ASLN-0044	ASNH-0196	ASND-0190
ASFJ-0043	ASLN-0045	ASNH-0197	ASND-0198
ASFJ-0044	ASLN-0046	Columbia	ASND-0217
ASFJ-0048	ASLN-0047	ASHN-0069	ASNE-0016
ASHJ-0054	ASLN-0053	ASLE-0047	ASNE-0017
ASHJ-0055	ASMA-0027	ASLE-0048	ASNE-0018
ASJB-0130	ASMA-0028	Croatia	ASNE-0033
ASJB-0131	ASMA-0029	ASMD-0226	ASNE-0034
ASJB-0132	ASMA-0069	ASNF-0093	ASNE-0035
ASLJ-0018	ASMA-0070	ASNF-0094	ASNE-0036
ASLJ-0019	ASMA-0071	ASNF-0095	ASNE-0037
ASNH-0363	ASMB-0037	ASNF-0096	ASNE-0038

Finland	France	Germany	Germany
ASNE-0039	ASJK-0078	ASEF-0023	ASJM-0095
ASNE-0040	ASJK-0079	ASEJ-0012	ASJM-0096
ASNE-0129	ASJK-0080	ASEL-0055	ASJM-0097
ASNE-0130	ASJK-0081	ASEL-0056	ASJM-0098
ASNE-0131	ASJK-0096	ASEN-0055	ASJM-0108
ASNE-0132	ASJK-0111	ASEN-0061	ASJN-0043
ASNE-0133	ASJK-0112	ASEN-0066	ASJN-0044
ASNE-0134	ASJK-0113	ASEN-0067	ASJN-0045
ASNE-0135	ASJK-0114	ASEN-0068	ASJN-0049
ASPC-0040	ASJK-0119	ASEN-0069	ASJN-0060
France	ASJM-0022	ASEN-0070	ASKB-0048
ASEL-0096	ASJM-0075	ASEN-0071	ASKB-0053
ASEL-0097	ASJM-0076	ASEN-0073	ASKB-0055
ASEL-0105	ASJM-0077	ASFD-0012	ASKC-0095
ASEL-0106	ASJM-0078	ASFD-0027	ASKC-0096
ASEL-0107	ASJM-0168	ASFK-0041	ASKC-0097
ASEM-0088	ASKA-0044	ASFM-0146	ASKC-0103
ASEM-0089	ASKD-0007	ASFM-0147	ASKJ-0134
ASEM-0090	ASKH-0053	ASHB-0084	ASKM-0156
ASEM-0094	ASKH-0105	ASHF-0122	ASKN-0001
ASEM-0095	ASKH-0106	ASHH-0056	ASKN-0016
ASEM-0096	ASKH-0108	ASHJ-0031	ASKN-0018
ASEM-0110	ASKK-0024	ASHJ-0032	ASKN-0019
ASEM-0111	ASLF-0138	ASHL-0043	ASLE-0081
ASEM-0112	ASLM-0182	ASHL-0045	ASLE-0090
ASEM-0120	ASLM-0183	ASHL-0046	ASLM-0190
ASEN-0034	ASLN-0155	ASHL-0047	ASLM-0191
ASEN-0072	ASMD-0251	ASHL-0048	ASLM-0192
ASFE-0005	ASMD-0252	ASJC-0066	ASLM-0193
ASFE-0009	ASMD-0262	ASJC-0067	ASLN-0164
ASFF-0033	ASNC-0064	ASJC-0071	ASLN-0165
ASFN-0002	ASNC-0065	ASJE-0055	ASLN-0166
ASHA-0039	ASNC-0066	ASJE-0119	ASLN-0167
ASHA-0040	ASNC-0067	ASJJ-0104	ASMA-0001
ASHA-0041	ASNH-0111	ASJJ-0105	ASMA-0002
ASHA-0042	ASPE-0004	ASJJ-0106	ASMA-0003
ASHA-0043	Germany	ASJJ-0107	ASMA-0004
ASHA-0044	ASEE-0053	ASJJ-0108	ASMA-0005
ASHF-0065	ASEF-0007	ASJJ-0109	ASMA-0013
ASHJ-0012	ASEF-0008	ASJJ-0110	ASMA-0015
ASHL-0066	ASEF-0009	ASJJ-0111	ASMA-0026
ASJH-0068	ASEF-0010	ASJJ-0112	ASMB-0192
ASJH-0069	ASEF-0011	ASJJ-0113	ASMB-0217
ASJK-0072	ASEF-0018	ASJJ-0114	ASMB-0225
ASJK-0073	ASEF-0020	ASJJ-0115	ASMC-0223
ASJK-0076	ASEF-0021	ASJK-0100	ASMC-0224
ASJK-0077	ASEF-0022	ASJM-0094	ASMD-0001

Germany

ASMD-0023
ASMD-0024
ASME-0018
ASME-0019
ASMK-0098
ASMK-0099
ASMK-0100
ASMK-0108
ASMK-0109
ASMK-0110
ASMK-0111
ASMK-0116
ASMK-0117
ASMK-0118
ASMK-0166
ASMK-0167
ASMK-0168
ASMK-0173
ASMK-0174
ASMK-0175
ASMK-0177
ASMK-0178
ASMK-0179
ASMK-0192
ASMK-0193
ASMK-0194
ASMK-0201
ASMK-0202
ASMK-0203
ASMK-0204
ASMK-0205
ASMK-0206
ASMK-0219
ASMK-0220
ASMK-0221
ASML-0006
ASML-0007
ASML-0008
ASML-0018
ASML-0019
ASML-0020
ASML-0021
ASML-0022
ASML-0023
ASML-0033
ASML-0034
ASML-0035

Germany

ASML-0036
ASML-0041
ASML-0042
ASML-0043
ASML-0044
ASML-0045
ASML-0046
ASML-0047
ASML-0057
ASML-0058
ASML-0059
ASML-0068
ASML-0069
ASML-0070
ASML-0071
ASML-0086
ASML-0087
ASML-0088
ASML-0098
ASML-0099
ASML-0109
ASML-0110
ASML-0120
ASML-0121
ASML-0122
ASML-0123
ASML-0124
ASML-0125
ASML-0144
ASML-0145
ASML-0146
ASML-0155
ASML-0156
ASML-0171
ASML-0172
ASML-0173
ASML-0174
ASML-0175
ASML-0177
ASML-0188
ASML-0189
ASML-0190
ASML-0203
ASML-0204
ASML-0205
ASMM-0146
ASNA-0179

Germany

ASNA-0180
ASNA-0181
ASNC-0138
ASNE-0217
ASNE-0218
ASNE-0219
ASNF-0038
ASNF-0039
ASNF-0040
ASNJ-0124
ASNK-0047
ASNK-0066
ASNK-0067
ASNK-0068
ASNK-0069
ASNK-0070
ASNK-0120
ASNL-0052
ASNL-0053
ASNL-0054
ASNL-0055
ASNM-0028
ASNM-0029
ASNM-0030
ASPA-0076
ASPE-0026
ASPF-0138
Greece
ASFF-0012
ASFF-0013
ASFF-0014
ASFF-0015
ASFF-0016
India
ASHB-0004
ASHB-0005
ASKM-0150
ASKM-0151
ASKM-0152
ASLC-0166
ASLC-0167
ASLC-0168
ASLC-0169
ASLJ-0051
ASLJ-0052
ASMD-0264

Indonesia

ASFH-0050
ASLD-0122
ASLD-0123
ASLD-0124
ASLD-0125
ASLD-0126
Iran
ASFM-0171
ASFM-0172
ASFN-0018
ASJB-0072
Ireland
ASJC-0013
Italy
ASFA-0036
ASFA-0037
ASFA-0038
ASFB-0011
ASFB-0012
ASFB-0013
ASFB-0014
ASFF-0051
ASFF-0055
ASFJ-0001
ASFJ-0020
ASFM-0036
ASFM-0037
ASHA-0045
ASHA-0046
ASHA-0118
ASHA-0120
ASHA-0121
ASHA-0124
ASHA-0125
ASHA-0126
ASHA-0127
ASHA-0128
ASHB-0033
ASHB-0035
ASHB-0036
ASHB-0037
ASHB-0038
ASHB-0039
ASHB-0040
ASHB-0043
ASHC-0076
ASHC-0078

Italy

ASHC-0080
ASHC-0081
ASHC-0082
ASHC-0083
ASHC-0084
ASHC-0085
ASHC-0086
ASHC-0087
ASHC-0088
ASHH-0050
ASHH-0053
ASHM-0003
ASHM-0004
ASHM-0066
ASHN-0010
ASHN-0011
ASHN-0012
ASHN-0013
ASHN-0014
ASHN-0027
ASJB-0049
ASJB-0127
ASJB-0139
ASJB-0140
ASJB-0141
ASJB-0142
ASJB-0144
ASJB-0145
ASJB-0146
ASJB-0147
ASJB-0149
ASJB-0150
ASJB-0151
ASJC-0012
ASJC-0030
ASJC-0031
ASJE-0079
ASJE-0080
ASJF-0018
ASJF-0019
ASJF-0020
ASJF-0021
ASJF-0022
ASJF-0023
ASJM-0079
ASJM-0163
ASJM-0164

Italy

ASJM-0167
ASJN-0068
ASJN-0071
ASJN-0072
ASJN-0080
ASJN-0081
ASJN-0082
ASJN-0083
ASKE-0027
ASKE-0033
ASKE-0037
ASKE-0044
ASKE-0121
ASKE-0122
ASKK-0034
ASKL-0016
ASLC-0138
ASLF-0057
ASLH-0089
ASLH-0090
ASLL-0050
ASLL-0051
ASLL-0113
ASLL-0117
ASLL-0118
ASLL-0119
ASLM-0019
ASLN-0093
ASLN-0094
ASMD-0209
ASMD-0269
ASMD-0270
ASMH-0012
ASMJ-0003
ASMJ-0004
ASMJ-0005
ASMJ-0006
ASMJ-0007
ASMJ-0097
ASMJ-0098
ASMM-0037
ASMM-0038
ASMM-0039
ASMM-0040
ASNB-0217
ASNB-0218
ASNB-0219

Italy

ASNC-0143
ASNC-0208
ASPB-0021
ASPB-0022
ASPD-0063
ASPE-0050
ASPE-0051
ASPE-0052
ASPE-0053
ASPE-0054
ASPJ-0004
Japan
ASFH-0085
ASKH-0040
ASKN-0056
ASNJ-0186
ASNJ-0187
ASPB-0003
ASPC-0084
ASPC-0085
Kuwait
ASFF-0030
ASFF-0031
ASFF-0032
ASJM-0045
ASJM-0046
ASJM-0047
ASKB-0098
ASKB-0099
ASKB-0100
ASKB-0102
ASKB-0104
ASKB-0106
ASKB-0107
ASKB-0109
ASKC-0006
ASKC-0007
ASKC-0013
ASKC-0016
ASKD-0099
ASLM-0079
ASLM-0080
ASLM-0081
ASLM-0082
ASLM-0090
ASLM-0091
ASLM-0092

Kuwait

ASLM-0093
ASLM-0094
Lithuania
ASFM-0128
ASFM-0129
ASJN-0001
Mexico
ASKD-0015
ASKE-0082
ASKH-0078
ASKH-0079
ASLL-0065
ASLL-0066
ASMK-0001
ASMM-0238
ASMM-0239
ASMM-0240
ASMM-0241
ASNH-0017
ASNH-0018
ASNH-0019
ASNH-0020
ASNH-0021
ASPE-0105
ASPE-0106
Morocco
ASMH-0113
ASMH-0114
ASMH-0115
ASMH-0116
ASMH-0117
ASNK-0006
ASNK-0007
Netherlands
ASHD-0023
ASHD-0024
ASHD-0027
ASHD-0028
ASHD-0029
ASHL-0056
ASJJ-0097
ASJJ-0118
ASJJ-0119
ASJK-0035
ASJK-0036
ASJK-0037
ASJK-0038

Netherlands

ASJK-0039
ASJK-0040
ASJK-0041
ASJK-0042
ASJK-0043
ASJK-0044
ASKA-0010
ASKA-0011
ASKA-0013
ASKA-0014
ASKA-0016
ASKA-0017
ASKA-0018
ASLD-0115
ASLD-0116
ASMC-0194
ASMC-0195
ASMC-0221
ASMC-0222
ASNH-0299
ASNH-0300
ASNH-0301
ASNH-0302

Norway

ASFK-0033
ASFL-0008
ASFL-0009
ASFL-0010
ASFL-0011
ASFL-0012
ASFL-0013
ASHD-0030
ASHD-0031
ASHE-0010
ASHE-0012
ASHE-0014
ASHE-0015
ASHE-0016
ASHE-0018
ASHE-0019
ASHE-0020
ASHF-0016
ASHF-0017
ASJE-0081
ASJE-0082
ASJE-0083
ASKC-0021

Norway

ASKC-0022
ASKC-0025
ASKC-0026

Netherlands

ASLA-0052
ASLA-0053
ASLA-0058
ASLA-0070
ASLA-0072
ASLB-0104
ASLB-0105
ASLF-0059
ASMJ-0067
ASMJ-0068
ASMJ-0069
ASMJ-0070
ASMJ-0071
ASMJ-0072
ASMJ-0082
ASMJ-0083
ASMJ-0099
ASMJ-0100
ASMK-0059
ASMK-0060
ASMK-0061
ASMK-0062
ASMK-0063
ASMK-0070
ASMK-0071
ASMK-0072
ASMK-0073
ASMK-0074
ASMM-0099
ASMM-0100
ASMM-0101
ASMM-0102
ASMM-0103
ASMM-0187
ASMM-0207
ASMN-0131
ASMN-0132
ASNA-0002
ASNA-0003
ASNA-0004
ASNA-0005
ASNA-0006
ASNA-0007

Netherlands

ASNA-0008
ASNA-0009
ASNA-0010
ASNA-0011
ASNA-0013
ASNA-0014
ASNA-0015
ASNA-0024
ASNA-0025
ASNA-0026
ASNA-0027
ASNA-0028
ASNA-0029
ASNA-0030
ASNA-0031
ASNA-0034
ASNA-0035
ASNA-0036
ASNA-0037
ASNA-0178
ASNC-0152
ASNC-0153
ASNC-0161
ASNC-0162
ASNC-0163
ASNC-0164
ASNC-0165
ASNC-0166
ASNE-0125
ASNE-0126
ASNE-0127
ASNE-0128
ASNE-0136
ASNE-0137
ASNE-0138
ASNK-0075
ASNK-0076
ASNK-0077
ASNM-0007
ASPC-0104
ASPC-0105
ASPD-0096
ASPD-0097
ASPD-0099
ASPD-0100
ASPD-0101
ASPD-0102

Netherlands

ASPD-0104
ASPD-0105
ASPD-0106
ASPD-0107

Netherlands

ASPD-0108
ASPE-0010
ASPE-0021

Panama

ASKK-0062
ASKK-0071
ASKK-0074
ASKK-0076
ASMF-0103

Peru

ASFL-0045

Poland

ASFL-0107
ASFL-0108
ASFL-0113
ASFL-0114
ASFL-0115
ASLK-0008
ASLK-0009
ASLK-0010
ASLK-0011
ASLK-0013
ASLK-0014
ASLM-0124
ASLM-0125
ASLM-0126
ASLM-0140
ASLM-0145
ASMK-0078
ASMK-0079
ASMK-0080
ASMK-0081
ASMK-0082
ASNH-0297
ASNH-0373

Portugal

ASHL-0122
ASHL-0123
ASHL-0124
ASHM-0064
ASKF-0120
ASKF-0121

Portugal

ASKF-0125
ASKF-0128
ASKK-0122
ASKK-0123
ASKK-0128
ASKK-0129
ASKK-0132
ASKK-0133
ASKK-0135
ASKK-0136
ASKK-0146
ASKK-0147
ASKK-0148
ASKK-0149
ASKK-0150
ASKK-0154
ASKK-0155
ASKK-0158
ASKL-0002
ASKL-0003
ASKL-0004
ASKL-0008
ASKL-0009
ASKL-0012
ASKL-0013
ASKL-0015
ASKL-0025
ASKL-0027
ASKL-0031
ASKL-0043
ASKL-0073
ASKL-0075
ASKL-0080
ASKL-0081
ASKL-0082
ASKL-0083
ASLJ-0160
ASME-0044
ASME-0045
ASME-0046
ASME-0047
ASME-0048
ASME-0049
ASME-0050
ASME-0051
ASME-0052
ASMF-0044

Portugal

ASMF-0045
ASMF-0046
ASMF-0047
ASMF-0048
ASMF-0049
ASMF-0050
ASMF-0051
ASMK-0022
ASMK-0023
ASMK-0024
ASMK-0025
ASNA-0038
ASNA-0039
ASNA-0040
ASNA-0041
ASNA-0042
ASNA-0043
ASNA-0044
ASNA-0045
ASNA-0046
ASNH-0284
ASNH-0285
ASNH-0286
ASPA-0205
ASPA-0206
Romania
ASHL-0125
ASHL-0126
ASMM-0061
ASMM-0062
Russian Fed.
ASJK-0053
ASNH-0095
ASNH-0096
ASPC-0064
Saudi Arabia
ASEJ-0023
ASJH-0019
ASJH-0020
ASJH-0021
ASJH-0022
ASJH-0023
ASJH-0024
ASJH-0025
ASJH-0026
ASKJ-0132
ASKJ-0135
ASKJ-0141

Serbia

ASKD-0091
ASKD-0094
ASKD-0096
Serbia
ASKE-0001
ASKE-0004
ASKE-0006
ASKE-0010
ASKE-0012
ASKE-0018
ASKE-0019
ASKE-0026
ASKE-0031
ASKE-0039
ASKE-0054
ASKE-0057
ASKE-0058
Slovakia
ASNB-0152
ASNB-0153
South Africa
ASFM-0139
South Korea
ASJJ-0135
ASJK-0006
ASJK-0007
ASJK-0017
Spain
ASEM-0061
ASEM-0062
ASEM-0063
ASEM-0064
ASEM-0065
ASEM-0066
ASEM-0067
ASEM-0068
ASEM-0069
ASEM-0070
ASEM-0071
ASFA-0009
ASFA-0010
ASFA-0011
ASFA-0012
ASFA-0013
ASFA-0014
ASFA-0015
ASFA-0016

Spain

ASFA-0017
ASFA-0018
ASFA-0019
ASFM-0140
ASHA-0088
ASHA-0089
ASHA-0090
ASHA-0095
ASHA-0096
ASHA-0097
ASHA-0098
ASHA-0099
ASHA-0103
ASHB-0053
ASHB-0054
ASHB-0055
ASHB-0056
ASHB-0060
ASHB-0061
ASHJ-0064
ASHJ-0069
ASHJ-0070
ASHJ-0073
ASHJ-0074
ASHJ-0075
ASHJ-0076
ASHJ-0082
ASHJ-0083
ASHJ-0084
ASHJ-0085
ASHJ-0086
ASHJ-0089
ASHJ-0090
ASHJ-0092
ASHJ-0093
ASHJ-0094
ASJL-0036
ASJL-0037
ASJL-0038
ASJL-0039
ASJM-0060
ASJM-0061
ASJM-0062
ASKE-0105
ASKE-0106
ASKE-0110
ASKE-0111

Spain

ASKE-0116
ASKJ-0017
ASKJ-0018
ASKJ-0019
ASKJ-0020
ASKJ-0022
ASKJ-0028
ASKJ-0036
ASKJ-0038
ASKJ-0045
ASKJ-0049
ASKJ-0050
ASKK-0145
ASKM-0142
ASLD-0097
ASLD-0098
ASLD-0099
ASLK-0044
ASLK-0045
ASLM-0053
ASLM-0054
ASLM-0055
ASLM-0056
ASLM-0057
ASLM-0128
ASLM-0130
ASLM-0131
ASLM-0146
ASLM-0219
ASLM-0220
ASMA-0046
ASMC-0059
ASMC-0060
ASMC-0061
ASMC-0062
ASMC-0063
ASMC-0064
ASMC-0103
ASMC-0104
ASMC-0105
ASMC-0106
ASMC-0107
ASMC-0108
ASMC-0110
ASMC-0115
ASMC-0117
ASMC-0118

Spain

ASMD-0214
ASMD-0215
ASMD-0216
ASMD-0217
ASMD-0218
ASMJ-0022
ASMJ-0029
ASMJ-0030
ASMJ-0031
ASMJ-0032
ASMM-0049
ASMM-0050
ASMN-0078
ASMN-0079
ASNC-0063
Sweden
ASMH-0158
Switzerland
ASEE-0032
ASEE-0033
ASEE-0039
ASEE-0040
ASEE-0041
ASFC-0044
ASFC-0045
ASFC-0046
ASHF-0116
ASHK-0102
ASHK-0103
ASHM-0077
ASHM-0088
ASHM-0089
ASHM-0090
ASHM-0091
ASJJ-0044
ASJJ-0045
ASKH-0110
ASKH-0115
ASKM-0159
ASKM-0161
ASKM-0162
ASKM-0188
ASKM-0189
ASKM-0192
ASLB-0107
ASLB-0108
ASLB-0109

Switzerland

ASLH-0035
ASLH-0038
ASMB-0113
ASMB-0114
ASMB-0115
ASMB-0116
ASND-0012
ASND-0013
ASND-0019
ASND-0020
ASND-0021
ASND-0022
ASND-0023
ASPC-0043
ASLD-0006
ASLF-0125
ASLF-0126
ASLH-0034
Taiwan
ASFK-0034
ASHD-0068
ASLE-0064
ASME-0061
ASNE-0084
ASNE-0085
Thailand
ASFD-0028
ASHL-0111
ASHL-0112
ASLB-0054
Turkey
ASFB-0038
ASFB-0039
ASFB-0040
ASFB-0041
ASFB-0042
ASFB-0043
ASFB-0044
ASLA-0097
ASLA-0106
ASLB-0003
ASLB-0004
ASLB-0005
ASLB-0006
ASLB-0007
ASLB-0008
ASLB-0010

Turkey

ASLB-0012
ASLB-0013
ASLB-0025
ASLB-0026
ASLB-0027
ASLB-0028
ASLB-0060
ASLB-0061
ASLB-0062
ASLB-0063
ASLB-0064
ASLB-0081
ASLB-0082
ASLB-0086
ASLB-0088
Ukraine
ASLL-0127
United Kingdom
ASFC-0007
ASFC-0008
ASFC-0009
ASFC-0010
ASHC-0031
ASHC-0048
ASHC-0050
ASHF-0101
ASHF-0105
ASHF-0106
ASHF-0111
ASHF-0112
ASHF-0113
ASHF-0114
ASJK-0045
ASJK-0046
ASJK-0052
ASJL-0108
ASJL-0109
ASJL-0110
ASJL-0111
ASKC-0030
ASKC-0031
ASKC-0053
ASKC-0054
ASKC-0104
ASLN-0070
ASLN-0072
ASLN-0073

United Kingdom

ASLN-0074

ASLN-0075

ASLN-0076

ASLN-0121

ASLN-0122

ASLN-0123

ASMC-0056

ASMC-0057

ASNB-0216

ASPB-0079

ASPB-0080

ASPB-0086

ASPB-0087

Utd.Arab.Emir.

ASFD-0075

ASFN-0012

ASHB-0070

ASHB-0071

ASHB-0074

ASHB-0076

ASHB-0077

ASHB-0078

ASHB-0079

ASHB-0080

ASHB-0081

ASJB-0059

ASJB-0060

ASJB-0061

ASJB-0062

ASJB-0063

ASJB-0065

ASJB-0066

ASJB-0067

ASJB-0080

ASJB-0081

ASJB-0082

ASJB-0099

ASJB-0102

ASJB-0105

ASJB-0108

ASJC-0015

ASJC-0016

ASJC-0019

ASLD-0119

ASLD-0120

ASLD-0121

ASPC-0048

Vietnam

ASMN-0082