

**Avis de sécurité**  
Field safety notice FSN

Paris, le 24/01/2022

Référence de l'avis : CE22-0002

Type d'avis : initial

**A l'attention :**

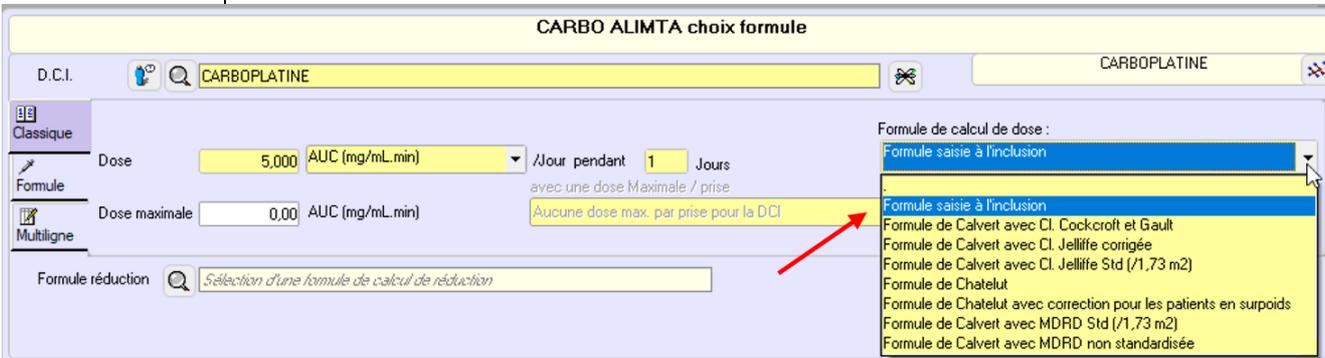
Du pharmacien responsable de la PUI  
Du responsable informatique  
Des correspondants locaux de vigilance

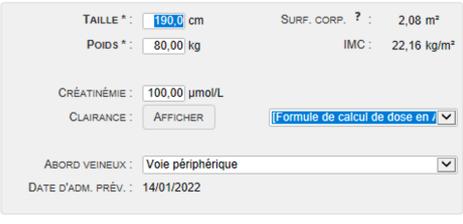
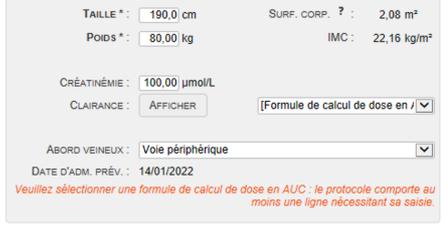
Madame, Monsieur,

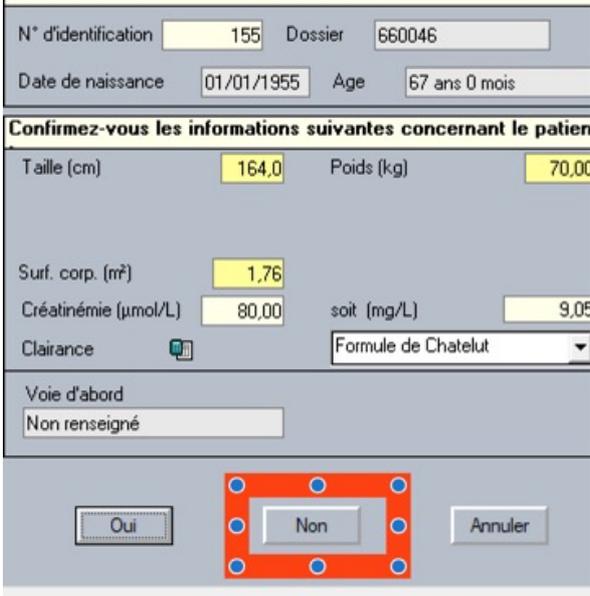
Nous vous contactons dans le cadre de la sécurité d'utilisation de nos logiciels.

Informations sur le dispositif	
Type du dispositif	Logiciel d'aide à la prescription et à la dispensation
Nom commercial	CHIMIO®
Module logiciel	Chimio Web
Version(s) majeure(s) concernée(s)	6.0 et antérieure
Version(s)	Toute version
Public concerné	Prescripteurs / Pharmaciens / Infirmier(e)s Nombre d'établissements potentiellement concernés < 10

**Raison de l'action corrective de sécurité terrain (FSCA)**

<p><b>Description du problème</b></p>	<p><b><u>Lorsque j'utilise un protocole paramétré pour une ligne en « Formule saisie à l'inclusion » :</u></b></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p><b><u>Si, lors de l'inclusion en web, je confirme les informations à 2 reprises sans sélectionner de formule</u></b></p>
---------------------------------------	--

		
<b>Evaluation du risque</b>	<b>Risque élevé : Dose calculée avec formule non adaptée</b>	
<b>Informations complémentaires</b>	<p><i>La dose prescrite est aberrante et n'est pas mise à jour</i></p> <p><i>La réouverture de la fenêtre en prescription ou validation pharmaceutique (client web ou client windows) peut parfois résoudre le problème.</i></p>	

<b>Mesures de mitigation (réduction du risque)</b>	
<b>Mesures correctives de sécurité mises en œuvre par Computer Engineering</b>	Correction immédiate ( <b>DC 108629</b> ) Mise à disposition du correctif dès publication du prochain patch
<b>Mesures immédiates à mettre en œuvre par les utilisateurs</b>	Sensibilisation des prescripteurs En validation pharmaceutique (en client windows), lorsque la fenetre « patient » va s'ouvrir, répondre <b>non</b> à la question pour relancer les calculs systématiquement
<b>Informations complémentaires</b>	

### **Transmission de cet avis**

Cet avis de sécurité doit être communiqué au sein de votre établissement et vous devez vous assurer de sa prise en compte.

### **Point de contact**

Pour toute question, vous pouvez contacter le correspondant de matériovigilance

Jean-François TOURNAMILLE  
[ift@computer-engineering.fr](mailto:ift@computer-engineering.fr)  
12 rue du faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS

### **Confirmation de prise en charge**

Nous demandons à nos clients de confirmer la prise en charge de cet avis à l'aide du lien suivant :