



Ref#R2208399

## Avis urgent de sécurité sur le terrain WHILL Model C

Date : Mars 2022

A l'attention des utilisateurs du Model C de WHILL

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique

Nom du modèle : WHILL Model C

Type d'action : Conseils donnés par le fabricant concernant l'utilisation de l'appareil


### Description du problème :

Cet avis a pour but de rappeler le risque potentiel de blessure grave pour l'utilisateur qui peut résulter de l'utilisation du WHILL Model C sans avoir assemblé correctement ses composants.

### Conseils sur les mesures à prendre par l'utilisateur :

Pour éviter ce risque, l'utilisateur doit s'assurer qu'après avoir assemblé les composants, le levier de déverrouillage de la base d'entraînement avant et arrière a basculé complètement vers l'avant et que la barre anti-basculement est tombée dans sa position la plus basse.

La conduite de l'appareil avec la base d'entraînement déverrouillée ou la barre anti-basculement relevée est extrêmement dangereuse, car les bases d'entraînement avant et arrière peuvent se séparer lors du passage d'un obstacle, d'une pente ou d'une rampe.

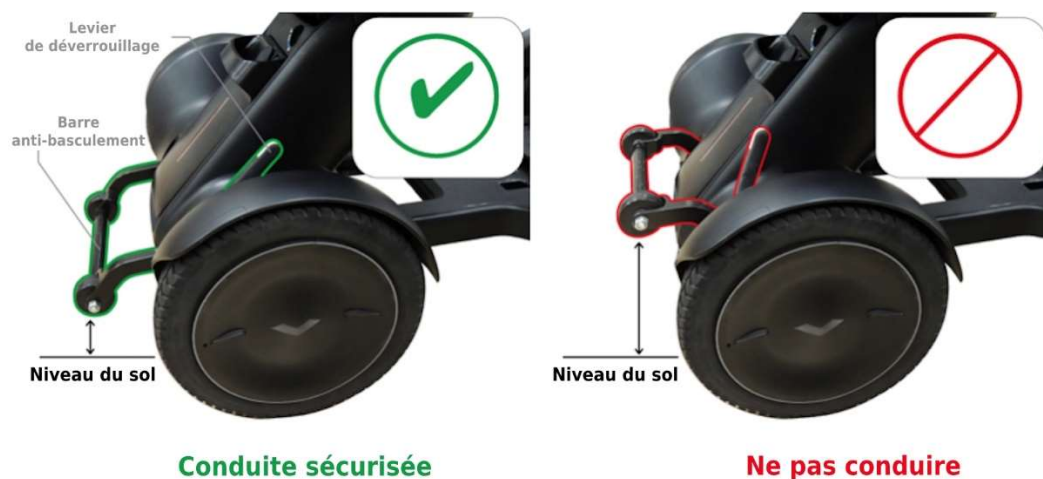



Ref#R2208399

Les informations contenues dans cet avis sont également incluses dans le manuel d'utilisation du Model C de WHILL et dans le site Web ci-dessous. Veuillez lire entièrement et attentivement le manuel d'utilisation.

France : <https://whill.inc/fr/>

Allemagne : <https://whill.inc/de/>

Italie : <https://whill.inc/it/>

Pays-Bas : <https://whill.inc/nl/>

Espagne : <https://whill.inc/es/>

Royaume-Uni : <https://whill.inc/gb/>

Danemark : <https://whill.inc/dk/>

Norvège : <https://whill.inc/no/>

Pologne : <https://whill.inc/pl/>

Suède : <https://whill.inc/se/>

**Contact:**

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61

1101 DL Amsterdam Netherlands

Courriel: [eu.info@whill.inc](mailto:eu.info@whill.inc)

Tsuyoshi Iriyama

WHILL, Inc.

Directeur des affaires réglementaires