



Information urgente sur la sécurité

Correction du mode d'emploi
concernant

Poignée à piles Economy pour laryngoscopes

01.04.2022

Chère cliente, cher client,

Selon nos données, vous avez reçu le produit suivant:

Groupe de produit	REF	Modèle	LOT concerné
Laryngoscopes	03.41001.721	F.O. Poignée à pile Economy, vert	U =2013; V =2014; W =2015; X =2016; Y =2017; Z =2018;
	03.11001.721	WL Poignée à pile Economy, bleu	A =2019; B =2020

Description du problème:

La durée de vie des poignées mentionnées ci-dessus est limitée à 5 ans. En cas d'utilisation au-delà de cette durée de vie, la poignée en plastique peut se briser en raison du vieillissement du matériau.

Cette indication ne figurait pas dans les modes d'emploi qui accompagnaient les poignées mentionnées ci-dessus.

L'indication manquante a été ajoutée avec le mode d'emploi version QM-GAP-0140D.


Mesures nécessaires :

Veuillez vérifier le LOT de vos poignées à piles Economy.


Si la durée de vie de 5 ans est dépassée, elles doivent être jetées.

Vous trouverez le LOT sur l'étiquette de l'emballage et/ou sur la tête du poignée (voir images):

Anciens modèles

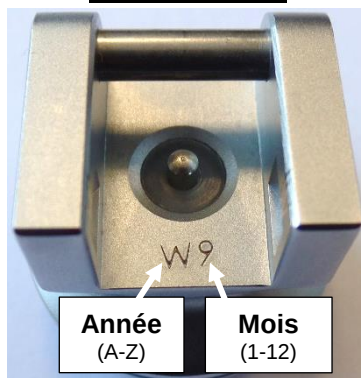

Modèles plus récents

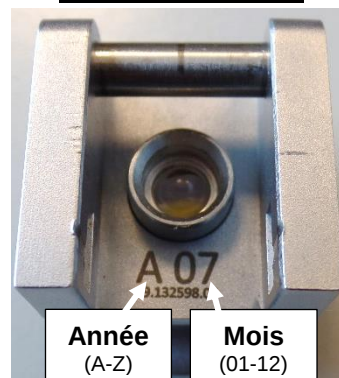

Sous le lien suivant, vous trouverez le mode d'emploi actuellement en vigueur à télécharger sur notre site internet: <https://www.kawemed.com/en/downloads/manuals/>

KIRCHNER & WILHELM

GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany
www.kawemed.com
info@kawemed.de

Zentrale / Switchboard

Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 0
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 11
Verkauf / Sales Department
Fon +49 (0)7141 / 68 188 - 44
Fax +49 (0)7141 / 68 188 - 55

kompetenz in medizintechnik
weltweit

seit 1890



MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe

Transmission des informations décrites ici :

Veuillez-vous assurer au sein de votre organisation que tous les utilisateurs des produits mentionnés ci-dessus et les autres personnes à informer ont pris connaissance de la présente Information urgente sur la sécurité. Si vous avez remis les produits à des tiers, veuillez leur transmettre une copie de cette information ou informer la personne de contact indiquée ci-dessous.

Veuillez conserver ces informations au moins jusqu'à la fin de l'intervention.

L'autorité nationale compétente a reçu une copie de ces "informations urgentes sur la sécurité".

KIRCHNER & WILHELM regrette les éventuels désagréments causés par ce problème.

Cordialement,

Sandrina Lerch
gm@kawemed.de
Gestion de qualité