

URGENT- Notification de sécurité produit

Notification aux patients

Masque facial Amara View à contact minimal
Masque facial DreamWear
Masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez
Masques nasaux Wisp et Wisp Youth
Masque de traitement 3100 NC/SP

Ce document contient des informations importantes mises à jour pour assurer le bon fonctionnement continu et en toute sécurité de votre matériel.

Veillez examiner les informations suivantes avec tous les membres de votre personnel qui doivent en avoir connaissance. Il est important d'en comprendre les conséquences.

Veillez conserver une copie de ce document avec le Manuel d'utilisation de votre matériel.

Septembre, 2022

Cher patient,

Les dispositifs d'interface patient Philips Respironics suivants (masques faciaux et nasaux), à savoir le masque facial Amara View à contact minimal, le masque facial DreamWear, le masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez, les masques nasaux Wisp, les masques nasaux Wisp Youth et le masque de traitement 3100 NC/SP contiennent des aimants.

Philips Respironics met à jour ses contre-indications et avertissements existants en les remplaçant par les suivants :

Contre-indication : l'utilisation du masque est contre-indiquée pour les patients et les membres de leur foyer, les soignants et les conjoint(e)s qui peuvent se trouver à proximité des patients utilisant les masques et qui portent des dispositifs implantés susceptibles d'être affectés par les aimants, y compris, mais sans s'y limiter :

- Stimulateurs cardiaques
- Défibrillateurs cardioverters implantables (DCI)
- Neurostimulateurs
- Implants/électrodes/valves métalliques et magnétiques placés dans les membres supérieurs, le torse ou plus haut (c'est-à-dire dans le cou et la tête)
- Shunts du LCR (liquide céphalo-rachidien) (par exemple shunt ventriculo-péritonéal)
- Clips d'anévrisme
- Spirales d'embolisation
- Dispositifs d'interruption du débit intravasculaire des anévrismes intracrâniens
- Plaques crâniennes métalliques, vis, protections de trou de trépan et substituts osseux
- Éclats métalliques dans l'œil

- *Implants oculaires (par exemple, implants pour glaucome, implants rétinien)*
- *Certaines lentilles de contact contenant du métal*
- *Implants pour restaurer l'audition ou l'équilibre contenant un aimant implanté (tels que les implants cochléaires, les dispositifs auditifs implantés à conduction osseuse et les implants auditifs du tronc cérébral)*
- *Systèmes de fixation de prothèses dentaires magnétiques*
- *Clips gastro-intestinaux métalliques*
- *Stents métalliques (par exemple, anévrisme, coronaire, trachéo-bronchique, biliaire)*
- *Ports et pompes implantables (par exemple pompes à insuline)*
- *Neurostimulateurs de l'hypoglosse*
- *Dispositifs présentant l'étiquette "Non approprié pour l'IRM" (imagerie par résonance magnétique)*
- *Les implants métalliques et magnétiques ne présentant pas d'étiquette relative à l'IRM ou dont la sécurité dans un champ magnétique n'a pas été évaluée*

Avertissement : des aimants d'une intensité de champ magnétique de 400 mT sont utilisés dans le masque. À l'exception des dispositifs cités dans la contre-indication, assurez-vous que le masque est maintenu à au moins 15,24 cm environ de tout autre implant médical ou dispositif médical susceptible d'être affecté par les champs magnétiques afin d'éviter tout effet éventuel provenant des champs magnétiques localisés. Cela s'applique aux membres du foyer, aux soignants et aux conjoint(e)s qui peuvent se trouver à proximité des patients utilisant les masques.

1. la nature du problème et les circonstances dans lesquelles il peut survenir ;

- Les masques concernés contiennent des aimants qui peuvent potentiellement affecter le fonctionnement et/ou entraîner un mouvement/déplacement des implants médicaux ou des dispositifs médicaux susceptibles d'être affectés par les champs magnétiques.
- Pour plus d'informations, reportez-vous aux contre-indications et aux avertissements de cette notification de sécurité produit.

2. Description du danger/des risques associés au problème

- À l'exception des dispositifs cités dans la contre-indication, si les aimants du masque sont placés à moins de 15,24 cm environ d'un implant ou d'un dispositif métallique, ils peuvent provoquer un dysfonctionnement du dispositif, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- Quatorze (14) rapports patient suggèrent que les aimants du masque ont affecté des dispositifs médicaux, notamment : interférence avec le stimulateur cardiaque, défaillance du stimulateur cardiaque entraînant un remplacement, nécessité d'un réglage de shunt, réinitialisation du défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), convulsions, arrêt périodique du défibrillateur, arythmie, pression artérielle irrégulière, variation des pulsations cardiaques et troubles cognitifs.

3. Systèmes concernés et identification de ces derniers

Les images des masques concernés sont présentées ci-dessous. Les clips magnétiques des harnais de ces masques sont entourés. Ces images peuvent servir de référence pour déterminer si votre masque ou celui de votre patient utilise également des clips magnétiques pour harnais. Ces masques sont destinés à fournir aux patients une interface pour l'application d'une thérapie par PPC ou à deux niveaux de pression. Les références des masques concernés et des composants des masques contenant des aimants sont répertoriées dans la figure 6.



Figure 1 :
masque
facial Amara
View



Figure 2 :
masque
nasal
DreamWisp

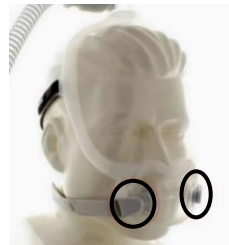


Figure 3 :
masque
facial
DreamWear



Figure 4 :
masques
nasaux Wisp
et Wisp
Youth



Figure 5 :
masque de
traitement
3100 NC/SP

4. Actions à mettre en œuvre par le patient afin d'éviter tout risque

En tant que patient utilisateur de ces masques, vous devez respecter les précautions suivantes :

Vous devez mettre en œuvre l'action suivante :

- 4.1. **CESSEZ** d'utiliser le masque concerné si l'implant/le dispositif médical est contre-indiqué avec les aimants du masque. Les patients doivent consulter leur médecin immédiatement pour déterminer si un autre masque peut être utilisé pour leur traitement. En attendant, ils doivent utiliser un masque non magnétique (si disponible) pour poursuivre leur traitement. Mettez au rebut de manière appropriée le masque doté d'aimants après avoir obtenu une alternative.
- 4.2. Si vous, les membres de votre foyer, vos soignants et votre conjoint(e) qui peuvent se trouver à proximité immédiate de vous, ne sont pas porteurs de dispositifs médicaux implantés ou d'éclats métalliques dans les yeux, aucune action n'est nécessaire.
- 4.3. Les membres du foyer, les soignants et les conjoint(e)s porteurs d'un implant/dispositif médical doivent s'assurer que le masque est maintenu à au moins 15,24 cm environ du ou des implants/dispositifs médicaux.

5. Description des actions prévues par Philips pour remédier au problème

Philips Respironics met à jour ses contre-indications et avertissements existants comme indiqué dans cette notification de sécurité produit.

Cette notification a été envoyée à l'organisme réglementaire compétent. Les effets indésirables ou les problèmes de qualité identifiés lors de l'utilisation de ce produit peuvent être signalés à Philips ou à l'autorité locale compétente.

Philips Respironics regrette tout désagrément causé par ce problème.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Thomas Fallon
Responsable Assurance Qualité
Philips Respironics

Dispositifs concernés par ce problème – Figure 6 :

Masque facial Amara View à contact minimal	
Réf. de pièce	Description
1090602	S Amara View Mask w/HGR
1090603	M Amara View Mask w/HGR
1090604	L Amara View Mask w/HGR
1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090624	L Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090641	XS Amara View Mask w/HGR, JPN
1090642	S Amara View Mask w/HGR, JPN
1090643	M Amara View Mask w/HGR, JPN
1090644	L Amara View Mask w/HGR, JPN
1090651	XS Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090652	S Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090653	M Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090654	L Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090662	S Amara View Mask w/HGR, INTL
1090663	M Amara View Mask w/HGR, INTL
1090664	L Amara View Mask w/HGR, INTL
1090670	Amara View Mask w/HGR, FitPack
1090696	RP – Amara View Headgear, L
1090697	RP-Amara View Headgear, Standard
1135080	S AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135081	M AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135082	L AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1136626	Amara View Magnet Clip
1090670RTL	AMARA VIEW MASK W/HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Amara View Full Face Magnetic Clips

Masque facial DreamWear	
Réf. de pièce	Description
1133344	S, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133345	M, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133370	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL

Masques nasaux Wisp et Wisp Youth	
Réf. de pièce	Description
1094050	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1094051	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAG CLIPS DOM
1094053	WISP MASK, USA, FABRIC FRAME, W/ HDGR
1094060	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL
1094061	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
1094062	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL SE
1094070	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, JPN SE
1094071	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1094072	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME, W/ HDGR JPN
1094073	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1109298	WISP YOUTH MASK, FABRIC, W/MAG CLIPS DOM
1113954	XL, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1117119	MW, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1118060	P, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118061	S/M, WISP MASK CLEAR FRAME, W/ HDGR DOM
1118062	L, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118063	XL, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HGR, DOM
1118064	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118065	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME W/ HDGR,DOM
1118066	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118067	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
1120434	Wisp/DreamWisp Magnetic Headgear Clip,RP
1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
1137366	S/M, Wisp Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137367	L, Wisp Nasal Mask, Fabric Frame, DOM
1137368	S/M, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137369	L, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP LAB MASK ,DOM
1138989	P, WISP MASK,CLEAR FRAME, W/HDGR,1118060
1138991	L, WISP MASK, CLEAR W/ HDGR, DOM 1118062
1138992	XL,WISP MASK,CLEAR FRAME,W/ HGR,1118063
1138993	P, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118064

1133371	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133372	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133373	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm
1133375	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133376	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133377	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133378	MW, DreamWear Full, S. & M. Frm, GBL
1133380	S, DreamWear Full, M. Frm W/ HGR, GBL
1133381	M, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133382	L, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133383	MW, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133385	S, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133386	M, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR
1133387	L, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133388	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR,
1133390	S, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133391	M, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133392	L, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133393	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR
1133395	DreamWear Full, Demo Pack
1133400	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1133401	DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL
1133405	S, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133406	M, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133407	L, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133408	MW, DreamWear Full, Med Frm W/O
1133410	S, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133411	M, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133412	L, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR

1138994	S/M,WISP MASK FABRICFRAME W/HDGR,1118065
1138995	L, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118066
1138996	XL,WISP MASK,FABRIC FRAME W/HGR, 1118067
1139009	S/M,WISPMASK CLEAR FRAME,W/ HDGR 1118061
1094051RTL	WISP MASK, FABRICFRM,W/MAG CLIPS DOM-RTL
1148366	DreamWisp/Wisp Magnetic Clips - RTL

Masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez	
Réf. de pièce	Description
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con W/HGR GBL
1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con W/O HGR GBL
1137921	FitPk, DreamWisp Nsl, MED Con W/ HGR INT
1137922	P, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137923	S, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137924	M, DreamWisp Nsl, Med Conn W/O HGR GBL
1137925	L, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137926	XL, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137927	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137928	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137929	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137930	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137931	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137932	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137933	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137934	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137935	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137936	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137937	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT

1133413	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR	1137938	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1133415	S, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL	1137939	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1133416	M, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR	1137940	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1133417	L, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL	1137941	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1133418	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR	1137942	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1133423	S/M, DreamWear Full, Sm Frm w/ HGR	1137943	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1133424	S/M, DreamWear Full, Med Frm w/ HGR	1137944	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1133425	S/M, DreamWear Full, Lg Frm w/ HGR	1137945	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1133427	W, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR	1137946	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1133430	S, DreamWear Full Cushion, RP	1137947	P, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1133431	M, DreamWear Full Cushion, RP	1137948	S, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1133432	L, DreamWear Full Cushion, RP	1137949	M, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1133433	MW, DreamWear Full Cushion, RP	1137950	L, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1133434	SW, DreamWear Full Cushion, RP	1137951	XL, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1133435	S, DreamWear Full Cushion, RP, JPN	1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1133436	M, DreamWear Full Cushion, RP, JPN	1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con
1133438	W, DreamWear Full Cushion, RP, JPN	1137955	Combo LabPK DreamWisp
1133450	DreamWear Full Headgear, RP	1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1133454	Headgear Magnet Clip, RP	1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1135275	S, DreamWear Full, Sm and Med Frm	1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1135276	M, DreamWear Full, Sm and Med Frm	1139332	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1135277	SW, DreamWear Full, Sm and Med Frm	1139333	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1135278	MW, DreamWear Full, Sm and Med Frm	1139334	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1135327	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1139335	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1135388	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1139336	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1135389	SW, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1144344	DreamWisp RS HEADGEAR-Lab, RP
1135390	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm	1144345	DreamWisp LARGE HEADGEAR-Lab, RP
1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab, Med Frm	1144346	DreamWisp HEADGEAR - Lab, RP
1137431	Ext Sizepack, DreamWear Full Lab Msk	1144502	FitPack, DreamWisp, USA
1137437	S, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame	1148409	DreamWisp Headgear (RS)- RTL
1137438	S, DreamWear Full Lab Mask, Sm Frame	1148410	DreamWisp HEADGEAR, RP- RTL
1137439	M, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame	1148411	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP- RTL

1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB
1140235	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1143130	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1144347	DreamWear Full Headgear - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Headgear, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face Magnet Clip - RTL
1133375RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Small
1133376RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Medium
1133377RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Large
1133378RTL	DreamWear Face Mask Kit, M. Cushion
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133431RTL	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133432RTL	DreamWear Full Face Cushion, Large
1133433RTL	DreamWear Full Face Cushion, Medium

1148913	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148914	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148915	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148916	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148917	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1137942AP	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137943AP	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137943CE	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137943RC	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137944AP	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137944CE	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137944RC	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137945AP	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137945CE	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137945RC	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR -RTL

Masque de traitement 3100 NC/SP	
1144608	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR
1144610	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145038	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145039	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145040	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145041	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR
1145044	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145045	S, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145046	M, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145047	L, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145048	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR
1145049	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR,

1145050	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145051	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145052	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR
1145055	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145056	S, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145057	M, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145058	L, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145059	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR
1145060	Therapy Mask 3100 NC-SP, demopack
1145061	Therapy Msk 3100 NC, lab fitpack, single
1145062	Therapy Msk 3100 SP, lab fitpack, single
1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, lab combo
1145064	XS, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145065	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145066	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145067	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145068	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145069	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145070	S, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145071	M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145072	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145073	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145074	Therapy Mask 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145460	S, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145461	M, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145462	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145463	L, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145464	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL

1145465	S, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145466	M, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145467	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145478	L, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145916	Therapy Mask 3100 NC, lab fitpack, GBL
1145917	Therapy Mask 3100 SP, lab fitpack, GBL