



Chère cliente, Cher client,

Nous tenons à vous informer, des dernières recommandations émises par ThermoFisher, concernant le rendu de résultat de vos typages Linkage à l'aide des kits 1575C, 1580C et 1862C pour les échantillons qui sont homozygotes DQ5 avec l'allèle DQB1*05:04.

[Consulter la note de One Lambda](#)

Pour compléter cette note transmise ci-dessus, nous souhaitons vous apporter quelques précisions :

En raison d'une fausse réactivité positive possible sur les puits LSDQB-008.1 et/ou LSDQB-009.1 , le logiciel peut attribuer un DQB1*05, DQB1*04 à la place d'un DQB1*05, DQB1*05:04.

Pour les tests 1580C, l'association DRB1/DQB1 ne répondra pas à un déséquilibre de liaison connu et le logiciel indiquera un avertissement de type haplocheck / allèle rare / no call .

Pour les tests 1575C et 1862C un résultat incorrect peut être généré sans avertissement du logiciel.

Ce résultat nécessite des tests de confirmation supplémentaires, à définir selon vos critères de validations internes.

Ce problème est résolu dans les prochains lots (avec un plan de plaque EX25) qui devraient être disponibles au plus tard le lundi 7 novembre 2022.

D'ici là, nous vous demandons de nous retourner le formulaire ci-dessous à l'adresse : hla@eurobio-scientific.com

[Formulaire de réponse](#)

Si vous avez d'autres questions concernant cette note, vous pouvez contacter notre service hotline : hla@eurobio-scientific.com

Nous vous remercions de l'attention immédiate que vous portez à cet avis. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a pu causer et nous vous remercions de votre compréhension. Nous vous tiendrons au courant dès que les nouveaux lots seront disponibles.

[Le groupe HLA](#)