

## Information urgente de sécurité

### Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™\* Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) (Mahurkar QPlus)

#### Rappel

Décembre 2022

Référence Medtronic : FA1295

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant : US-MF-000028763

Cher professionnel de santé,

L'objet de cette lettre est de vous informer que Medtronic procède au rappel volontaire des lots spécifiques de cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™\* Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French). Ce produit est également connu sous le nom de Mahurkar QPlus.

**Veillez noter :** Ce rappel **ne concerne pas** les cathéters haut débit Mahurkar **Elite** High-Flow (13,5 French).

Vous recevez cette lettre car les dossiers de Medtronic indiquent que votre établissement pourrait avoir au moins un des cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) qui sont listés dans la pièce jointe A. Medtronic a initié cette action pour prévenir l'utilisation de produits potentiellement affectés qui pourraient avoir un impact sur les patients.

#### Description du problème :

Au cours du processus de production, une fuite interne potentielle dans la partie connecteur du cathéter d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) spécifique a été identifiée en raison d'un vide dans la partie connecteur du cathéter. Pendant la dialyse, cette fuite interne dommageable observée pourrait se traduire par une communication croisée du circuit sanguin. À l'échelle mondiale, au 14 octobre 2022, il y a eu sept plaintes dont l'une ayant confirmé la preuve d'une communication interluminale. Deux événements indésirables ont été signalés, dont un pour thrombose et un pour débit insuffisant. Aucun décès n'a été signalé.

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

### **Risque pour la santé :**

L'utilisation d'un produit présentant ce défaut de fabrication pourrait entraîner un risque potentiel pour le patient, notamment : traitement inadéquat, exposition involontaire aux radiations, hémolyse, formation de thrombus, embolie, retard dans le traitement et infection potentielle.

### **Recommandations pour les patients :**

Pour les patients avec des lots affectés de cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French), une procédure de remplacement pourrait ne pas être nécessaire. L'examen des cathéters en production a indiqué que la majorité des cathéters (p. ex., >99 %) visés par le rappel fonctionnent comme prévu et ne présentent pas de fuite interne dans la partie connecteur du cathéter. Les médecins doivent continuer à suivre les politiques et procédures propres à l'établissement pour l'évaluation de routine de la perméabilité, du fonctionnement et de l'efficacité du dispositif d'accès de l'hémodialyse. En présence d'un vide interluminal dans la partie connecteur du cathéter, une « communication » ou un mouvement du contenu du cathéter entre les lumières veineuse et artérielle à l'intérieur du cathéter peut être visible ; cependant, elle ne se présenterait pas comme une fuite ou un défaut externe. En cas de détection, l'équipe médicale du patient doit faire appel à son jugement clinique pour déterminer la nécessité et le moment du remplacement du cathéter, conformément au mode d'emploi du produit et aux politiques et procédures propres à l'établissement.

### **Actions requises :**

1. Pour vous aider à identifier si vous avez un produit affecté, vous pouvez contacter le service des affaires réglementaires : [affaires.reglementaires@medtronic.com](mailto:affaires.reglementaires@medtronic.com)

**Remarque :** le dispositif concerné fait partie d'un kit de cathéters. Veuillez vous référer aux kits répertoriés dans la pièce jointe A pour vous aider à identifier le produit concerné.

2. Mettez immédiatement en quarantaine et cessez d'utiliser tous les cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) non utilisés des lots concernés (voir la pièce jointe A).
3. Veuillez remplir le formulaire d'accusé de réception du client, même si vous **n'avez pas** de stock de produits non utilisés.

4. Retournez à Medtronic tous les cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) inutilisés de votre inventaire comme indiqué dans les **instructions d'envoi et de retour** ci-dessous.
5. Si vous avez distribué l'un des lots concernés de cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) répertoriés dans la pièce jointe A, vous êtes tenu(e) de fournir rapidement ces informations de rappel à ces destinataires.
6. Veuillez partager cet avis avec toutes les personnes devant être au courant dans votre établissement, y compris, mais sans s'y limiter, les néphrologues, les médecins, les infirmières en néphrologie ou d'autres membres du personnel de dialyse.
7. Conservez cette notification dans vos dossiers.

## Instructions d'expédition et de retour :

	Client disposant de produits concernés en stock	Client ne disposant d'aucun produit concerné en stock	Où envoyer le formulaire rempli
Si le produit a été acheté <b>directement</b> de Medtronic	<p>Veillez remplir le formulaire de retour produits ci-joint dans son intégralité.</p> <p>À réception du formulaire, le Service client de Medtronic vous contactera pour organiser le retour de vos produits. Vous recevrez un avoir pour tout dispositif non utilisé que vous renvoyez.</p>	<p>Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ».</p>	<p>Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits.</p>
Si le produit a été acheté auprès d'un <b>distributeur</b>	<p>Remplissez <b>tous</b> les champs du formulaire et contactez directement votre distributeur pour convenir du retour des produits.</p>	<p>Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ».</p>	<p>Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits.</p>

## Informations complémentaires :

# Medtronic

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

Medtronic a notifié l'ANSM de cette action.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. La sécurité du patient étant notre priorité, nous vous remercions par avance de votre intervention rapide. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant Medtronic ou les affaires réglementaires : [affaires.reglementaires@medtronic.com](mailto:affaires.reglementaires@medtronic.com)

Cordialement,

Leclerre Iepine, Aurelie / Renal Access Disease State Manager

### **Pièces jointes :**

Pièce jointe A : IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNÉ

## Pièce jointe A :

\

### IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNÉ

#### Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™\* Acute Dual

#### Lumen High Flow (13,5 French)

#### (Mahurkar QPlus)



Extension droite de 13,5 Fr



Identification du marquage  
de Mahurkar QPlus

Extension incurvée de 13,5 Fr

## Pièce jointe A :

### IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNÉ

#### Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™\* Acute Dual Lumen High Flow (13,5 French) (Mahurkar QPlus)

 COVIDIEN™

REF 8888135193

### MAHURKAR™


#### Acute Dual Lumen Catheter Kit

High Flow Pre-Curved  
13.5 Fr/Ch (4.5 mm) x 19.5 cm

Kit de cathéter d'urgence à double lumière

Pré-courbé pour débit élevé

Kit, zwellumiger Katheter für die akute Versorgung, Vorgebogen für hohen Durchfluss  
Kit con catetere a doppio lume per trattamenti acuti, Per flusso elevato, Pre-curvato  
Equipo de catéter de doble lumen para enfermos agudos, Precurvada de alto flujo  
Kateterkit med dubbellumen för akutvård, Förböjd, för högt flöde  
Set met katheter met dubbel lumen voor acute zorg, Hoge flow, voorgebogen  
Kit de cateter de lumen duplo para cuidados intensivos, Pré-curvo de caudal elevado

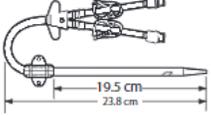

Catheter; 18 G (1,27 mm) x 7 cm Introducer Needle; 0,038" (0,965 mm) x 70 cm J/Straight Stainless Steel Guidewire; 10 Fr/Ch (3,3 mm) Dilator; 14 Fr/Ch (4,7 mm) Dilator; (2) Wound Dressings; Removable Suture Wing; (2) Sealing Caps  
Catheter; Aiguille d'introduction de 18 G (1,27 mm) x 7 cm; Guide en J/droit en acier inoxydable de 0,965 mm (0,038 pol.) x 70 cm; Dilatateur de 10 Fr/Ch (3,3 mm); Dilatateur de 14 Fr/Ch (4,7 mm); (2) pansements; ailettes de suture amovibles; (2) bouchons obturateurs  
Katheter; 18 G (1,27 mm) x 7 cm Einführnadel; 0,965 mm (0,038 Zoll) x 70 cm Edelstahlführungsdraht mit J-förmiger und gerader Spitze; Dilator, 10 Fr/Ch (3,3 mm); Dilator, 14 Fr/Ch (4,7 mm); (2) Verbände; entfernbarer Fixerflügel; (2) Abdeckkappen  
Cateter; Ago introduttore da 18 G (1,27 mm) x 7 cm; Filo guida a J/dritto di acciaio inossidabile da 0,965 mm (0,038 pol.) x 70 cm; Dilatatore 10 Fr/Ch (3,3 mm); Dilatatore 14 Fr/Ch (4,7 mm); (2) medicazioni per incisione; aletta sutura rimovibile; (2) tappi autosigillanti  
Catheter; Ajuja introdutora de 18 G (1,27 mm) x 7 cm; Guia metálica de acero inoxidable recta/en J de 0,965 mm (0,038 pulg.) x 70 cm; Dilatador de 10 Fr/Ch (3,3 mm); Dilatador de 14 Fr/Ch (4,7 mm); (2) vendas para heridas; aleta de sutura separable; (2) tapas de sellado  
Katheter; 18 G (1,27 mm) x 7 cm införingsnål; 0,965 mm (0,038 tum) x 70 cm J-formad/rak ledare i rostfritt stål; 10 Fr/Ch (3,3 mm) dilatator; 14 Fr/Ch (4,7 mm) dilatator; (2) förbands/lossbar suturvinge; (2) tv-proppar  
Katheter; 18 G (1,27 mm) x 7 cm introducerenaald; 0,965 mm (0,038 inch) x 70 cm roestvrijstalen voerdraad met J-vormige/rechte tip; 10 Fr/Ch (3,3 mm) dilatator; 14 Fr/Ch (4,7 mm) dilatator; (2) wondverbanden; verwijderbare hechtvleugel; (2) afsluitdoppen  
Cateter; Ajuha introdutora 18 G (1,27 mm) x 7 cm; Fio-guia em aço inoxidável em "J"/recto com 0,965 mm (0,038 pol.) x 70 cm; Dilatador de 10 Fr/Ch (3,3 mm); Dilatador de 14 Fr/Ch (4,7 mm); (2) pensos; aleta de sutura amovível; (2) tampas vedantes

Numéro du modèle

Numéro du modèle

COVIDIEN™  
**MAHURKAR™**  
Acute Dual Lumen Catheter  
13.5 Fr (Q) (4.5 mm) x 19.5 cm, A-1.6 mL, V-1.7 mL

REF 8888135193  
LOT XXXXXXXXXXXX

MAHURKAR™ is a trademark of Saktharam D. Mahurkar, M.D., used under license. (c) - ml

COVIDIEN™  
**MAHURKAR™**  
Acute Dual Lumen Catheter  
13.5 Fr (Q) (4.5 mm) x 19.5 cm, A-1.6 mL, V-1.7 mL

REF 8888135193  
LOT XXXXXXXXXXXX

MAHURKAR™ is a trademark of Saktharam D. Mahurkar, M.D., used under license. (c) - ml

COVIDIEN™  
**MAHURKAR™**  
Acute Dual Lumen Catheter  
13.5 Fr (Q) (4.5 mm) x 19.5 cm, A-1.6 mL, V-1.7 mL

REF 8888135193  
LOT XXXXXXXXXXXX

MAHURKAR™ is a trademark of Saktharam D. Mahurkar, M.D., used under license. (c) - ml

STERILE EO

Not made with natural rubber latex

Single use

Rx ONLY

Not made with DEHP

Caution, consult accompanying documents

Keep away from sunlight

Do not use if package is opened or damaged.  
Ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert ou endommagé.  
Bei geöffnetem oder beschädigter Produktpackung nicht verwenden.  
Non utilizzare se l'imballaggio dell'unità è aperto o danneggiato.  
No utilizar si la envoltura está abierta o dañada.  
Använd ej produkten om styckförpackningen är öppnad eller skadad.  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of geopend is.  
Nao utilizar se a embalagem que contém a unidade estiver aberta ou danificada.

Non-pyrogenic: Aprotogeno, Apptrogeno, Pyrogenfrei, Niet-pyrogen, Aprotogeno, Aprotogénico

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien logo and Positive Results for Life are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. ® brands are trademarks of their respective owner. MAHURKAR™, Double-D™, and the Double-D design are U.S. registered trademarks of Saktharam D. Mahurkar, used under license. All other brands are trademarks of a Covidien company.

May be covered by U.S. patents: [www.covidien.com/patents](http://www.covidien.com/patents)  
© 2011 Covidien. Made in Costa Rica.  
Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.  
F100102437

SEQ #

LOT XXXXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD

FPO - GTIN/EXP/LOT

(01)10884521006492(17)YYMMDD(10)XXXXXXXXXX

# Medtronic

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

Nom du produit	Modèles	GTIN	Numéros de lot			
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 13,5 cm, Extensions droites, Kit	8888135131	20884521 006208	181290008	181850013		
			3	4	1826200138	2006500068
			181350012	181850013		
			5	5	1826200139	2010800195
			181350012	181850013		
			6	6	1830300127	2011300093
			181350012	182540015		
			7	0	1932300176	2019500161
			181500012	182540015		
			5	1	2001400063	2110900061
			181570009	182540015		
			3	2	2003900121	2110900084
181770016	182540015					
3	3	2005700199	2113300229			
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 16 cm, Extensions droites, Kit	8888135161	20884521 006352			19088002	200800010
			1800300109	1826800111	7	5
					19102000	210260008
			1801000106	1827600097	9	5
					19130001	210420011
			1801600120	1827600098	1	5
					19130001	210690005
			1802300090	1828900079	2	5
					19140002	210690005
			1803700086	1831100166	4	7
					19140002	210690006
			1804500111	1831100172	5	3
					19140002	211090008
			1806500176	1834500175	6	5
					19140002	211090013
			1807300110	1834500185	7	0
					19232000	211330020
			1808500123	1835100094	0	2
		19233000	211330020			
1809200137	1900700154	8	4			
		19234002	211330020			
1810000110	1900700155	5	7			

				19234002	211330020
			1811500137	1901400129	8 9
				19234002	211330021
			1812200145	1901400130	0 1
				19234002	211330021
			1812900084	1901400132	4 2
				19316000	211330021
			1820500155	1902100143	9 5
				19316000	211330023
			1820500157	1903500131	0 1
				19316000	211660008
			1820500159	1904900105	1 2
				19316000	220180006
			1821300101	1908400352	2 8
				19316000	220180007
			1823900099	1908400353	3 5
				20065000	220180008
			1826200140	1908800226	3 5
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 19,5 cm, Extensions droites, Kit	8888135191	20884521 006444	180030011		192820006 210260008
			0	1831100154	0 8
			180160012		192880017 210260008
			1	1831100156	9 9
			180230008		193300007 210340014
			7	1831100157	7 3
			180510008		193300007 210340014
			5	1831100158	8 4
			180580013		193300007 210420011
			8	1831100168	9 6
			180650017		193430014 210420011
			7	1831100173	7 7
			180730011		193430014 210420012
			1	1831100174	8 0
			180790011		193440019 210420012
			1	1902100152	6 2
			180850012		193440019 210420013
			4	1902100153	7 0
			180920013		193440019 210420013
			8	1902800147	8 1

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

			181000011		200070007	210690006
			3	1902800148	7	4
			181020010		200070007	210690011
			9	1902800149	8	7
			181150013		200070009	210690012
			8	1903500132	7	3
			181220013		200390012	210690018
			9	1904900118	0	3
			181350012		200780004	210690019
			4	1905600096	5	8
			181350012		200780009	210690021
			8	1905600097	1	7
			181430016		200780011	210690023
			7	1911600106	7	0
			181430016		200920009	211090006
			8	1911600107	8	0
			181430016		200930009	211090006
			9	1911600108	8	2
			181430017		200930009	211090008
			0	1911600109	9	3
			181500012		200930010	211090010
			1	1914400134	8	0
			181570009		200940012	211090013
			4	1914400135	3	2
			181570009		200940012	211090015
			5	1914800170	4	1
			181630007		201060008	211090015
			9	1916500149	7	2
			181630008		201060008	211090015
			0	1916500150	9	3
			181700010		201080019	211090016
			4	1916500151	2	1
			181700010		201080019	211330021
			5	1916500152	6	0
			181770016		201080019	211330021
			1	1917200301	7	3
			181770016		201130009	211330021
			2	1917200302	5	6

			182340007		201510003	211330021
			9	1917200304	6	8
			182390012		201630004	211330022
			8	1917200311	7	2
			182470011		201670006	211330022
			1	1917200313	8	4
			182470011		201670006	211330023
			4	1919800100	9	2
			182470011		201950017	211330023
			5	1919800101	9	8
			182820008		202340014	211330024
			2	1920500239	2	0
			182820009		202340014	211660011
			9	1920500240	3	3
			182820010		203310006	211660013
			0	1920500241	7	4
			182890008		203500007	211660018
			0	1927500118	1	1
			182890010		203500007	211660018
			8	1927500119	2	3
			182890010		203500007	220180008
			9	1928200057	3	2
			183030012		203500007	220330007
			3	1928200058	4	4
			183100008		210260008	220330008
			4	1928200059	7	6
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 24 cm, Extensions droites, Kit	8888135241	20884521006536	181220014	191440013		
			3	6	2018800039	2106900060
			181500012	192400017		
			2	5	2018800040	2106900067
			181500012	192400017		
			3	7	2018800041	2106900111
			181500012	192400017		
			4	8	2019500158	2110900101
			181630008	192400018		
			1	0	2019500159	2110900160
			181700010	192610028		
			3	9	2019500160	2113300203

# Medtronic

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

			182130010	192610029		
			4	0	2020500069	2113300217
			182130010	192670011		
			6	6	2020500070	2113300225
			182820008	193150011		
			1	4	2020500071	2113300241
			190600012	193160007		
			2	8	2020500073	2119400199
			190600012	193430014		
			3	5	2020500074	2201800072
			190600012	200570019		
			5	7	2023400144	2201800073
			190670016	200570019		
			4	8	2103400145	2201800079
			191020010	200930004		
			7	6	2104200118	2201800081
			191020010	201660005		
			8	6	2104200119	2203300075
			191130021	201800002		
			0	3	2104200121	2203300076
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 13,5 cm, Extensions incurvées, Kit	8888135132	20884521 006215	180790011		192050025	20029001
			3	1835100093	0	6
			180920013	190420011	192050025	20029001
			6	1	1	7
			180920014	190670020	192130004	20065000
			3	9	5	9
			181020011	190770010	192130004	20078000
			0	1	6	3
			181220014	191130021	192130004	20108001
			2	3	7	3
			181900011	191260012	192190018	20108001
			6	0	7	4
			181900011	191260012	192190018	20151000
			7	1	8	7
			181900011	191260012	193300007	20160000
			8	2	6	0
			182050015	191300010	193430014	20167000
			2	1	6	3

			182620009	191300010	200070009	22018000
			4	2	9	2
			183110016	191300010	200290010	
			0	3	5	
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 16 cm, Extensions incurvées, Kit	8888135162	20884521 006376	180450011		19144001	
			2	1822600140	14	2019500163
			180510008		19144001	
			3	1822600141	15	2019500167
			180650017		19199001	
			5	1822600142	23	2019500170
			180850012		19268004	
			1	1823000086	55	2019500183
			181000010		19268004	
			9	1823400075	56	2028300165
			181020011		19268004	
			1	1823900136	57	2113300234
			181220014		19323001	
			4	1908400313	74	2201800059
			181290008		19323001	
			2	1908400314	75	2203300143
			182200012		20084001	
			5	1911300211	15	
			182260013		20159000	
			9	1911300212	59	
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr, 19,5 cm, Extensions incurvées, Kit	8888135192	20884521 006475	181020011	182680011		
			2	0	1924000217	2019500176
			182200007	183030016		
			0	3	2009200099	2035000075
			182390012	190560013		
			6	4	2015100034	2035000076
			182620014	190780014		
			2	9	2016000062	2119400256
			182680010	191260008		
			1	8	2016300043	2201800076
Cathéters d'hémodialyse aiguë haut débit à double lumière Mahurkar™* High Flow Dual Lumen Acute de 13,5 Fr,	8888135242	20884521 006543	180230008	180920014		
			9	1	1907800112	2019500180
			180230009	183110016		
			4	7	1908400342	2019500181

# Medtronic

## Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Tel 01 55 38 17 00

24 cm, Extensions incurvées, Kit			180790011	190560013		
			5	3	2016300045	2113300219

# Medtronic

## FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU CLIENT

Veuillez envoyer ce formulaire par courriel (même si vous n'avez pas d'inventaire concerné) :

[affaires.reglementaires@medtronic.com](mailto:affaires.reglementaires@medtronic.com); avant le 30/01/23

### Information Urgente de Sécurité - Rappel

**FA1295 : fuite du Cathéter Mahurkar Hub Void Inter-lumen**

Coordonnées du client			
Nom de l'entreprise :		Numéro de compte (facultatif) :	
Adresse:		Ville:	Pays:
<ul style="list-style-type: none"><li>Je confirme que j'ai lu et compris l'information urgente de sécurité.</li><li>J'accepte de transmettre l'information urgente de sécurité à tous ceux qui ont besoin d'être au courant au sein de notre organisation ou à toute organisation où les produits potentiellement touchés ont été transférés.</li><li>J'ai examiné notre inventaire, identifié et mis en quarantaine tous les produits touchés inutilisés dans notre inventaire, et je déclare ce qui suit :</li></ul> <input type="checkbox"/> Aucun produit visé ne se trouve dans nos installations. <input type="checkbox"/> Les produits touchés se trouvent dans nos installations. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les produits concernés à retourner à Medtronic.			
Nom (en caractères d'imprimerie) :	Titre du poste:	Date:	Signature :

Veuillez remplir la section ci-dessous uniquement si vous avez affecté le stock:

Détails du retour			
Facture ou bon de livraison (si disponible)	Code de l'article	Lot # / Série #	Quantité (veuillez compter les unités à l'intérieur de la boîte)
<input type="checkbox"/> Si vous avez d'autres produits à retourner, cochez la case. Veuillez créer et envoyer une pièce jointe séparée avec les mêmes données.			<b>Total:</b>
Personne de contact au point de collecte :			
Adresse de ramassage / département (veuillez fournir les détails de l'emplacement. Par exemple : zone de collecte/zone accessible) :			
Ville:		Code postal:	
Numéro de téléphone de prise en charge:		E-mail de ramassage :	
Quand le produit sera-t-il prêt à être ramassé? (Veuillez prévoir 2 jours pour le traitement de votre demande):			
Heures d'ouverture du lieu de prise en charge:		Dimension LxlxH (en cm): ... x ... x ...	
# Palettes:	# Parcels:	Nombre de colis de plus de 45 kg:	

- Le service clientèle vous contactera directement pour organiser le retour des produits concernés et un crédit vous sera accordé pour les produits retournés.
- Veuillez ne pas renvoyer les marchandises avant d'avoir reçu les documents de retour.
- Veuillez emballer les marchandises conformément aux instructions d'emballage qui seront fournies lors de la confirmation et retirer toutes les étiquettes de l'envoi entrant.