

Adresse

Votre signe/message de Notre signeComposez le 0521 807-Fax 0521 807-Date

13.01.2023

Consignes de sécurité importantes pour les laveurs-désinfecteurs Steelco PWD 8626 et Steelco PWD 8628

Mesdames et Messieurs,

Par la présente, nous souhaitons vous informer d'un éventuel problème de sécurité avec le type de produit Steelco PWD 8626 et Steelco PWD 8628 fabriqués par Miele & Cie. KG avec la sélection de cycle intelligente

Selon nos dossiers, des laveuses-désinfecteuses de ce type sont installées dans votre établissement.

Ces unités sont équipées d'une sélection de cycle intelligente qui reconnaît les porteurs de charge et attribue et démarre automatiquement le programme dédié.

Avec cette lettre, nous souhaitons vous informer d'un éventuel problème de sécurité lié à la sélection du cycle intelligent. Nous nous rendons compte que dans de très rares cas individuels, le porte-charge inséré n'a pas été détecté correctement et qu'un cycle non optimal a été sélectionné.

Chaque fois que vous démarrez le programme, même dans le paramètre « reconnaissance automatique de la charge/Allocation automatique des programmes », nous vous recommandons de vérifier sur l'écran de l'appareil si le programme destiné au support de charge utilisé a été lancé. Si un programme inapproprié s'affiche, interrompez le programme et retirez brièvement le support de chargement de la machine du côté du chargement, puis remettez-le dans la machine. Ensuite, veuillez désactiver le paramètre « reconnaissance automatique de la charge/Programme automatique » et utiliser le paramètre « Choix et sélection du programme direct de l'opérateur » (voir mode d'emploi). Vous devez également communiquer directement avec Miele ou Steelco Service afin qu'ils puissent remplacer le composant défectueux.

11- 2 -

Miele & Cie. KGLE la société est une société en commandite ayant son siège social à Gütersloh, Deutsche Bank AG Gütersloh Miel
estraße 2Reg. -Donne. Gütersloh, HRA 3268. BIC : DEUTDE3B480 ; IBAN: DE34 4807 0040 0334 6780 00 33611 BielefeldMiele
Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger.

Gütersloh, HRB 1325, Commerzbank AG Gütersloh Téléphone: 0521 807-0Zinkann Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger.
BIC : COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00 Télécopie : 0521 807-2090Directeurs généraux :

Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl, UniCredit Bank AG Berlin Internet:

www.miele.deDr. Markus Miele, Rebecca Steinhage, Dr. Reinhard Zinkann.

BIC : HYVEDEMM488 ; IBAN: DE41 1002



Cette recommandation peut être ignorée si votre machine est exploitée par « choix et sélection de programme direct de l'opérateur » ou connectée à un système externe de documentation par lots qui vérifie le programme sélectionné avec le programme prévu. Dans ce contexte, dans un souci d'exhaustivité, nous tenons à vous rappeler une fois de plus la nécessité de soumettre également le résultat du retraitement à des contrôles de routine réguliers.

Lors de la prochaine maintenance, même si votre machine n'est pas affectée, le technicien de service remplacera gratuitement ce composant de manière proactive pour vous.

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs du produit ci-dessus dans votre organisation et les autres personnes doivent être informés de cet avis de sécurité. Les autorités compétentes ont été informées de cette lettre.

De plus, nous avons besoin d'une lettre de retour de votre part. Par conséquent, veuillez remplir et signer le formulaire de réponse ci-joint et nous le retourner par e-mail sous forme de PDF numérisé deux semaines après réception.

Votre contact chez Steelco - et aussi le destinataire de votre retour est:

bénéficiaire : M. Regis Alison (Steelco)

Courriel : r.alison@steelcogroup.com

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Nous restons à votre disposition et vous remercions de votre coopération.

Cordialement

Miele & Cie. KG
Agent des affaires réglementaires

Dr Andreas Brömmelhaus