



**HOSPICES CIVILS DE LYON**  
**Direction des Services Numériques**  
61 Boulevard Pinel  
69500 BRON

Bron, le 05 Juin 2023,

Référence avis : 230605-HCL-Avis de sécurité

**IMPORTANT – AVIS DE SECURITE**  
**Pancarte IDE : défaut de conversion de débit PSE**

**A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*Prescripteurs, Pharmaciens, IDE*)**

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module *LAPCMP d'EASILY*. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

***DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)***


Les différentes versions maintenues du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont :  
V6.1.23, V6.1.24, V7.0.0, V7.0.1, V8.0.

## NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement au niveau de la pancarte IDE.  
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'erreur médicamenteuse**.

Lors de l'administration de PSE :

- Dont le débit prescrit est exprimé en « /24h » (ex : 25mg/24h),
- Lorsque l'IDE trace l'administration du PSE en choisissant l'unité de volume « mL/h »,
  - L'infobulle affichée au survol de la souris sur la barre de progression du PSE indique un débit d'administration faux (le débit en « mL/h » est divisé par 24, le débit en « mL/24h » est divisé par 24),

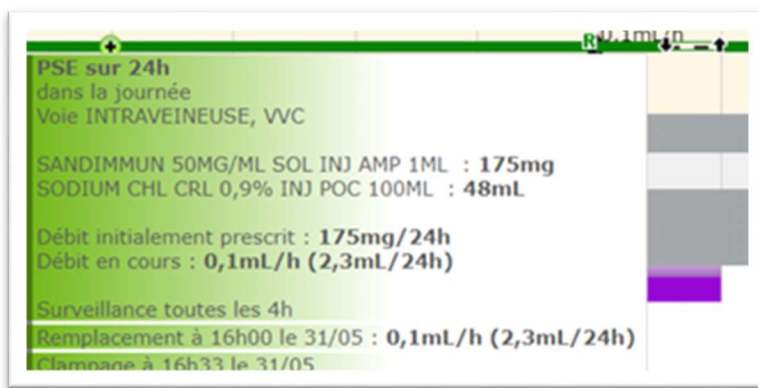

- La longueur de la barre de progression du PSE (qui indique la durée d'administration) est multipliée par 24, ce qui décale l'occurrence de renouvellement du PSE d'autant de temps.



*NB : le débit proposé au niveau de la fenêtre d'administration est juste.*

## ***ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION***

### ***Conduite à tenir pour les IDE***

Dans l'attente de la livraison d'un correctif, la plus grande vigilance est recommandée lors de l'administration des PSE. Il est recommandé de consulter systématiquement la prescription médicale.

## ***ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE***

Un correctif a été développé.

Au moment où nous adressons cet avis de sécurité, ce correctif est en cours de recette.

La mise à disposition est envisagée semaine 23 (semaine du 05/06 au 09/06/2023) pour les utilisateurs disposant des versions concernées.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC  
Directeur des Services Numériques