



FSN Référence Linde France : CIM 03804026 FSN

26 mai 2023

Avis de sécurité : Information aux utilisateurs

Système de distribution de gaz médicaux Linde France utilisés en association avec des unités médicales de secours

A l'attention des Directeur des établissements de santé utilisant un systèmes de distribution de gaz médicaux installés par Linde France associé à une ou plusieurs Unités Médicales de Secours installées par Linde France servant de sources de secours locales en vue de sécuriser l'approvisionnement en gaz médicaux des zones à approvisionnement critique et à forte dépendance accueillant des patients hautement dépendants.

Objet : rappel des limites du domaine de couverture des Unités Médicales de Secours

Madame, Monsieur,

L'arrêté du 7 janvier 1993 (JO du 15 janvier 1993) et l'arrêté du 3 octobre 1995 (JO du 13 octobre 1995) imposent la mise en œuvre de systèmes techniques ou de procédures permettant de poursuivre les soins en cours dans les zones de soins critiques en cas de défaillance d'alimentation normale en gaz à usage médical.

Les Unités Médicales de Secours installées par Linde France sur les réseaux de distribution de fluide médicaux à proximité immédiate de ces zones de soins critiques sont conçues selon le fascicule de documentation Afnor FD S 90-155 4 « *Systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide — Compléments pour la conception et la réception* ».

Elles ont pour fonction de fournir des sources locales d'alimentation en gaz médicaux permettant d'assurer la continuité d'alimentation en fluides médicaux pour les patients hautement dépendants en cas d'évènement catastrophique affectant le réseau de distribution de fluides médicaux.

Ces Unités Médicales de Secours permettent d'assurer de façon automatique la continuité d'alimentation en Oxygène médicinal, en Air médicinal 4.5 bar et en Vide médical en cas de défaut d'alimentation par les réseaux et sources approvisionnant normalement les zones critiques.

Bien que sans conséquence pour le patient, l'analyse d'un incident récent, nous conduit à rappeler que **ces Unités Médicales de Secours ne sont pas conçues pour assurer la continuité d'alimentation en**



FSN Référence Linde France : CIM 03804026 FSN

« Air moteur pour instruments chirurgicaux » (8 bar); en Air pour prise Segal; en vide pour prise Segal; en Protoxyde d'azote Médicinal ou en Dioxyde de carbone médical.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de mis en place de systèmes techniques ou de procédures spécifiques dès lors, qu'en fonction des actes pratiqués et des équipements mis en œuvre, vous auriez identifié la nécessité de maintenir une continuité d'approvisionnement pour toute ou partie de ces fluides médicaux non secourus par les Unités Médicales de Secours en vue de permettre la poursuite jusqu'à leur terme des soins en cours dans les zones de soins critiques en cas de défaillance d'alimentation normale en gaz à usage médical.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance pour la recherche de solutions techniques adaptées à votre activité, vous pouvez contacter votre correspondant habituel par téléphone au 0 810 421 000, par courrier adressé à Linde France S.A., Les Jardins du Lou – bâtiment 5, 70 avenue Tony Garnier - CS 70021, 69304 Lyon Cedex 07, France ou par mail adressé à serviceclient.fr@linde.com.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Abdon Planes
Pharmacien Responsable / PRRC
Directeur QRA Linde France S.A.

Cet avis de sécurité a fait l'objet d'une diffusion direct à l'attention des utilisateurs de systèmes de distribution de gaz médicaux installés par Linde France associés à une ou plusieurs Unités Médicales de Secours installées par Linde France.

Cet avis de sécurité a été transmis aux autorités réglementaires compétentes.