

Avis relatif à la sécurité

Module IndiGo pour lits Arjo Enterprise 5000x, Enterprise 8000X, Enterprise 9000X, Citadel

Date:	23/08/2023
Problématique :	Mouvement involontaire de la roue motorisée (module Indigo)
Produits concernés :	Arjo lits médicalisés Enterprise 5000x, Enterprise 8000X, Enterprise 9000X, Citadel équipés d'un module IndiGo (voir Annexe 1)
Période de fabrication :	Mai 2018 à Février 2023
Référence Action :	FSN-POZ-001-2023
Pages :	3 + Formulaire de réponse
N° d'enregistrement du fabricant :	SE-MF-000000696



Cher Client,

Nos dossiers indiquent que vous êtes en possession d'un ou plusieurs lits médicalisés Arjo équipés d'un module IndiGo (numéro de série repris dans le tableau ci-après).

Arjo diffuse cet avis relatif à la sécurité afin de vous informer d'un risque pouvant survenir lors de l'utilisation.

Veillez noter que les lits non équipés d'un module IndiGo, ne sont pas concernés par cet avis.

Description de la problématique

Suite à des remontées Clients et investigations menées en interne, Arjo confirme que certains lits médicalisés équipés d'un module IndiGo peuvent présenter un dysfonctionnement entraînant un mouvement involontaire des roues du lit.

Les investigations ont révélé que la cause du problème est multifactorielle, mais que le principal facteur est un problème au niveau de la carte électronique du module.

Une solution technique est en cours de développement et sera disponible fin 2023, les Clients seront recontactés lors de sa disponibilité.

Avant le déploiement de la solution technique, Arjo souhaite vous informer du risque identifié et vous rappeler le contenu du mode d'emploi du module IndiGo fourni avec le produit.

Tant que le mode d'emploi est respecté, les conséquences sur la santé sont atténuées.

Risque Clinique :

Arjo confirme que cette situation n'a jamais entraîné de blessure grave ou d'autres conséquences pour la santé (que ce soit pour le patient ou le soignant). La probabilité d'apparition d'un accident entraînant de conséquences cliniques est faible.

Les lits médicalisés équipés d'un module IndiGo peuvent continuer à être utilisés, à condition que les facteurs d'atténuation des risques suivants soient respectés.

Facteurs d'atténuation des risques :

Pour minimiser le risque de conséquences pour la santé, utilisez le produit en suivant le mode d'emploi IndiGo, en particulier les points suivants :

- Le contact avec le lit doit être maintenu en permanence :

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'IndiGo, maintenir en permanence le contact avec le lit.

- Désactiver le module IndiGo et enclencher les freins en plaçant la pédale en position la plus basse :

APRÈS UTILISATION DU SYSTÈME IndiGo

1. Désactiver *IndiGo* et enclencher les freins en mettant la pédale en position la plus basse. **Voir fig. 17**
2. Charger *IndiGo* en branchant le cordon d'alimentation du lit à la prise murale après chaque utilisation.



Se reporter à la rubrique Activation/désactivation du système *IndiGo* et freins.

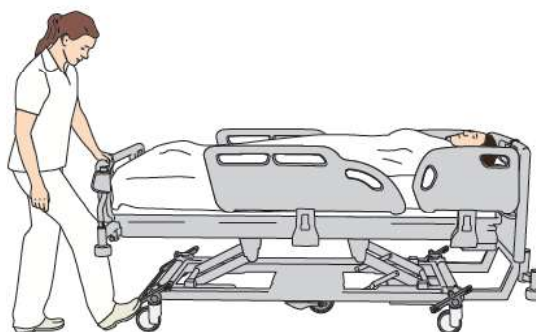


Fig. 17

- Si le mouvement involontaire des roues du lit survient, rappelez-vous que chaque module IndiGo comprend un interrupteur d'arrêt d'urgence qui peut être activé pour arrêter le mouvement du lit à tout moment. L'interrupteur est situé à la fois à la tête et au pied du lit. Lorsque l'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé, un frein électrique s'enclenche pour freiner l'élan et ralentir le lit jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Emplacements de l'interrupteur d'arrêt d'urgence

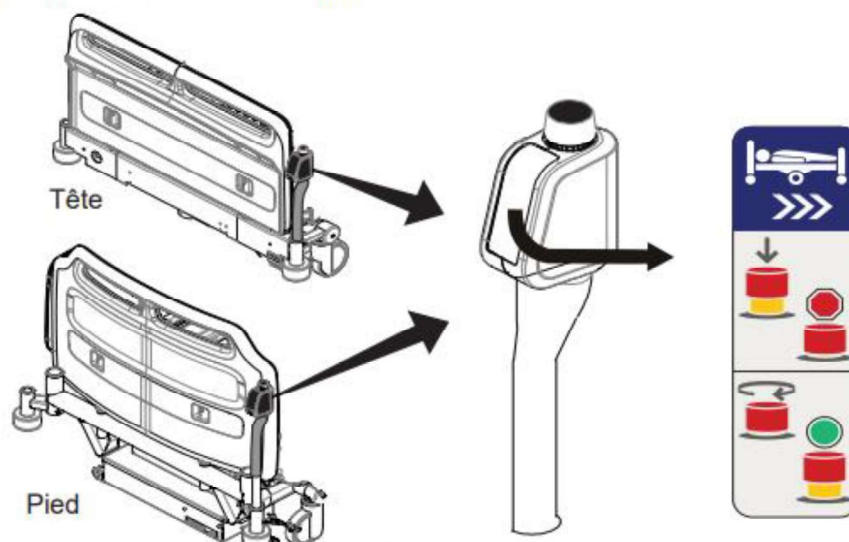


Fig. 4

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au mode d'emploi.

Prochaines étapes

1. S'assurer que tout le personnel soignant et les brancardiers soient informés de cet avis relatif à la sécurité.
2. Utiliser le lit en suivant toujours le mode d'emploi.
3. Remplir et signer le formulaire de réponse client, ci joint, le retourner au Service Qualité d'Arjo France (coordonnées en bas du formulaire de réponse).
4. Contacter votre contact Arjo habituel, en cas de dysfonctionnement du produit.

Nous regrettons tout inconvénient que ce problème peut causer, mais nous apprécions grandement votre compréhension à l'égard des mesures correctives que nous prenons.

Arjo recontactera les Clients concernés lorsque la solution sera disponible et nos équipes interviendront gratuitement afin de corriger les produits Clients.

Commentaires

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, veuillez contacter le Service Qualité d'Arjo par courriel, à l'adresse Qualite.France@arjo.com

Annexe 1

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0520042	0505609736049220181126P0520042	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0579614	0505609734553620191204P0579614	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0579615	0505609734553620191204P0579615	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0579616	0505609734553620191204P0579616	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0579617	0505609734553620191204P0579617	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0579618	0505609734553620191204P0579618	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0591760	0505609734555020200228P0591760	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0593197	0505609734555020200309P0593197	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611514	0505609734553620200625P0611514	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611515	0505609734553620200625P0611515	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611516	0505609734553620200625P0611516	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611517	0505609734553620200625P0611517	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611518	0505609734553620200625P0611518	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611519	0505609734553620200625P0611519	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611520	0505609734553620200625P0611520	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611521	0505609734553620200625P0611521	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611522	0505609734553620200625P0611522	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0611523	0505609734553620200625P0611523	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0622335	0505609735011020200908P0622335	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0622513	0505609734553620200909P0622513	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0622514	0505609734553620200909P0622514	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0643751	0505609735011020210122P0643751	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643752	0505609735011020210122P0643752	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643753	0505609735011020210122P0643753	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643754	0505609735011020210122P0643754	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643755	0505609735011020210122P0643755	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643756	0505609735011020210122P0643756	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643757	0505609735011020210122P0643757	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643758	0505609735011020210122P0643758	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643759	0505609735011020210122P0643759	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643760	0505609735011020210122P0643760	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643761	0505609735011020210122P0643761	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643762	0505609735011020210122P0643762	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643763	0505609735011020210122P0643763	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643764	0505609735011020210122P0643764	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0643765	0505609735011020210122P0643765	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0710742	0505944120677420220215P0710742	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710743	0505944120677420220215P0710743	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710744	0505944120677420220215P0710744	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710745	0505944120677420220215P0710745	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710746	0505944120677420220215P0710746	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0704884	0505609735011020220120P0704884	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0704885	0505609735011020220120P0704885	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0746836	0505609734553620220906P0746836	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496803	0505609734553620180619P0496803	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496804	0505609734553620180619P0496804	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496805	0505609734553620180619P0496805	INDIGO RETROFIT- FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0496806	0505609734555020180619P0496806	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496807	0505609734555020180619P0496807	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496808	0505609735011020180619P0496808	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0496809	0505609735011020180619P0496809	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0496819	0505609734553620180619P0496819	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496820	0505609734553620180619P0496820	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496821	0505609734553620180619P0496821	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496822	0505609734555020180619P0496822	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496823	0505609734555020180619P0496823	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0710747	0505944120677420220215P0710747	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710748	0505944120677420220215P0710748	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0710749	0505944120677420220215P0710749	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0496827	0505609734553620180619P0496827	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496828	0505609734553620180619P0496828	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496830	0505609734555020180619P0496830	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0496831	0505609734555020180619P0496831	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0554234	0505598279572220190628P0554234	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0554235	0505598279572220190628P0554235	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0497112	0505609734553620180621P0497112	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497113	0505609734553620180621P0497113	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497115	0505609734555020180621P0497115	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497116	0505609734555020180621P0497116	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497117	0505609734555020180621P0497117	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497118	0505609734555020180621P0497118	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497120	0505609735011020180621P0497120	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0554236	0505598279572220190628P0554236	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0554237	0505598279572220190628P0554237	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0554238	0505598279572220190628P0554238	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0554239	0505598279572220190628P0554239	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630067	0505598279572220201021P0630067	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0565645	0505634169812820190911P0565645	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565646	0505634169812820190911P0565646	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565647	0505634169812820190911P0565647	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565648	0505634169812820190911P0565648	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565649	0505634169812820190911P0565649	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565650	0505634169812820190911P0565650	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565651	0505634169812820190911P0565651	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565652	0505634169812820190911P0565652	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0565653	0505634169812820190911P0565653	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0577664	0505944100141620191120P0577664	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577665	0505944100141620191120P0577665	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577666	0505944100141620191120P0577666	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577667	0505944100141620191120P0577667	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577668	0505944100141620191120P0577668	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577669	0505944100141620191120P0577669	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577670	0505944100141620191120P0577670	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577671	0505944100141620191120P0577671	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0574757	0505944100066220191030P0574757	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0524016	0505609736049220181214P0524016	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0622636	0505944113470120200910P0622636	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622637	0505944113470120200910P0622637	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622638	0505944113470120200910P0622638	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622639	0505944113470120200910P0622639	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622848	0505944113470120200911P0622848	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622849	0505944113470120200911P0622849	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622850	0505944113470120200911P0622850	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622851	0505944113470120200911P0622851	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622852	0505944113470120200911P0622852	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622853	0505944113470120200911P0622853	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622854	0505944113470120200911P0622854	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622855	0505944113470120200911P0622855	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622856	0505944113470120200911P0622856	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0622857	0505944113470120200911P0622857	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623099	0505944113470120200914P0623099	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623100	0505944113470120200914P0623100	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623101	0505944113470120200914P0623101	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623102	0505944113470120200914P0623102	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623103	0505944113470120200914P0623103	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623104	0505944113470120200914P0623104	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623105	0505944113470120200914P0623105	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623106	0505944113470120200914P0623106	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623107	0505944113470120200914P0623107	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0623108	0505944113470120200914P0623108	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0661613	0505944117482020210429P0661613	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0742045	0505944122044220220810P0742045	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0672627	0505609734555020210721P0672627	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0672628	0505609734555020210721P0672628	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0577776	0505944102084420191121P0577776	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0672629	0505609734555020210721P0672629	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0672630	0505609734555020210721P0672630	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0672631	0505609734555020210721P0672631	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0516744	0505609735779920181106P0516744	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677671	0505609735779920210819P0677671	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677672	0505609735779920210819P0677672	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677673	0505609735779920210819P0677673	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630288	0505944113976820201022P0630288	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630454	0505944113976820201023P0630454	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0561661	0505634167680520190819P0561661	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0591761	0505609734555020200228P0591761	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0561662	0505634167680520190819P0561662	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0631702	0505944114172320201028P0631702	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0631703	0505944114172320201028P0631703	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0631704	0505944114172320201028P0631704	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0640704	0505944114172320210108P0640704	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0640705	0505944114172320210108P0640705	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0640706	0505944114172320210108P0640706	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0640707	0505944114172320210108P0640707	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0647056	0505944114172320210209P0647056	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653208	0505944114172320210315P0653208	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653209	0505944114172320210315P0653209	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653210	0505944114172320210315P0653210	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653211	0505944114172320210315P0653211	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653212	0505944114172320210315P0653212	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653213	0505944114172320210315P0653213	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653214	0505944114172320210315P0653214	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0610589	0505944102112420200619P0610589	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0610590	0505944102112420200619P0610590	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0653215	0505944114172320210315P0653215	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653216	0505944114172320210315P0653216	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653217	0505944114172320210315P0653217	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653218	0505944114172320210315P0653218	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653219	0505944114172320210315P0653219	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653220	0505944114172320210315P0653220	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653221	0505944114172320210315P0653221	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653222	0505944114172320210315P0653222	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653223	0505944114172320210315P0653223	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653224	0505944114172320210315P0653224	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653225	0505944114172320210315P0653225	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653226	0505944114172320210315P0653226	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653443	0505944114172320210316P0653443	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653444	0505944114172320210316P0653444	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653445	0505944114172320210316P0653445	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653446	0505944114172320210316P0653446	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653447	0505944114172320210316P0653447	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653448	0505944114172320210316P0653448	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653449	0505944114172320210316P0653449	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653450	0505944114172320210316P0653450	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653451	0505944114172320210316P0653451	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653452	0505944114172320210316P0653452	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653453	0505944114172320210316P0653453	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0661966	0505944114172320210504P0661966	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0682733	0505609735803120210916P0682733	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0682734	0505609735803120210916P0682734	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0682735	0505609735803120210916P0682735	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0682736	0505609735803120210916P0682736	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0682737	0505609735803120210916P0682737	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693241	0505609735803120211109P0693241	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630068	0505598279572220201021P0630068	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693242	0505609735803120211109P0693242	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630289	0505944113976820201022P0630289	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630290	0505944113976820201022P0630290	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630291	0505944113976820201022P0630291	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630292	0505944113976820201022P0630292	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630450	0505944113976820201023P0630450	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0630451	0505944113976820201023P0630451	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630452	0505944113976820201023P0630452	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630453	0505944113976820201023P0630453	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693243	0505609735803120211109P0693243	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630455	0505944113976820201023P0630455	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630456	0505944113976820201023P0630456	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630457	0505944113976820201023P0630457	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630458	0505944113976820201023P0630458	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630459	0505944113976820201023P0630459	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630460	0505944113976820201023P0630460	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630461	0505944113976820201023P0630461	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630462	0505944113976820201023P0630462	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630463	0505944113976820201023P0630463	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0630464	0505944113976820201023P0630464	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693244	0505609735803120211109P0693244	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693245	0505609735803120211109P0693245	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693246	0505609735803120211109P0693246	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632426	0505944113976820201102P0632426	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632427	0505944113976820201102P0632427	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632428	0505944113976820201102P0632428	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632429	0505944113976820201102P0632429	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632430	0505944113976820201102P0632430	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632431	0505944113976820201102P0632431	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632432	0505944113976820201102P0632432	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632433	0505944113976820201102P0632433	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632434	0505944113976820201102P0632434	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0632435	0505944113976820201102P0632435	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636988	0505944113976820201201P0636988	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636989	0505944113976820201201P0636989	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636990	0505944113976820201201P0636990	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636991	0505944113976820201201P0636991	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636992	0505944113976820201201P0636992	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636993	0505944113976820201201P0636993	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636994	0505944113976820201201P0636994	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636995	0505944113976820201201P0636995	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636996	0505944113976820201201P0636996	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0636997	0505944113976820201201P0636997	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0637926	0505944113976820201207P0637926	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0637927	0505944113976820201207P0637927	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0637928	0505944113976820201207P0637928	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0637929	0505944113976820201207P0637929	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0637930	0505944113976820201207P0637930	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0638563	0505944113976820201209P0638563	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0638564	0505944113976820201209P0638564	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0638565	0505944113976820201209P0638565	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0638566	0505944113976820201209P0638566	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0638567	0505944113976820201209P0638567	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0693247	0505609735803120211109P0693247	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0742044	0505944122044220220810P0742044	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0742040	0505944122044220220810P0742040	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0742041	0505944122044220220810P0742041	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0647055	0505944114172320210209P0647055	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0742042	0505944122044220220810P0742042	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0742043	0505944122044220220810P0742043	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745865	0505944130684920220901P0745865	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745866	0505944130684920220901P0745866	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745867	0505944130684920220901P0745867	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745868	0505944130684920220901P0745868	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745869	0505944130684920220901P0745869	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745870	0505944130684920220901P0745870	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0745871	0505944130684920220901P0745871	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0736130	0505609734891920220628P0736130	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0736131	0505609734891920220628P0736131	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735414	0505609734891920220624P0735414	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735415	0505609734891920220624P0735415	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735416	0505609734891920220624P0735416	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735417	0505609734891920220624P0735417	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0736128	0505609734891920220628P0736128	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0736129	0505609734891920220628P0736129	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0736132	0505609734891920220628P0736132	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735739	0505609734891920220627P0735739	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735740	0505944121904020220627P0735740	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0653227	0505944115029920210315P0653227	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0735741	0505944121904020220627P0735741	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735742	0505944121904020220627P0735742	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735743	0505944121904020220627P0735743	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0735744	0505609734883420220627P0735744	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0516745	0505609735803120181106P0516745	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0516746	0505609735803120181106P0516746	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0517070	0505609735803120181106P0517070	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0517071	0505609735803120181106P0517071	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0517072	0505609735803120181106P0517072	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521182	0505609735803120181129P0521182	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521183	0505609735803120181129P0521183	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521184	0505609735803120181129P0521184	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521185	0505609735803120181129P0521185	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521186	0505609735803120181129P0521186	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521187	0505609735803120181129P0521187	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521188	0505609735803120181129P0521188	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521189	0505609735803120181129P0521189	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521190	0505609735803120181129P0521190	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521191	0505609735803120181129P0521191	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521192	0505609735803120181129P0521192	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521193	0505609735803120181129P0521193	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521194	0505609735803120181129P0521194	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521195	0505609735803120181129P0521195	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0521196	0505609735803120181129P0521196	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521197	0505609735803120181129P0521197	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0521198	0505609735803120181129P0521198	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0577778	0505944102112420191121P0577778	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0577779	0505944102112420191121P0577779	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0577780	0505944102112420191121P0577780	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0577781	0505944102112420191121P0577781	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603778	0505944102112420200514P0603778	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603779	0505944102112420200514P0603779	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603780	0505944102112420200514P0603780	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603781	0505944102112420200514P0603781	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603782	0505944102112420200514P0603782	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0603783	0505944102112420200514P0603783	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604165	0505944102112420200515P0604165	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604166	0505944102112420200515P0604166	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604167	0505944102112420200515P0604167	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604168	0505944102112420200515P0604168	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604169	0505944102112420200515P0604169	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604170	0505944102112420200515P0604170	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604171	0505944102112420200515P0604171	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604172	0505944102112420200515P0604172	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604173	0505944102112420200515P0604173	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0604174	0505944102112420200515P0604174	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0677990	0505944118552920210820P0677990	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677991	0505944118552920210820P0677991	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677992	0505944118552920210820P0677992	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677993	0505944118552920210820P0677993	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677994	0505944118552920210820P0677994	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0677995	0505944118552920210820P0677995	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0678175	0505944118552920210823P0678175	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0678176	0505944118552920210823P0678176	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0579798	0505944102127820191204P0579798	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0579799	0505944102127820191204P0579799	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0579800	0505944102127820191204P0579800	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0579801	0505944102127820191204P0579801	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0579802	0505944102127820191204P0579802	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0611720	0505944102127820200626P0611720	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0611721	0505944102127820200626P0611721	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0611722	0505944102127820200626P0611722	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0611723	0505944102127820200626P0611723	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0611724	0505944102127820200626P0611724	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0695590	0505944102127820211123P0695590	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0695591	0505944102127820211123P0695591	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0695592	0505944102127820211123P0695592	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0697773	0505944120370420211202P0697773	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0723439	0505944120370420220411P0723439	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0723440	0505944120370420220411P0723440	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0733663	0505609734891920220614P0733663	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE

Serial Number	UDI Number	Brand Name
P0763604	0505944130691720221209P0763604	ENTERPRISE 8000X WITH INDIGO
P0763605	0505944130691720221209P0763605	ENTERPRISE 8000X WITH INDIGO
P0763606	0505944130691720221209P0763606	ENTERPRISE 8000X WITH INDIGO
P0577775	0505944102084420191121P0577775	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0583890	0505944100066220200107P0583890	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0740121	0505634160164720220802P0740121	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0740122	0505634160164720220802P0740122	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0546041	0505609737032320190507P0546041	ENTERPRISE 8000X WITH INDIGO
P0496824	0505609735011020180619P0496824	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0774184	0505944130769320230208P0774184	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0691617	0505944120148920211029P0691617	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691618	0505944120148920211029P0691618	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691619	0505944120148920211029P0691619	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691620	0505944120148920211029P0691620	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691621	0505944120148920211029P0691621	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691622	0505944120148920211029P0691622	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691623	0505944120148920211029P0691623	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691624	0505944120148920211029P0691624	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691625	0505944120148920211029P0691625	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0691626	0505944120148920211029P0691626	ENTERPRISE 5000X INDIGO FRANCE
P0746927	0505944114172320220906P0746927	CITADEL WITH INDIGO - FRANCE
P0496832	0505609735011020180619P0496832	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0496833	0505609735011020180619P0496833	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0496826	0505609734553620180619P0496826	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0774181	0505944130954320230208P0774181	ENTERPRISE BED 9000X INDIGO
P0496825	0505609735011020180619P0496825	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0496829	0505609734555020180619P0496829	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497114	0505609734553620180621P0497114	INDIGO RETROFIT- FRANCE
P0497119	0505609735011020180621P0497119	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0497121	0505609735011020180621P0497121	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT
P0497122	0505609735011020180621P0497122	INDIGO RETROFIT- FRANCE CIT