

Direction des Opérations réglementaires et Pharmaceutiques

Service Vigilance Qualite Produits

Email: Vigilance\_qualite.fr@bbraun.com

Tel: 01.41.10.53.00 - touche 3

**Etablissement**

A l'attention du Resp. Matéiovigilance/Resp. Bloc  
Rue  
CP- Ville

Saint-Cloud, le 23 novembre 2023

**INFORMATION DE SECURITE  
COMBITRANS® MONITORING-SET**

Madame, Monsieur,

A la demande du fabricant B. Braun Melsungen AG, nous vous faisons parvenir cette information de sécurité concernant les produits listés ci-dessous :

Nom du produit	Référence	Lots concernés
COMBITRANS MONITORING-SET ARTERIELLE	5202620	Tous les lots

D'après notre état de traçabilité, votre établissement est concerné par cette note de sécurité.

Les kits de surveillance Combitrans® sont des systèmes de surveillance invasifs stériles à un usage unique destinés à mesurer la pression artérielle physiologique et à effectuer des prélèvements sanguins.

Un contact prolongé avec des solvants organiques (type désinfectant en aérosol) peut engendrer la formation de fissures sur les raccords de tubulures et les robinets multidirectionnels Discofix.

**Nous vous informons que les kits de surveillance Combitrans® comprendront désormais un avertissement séparé concernant les robinets multidirectionnels Discofix.**

**Risque pour le patient :**

Dans des cas extrêmement rares, des fissures peuvent entraîner des fuites et donc un risque de modification de transmission du signal de pression. De plus, un risque d'embolie gazeuse lié à une entrée d'air ne peut être exclu.

Les risques liés à d'éventuelles fuites sont connus et sont déjà listés dans les instructions d'utilisation (IFU) actuelles :

*"Risques : les complications éventuelles sont une infection, une embolie due à des bulles d'air ou des caillots de sang, une sur-perfusion ou une fuite. Un raccord non étanche favorise une entrée de l'air dans le système, et entraîne une lecture de pression basse et incorrecte. (...) De plus, des bulles d'air peuvent avoir une influence négative sur la lecture de pression. Les bulles d'air doivent être soigneusement éliminées du réservoir de purge et des conduites vers le patient, pour éviter toute entrée d'air dans le capteur de pression. "*

**Mesures mises en place par B. BRAUN Melsungen AG :**

Afin de réduire davantage le risque de fissuration, les instructions d'utilisation (IFU) contiendront désormais une note d'avertissement complémentaire mentionnant :

"Les robinets multidirectionnels et les raccords peuvent avoir tendance à se fissurer lorsqu'ils sont en contact avec des désinfectants à base d'alcool. Ces fissures peuvent entraîner des fuites ou des entrées d'air. Nous recommandons de contrôler l'ensemble de la ligne pour détecter ces risques."

En raison d'une exigence du fabricant de robinets multidirectionnels Discofix, les produits mentionnés ci-dessus comprendront désormais une note d'avertissement complémentaire séparée (cf annexe 1).

**Nous vous recommandons d'appliquer les mesures suivantes jusqu'à ce que les nouvelles instructions d'utilisation soient disponibles :**

- Si les kits de surveillance Combitrans® font l'objet de désinfection, veuillez surveiller avec attention l'éventuelle formation de fissures des raccords de tubulures et des robinets multidirectionnels.
- Si vous détectez une fissure et/ou une fuite, veuillez changer la totalité du kit de surveillance Combitrans®
- Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'utilisation correcte du produit, veuillez contacter le responsable d'application B. Braun de votre région, qui vous fournira les informations dont vous avez besoin.

**Nous vous demandons :**

- D'accuser réception dès la prise de connaissance de ce document en nous retournant **l'annexe 2 (A.R)**.
- D'informer les personnes utilisatrices ainsi que les personnes à qui vous auriez distribué le(s) produit(s) de cette information de sécurité.

L'ANSM a été informée de cette information de sécurité.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre directement contact avec le Service Vigilance Qualité Produits de B. Braun Médical France au 01-41-10-53-00 touche 3 ou par email à [vigilance\\_rappel.fr@bbraun.com](mailto:vigilance_rappel.fr@bbraun.com).

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

**Manuelle SCHNEIDER-PONSOT**

Directeur des Opérations Réglementaires et Pharmaceutiques  
Pharmacien responsable  
Correspondant de Matéiovigilance



**ANNEXE 2**

EXPEDITEUR :

Nom de l'établissement :

Code Client :

CP/ Ville :

DESTINATAIRE :

**B. Braun Medical SAS**

**DIRECTION DES OPERATIONS**

**REGLEMENTAIRES & PHARMACEUTIQUES**

26, Rue Armengaud

F – 92210 Saint-Cloud

Tel – N° 01-41-10-53-00 touche 3

**- ACCUSE RECEPTION -**

**INFORMATION DE SECURITE  
COMBITRANS® MONITORING-SET**

**Confirmation de courrier à retourner au Service Vigilance Qualité Produits :**

**fax : 01-70-83-45-06**

**email : [vigilance\\_rappel.fr@bbraun.com](mailto:vigilance_rappel.fr@bbraun.com)**

**Nous avons pris note de l'information de sécurité des dispositifs listés ci-dessous**

<b>Nom du produit</b>	<b>Référence</b>	<b>Lots concernés</b>
COMBITRANS MONITORING-SET ARTERIELLE	5202620	Tous les lots

*Les utilisateurs / services ont été informés des mesures à mettre en place.*

**Date :**

**Nom/Fonction :**

**Signature :**