

«Code\_client» - «Nom Client»  
«Adresse»  
«Code postal » «Ville»

Fondettes, le 29/11/2023  
Référence : 2023\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss

**Objet : INFORMATION SECURITE IMPORTANTE concernant les déambulateurs Invacare Dolomite Gloss fabriqués entre février 2020 et octobre 2022.**

Madame, Monsieur, Cher Client,

Nous avons identifié qu'une quantité limitée de déambulateurs Invacare Dolomite Gloss ne se comporte pas comme prévu lorsqu'ils sont soumis à des chocs importants ou lorsqu'ils sont utilisés de manière intensive.

Le déambulateur Gloss a été testé et est conforme aux tests de fatigue et de charge statique selon la norme ISO 11199-2. Cependant, il a été constaté que la durabilité de son siège est affectée, avec un éventuel effet négatif sur sa résistance. Les œillets plastiques du mécanisme de pliage peuvent casser de façon prématurée lors de l'utilisation et peuvent engendrer la chute de l'utilisateur.

Par conséquent, Invacare a décidé, à titre préventif, de remplacer le croisillon des déambulateurs Invacare Dolomite Gloss concernés sur le terrain par un nouveau croisillon amélioré et plus résistant, afin de garantir leur utilisation en toute sécurité.

**Afin de mettre en conformité ces déambulateurs Invacare Dolomite Gloss, nous vous demandons de diffuser cette information à l'ensemble des personnes concernées au sein de votre organisation, puis de remplacer le croisillon.**

Nous vous envoyons avec ce courrier, les numéros de séries des déambulateurs qui vous concernent ainsi que les annexes I et II. Tous les déambulateurs Invacare Dolomite Gloss sur le marché sont concernés par cette information de sécurité importante, ils ont donc été **fabriqués entre février 2020 et octobre 2022** et la plage de numéros de série est comprise entre 20BHL0002 à 22J02000316.

Par ailleurs, conformément à la législation, l'Autorité Compétente ANSM, est informée de cette Information Sécurité.

Pour assurer la traçabilité et le bon déroulement de ces actions, nous vous demandons de :

- Confirmer à l'aide de l'**ANNEXE I** avoir reçu et diffusé au sein de votre organisation cette information sécurité. A réception de l'**ANNEXE I** nous vous enverrons le ou les kit(s) nécessaire(s).
- Vérifier les déambulateurs indiqués dans l'**ANNEXE I** et cesser leur utilisation en planifiant l'échange du croisillon.
- Réaliser le changement du croisillon grâce au kit de remplacement fourni par Invacare. Une fiche d'instruction est fournie pour le montage. Si vous ne pouvez pas réaliser cette opération pour des raisons techniques, vous pouvez nous retourner votre déambulateur.
- Confirmer le changement du croisillon, en nous retournant l'**ANNEXE II** de confirmation, et en précisant les numéros de série des déambulateurs sur lesquels vous avez remplacé les croisillons. Il est important de nous confirmer vos actions correctives au fur et à mesure afin de communiquer leur clôture auprès de l'ANSM.

Nous comprenons le désagrément occasionné par cette information, le but de notre action est d'assurer une utilisation des produits dans les meilleures conditions de sécurité et dans le respect des exigences réglementaires.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, nos sincères salutations.

Lahoussine Abelque  
Responsable Qualité

### ANNEXE I : CONFIRMATION RECEPTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION SECURITE

Ce formulaire a pour objet de confirmer que les actions correctives, demandées par l'information sécurité référencée 2023\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss concernant les déambulateurs Invacare **Dolomite Gloss**, datée du 22.11.2023, ont été communiquées au sein de votre organisation, que les actions correctives sont en cours de réalisation et que vous planifiez de remplacer les croisillons sur les produits dont les numéros de série sont référencés dans ce formulaire.

| INFORMATION SECURITE                         |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence                                    | 2023_FSCA_Invacare Dolomite Gloss |
| Date                                         | 22 novembre 2023                  |
| Nom Produit                                  | Invacare Dolomite Gloss           |
| Modèle / code commercial                     |                                   |
| Numéros de série des déambulateurs concernés |                                   |
| Code Client                                  |                                   |
| Nom Client                                   |                                   |
| Email de communication                       |                                   |

| CONFIRMATION RECEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> <b>Je vous confirme avoir pris note de l'information sécurité référencée n°2023_FSCA_Invacare Dolomite Gloss concernant les déambulateurs Dolomite Gloss et que cette information a été diffusée au sein de mon organisation.</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Veillez m'envoyer les kits de remplacement à utiliser.</b><br/>A réception de ces kits, je m'engage à faire le changement dans les meilleurs délais et à vous confirmer le changement à l'aide de l'ANNEXE II.</p> <p><i><b>NB:</b> si vous ne pouvez pas réaliser cette opération pour des raisons techniques, vous avez la possibilité de nous retourner vos déambulateurs, merci dans ce cas de contacter notre Service Client pour l'organisation du retour de vos produits.</i></p> |

☞ **Veillez compléter et nous retourner ce formulaire par courriel à l'adresse : [materiovigilance@invacare.com](mailto:materiovigilance@invacare.com)**

☞ En cas d'impossibilité (ex : déambulateur perdu, détruit, revendu, numéro de série erroné, ne vous appartient pas, n'est plus utilisé ...) merci de nous retourner ce formulaire **en citant le motif ci-dessous**, daté et signé et spécifier les numéros de série des produits pour lesquels vous ne pouvez pas réaliser cette action.

Motif : .....

Numéros de série .....

Date : .....

Signature :

**ANNEXE II : CONFIRMATION ACTION CORRECTIVE**

Ce formulaire a pour objet de confirmer que les actions correctives, demandées par l'information sécurité référencée 2023\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss concernant les déambulateurs Invacare **Dolomite Gloss**, datée du 22.11.2023, sont en cours de réalisation et que vous avez remplacé les croisillons sur les produits dont les numéros de série sont notés dans ce formulaire.

| INFORMATION SECURITE                         |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence                                    | 2023_FSCA_Invacare Dolomite Gloss |
| Date                                         | 22 novembre 2023                  |
| Nom Produit                                  | Invacare Dolomite Gloss           |
| Modèle / code commercial                     |                                   |
| Numéros de série des déambulateurs concernés |                                   |
| Code Client                                  |                                   |
| Nom Client                                   |                                   |
| Email de communication                       |                                   |

| CONFIRMATION ACTION CORRECTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> <b>Je vous confirme avoir remplacé les croisillons sur les déambulateurs Invacare Dolomite Gloss dont les numéros de série sont identifiés ci-contre.</b></p> <p><i>NB : Il n'est pas nécessaire de retourner les croisillons remplacés, vous vous engagez par ce formulaire à les mettre au rebut.</i></p> | <p>Liste des numéros de série dont les croisillons ont été remplacés :</p> |

☞ **Veuillez compléter et nous retourner ce formulaire par courriel à l'adresse : [materiovigilance@invacare.com](mailto:materiovigilance@invacare.com)**

Votre réponse est la preuve que l'action corrective a été réalisée, elle nous permet de suivre l'état d'avancement de vos actions et informer les Autorités Compétentes.  
Nous vous demandons de nous informer de façon régulière, de préférence mensuelle.

☞ En cas d'impossibilité (ex : déambulateur perdu, détruit, revendu, numéro de série erroné, ne vous appartient pas, n'est plus utilisé ...) merci de nous retourner ce formulaire **en citant le motif ci-dessous**, daté et signé et spécifier les numéros de série des produits pour lesquels vous ne pouvez pas réaliser cette action.

Motif : .....

Numéros de série .....

Date : .....

Signature :



Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20F02003553 | 20J02000566 | 20K02003127 | 21B02001636 | 21B02001785 |
| 20F02003584 | 20J02000567 | 20K02003192 | 21B02001637 | 21B02001786 |
| 20F02003585 | 20J02000568 | 20K02003193 | 21B02001638 | 21B02001787 |
| 20F02003586 | 20J02000569 | 20K02003378 | 21B02001639 | 21B02001788 |
| 20F02003587 | 20J02000570 | 20K02004020 | 21B02001640 | 21B02001789 |
| 20F02003588 | 20J02000571 | 20K02004021 | 21B02001641 | 21B02001790 |
| 20F02003590 | 20J02000572 | 20L02000214 | 21B02001642 | 21B02001791 |
| 20F02003591 | 20J02000573 | 20L02000215 | 21B02001643 | 21B02001792 |
| 20F02003592 | 20J02000574 | 20L02000363 | 21B02001644 | 21B02001793 |
| 20GHL0202   | 20J02000575 | 20L02000364 | 21B02001645 | 21B02001794 |
| 20I02001390 | 20J02000576 | 20L02001574 | 21B02001646 | 21B02001795 |
| 20I02001391 | 20J02000577 | 20L02001736 | 21B02001647 | 21B02001796 |
| 20I02001392 | 20J02000578 | 20L02002133 | 21B02001648 | 21B02001798 |
| 20I02001393 | 20J02000579 | 20L02002535 | 21B02001649 | 21B02001799 |
| 20I02001394 | 20J02002922 | 20L02002790 | 21B02001650 | 21B02001800 |
| 20I02001395 | 20J02002923 | 21A02000006 | 21B02001651 | 21B02001801 |
| 20I02001396 | 20J02002924 | 21A02001693 | 21B02001652 | 21B02001802 |
| 20I02001397 | 20J02002925 | 21B02001507 | 21B02001653 | 21B02001803 |
| 20iHL0086   | 20J02002926 | 21B02001508 | 21B02001654 | 21B02001804 |
| 20iHL0087   | 20J02002927 | 21B02001509 | 21B02001655 | 21B02001805 |
| 20iHL0092   | 20J02002928 | 21B02001602 | 21B02001656 | 21B02001806 |
| 20J02000529 | 20J02002929 | 21B02001603 | 21B02001657 | 21B02001807 |
| 20J02000530 | 20J02002930 | 21B02001604 | 21B02001658 | 21B02001808 |
| 20J02000531 | 20J02002931 | 21B02001605 | 21B02001659 | 21B02001809 |
| 20J02000532 | 20J02002932 | 21B02001606 | 21B02001660 | 21B02001908 |
| 20J02000533 | 20J02002933 | 21B02001607 | 21B02001661 | 21B02001909 |
| 20J02000534 | 20J02002934 | 21B02001608 | 21B02001662 | 21B02001910 |
| 20J02000535 | 20J02002935 | 21B02001609 | 21B02001663 | 21B02001911 |
| 20J02000536 | 20J02002936 | 21B02001610 | 21B02001761 | 21B02001912 |
| 20J02000537 | 20J02002938 | 21B02001611 | 21B02001762 | 21B02001913 |
| 20J02000538 | 20J02002939 | 21B02001612 | 21B02001763 | 21B02001914 |
| 20J02000539 | 20J02002940 | 21B02001613 | 21B02001764 | 21B02001915 |
| 20J02000540 | 20J02002941 | 21B02001614 | 21B02001765 | 21B02001916 |
| 20J02000541 | 20J02002942 | 21B02001615 | 21B02001766 | 21B02001917 |
| 20J02000542 | 20J02002943 | 21B02001616 | 21B02001767 | 21B02001918 |
| 20J02000543 | 20J02002944 | 21B02001617 | 21B02001768 | 21B02001919 |
| 20J02000544 | 20J02002945 | 21B02001618 | 21B02001769 | 21B02001920 |
| 20J02000545 | 20J02002946 | 21B02001619 | 21B02001770 | 21B02001921 |
| 20J02000546 | 20J02002947 | 21B02001620 | 21B02001771 | 21B02001922 |
| 20J02000547 | 20J02002948 | 21B02001621 | 21B02001772 | 21B02001923 |
| 20J02000548 | 20J02003218 | 21B02001622 | 21B02001773 | 21B02001924 |
| 20J02000549 | 20J02003219 | 21B02001623 | 21B02001774 | 21B02001925 |
| 20J02000550 | 20J02003220 | 21B02001624 | 21B02001775 | 21B02001926 |
| 20J02000551 | 20J02003221 | 21B02001625 | 21B02001776 | 21B02001927 |
| 20J02000552 | 20K02000039 | 21B02001628 | 21B02001777 | 21B02001928 |
| 20J02000553 | 20K02000357 | 21B02001629 | 21B02001778 | 21B02001929 |
| 20J02000554 | 20K02002707 | 21B02001630 | 21B02001779 | 21B02001930 |



Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20J02000555 | 20K02002708 | 21B02001631 | 21B02001780 | 21B02001931 |
| 20J02000556 | 20K02002833 | 21B02001632 | 21B02001781 | 21B02001932 |
| 20J02000557 | 20K02002834 | 21B02001633 | 21B02001782 | 21B02001933 |
| 20J02000558 | 20K02002837 | 21B02001634 | 21B02001783 | 21B02001934 |
| 20J02000559 | 20K02002838 | 21B02001635 | 21B02001784 | 21B02001935 |
| 21B02001936 | 21B02001988 | 21B02002065 | 21C02002312 | 21D02002328 |
| 21B02001937 | 21B02001989 | 21B02002066 | 21C02002313 | 21DHL0093   |
| 21B02001938 | 21B02001990 | 21B02002067 | 21C02002314 | 21DHL0123   |
| 21B02001939 | 21B02001991 | 21B02002068 | 21C02002315 | 21DHL0124   |
| 21B02001940 | 21B02002016 | 21B02002069 | 21C02002316 | 21DHL0127   |
| 21B02001941 | 21B02002017 | 21B02002070 | 21C02002317 | 21DHL0130   |
| 21B02001942 | 21B02002018 | 21B02002071 | 21C02002318 | 21DHL0131   |
| 21B02001943 | 21B02002019 | 21B02002072 | 21C02002319 | 21DHL0132   |
| 21B02001944 | 21B02002020 | 21B02002073 | 21C02002320 | 21DHL0133   |
| 21B02001945 | 21B02002021 | 21B02002074 | 21C02002321 | 21DHL0176   |
| 21B02001946 | 21B02002022 | 21B02002075 | 21C02002322 | 21DHL0179   |
| 21B02001947 | 21B02002023 | 21B02002076 | 21C02002323 | 21DHL0180   |
| 21B02001948 | 21B02002024 | 21B02002077 | 21C02002324 | 21DHL0181   |
| 21B02001949 | 21B02002025 | 21B02002078 | 21C02002347 | 21DHL0191   |
| 21B02001950 | 21B02002026 | 21B02002079 | 21D02000031 | 21DHL0256   |
| 21B02001951 | 21B02002027 | 21B02002080 | 21D02000032 | 21DHL0260   |
| 21B02001952 | 21B02002028 | 21B02002081 | 21D02000033 | 21DHL0267   |
| 21B02001953 | 21B02002029 | 21B02002082 | 21D02000413 | 21DHL0269   |
| 21B02001954 | 21B02002030 | 21B02002083 | 21D02000565 | 21DHL0312   |
| 21B02001955 | 21B02002031 | 21B02002084 | 21D02000566 | 21DHL0314   |
| 21B02001956 | 21B02002032 | 21B02002085 | 21D02000567 | 21DHL0320   |
| 21B02001957 | 21B02002033 | 21B02002086 | 21D02000569 | 21DHL0321   |
| 21B02001958 | 21B02002034 | 21B02002087 | 21D02000646 | 21DHL0322   |
| 21B02001959 | 21B02002035 | 21B02002088 | 21D02001674 | 21DHL0324   |
| 21B02001960 | 21B02002036 | 21B02002089 | 21D02001678 | 21DHL0325   |
| 21B02001961 | 21B02002037 | 21B02002090 | 21D02001740 | 21DHL0326   |
| 21B02001962 | 21B02002038 | 21B02002091 | 21D02001741 | 21dHL0365   |
| 21B02001963 | 21B02002039 | 21B02002092 | 21D02001742 | 21dHL0389   |
| 21B02001964 | 21B02002040 | 21B02002093 | 21D02001743 | 21dHL0395   |
| 21B02001965 | 21B02002041 | 21B02002094 | 21D02001744 | 21DHL0401   |
| 21B02001966 | 21B02002042 | 21B02002095 | 21D02001745 | 21DHL0405   |
| 21B02001967 | 21B02002043 | 21B02002096 | 21D02001746 | 21DHL0413   |
| 21B02001968 | 21B02002044 | 21B02002097 | 21D02001747 | 21DHL0420   |
| 21B02001969 | 21B02002045 | 21B02002098 | 21D02001748 | 21DHL0457   |
| 21B02001970 | 21B02002046 | 21B02002099 | 21D02001749 | 21dHL0466   |
| 21B02001971 | 21B02002047 | 21B02002100 | 21D02001750 | 21DHL0474   |
| 21B02001972 | 21B02002048 | 21C02000122 | 21D02001751 | 21DHL0496   |
| 21B02001973 | 21B02002049 | 21C02001681 | 21D02001752 | 21DHL0497   |
| 21B02001974 | 21B02002050 | 21C02001903 | 21D02001753 | 21DHL0498   |
| 21B02001975 | 21B02002051 | 21C02002056 | 21D02001754 | 21DHL0499   |
| 21B02001976 | 21B02002053 | 21C02002073 | 21D02001755 | 21DHL0512   |
| 21B02001977 | 21B02002054 | 21C02002300 | 21D02001756 | 21DHL0513   |



Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 21B02001978 | 21B02002055 | 21C02002302 | 21D02001757 | 21DHL0514 |
| 21B02001979 | 21B02002056 | 21C02002303 | 21D02001758 | 21DHL0516 |
| 21B02001980 | 21B02002057 | 21C02002304 | 21D02001759 | 21DHL0517 |
| 21B02001981 | 21B02002058 | 21C02002305 | 21D02001760 | 21DHL0518 |
| 21B02001982 | 21B02002059 | 21C02002306 | 21D02001761 | 21DHL0522 |
| 21B02001983 | 21B02002060 | 21C02002307 | 21D02001762 | 21DHL0582 |
| 21B02001984 | 21B02002061 | 21C02002308 | 21D02001763 | 21DHL0661 |
| 21B02001985 | 21B02002062 | 21C02002309 | 21D02002325 | 21DHL0702 |
| 21B02001986 | 21B02002063 | 21C02002310 | 21D02002326 | 21DHL0704 |
| 21B02001987 | 21B02002064 | 21C02002311 | 21D02002327 | 21DHL0705 |
| 21DHL0708   | 21DHL1021   | 21EHL0076   | 21EHL0281   | 21EHL0619 |
| 21DHL0710   | 21DHL1022   | 21EHL0078   | 21EHL0282   | 21EHL0620 |
| 21DHL0728   | 21DHL1026   | 21ehl0083   | 21EHL0283   | 21EHL0621 |
| 21DHL0729   | 21DHL1028   | 21EHL0086   | 21EHL0286   | 21EHL0622 |
| 21DHL0730   | 21DHL1029   | 21EHL0088   | 21EHL0287   | 21EHL0623 |
| 21DHL0731   | 21DHL1030   | 21EHL0089   | 21EHL0288   | 21EHL0624 |
| 21DHL0732   | 21DHL1031   | 21EHL0101   | 21ehl0289   | 21EHL0625 |
| 21DHL0734   | 21DHL1040   | 21EHL0104   | 21EHL0291   | 21EHL0626 |
| 21DHL0736   | 21DHL1042   | 21EHL0105   | 21EHL0293   | 21EHL0629 |
| 21DHL0871   | 21DHL1043   | 21EHL0107   | 21EHL0294   | 21EHL0631 |
| 21DHL0884   | 21DHL1044   | 21EHL0108   | 21EHL0295   | 21EHL0639 |
| 21DHL0890   | 21DHL1050   | 21EHL0109   | 21EHL0459   | 21EHL0669 |
| 21DHL0894   | 21E02000005 | 21EHL0111   | 21EHL0479   | 21EHL0685 |
| 21DHL0906   | 21E02000932 | 21EHL0112   | 21EHL0492   | 21EHL0688 |
| 21DHL0907   | 21E02002175 | 21EHL0114   | 21EHL0503   | 21EHL0691 |
| 21DHL0911   | 21E02002315 | 21EHL0115   | 21EHL0508   | 21EHL0695 |
| 21DHL0912   | 21E02002316 | 21EHL0116   | 21EHL0519   | 21EHL0696 |
| 21DHL0913   | 21E02002317 | 21EHL0119   | 21EHL0520   | 21EHL0697 |
| 21DHL0914   | 21E02002318 | 21EHL0120   | 21EHL0524   | 21EHL0698 |
| 21DHL0924   | 21E02002319 | 21EHL0123   | 21EHL0526   | 21EHL0700 |
| 21DHL0926   | 21E02002320 | 21EHL0124   | 21EHL0532   | 21EHL0712 |
| 21DHL0927   | 21E02002321 | 21EHL0127   | 21EHL0537   | 21EHL0714 |
| 21DHL0929   | 21E02002322 | 21EHL0129   | 21EHL0538   | 21EHL0715 |
| 21DHL0930   | 21E02002323 | 21EHL0131   | 21EHL0539   | 21EHL0716 |
| 21DHL0931   | 21E02002324 | 21EHL0132   | 21EHL0540   | 21EHL0717 |
| 21DHL0932   | 21E02002325 | 21EHL0134   | 21EHL0541   | 21EHL0718 |
| 21DHL0933   | 21e02002326 | 21EHL0135   | 21EHL0542   | 21EHL0719 |
| 21DHL0935   | 21E02002849 | 21EHL0146   | 21EHL0543   | 21EHL0720 |
| 21DHL0936   | 21EHL0001   | 21ehl0147   | 21EHL0544   | 21EHL0721 |
| 21DHL0939   | 21EHL0002   | 21EHL0157   | 21EHL0545   | 21EHL0722 |
| 21DHL0941   | 21EHL0003   | 21EHL0158   | 21EHL0546   | 21EHL0723 |
| 21DHL0945   | 21EHL0004   | 21ehl0161   | 21EHL0547   | 21EHL0724 |
| 21DHL0955   | 21EHL0005   | 21ehl0162   | 21EHL0548   | 21EHL0725 |
| 21DHL0956   | 21EHL0007   | 21ehl0163   | 21EHL0549   | 21EHL0726 |
| 21DHL0957   | 21EHL0008   | 21EHL0172   | 21EHL0550   | 21EHL0727 |
| 21DHL0960   | 21EHL0009   | 21EHL0186   | 21EHL0551   | 21EHL0728 |
| 21DHL0961   | 21EHL0010   | 21EHL0189   | 21EHL0552   | 21EHL0729 |



Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |           |           |             |             |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 21DHL0962   | 21EHL0011 | 21EHL0190 | 21EHL0553   | 21EHL0730   |
| 21DHL0964   | 21EHL0012 | 21ehl0207 | 21EHL0554   | 21EHL0731   |
| 21DHL0965   | 21EHL0015 | 21ehl0208 | 21EHL0580   | 21EHL0733   |
| 21DHL0970   | 21EHL0037 | 21EHL0222 | 21EHL0582   | 21EHL0734   |
| 21DHL0971   | 21EHL0038 | 21EHL0228 | 21EHL0592   | 21EHL0735   |
| 21DHL0972   | 21EHL0042 | 21EHL0229 | 21EHL0597   | 21EHL0736   |
| 21DHL0973   | 21EHL0043 | 21EHL0230 | 21EHL0609   | 21EHL0737   |
| 21DHL0974   | 21EHL0044 | 21EHL0232 | 21EHL0610   | 21eHL0743   |
| 21DHL0975   | 21EHL0045 | 21EHL0235 | 21EHL0611   | 21eHL0744   |
| 21DHL0976   | 21EHL0055 | 21EHL0236 | 21EHL0612   | 21eHL0749   |
| 21DHL0982   | 21EHL0056 | 21EHL0237 | 21EHL0613   | 21F02000096 |
| 21DHL0985   | 21EHL0057 | 21EHL0239 | 21EHL0614   | 21F02000889 |
| 21DHL0988   | 21EHL0068 | 21EHL0243 | 21EHL0615   | 21F02001173 |
| 21DHL1010   | 21EHL0074 | 21EHL0276 | 21EHL0617   | 21F02001343 |
| 21DHL1018   | 21EHL0075 | 21EHL0279 | 21EHL0618   | 21F02001459 |
| 21F02001860 | 21FHL0010 | 21FHL0160 | 21FHL0247   | 21G02000231 |
| 21F02001861 | 21FHL0012 | 21FHL0161 | 21FHL0248   | 21G02000232 |
| 21F02001862 | 21FHL0015 | 21FHL0162 | 21FHL0249   | 21G02000233 |
| 21F02001887 | 21FHL0018 | 21FHL0169 | 21FHL0250   | 21G02000234 |
| 21F02001888 | 21FHL0020 | 21FHL0170 | 21FHL0283   | 21G02000235 |
| 21F02001889 | 21FHL0027 | 21FHL0173 | 21FHL0347   | 21G02000236 |
| 21F02001890 | 21FHL0028 | 21FHL0174 | 21FHL0348   | 21G02000237 |
| 21F02001891 | 21FHL0030 | 21FHL0175 | 21FHL0349   | 21G02000238 |
| 21F02001960 | 21FHL0033 | 21FHL0176 | 21FHL0360   | 21G02000239 |
| 21F02002019 | 21FHL0034 | 21FHL0177 | 21FHL0361   | 21G02000416 |
| 21F02002021 | 21FHL0035 | 21FHL0178 | 21FHL0366   | 21G02000420 |
| 21F02002226 | 21FHL0036 | 21FHL0180 | 21FHL0367   | 21G02000421 |
| 21F02002598 | 21fHL0043 | 21fHL0181 | 21FHL0368   | 21G02000422 |
| 21F02002662 | 21FHL0046 | 21FHL0183 | 21FHL0372   | 21G02000423 |
| 21F02002663 | 21FHL0056 | 21FHL0184 | 21FHL0373   | 21G02000424 |
| 21F02002707 | 21fHL0058 | 21FHL0185 | 21FHL0377   | 21G02000425 |
| 21F02002708 | 21FHL0060 | 21FHL0193 | 21fh0379    | 21G02000426 |
| 21F02002710 | 21FHL0061 | 21FHL0196 | 21FHL0380   | 21G02000427 |
| 21F02002912 | 21FHL0062 | 21FHL0198 | 21FHL0381   | 21G02000428 |
| 21F02002913 | 21FHL0064 | 21FHL0200 | 21FHL0384   | 21G02000429 |
| 21F02002914 | 21FHL0068 | 21FHL0203 | 21FHL0386   | 21G02000430 |
| 21F02003020 | 21FHL0080 | 21FHL0205 | 21fh0387    | 21G02000431 |
| 21F02003021 | 21FHL0082 | 21FHL0206 | 21FHL0388   | 21G02000432 |
| 21F02003022 | 21FHL0090 | 21FHL0210 | 21FHL0390   | 21G02000433 |
| 21F02003023 | 21fHL0095 | 21FHL0211 | 21G02000200 | 21G02000434 |
| 21F02003024 | 21FHL0118 | 21FHL0212 | 21G02000204 | 21G02000435 |
| 21F02003025 | 21FHL0119 | 21FHL0213 | 21G02000205 | 21G02000436 |
| 21F02003026 | 21FHL0120 | 21FHL0214 | 21G02000206 | 21G02000437 |
| 21F02003027 | 21FHL0121 | 21FHL0219 | 21G02000207 | 21G02000438 |
| 21F02003028 | 21FHL0122 | 21FHL0220 | 21G02000208 | 21G02000439 |
| 21F02003029 | 21FHL0123 | 21FHL0221 | 21G02000209 | 21G02000441 |
| 21F02003030 | 21FHL0124 | 21FHL0225 | 21G02000210 | 21G02000442 |



Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |           |           |             |             |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 21F02003031 | 21FHL0125 | 21FHL0226 | 21G02000211 | 21G02000443 |
| 21F02003033 | 21FHL0126 | 21FHL0227 | 21G02000212 | 21G02000444 |
| 21F02003034 | 21FHL0129 | 21FHL0228 | 21G02000213 | 21G02000733 |
| 21F02003036 | 21FHL0130 | 21FHL0229 | 21G02000214 | 21G02001036 |
| 21F02003038 | 21FHL0131 | 21FHL0230 | 21G02000215 | 21G02001066 |
| 21F02003042 | 21FHL0132 | 21FHL0231 | 21G02000216 | 21G02001067 |
| 21F02003044 | 21FHL0133 | 21FHL0233 | 21G02000217 | 21G02001091 |
| 21F02003045 | 21FHL0135 | 21FHL0234 | 21G02000218 | 21G02001198 |
| 21F02003046 | 21FHL0136 | 21FHL0235 | 21G02000219 | 21G02001207 |
| 21F02003048 | 21FHL0142 | 21FHL0236 | 21G02000220 | 21G02001209 |
| 21F02003049 | 21FHL0143 | 21FHL0237 | 21G02000221 | 21G02001210 |
| 21F02003050 | 21FHL0144 | 21FHL0238 | 21G02000222 | 21G02001314 |
| 21F02003094 | 21FHL0145 | 21FHL0239 | 21G02000223 | 21G02001316 |
| 21FHL0003   | 21FHL0146 | 21FHL0240 | 21G02000224 | 21G02001318 |
| 21FHL0004   | 21FHL0148 | 21FHL0241 | 21G02000225 | 21G02001320 |
| 21FHL0005   | 21FHL0151 | 21FHL0242 | 21G02000226 | 21G02001323 |
| 21FHL0006   | 21FHL0152 | 21FHL0243 | 21G02000227 | 21G02001325 |
| 21FHL0007   | 21FHL0153 | 21FHL0244 | 21G02000228 | 21G02001326 |
| 21FHL0008   | 21FHL0154 | 21FHL0245 | 21G02000229 | 21G02001675 |
| 21FHL0009   | 21FHL0155 | 21FHL0246 | 21G02000230 | 21G02001676 |
| 21G02001677 | 21IHL0010 | 21IHL0096 | 21IHL0180   | 21KHL0301   |
| 21G02002055 | 21IHL0011 | 21IHL0097 | 21IHL0181   | 21KHL0304   |
| 21G02002056 | 21IHL0012 | 21IHL0098 | 21IHL0183   | 21KHL0306   |
| 21G02002365 | 21IHL0013 | 21IHL0099 | 21IHL0189   | 21KHL0307   |
| 21H02000266 | 21IHL0016 | 21IHL0100 | 21IHL0191   | 21KHL0308   |
| 21H02000269 | 21IHL0017 | 21IHL0101 | 21IHL0197   | 21KHL0309   |
| 21H02000272 | 21IHL0018 | 21IHL0104 | 21IHL0198   | 21KHL0311   |
| 21H02000273 | 21IHL0019 | 21IHL0105 | 21IHL0199   | 21KHL0312   |
| 21H02000274 | 21IHL0020 | 21IHL0106 | 21IHL0200   | 21KHL0313   |
| 21H02000275 | 21IHL0021 | 21IHL0111 | 21IHL0201   | 21KHL0314   |
| 21H02000276 | 21IHL0022 | 21IHL0112 | 21IHL0202   | 21KHL0315   |
| 21H02000277 | 21IHL0023 | 21IHL0113 | 21IHL0203   | 21KHL0316   |
| 21H02000278 | 21IHL0024 | 21IHL0114 | 21IHL0204   | 21KHL0317   |
| 21H02000279 | 21IHL0026 | 21IHL0116 | 21IHL0205   | 21KHL0318   |
| 21H02000280 | 21IHL0028 | 21IHL0121 | 21IHL0206   | 21KHL0319   |
| 21H02000282 | 21IHL0029 | 21IHL0122 | 21IHL0207   | 21KHL0320   |
| 21H02000283 | 21IHL0030 | 21IHL0125 | 21IHL0208   | 21KHL0321   |
| 21H02000609 | 21IHL0036 | 21IHL0126 | 21IHL0209   | 21KHL0325   |
| 21H02000610 | 21IHL0040 | 21IHL0127 | 21IHL0210   | 21KHL0326   |
| 21H02000612 | 21IHL0042 | 21IHL0130 | 21IHL0212   | 21KHL0339   |
| 21H02000613 | 21IHL0043 | 21IHL0131 | 21IHL0213   | 21KHL0340   |
| 21H02000614 | 21IHL0044 | 21IHL0132 | 21IHL0214   | 21KHL0341   |
| 21H02000615 | 21IHL0045 | 21IHL0134 | 21IHL0215   | 21KHL0345   |
| 21H02000616 | 21IHL0047 | 21IHL0135 | 21IHL0216   | 21KHL0349   |
| 21H02000617 | 21IHL0049 | 21IHL0136 | 21IHL0217   | 21KHL0392   |
| 21H02000618 | 21IHL0050 | 21IHL0138 | 21IHL0218   | 21KHL0427   |
| 21H02000619 | 21IHL0051 | 21IHL0140 | 21IHL0219   | 21KHL0428   |




Yes, you can.

**FR\_Liste Gloss\_SN\_FSCA\_Invacare Dolomite Gloss**

|             |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21H02000620 | 21IHL0052 | 21IHL0143 | 21IHL0220 | 21KHL0430 |
| 21H02000621 | 21IHL0053 | 21IHL0144 | 21IHL0221 | 21KHL0432 |
| 21H02000622 | 21IHL0054 | 21IHL0145 | 21IHL0280 | 21KHL0433 |
| 21H02000623 | 21IHL0055 | 21IHL0146 | 21IHL0286 | 21KHL0434 |
| 21H02000626 | 21IHL0056 | 21IHL0148 | 21IHL0303 | 21KHL0436 |
| 21H02000627 | 21IHL0057 | 21IHL0149 | 21IHL0308 | 21KHL0438 |
| 21H02002092 | 21IHL0058 | 21IHL0161 | 21IHL0310 | 21KHL0439 |
| 21H02002094 | 21IHL0059 | 21IHL0162 | 21IHL0312 | 21KHL0442 |
| 21HHL0227   | 21IHL0060 | 21IHL0163 | 21IHL0315 | 21KHL0443 |
| 21HHL0253   | 21IHL0077 | 21IHL0164 | 21IHL0316 | 21KHL0444 |
| 21hHL0263   | 21IHL0081 | 21IHL0165 | 21IHL0317 | 21KHL0457 |
| 21hHL0264   | 21IHL0082 | 21IHL0166 | 21IHL0318 | 22bhl0056 |
| 21hHL0296   | 21IHL0083 | 21IHL0167 | 21IHL0319 | 22BHL0244 |
| 21hHL0300   | 21IHL0084 | 21IHL0168 | 21IHL0385 | 22bHL0280 |
| 21HHL0304   | 21IHL0085 | 21IHL0169 | 21IHL0386 | 22bhl0397 |
| 21I02001569 | 21IHL0086 | 21IHL0170 | 21IHL0413 | 22BHL0410 |
| 21IHL0001   | 21IHL0087 | 21IHL0171 | 21IHL0420 | 22bhl0419 |
| 21IHL0002   | 21IHL0088 | 21IHL0172 | 21IHL0422 | 22BHL0426 |
| 21IHL0003   | 21IHL0089 | 21IHL0173 | 21IHL0427 | 22bhl0440 |
| 21IHL0004   | 21IHL0090 | 21IHL0174 | 21IHL0436 | 22bhl0442 |
| 21IHL0005   | 21IHL0091 | 21IHL0175 | 21IHL0451 |           |
| 21IHL0006   | 21IHL0092 | 21IHL0176 | 21KHL0271 |           |
| 21IHL0007   | 21IHL0093 | 21IHL0177 | 21KHL0275 |           |
| 21IHL0008   | 21IHL0094 | 21IHL0178 | 21KHL0291 |           |
| 21IHL0009   | 21IHL0095 | 21IHL0179 | 21KHL0297 |           |


## Instructions relatives à l'assemblage de Dolomite® Gloss®

**i** Temps approximatif nécessaire pour le remplacement du croisillon | quinze minutes (15')

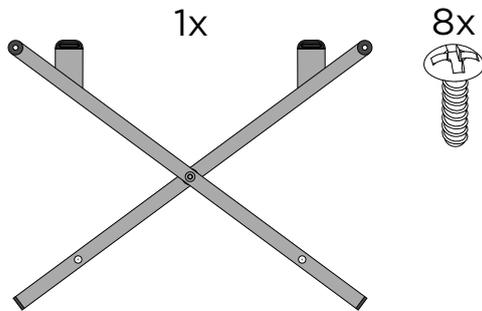


**i** Le présent document fournit les instructions relatives au remplacement du croisillon d'origine par une version nouvellement conçue, nécessaire pour résoudre les problèmes liés à la résistance et à la performance de ce produit.

**i** Il s'avère **important** de vérifier l'intégrité de l'assise. Avant de commencer cette procédure, effectuez une évaluation approfondie de l'état actuel du produit (*reportez-vous à « Liste de vérification », dans Manuel de maintenance du produit*).

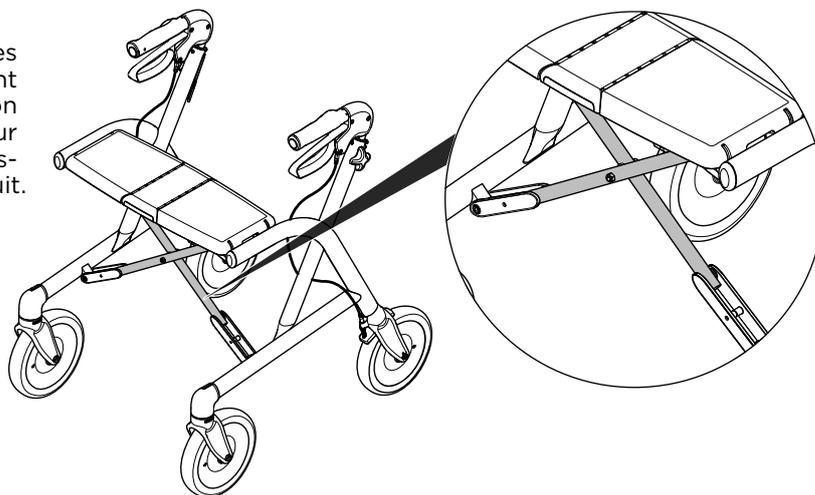

### 1. Séparation de l'assise du rollator\*

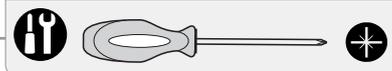


- Dévissez et retirez les huit vis (2x $\text{A}$ , 2x $\text{B}$ , 2x $\text{C}$  et 2x $\text{D}$ ), et les quatre supports qui fixent l'assise au châssis du rollator.
- Séparez l'assise du rollator.



**i** \*Alternativement à Étape 1. Vous pouvez retirer les quatre vis intérieures (1x $\text{A}$ , 1x $\text{B}$ , 1x $\text{C}$  et 1x $\text{D}$ ), et desserrer uniquement les vis extérieures, de sorte à faire pivoter les supports vers l'extérieur à 90° et séparer l'assise du châssis du rollator.

En ayant recours à cette alternative, vous pouvez conserver les quatre supports fixés à l'assise, ce qui facilite l'installation de l'assise au châssis après avoir procédé à l'assemblage du nouveau croisillon.

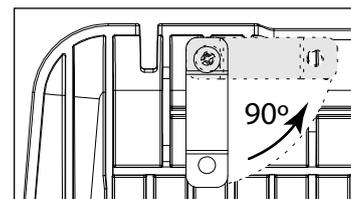




Invacare Rea AB  
Växjövägen 303  
SE-343 71 Diö  
Sweden

**Dolomite**



## 2. Démontage du croisillon du châssis



**i** Les deux biellettes en plastique (A), ne doivent pas se détacher du cadre lors du démontage du croisillon.

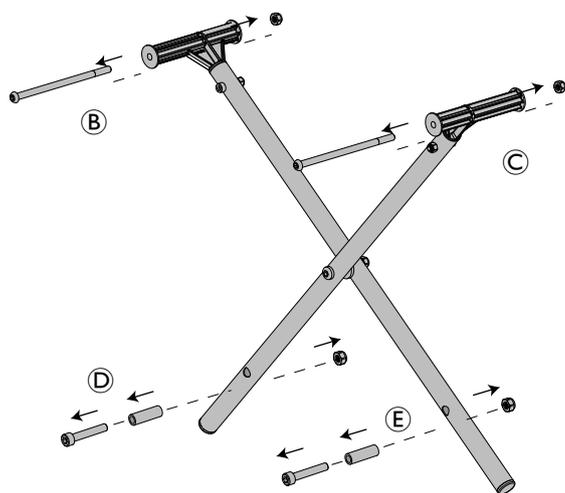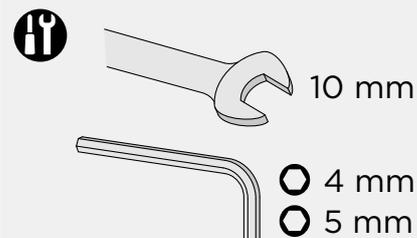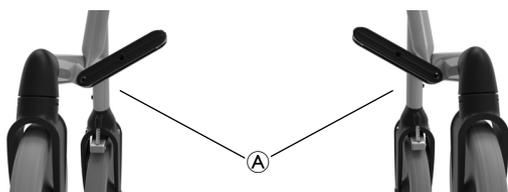

- Dévissez les connecteurs (écrous et boulons) supérieurs gauche (B) et droit (C) situés entre le croisillon et le châssis du rollator.
- Dévissez les biellettes (écrous, entretoises et boulons) inférieures gauche (D) et droit (E) situées entre le croisillon et le châssis du rollator.
- Retirez et jetez le croisillon d'origine.

## 3. Assemblage du nouveau croisillon


Voir Étape 2. dans l'ordre inverse.

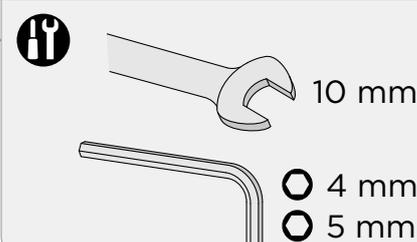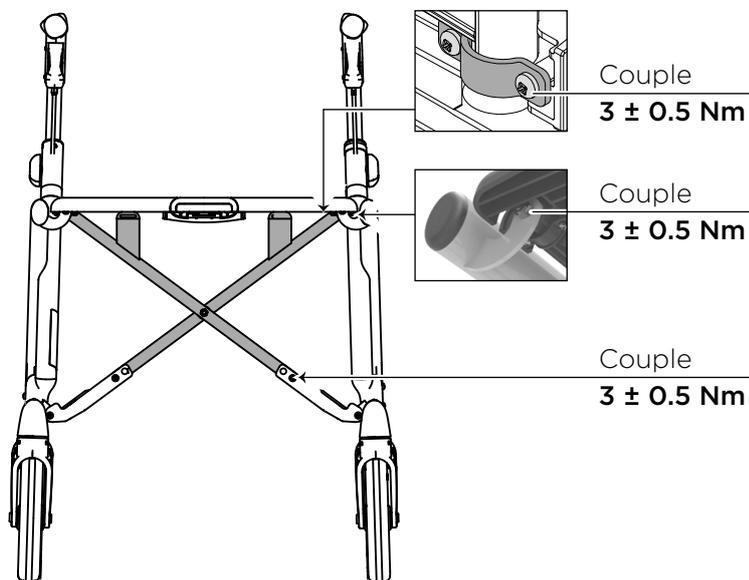

**i** Ne **PAS** oublier d'utiliser les entretoises lors de la fixation des biellettes inférieures (D) et (E) situées entre le châssis et le croisillon.

## 4. Rattachez à nouveau l'assise au rollator

Voir Étape 1. dans l'ordre inverse et Étape 3. pour les informations relatives au couplage.

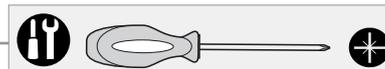

**i** En cas de dommage ou de perte des vis d'origine, utilisez les vis fournies avec le nouveau croisillon pour fixer à nouveau l'assise.



Invacare Rea AB  
Växjövägen 303  
SE-343 71 Diö  
Sweden

**Dolomite**



Yes, you can!