

Date:11Dec. 2023

Lettre d'information de sécurité Peson MHS2510I CHARDER

For Attention of*: Distributeurs et utilisateurs


Contact details of local representative (name, e-mail, telephone, addressetc.)*			
Charder	Electronic	Co.,	Ltd.Name: Lotus LeeE-mail:
lotus@charder.com.tw		Telephone: +886-4-24063766 ext.270	Address: No. 103,
Guozhong Road, Dali District, Taichung City 41262, Taiwan (R.O.C.)			

Lettre d'information de sécurité
Rappel des pesons MHS2510I CHARDER

1. Information on Affected Devices*	
1.	<p>1. Device Type(s)*</p> <p>Peson pour lève-personnes, avec joint, sans adaptateur</p> 
1.	<p>2. Commercial name(s)*</p> <p>Peson pour lève-personnes</p>
1.	<p>3. Unique Device Identifier(s) (UDI-DI)</p> <p>N/A</p>
1.	<p>4. Primary clinical purpose of device(s)*</p> <p>Cet appareil est destiné à mesurer le poids de personnes à mobilité réduite, pour le diagnostic des problèmes liés au poids par les professionnels.</p>
1.	<p>5. Device Model/Catalogue/part number(s)*</p> <p>MHS2510I</p>
1.	<p>6. Software version</p> <p>1.03</p>
1.	<p>7. Affected serial or lot number range</p> <p>Cf liste des numéros de série en annexe</p>
1.	<p>8. Associated devices</p> <p>Lève-personnesINVACARE BIRDIE EVO</p>

2. Reason for Field Safety Corrective Action (FSCA)*	
2.	<p>1. Description du problème</p> <p>Un incident est survenu dans un établissement de santé impliquant un peson MHS2510I et un lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO. Lors du transfert, le patient a chuté et s'est blessé au cou en heurtant les pieds du lève-personnes. Le peson endommagé a été renvoyé au distributeur pour analyse.</p> <p>Il y a 2 adaptateurs pour connecter les joints du peson Charder au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO (attache supérieure et attache inférieure). Les pesons MHS2510I livrés par Charder et Abilanx sont uniquement équipés de joints, sans adaptateurs. Les adaptateurs pour connecter les joints du peson au lève-personnes électronique INVACARE BIRDIE EVO peuvent être obtenus auprès du fournisseur de lève-personnes du marché pour ainsi assembler le peson MHS2510I au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO</p> <p>Suite aux analyses menées sur le peson, Abilanx a demandé à ses clients de cesser de vendre les appareils concernés et a décidé de rappeler tous les pesons MHS2510I (lorsqu'ils ont été adaptés au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO) afin de procéder à une inspection de sécurité..</p>
2.	<p>2. Risque à l'origine de la FSCA</p>

Les adaptateurs qui relient les joints du peson et du lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO peuvent provenir du fournisseur de lève-personnes. L'adaptation entre le peson et le lève-personnes doit être vérifiée par le fournisseur du lève-personnes (produit final) avant la livraison à l'utilisateur final, qui doit également recevoir la formation nécessaire. Le peson est conçu pour être installé entre le bras de levage et le cintre du lève-personne, en position totalement verticale (Référence 1).

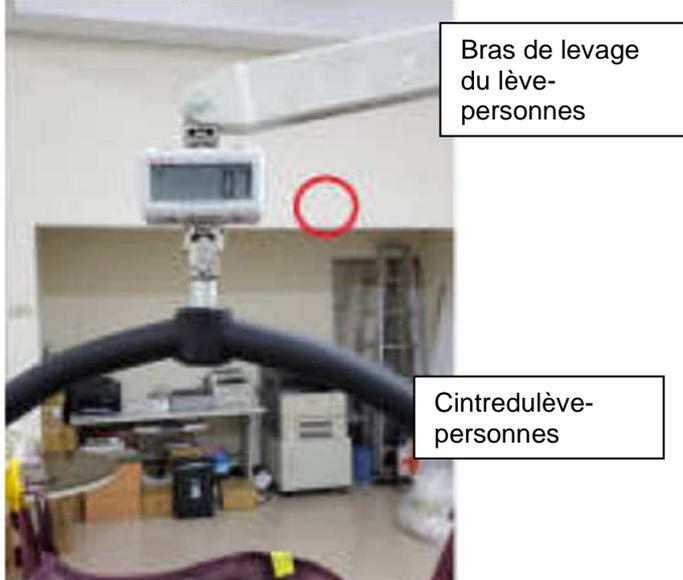

(Référence 1)

Après analyse du peson endommagé, Charder a déterminé que la rupture du joint était causée par le fait que le peson avait été installé dans une position courbée (référence 2) à l'aide d'un adaptateur tiers pendant une période prolongée, ce qui a finalement entraîné une rupture et la chute du patient.




(référence 2)

2. 3. Probabilité de survenue de l'incident

Si le peson est courbé/plié lors de son installation, la probabilité d'une rupture éventuelle est inévitable à 100 % une fois qu'il est soumis à un poids suffisant et utilisé suffisamment de fois en raison d'une force incohérente exercée sur le connecteur d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu (plié), ce qui entraîne une déformation et une défaillance éventuelle.

De même que si le peson est correctement vertical lors de l'installation initiale, mais qu'il est capable de se plier à n'importe quel moment de son fonctionnement (par exemple :

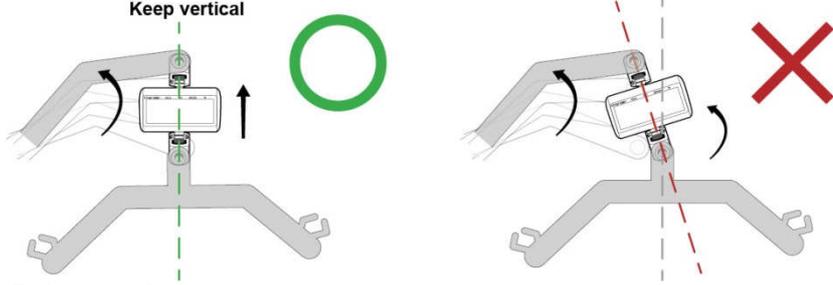	<p>lorsqu'il est soulevé au point le plus élevé, le même problème s'applique. (Référence 3)</p>  <p>(Référence 3)</p>
2.	<p>4. Risque potentiel pour les patients/utilisateurs</p> <p>L'articulation reliant la balance au système de lève-patient se rompt. Le patient tombe et heurte le sol.</p>
2.	<p>5. Autres informations visant à définir le problème</p> <p>1. Pour garantir que les joints ne se casseront pas, les opérateurs doivent s'assurer que les joints ne sont pas fixés en position pliée. Idéalement, les articulations doivent pouvoir bouger librement, de sorte qu'elles restent verticales quelle que soit la position du lève-personnes (par exemple : complètement abaissé ou complètement relevé).</p> <p>2. Éviter d'associer le peson au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO d'INVACARE.</p>
2.	<p>6. Contexte du problème</p> <p>(1) Comment le fabricant en a-t-il eu connaissance ? Cet incident a été signalé par notre distributeur en France "Abilanx".</p> <p>(2) Quelle est la cause profonde, si elle est connue ? Un joint tiers (non produit par le fabricant) a été utilisé et a été installé et utilisé de manière incorrecte lorsqu'il est connecté au peson.</p> <p>(3) Cette FSCA affecte-t-elle uniquement l'ensemble de produits répertoriés ? Oui, elle s'applique uniquement au peson Charder Lift MHS2510I qui a été associée au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO d'INVACARE.</p> <p>(4) Quelles autres actions l'utilisateur peut-il entreprendre pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir ? Une lettre d'avertissement avec des illustrations claires d'une installation et d'un fonctionnement corrects et inappropriés a été émise et envoyée aux utilisateurs via nos importateurs/distributeurs agréés. Les utilisateurs sont invités à suivre correctement les instructions pour une utilisation en toute sécurité et doivent s'assurer que le peson est en position verticale. Si une inclinaison ou une courbure est observée, le peson ne doit pas être utilisé.</p> <p>Par la même occasion, nous rappelons les appareils concernés pour les inspecter et les retravailler (si nécessaire) via notre distributeur (Abilanx)</p>
2.	<p>7. Autres informations pertinentes pour la FSCA</p> <p>Non.</p>

3. Type of Action to mitigate the risk*

3.	<p>1. Action à entreprendre par l'utilisateur*</p> <p><input type="checkbox"/> Identifier l'appareil</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Retourner le dispositif</p> <p><input type="checkbox"/> Modification/ inspection de l'appareil sur site</p> <p><input type="checkbox"/> Suivre les recommandations de prise en charge des patients</p> <p><input type="checkbox"/> Mise en quarantaine du dispositif</p> <p><input type="checkbox"/> Destruction du dispositif</p>
-----------	---

4. General Information*		
4.	1. FSN Type*	Update
4.	2. For updated FSN, reference number and date of previous FSN	ER12170003-F (reference ANSM :R2119009)
4.	3. For Updated FSN, key new information as follows:	
	<p>1. Accuser réception de cette lettre d'information de sécurité dans les plus brefs délais, au plus tard le 31 janvier 2024.</p> <p>2. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil concerné.</p> <p>3. Renvoyez l'appareil concerné à Abilanx dans les plus brefs délais</p>	
4.	4. Further advice or information already expected in follow-up FSN?*	No
4.	5. If follow-up FSN expected, what is the further advice expected to relate to:	
	Eg patient management, device modifications etc.	
4.	6. Anticipated timescale for follow-up FSN	For provision of updated advice.
4.	7. Manufacturer information (For contact details of local representative refer to page 1 of this FSN)	
	a. Company Name	Only necessary if not evident on letter-head.
	b. Address	Only necessary if not evident on letter-head.
	c. Website address	Chardermedical.com
4.	<p>8. La présente note d'information à l'intention des clients a été communiquée à l'autorité (de régulation) compétente de votre pays.*</p> <p>Le peson impliqué n'est pas un dispositif médical dans le pays d'implantation de Charder (Taiwan), cet incident s'applique uniquement au peson associé au lève-personnes INVACARE BIRDIE EVO qui a été vendu en France. Nous n'informerons donc pas le C.A. Dans Taiwan.</p> <p>Charder a signalé l'incident à l'ANSM France, l'autorité compétente du pays où l'incident s'est produit, et a également informé le représentant de l'autorité européenne – Obelis s.a..</p>	
4.	9. List of attachments/appendices:	Liste des N° de série appareils à rappeler
4.	10. Name/Signature	Lotus Lee, Management Representative

Transmission of this Field Safety Notice	
	<p>This notice needs to be passed on all those who need to be aware within your organisation or to any organisation where the potentially affected devices have been transferred. (As appropriate)</p> <p>Please transfer this notice to other organisations on which this action has an impact. (As appropriate)</p> <p>Please maintain awareness on this notice and resulting action for an appropriate period to</p>

Rev 2: February2020

FSN Ref: ER123C0001-FN

FSCA Ref: ER123C0001-F

ensure effectiveness of the corrective action.

Please report all device-related incidents to the manufacturer, distributor or local representative, and the national Competent Authority if appropriate, as this provides important feedback.*

Note: Fields indicated by * are considered necessary for all FSNs. Others are optional.

Annex I

Avis de sécurité sur le terrain Formulaire de réponse du distributeur/importateur Formulaire de réponse du distributeur/importateur

1. Informations sur les avis de sécurité sur le terrain (FSN)	
Numéro de référence FSN *	ER123C0001-FN
Date du FSN*	11 décembre 2023
Nom du produit/appareil*	Peson MHS2510I CHARDER
Code(s) de produit	MHS2510I
Numéro(s) de lot/série	S/N T16002370 ;numéro de lot MA11690011.. Détaillé en annexe du FSN (liste de tous les numéros de série)

2. Détails du distributeur/importateur	
Nom de l'entreprise*	
Numéro de compte	
Adresse*	
Adresse de livraison si différente de ci-dessus	
Nom du contact *	
Titre ou fonction	
Numéro de téléphone*	
E-mail*	

3. Renvoyez un accusé de réception à l'expéditeur	
E-mail	Pré-rempli par le fabricant/expéditeur/demandeur
Ligne d'assistance pour distributeurs/importateurs	Pré-rempli par le fabricant/expéditeur/demandeur
Adresse postale	Pré-rempli par le fabricant/expéditeur/demandeur
Portail Web	Pré-rempli par le fabricant/expéditeur/demandeur
Date limite de retour du formulaire de réponse Distributeur/Importateur*	31 mars 2024

4. Distributeurs/Importateurs (Cochez toutes les réponses applicables)		
<input type="checkbox"/>	*Je confirme la réception, la lecture et la compréhension de l'avis de sécurité sur le terrain.	Distributeur/Importateur à compléter ou à saisir N/A
<input type="checkbox"/>	J'ai vérifié mon stock et mis mon inventaire en quarantaine	Distributeur/Importateur pour saisir la quantité et la date
<input type="checkbox"/>	J'ai identifié des clients qui ont reçu ou ont pu recevoir cet appareil	
<input type="checkbox"/>	J'ai joint la liste des clients	
<input type="checkbox"/>	J'ai informé les clients identifiés de ce FSN	Date de communication :
<input type="checkbox"/>	J'ai reçu une confirmation de réponse de tous les clients identifiés	
<input type="checkbox"/>	J'ai renvoyé les appareils concernés : entrez le nombre d'appareils retournés et la date limite.	Ajoutez la quantité, le numéro de lot/série/la date de retour (mêmes informations que celles demandées par le formulaire de réponse client).
<input type="checkbox"/>	J'ai détruit les appareils concernés – entrez le numéro détruit et la date	Ajoutez la quantité, le numéro de lot/série/la date de retour (mêmes informations que celles demandées par

	complète.	le formulaire de réponse client).
<input type="checkbox"/>	Ni moiniaucun de mes clients n'avonsd'appareilsconcernéseninventaire	
Imprimer le nom *	Nom du distributeur/importateurimpriméici	
Signature*	Inscrivez le distributeur/importateurici	
Date *		

Les champs obligatoiresontmarqués d'un *

Il est important que votre organisation prenne les mesuresdétaillées dans le FSN et confirme que vousavezreçu le FSN.

La réponse de votre organisation constitue la preuve dont nous avonsbesoin pour suivre la progression des actions correctives.

Annex II

List of serial number of associated devices				
	PESON DETRUIT / scale destroyed			
NO.	Serial number / Numéro de série	Date of purchase / Date d'achat	Brand Marque /	Type of patient lifter / Type de leve-personne
1	N° T21004630	2023/3/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
2	N° T19003481	2019/12/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
3	N° T2000879	2020/7/7	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
4	N° T22002523	2023/2/22	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
5	N° T20001558	2020/12/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
6	N° T22002561	2023/6/15	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
7	N° T21004169	2021/10/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
8	N° T22001546	2023/1/16	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
9	N ° T21004121 (N ° Interne 11389100066)	2022/1/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
10	N ° T21004104 (N ° Interne PARC LOCATIF)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
11	N ° T21004105 (N ° Interne 11389100075)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
12	N ° T21005128 (N ° Interne 11389100074)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
13	N ° T21005131 (N ° Interne 11389100072)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
14	N ° T21005132 (N ° Interne 11389100071)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
15	N ° T21005133 (N ° Interne 11389100070)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
16	N ° T21005134 (N ° Interne 11389100069)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
17	N ° T21005135 (N ° Interne 11389100067)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
18	N ° T21005136 (N ° Interne 11389100068)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

19	N° T21005137 (N° Interne PARC LOCATIF)	2022/2/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
20	N° T19002545 (N° Interne CHEZ 1 PARTICULIER A ST BRADANT 22800)	2019/9/30	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
21	N° T20000951	2021/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
22	N ° T21004124 (N ° Interne 11389100057)	2021/11/23	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
23	N° T22002545	2023/2/27	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
24	N° T19003965	2020/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
25	N° T19003966	2020/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
26	N° T21005174	2022/1/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
27	N° T21005175	2022/1/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
28	N ° T20004238 (N ° Interne 11389100027)	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
29	N ° T20000843 (N ° Interne 11389100008)	2020/6/18	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
30	N° T20000864	2020/6/18	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
31	N° T20000875	2020/7/7	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
32	N ° T20001576 (N ° Interne 11389100018)	2020/9/16	CHARDER /	BIRDIE EVO
33	N ° T20001552 (N ° Interne 11389100021)	2020/10/19	CHARDER /	BIRDIE EVO
34	N ° T20001554 (N ° Interne 11389100020)	2020/10/19	CHARDER /	BIRDIE EVO
35	N ° T20001555 (N ° Interne 11389100019)	2020/10/19	CHARDER /	BIRDIE EVO
36	N° T20004228	2021/3/30	CHARDER / C151	BIRDIE EVO
37	N ° T20004229 (N ° Interne 11389100034)	2021/3/30	CHARDER / C151	BIRDIE EVO
38	N° T22001537	2022/4/27	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
39	N° T22001538	2022/4/27	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
40	N° T22001539	2022/4/27	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
41	N ° T20000932 (N ° Interne	2020/12/8	CHARDER /	BIRDIE

	11389100023)		C151 000	EVO
42	N° T20001653	2021/4/30	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
43	N° T20000921	2020/12/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
44	N° T22001593	2022/7/29	CHARDER / MHS2510I	BIRDIE EVO
45	N° T19002546	2019/9/30	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
46	N° T21004156	2022/3/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
47	N° T22001613	2022/7/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
48	N° T20000847	2021/1/20	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
49	N° T20000848	2021/1/20	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
50	N° T20004224	2021/4/8	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
51	N° T21005129	2021/12/2 9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
52	N° T21005151	2021/12/2 9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
53	N° T21003643	2021/9/1	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
54	N° T21001797	2021/7/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
55	N° T21001771	2021/7/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
56	N° T22001579	2023/6/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
57	N° T22001580	2023/6/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
58	N° T22001581	2023/6/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
59	N° T22001582	2023/6/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
60	N° T20001659	2021/5/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
61	N° T21005150	2021/12/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
62	N° T20004226	2021/4/1	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
63	N° T22002557	2023/6/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
64	N° T22001595	2022/7/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

65	N° T22001549	2022/7/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
66	N° T22002577	2023/6/27	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
67	N° T20001575	2020/9/10	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
68	N° T20001574	2020/9/10	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
69	N° T20000873	2020/11/1 9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
70	N ° T20001649 (N ° Interne 11389100049)	2021/9/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
71	N° T20001661	2021/9/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
72	N° T19003901	2020/1/27	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
73	N° T20001553	2020/10/2 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
74	N° T22001594	2022/7/21	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
75	N° T20000846	28/01/201	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
76	N° T20001551	2021/2/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
77	N° T22002527	2023/5/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
78	N° T21004153	2022/3/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
79	N° T20001609	2020/9/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
80	N ° T20001562 (N ° Interne 11389100013)	2020/8/14	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO
81	N ° T20004239 (N ° Interne 113891/26)	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
82	N ° T20004240 (N ° Interne 113891/30)	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
83	N ° T20004241 (N ° Interne 11389100025)	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
84	N° T21005143	2022/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
85	N ° T19003902 (N ° Interne 11389100004)	2020/1/23	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO
86	N ° T20000867 (N ° Interne 11389100007)	2020/5/26	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO
87	N ° T20001564 (N ° Interne 11389100014)	2020/8/14	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO

88	N° T20001565	2020/8/14	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO
89	N° T20004236	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
90	N ° T20004237 (N ° Interne 11389100029)	2023/2/17	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
91	N ° T21001738 (N ° Interne 11389100043)	2021/6/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
92	N ° T21001739 (N ° Interne 11389100044)	2021/6/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
93	N° T21001740 (N°Interne 113891)	2021/6/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
94	N ° T21004148 (N ° Interne 11389100056)	2021/11/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
95	N ° T21005140 (N ° Interne 11389100077)	2022/2/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
96	N ° T21005141 (N ° Interne 11389100014)	2022/2/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
97	N ° T21005142 (N ° Interne 11389100078)	2022/2/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
98	N° T21004102	2022/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
99	N° T21004160	2022/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
100	N° T21005144	2022/3/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
101	N° T21001712	2023/6/21	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
102	N° T21004129	2021/10/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
103	N° T21004131	2021/10/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
104	N° T21004132	2021/10/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
105	N° T21004133	2021/10/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
106	N° T22002558	2023/5/31	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
107	N° T20004197	2021/4/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
108	N° T20004283	2021/4/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
109	N° T19003939	2020/2/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
110	N° T22001586	2023/5/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

111	N° T20000855	2020/10/5	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
112	N° T20004230	2021/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
113	N° T22001596	2022/7/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
114	N° T22001591	2022/7/21	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
115	N° T19003505	2019/12/2 6	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
116	N° T22002606	2022/8/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
117	N° T22002616	2022/8/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
118	N° T19002710	2019/11/7	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
119	N ° T21004119 (N ° Interne 11389100065)	2022/1/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
120	N° T22001550	2022/7/20	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
121	N° T21001715	2021/6/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
122	N° T21001716	2021/6/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
123	N° T21003651	2021/8/31	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
124	N° T21004118	2022/1/17	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
125	N ° T21004120 (N ° Interne 11389100064)	2022/1/17	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
126	N° T22002533	2022/6/15	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
127	N° T22002535	2022/6/22	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
128	N° T22002538	2022/6/22	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
129	N° T22002525	2023/2/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
130	N° T22002526	2023/2/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
131	N° T22001567	2022/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
132	N° T22001572	2022/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
133	N° T19002523	2019/10/9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO

134	N° T19002524	2019/10/9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
135	N° T19002525	2019/10/9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
136	N° T22001569	2022/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
137	N° T22001570	2022/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
138	N° T21003644	2023/9/1	CHARDER / C151 000	BIRIDE EVO
139	N° T22001571	2022/5/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
140	N° T20001557	2021/1/6	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
141	N° T21001773	2021/7/23	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
142	N° T22001585	2023/5/23	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
143	N° T22001587	2023/5/23	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
144	N° T20001532	2020/7/15	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
145	N° T21004140	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
146	N° T21004141	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
147	N° T21004142	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
148	N° T21004143	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
149	N° T21004144	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
150	N° T21004145	2021/10/1 3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
151	N° T22001603	2023/3/23	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
152	N° T22001619	2023/3/23	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
153	N° T20001597	2020/12/1 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
154	N° T22002569	2023/4/14	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
155	N° T22002531	2023/4/27	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
156	N° T20000837	2020/5/18	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
157	N° T20000835	2020/5/19	CHARDER /	BIRDIE EVO

158	N° T20000842	2023/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
159	N° T21004146	2021/11/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
160	N° T21004147	2021/11/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
161	N° T19002530	2019/9/11	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
162	N ° T20004227 (N ° Interne 10213616)	2021/3/30	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
163	N° T21001723	2019/9/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
164	N° T19003485	2019/12/3	CHARDER / C151-000	BIRDIE EVO
165	N° T22002617	2022/12/1 4	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
166	N° T22002618	2022/12/1 4	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
167	N° T22002541	2022/12/2 7	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
168	N° T22002619	2022/12/2 7	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
169	N° T22002549	2023/3/23	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
170	N° T22002562	2023/6/19	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
171	N ° T19003483 (N ° Interne 10182205)	2019/12/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
172	N° T21005152	2022/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
173	N° T22001545	2023/1/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
174	N° T19003959	2000/4/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
175	N ° T19003960 (N ° Interne 10192151)	2000/4/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
176	N ° T19003897 (N ° Interne 10194902)	2000/5/14	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
177	N° T19003900 (N°Interne 1019403)	2000/5/14	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
178	N° T20000902	2020/11/3 0	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
179	N° T22001623	2022/5/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
180	N° T22001624	2022/5/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

181	N° T22001625	2022/5/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
182	N ° T20001592 (N ° Interne 10207158)	2000/12/4	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
183	N° T22002628	2023/3/6	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
184	N° T19002509	2019/9/6	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
185	N° T19003905	2000/1/14	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
186	N ° T20004194 (N ° Interne 10214335)	2021/4/8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
187	N° T20004195	2021/4/8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
188	N ° T21003647 (N ° Interne 10228792)	2021/9/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
189	N° T19002713	2019/11/5	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
190	N° T19003502	2019/11/2 1	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
191	N° T22002581	2022/12/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
192	N ° T19003463 (N ° Interne DOMUSVI)	2019/11/2 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
193	N ° T19003495 (N ° Interne 10179228)	2019/11/2 7	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
194	N ° T19003491 (N ° Interne 10180453)	2019/12/1 1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
195	N° T19003492	2019/12/1 1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
196	N ° T19003470 (N ° Interne 10187193)	2020/3/11	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
197	N° T22002582	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
198	N° T21001796	2021/7/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
199	N° T21005146	2021/12/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
200	N° T21005147	2021/12/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
201	N° T19002517 (N°Interne 10169407 DOMUSVI)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
202	N ° T19002518 (N ° Interne 10169408)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
203	N ° T19002519 (N ° Interne 10169409)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

204	N ° T19002520 (N ° Interne 10169265)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
205	N ° T19002521 (N ° Interne 10169405)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
206	N ° T19002522 (N ° Interne 10169406)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
207	N ° T19002537 (N ° Interne DOMUSVI)	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
208	N ° T19002539	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
209	N ° T19002540	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
210	N ° T19003461 (N ° Interne DOMUSVI)	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
211	N ° T19003462 (N ° Interne 10179260)	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
212	N ° T19003464 (N ° Interne 10179257)	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
213	N ° T19003465 (N ° Interne 10179262)	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
214	N ° T19003466 (N ° Interne 10179261)	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
215	N ° T19003497	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
216	N ° T19003500	2019/11/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
217	N ° T19003473	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
218	N ° T19003474 (N ° Interne 10179154)	2019/11/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
219	N ° T19003475 (N ° Interne 10179156)	2019/11/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
220	N ° T19003476 (N ° Interne 10179157)	2019/11/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
221	N ° T19003477 (N ° Interne 10179159)	2019/11/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
222	N ° T19003478	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
223	N ° T19003487	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
224	N ° T19003488	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
225	N ° T19003490 (N ° Interne 10179151)	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
226	N ° T19003489	2019/11/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

227	N° T20001645	2021/4/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
228	N° T20000945	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
229	N ° T21001779 (N ° Interne 10222900)	2021/7/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
230	N ° T21001780 (N ° Interne 10222899)	2021/7/26	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
231	N° T21005148	2021/12/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
232	N ° T21005149 (N ° Interne 10236835)	2021/12/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
233	N° T21005154	2022/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
234	N° T21005155	2022/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
235	N° T21005156	2022/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
236	N° T22001561	2022/6/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
237	N° T22001562	2022/6/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
238	N° T22001563	2022/6/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
239	N° T22001577	2022/6/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
240	N° T22002587	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
241	N° T22002588	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
242	N° T22002635	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
243	N° T22002636	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
244	N° T22002637	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
245	N° T22002638	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
246	N° T22002639	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
247	N° T22002640	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
248	N° T22002589	2022/11/3 0	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
249	N° T19002716	2019/10/2 8	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO

250	N° T19003954	2020/1/31	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
251	N ° T19003952 (N ° Interne 10187406)	2000/3/13	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
252	N ° T20004231 (N ° Interne 10211277)	2021/2/18	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
253	N° T22001602	2022/4/15	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
254	N ° T19003499 (N ° Interne 10177945)	2019/11/2 1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
255	N° T21005153	2022/2/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
256	N° T22002571	2023/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
257	N° T21004123	2021/11/2 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
258	N° T21004158	2022/3/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
259	N° T21004159	2022/3/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
260	N° T21004161	2022/3/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
261	N° T21004162	2022/3/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
262	N° T21004163	2022/3/2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
263	N° T22001626	2022/5/18	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
264	N° T22001557	2022/6/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
265	N° T22001560	2022/6/9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
266	N° T21005157	2021/12/8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
267	N° T20000933	2020/12/8	CHARER / C151 000	BIRDIE EVO
268	N° T21004114	2022/3/22	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
269	N° T22002572	2023/4/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
270	N° T20000944	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
271	N° T20001641	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
272	N° T20000940	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

273	N° T20001571	2020/9/24	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
274	N° T21001735	2021/6/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
275	N° T21001736	2021/6/25	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
276	N° T22002591 (N° Interne PARC LOCATIF)	2022/11/2 9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
277	N° T19002535	2019/9/11	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
278	N° T20004207	2021/2/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
279	N° T19003468	2020/3/16	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
280	N° T22002576	2023/6/27	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
281	N° T22001544	2022/6/29	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
282	N° T20001656	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
283	N° T19003903	2020/1/21	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
284	N° T20000897	2020/12/3	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
285	N° T20000941	2021/5/5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
286	N° T21004103	2022/3/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
287	N° T22002524	2023/2/13	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
288	N° T20001545	2020/9/7	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
289	N° T22001584	2023/6/6	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
290	N° T21004125	2021/11/2 5	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
291	N° T22002597	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
292	N° T22002611	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
293	N° T22002612	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
294	N° T22002613	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
295	N° T22002614	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO

296	N° T22002615	2022/8/24	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
297	N° T22002564	2022/11/2 8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
298	N° T22002566	2022/11/2 8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
299	N° T22002567	2022/11/2 8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
300	N° T22001618	2023/3/31	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
301	N° T20001566	2020/8/21	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
302	N° T20004210	2021/3/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
303	N° T20004211	2021/3/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
304	N° T20004209	2021/3/1	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
305	N° T20000844	2021/1/20	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
306	N° T20000845	2021/1/20	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
307	N° T22002590	2022/11/2 9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
308	N° T21004136	2021/10/1 2	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
309	N° T20000906	2021/8/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
310	N° T20004266	2021/8/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
311	N° T20004267	2021/8/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
312	N° T20004269	2021/8/12	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
313	N° T19002513	2019/9/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
314	N° T21001741	2021/6/8	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
315	N° T21004619	2022/3/31	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
316	N° T21004624	2022/3/31	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
317	N° T22002592	2022/11/2 9	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
318	N° T19002511	2019/9/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO

319	N° T21004150	2021/11/1 5	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
320	N° T19003504	2019/12/2 6	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
321	N° T20000836	2020/5/18	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
322	N° T20000868	2020/11/1 9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
323	N° T20000869	2020/11/1 9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
324	N° T20000870	2020/11/1 9	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
325	N° T19003904	2020/1/21	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
326	N° T21004629	2022/3/17	CHARDER / C151000	BIRDIE EVO
327	N° T22002528	2023/4/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
328	N° T22002530	2023/4/28	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
329	N° T21001725	2021/6/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
330	N° T21001726	2021/6/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
331	N° T21001727	2021/6/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
332	N° T21001728	2021/6/29	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
333	N° T22002546	2023/3/10	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO
334	N° T21005162	2022/1/26	CHARDER / C151 000	BIRDIE EVO