



FRENCH

Avis de sécurité Kit tampon

Cher Client,

La présente communication a pour objet de vous informer que GMM a décidé d'intervenir sur ses produits afin de garantir leur fiabilité dans le temps.

Produits concernés : systèmes du numéro de série 00811 au numéro de série 01672 inclus, portant les noms suivants :

<i>Nom</i>	<i>Marque</i>
Clisis Systems	Mecall
EIDOS RF439	Mecall
Discovery RF180	General Electric

Description :

Une vis de transmission pour les mouvements d'élévation et d'inclinaison du plateau porte-patient pourrait présenter une diminution de sa fiabilité dans le temps. Ceci pourrait être déterminé par une série de causes multiples comprenant, à titre d'exemple, une éventuelle collision du plateau lors de la phase d'inclinaison avec des objets externes, une utilisation incorrecte du dispositif, d'éventuels désalignements mécaniques et/ou une utilisation particulière et extraordinairement intense de l'équipement.

Action corrective :

Le Code 92251 – kit tampon – a été créé dans le but d'être mis en œuvre sur les équipements mentionnés ci-dessus, conformément aux numéros de série fournis.

Le kit contient toutes les pièces et les instructions nécessaires pour remplacer les composants.

Attention !

Les instructions doivent être complétées dans leur intégralité et renvoyées au fabricant par courrier électronique ou par télécopie à :

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.

courriers électroniques : gara@gmmspa.com et international_service@gmmspa.com

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento

Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 763121 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 5134376,00 I.V.

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 – Registro Pile: BG-000016

www.gmmspa.com – info@gmmspa.com – Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Cert. N.
9120.GNM1



Cert. N.
9124.GNM2



FRENCH

ou **télécopie au numéro +39 035 29 77 87**

Nous tenons à souligner qu'à ce jour, aucun événement n'a été signalé concernant des dommages matériels ou des blessures graves à des personnes en relation avec ce qui est décrit dans cette communication

Toutefois, les actions décrites **doivent** être entreprises pour atténuer un risque potentiel qui pourrait réduire à l'avenir la sécurité d'utilisation de l'équipement.

Le kit sera disponible et expédié progressivement avant le mois d'avril 2024 et devra être mis en œuvre progressivement au cours de la première maintenance ordinaire/extraordinaire et, dans tous les cas, **au plus tard 7 mois** à compter de la réception du kit lui-même, en donnant la priorité aux dispositifs selon la liste suivante :

<i>Priorité</i>	<i>Numéros de série</i>
1	Serial_Number_List_EN.pdf
2	Serial_Number_List_EN.pdf
3	Serial_Number_List_EN.pdf

Comme indiqué dans le Manuel d'utilisation, dans le Manuel de service et dans les instructions déjà fournies à l'utilisateur final, il convient de garder à l'esprit que toute opération sous le plateau doit être évitée.

Comptant sur votre attention en ce qui concerne cet avis de sécurité, GMM décline toute responsabilité en cas de non-application des mesures décrites ci-dessus dans le délai de temps indiqué dans cette communication.

Si le système a été vendu et/ou mis au rebut et qu'il n'est donc plus en votre possession, nous vous invitons à remettre le présent avis de sécurité au nouveau propriétaire en nous communiquant son nom, ou à nous fournir la notification de mise au rebut.

Le service d'assistance technique de GMM se tient à votre disposition pour toute autre demande d'information et/ou de support (international_service@gmmspa.com)

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento

Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 763121 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7/B - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 5134376,00 I.V.

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016

www.gmmspa.com - info@gmmspa.com - Posta Certificata: rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com



Cert. N.
9120.GNM1



Cert. N.
9124.GNM2