

**N° de l'avis de sécurité** : FSCA-030524

**Référence produit** : Nausifly 180

**Descriptif produit** : lève personne

**Objet** : Défaut de maintenance annuelle constaté sur un NAUSIFLY 180



**Objet** : Mise à jour de notre protocole de réalisation des entretiens et des maintenances de nos appareils.

Dans le cadre de la réalisation des maintenances annuelles, qui doivent être effectuées par nos distributeurs, nous avons mis à jour notre protocole de réalisation des entretiens et des maintenances de nos lève-personnes en y **ajoutant un focus sur les points les plus sensibles**, afin de prévenir tout risque de chute du patient, dont les conséquences pourraient s'avérer très graves pour la victime.

Nous vous rappelons que dans le cadre de la sécurité des patients et du respect des exigences de la norme ISO 10535 : 2021, il est préconisé un **contrôle de l'état de l'ensemble du dispositif de transfert (lève-personne + sangle) avant chaque utilisation** et à minima une maintenance préventive annuelle sur les points précisés sur le **document "Maintenance préventive - Lève-personnes"** qui suit en cliquant sur le bouton ci-dessous :

[Maintenance préventive - Lève-personnes](#)

Nous vous rappelons que nous assurons également des **formations gratuites de maintenance de nos appareils (rendez-vous à prévoir en présentiel ou distanciel)** dans le but d'assurer la bonne maintenance préventive et/ou curative de nos produits.

L'autorité compétente française, l'ANSM, a été informée de cette communication.

Actions à mettre en place par le distributeur :

- S'assurer de la mise à jour de leur gamme de maintenance préventive selon le modèle joint en annexe.
- Remplir, signer et renvoyer le formulaire de réception suivant à Nausicaa Médical

**Formulaire d'attestation de prise en compte de l'information de sécurité  
n° FSCA-030524**

Chers distributeurs, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer avant le 31 mai 2024 à [maintenance@nausicaa-medical.com](mailto:maintenance@nausicaa-medical.com)

<b>Informations administratives</b>	
Nom distributeur	
Ville (Pays)	
Nom du contact	

J'atteste avoir pris en compte et mettre en application la nouvelle gamme de maintenance annuelle sur tous les produits Nausify 180 que nous avons distribués

Date :

Signature :

## Annexe la fiche maintenance préventive



### MAINTENANCE PREVENTIVE LEVE-PERSONNE

Date d'intervention : ...../...../.....

Cachet du prestataire de service :	Nom et prénom de l'intervenant :
Nom du référent établissement :	Numéro de chambre :
Marque : Modèle : N° d'équipement : N°série fabricant :	<input type="checkbox"/> Matériel loué <input type="checkbox"/> Matériel appartenant à l'établissement

Descriptif	Conforme	Non conforme	Diagnostic
Vérification de la suspenste du fléau (ôter la protection éventuelle). <i>Il s'agit de vérifier l'usure de l'axe plein, de l'attache de l'axe (axe à gorge etc.) et du fourreau du fléau.</i>			
Vérification de l'assemblage vérin / bras de levage			
Vérification de l'assemblage vérin / mât			
Vérification de l'assemblage mât / bras de levage			
Vérification de(s) assemblage(s) mât / embase			
Vérification de l'assemblage mât / guidon soignant			
Vérification du système d'écartement des pieds			
Vérification de l'assemblage de la pédale ou du vérin ECP			
Vérification des assemblages des pieds droit et gauche			
Vérification de la fixation des roues			
Vérification de l'état de la structure et de la peinture			
Vérification du fonctionnement du vérin de levage			
Vérification de la télécommande (fonction et état)			
Vérification du boîtier de contrôle (arrêt d'urgence, chargeur...)			
Vérification de la batterie (faire 3 cycles complets)			
Optionnelle : Vérification du fonctionnement du vérin ECP			
Observations : • casse mauvaise utilisation du client • usure • matériel remplacé par N°			

Signature prestataire :

Cachet établissement :