

Notification de sécurité produit URGENTE

Système MobileDiagnost wDR : risque de blessure grave ou de décès suite à une défaillance du mécanisme antichute du bras télescopique.

Mai 2024

Ce document contient des informations importantes pour assurer le bon fonctionnement continu et en toute sécurité de votre matériel.

Veillez examiner les informations suivantes avec tous les membres de votre personnel qui doivent en avoir connaissance. Il est important d'en comprendre les conséquences.

Veillez conserver ce courrier dans vos dossiers.

Madame, Monsieur,

Philips a pris connaissance d'un problème de sécurité potentiel qui pourrait survenir sur les systèmes MobileDiagnost wDR fabriqués entre 2016 et 2020, lié au câble en acier installé à l'intérieur de la colonne qui soutient le poids du bras télescopique. Cette Notification de sécurité produit URGENTE est destinée à vous informer des points suivants :

1. La nature du problème et les circonstances dans lesquelles il peut survenir ;

Philips a été informé par le fournisseur Sedecal d'un problème potentiel lié aux interférences entre le câble en acier et la plaque métallique dans le chariot du bras télescopique des systèmes MobileDiagnost wDR. Les interférences potentielles sont causées par la forme ondulée des bornes du câble (voir la Figure 1). Ce problème peut entraîner une défaillance du système antichute qui empêcherait le bras télescopique de tomber en cas de rupture du câble en acier. Si le câble en acier se rompt et que le système antichute ne s'active pas, le bras télescopique peut tomber sur les opérateurs, les patients ou le personnel technique qualifié.

Philips n'a reçu aucun rapport lié à ce problème ou à une blessure à ce jour (avril 2024).

Figure 1 : Borne ondulée du câble en acier



2. Description du danger/des risques associés au problème

Si le bras télescopique tombe, le risque pour les patients, les utilisateurs et le personnel technique qualifié peut inclure des blessures physiques (par exemple, des douleurs, ecchymoses, lacérations, fractures, commotions) ou la mort.

3. Systèmes concernés et identification de ces derniers

Identification des systèmes concernés :

Le nom et le numéro de modèle (REF) ainsi que le numéro de série (SN) des systèmes concernés figurent dans l'Annexe A. Les numéros de référence des systèmes concernés et l'emplacement de l'étiquette sont indiqués dans le Tableau 1.

Tableau 1.

Nom du modèle	Numéro de modèle (REF)	Étiquette du système	Emplacement de l'étiquette
MobileDiagnost wDR	9890-010-89522		
	712002		
	712004		
	712005		
	712006		
	712007		

Utilisation prévue :

Le **MobileDiagnost wDR** convient à tous les examens radiographiques de routine, y compris les domaines spécialisés tels que les soins intensifs, la traumatologie, les blocs opératoires ou la pédiatrie. Les procédures de radiographie standard comprennent, par exemple :

- Examens radiographiques du squelette, y compris le crâne, le thorax, la colonne vertébrale, le bassin, les membres supérieurs et inférieurs, etc.
- Radiographies du poumon
- Radiographies des tissus mous (abdomen)

L'utilisateur dispose des méthodes d'acquisition suivantes :

- Technique d'acquisition libre pour deux capteurs-plans portables sans fil de taille différente
- Technique d'acquisition libre pour les cassettes et/ou les systèmes de radiographie par plaque ERLM

4. Description des actions à mettre en œuvre par le client/l'utilisateur afin de prévenir tout risque pour les patients ou les utilisateurs

- A. Vous pouvez continuer à utiliser votre ou vos systèmes MobileDiagnost wDR conformément à leur utilisation prévue. Transmettez cette notification à tous les utilisateurs de cet appareil afin qu'ils soient au courant du problème et des dangers/risques associés.
- B. Placez une copie de cette Notification de sécurité produit urgente avec le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil pour référence.
- C. Renseignez et renvoyez le formulaire de réponse ci-joint à Philips dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de sa réception. En remplissant ce formulaire, vous confirmez avoir reçu la Notification de sécurité produit urgente et compris le problème ainsi que les actions à mettre en œuvre.

5. Description des actions prévues par Philips pour remédier au problème

Un ingénieur commercial Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour la visite d'un responsable technique (RT) sur votre site pour réaliser une inspection et, si nécessaire, installer un nouveau câble. (Référence FCO71200237).



Pour toute information complémentaire ou demande d'assistance concernant ce problème, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624 en vous munissant du numéro de série de l'appareil.

Cette notification a été envoyée à l'organisme réglementaire compétent. N'oubliez pas de signaler toute survenue de ce problème à Philips, à votre représentant Philips ou à votre autorité réglementaire locale.

Philips vous présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée par ce problème.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Karmen Gruenert
Directrice Qualité, DXR

Formulaire de réponse à la Notification de sécurité produit URGENTE

Référence : système MobileDiagnost wDR : risque de blessure grave ou de décès suite à une défaillance du mécanisme antichute du bras télescopique. (Référence FCO71200237)

Instructions : veuillez remplir et renvoyer ce formulaire à Philips dans les plus brefs délais et au plus tard 30 jours à compter de sa réception. En remplissant ce formulaire, vous confirmez avoir reçu la Notification de sécurité produit urgente et compris le problème ainsi que les actions à mettre en œuvre.

Nom du client/du destinataire/de l'établissement :

Adresse postale :

Ville/Département/Code postal/Pays :

Actions à mettre en œuvre par le client :

- A. Vous pouvez continuer à utiliser votre ou vos systèmes MobileDiagnost wDR conformément à leur utilisation prévue.
Transmettez cette notification à tous les utilisateurs de cet appareil afin qu'ils soient au courant du problème et des dangers/risques associés.
- B. Placez une copie de cette Notification de sécurité produit urgente avec le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil pour référence.
- C. Renseignez et renvoyez le formulaire de réponse ci-joint à Philips dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de sa réception. En remplissant ce formulaire, vous confirmez avoir reçu la Notification de sécurité produit urgente et compris le problème ainsi que les actions à mettre en œuvre.

Nous accusons réception de la Notification de sécurité produit urgente ci-jointe, reconnaissons avoir compris cette dernière et confirmons que les informations contenues dans ce courrier ont été transmises de manière appropriée à tous les utilisateurs qui manipulent les systèmes MobileDiagnost wDR concernés.

Nom de la personne qui remplit le présent formulaire :

Signature :

Nom (en majuscules) :

Fonction :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Date (JJ/MMM/AAAA) :

Après avoir pris connaissance de cette notification et rempli ce document, nous vous prions de le renvoyer à Philips par e-mail à l'adresse « post_mkt_france@philips.com »

Annexe A – Numéros de série des systèmes concernés

Nom du modèle : MobileDiagnost wDR R2											
Numéro de modèle : 712002 / 9890-010-89522											
1620002	1620003	1620004	1620005	1620007	1620008	SN16200009	1620011	1620017	SN16200018		
SN1620020	1620023	SN1620024	1620027	1620028	1620029	SN16200038	SN1620042	1620049	1620050		
1620051	SN1620054	1620055	SN1620060	1620064	1620065	1620068	1620069	1620071	1620072		
1620073	1620076	SN1620077	1620078	1620086	1620087	1620089	SN16200092	SN1620093	SN16200104		
SN16200105	SN16200106	16200107	16200108	SN16200109	SN16200128	16200144	16200148	16200149	SN16200154		
16200155	SN16200161	17200001	17200008	SN17200010	17200012	17200015	17200016	17200017	SN17200021		
SN17200022	1720023	1720029	SN17200036	SN17200040	SN17200041	SN17200042	SN17200045	SN17200046	SN17200050		
SN17200051	SN17200052	17200054	SN17200057	SN17200062	17200065	SN17200068	SN17200069	17200071	SN17200075		
SN17200078	SN17200080	SN17200081	SN17200093	17200094	SN17200095	SN17200103	SN17200104	SN17200105	SN17200107		
SN17200108	SN17200109	17200117	SN17200122	SN17200132	SN17200133	SN17200141	SN17200143	SN17200144	SN17200146		
SN17200149	17200150	SN17200151	SN17200169	SN17200170	SN17200178	SN17200190	SN17200203	17200208	SN17200209		
17200211	SN17200212	SN17200213	SN17200215	SN17200216	17200222	17200223	SN17200225	17200234	SN18200006		
18200018	18200030	18200044	SN18200060	18200064	SN18200069	SN18200073	SN18200077	SN18200078	SN18200083		
SN18200090	SN18200094	SN18200098	SN18200099	SN18200100	SN18200101	SN18200102	SN18200103	SN18200104	SN18200105		
SN18200106	SN18200107	SN18200114	SN18200115	SN18200118	SN18200119	SN18200120	SN18200121	SN18200122	SN18200125		
SN18200126	SN18200148	SN18200149	SN18200152	SN18200153	SN18200156	SN18200157	SN18200158	SN18200181	SN18200184		
SN18200188	SN18200196	SN18200197	SN18200198	SN18200201	SN18200212	SN18200220	SN18200221	SN18200225	SN18200226		
SN18200227	SN18200235	SN18200238	SN18200250	SN18200255	SN18200262	SN18200270	SN18200272	SN18200273	SN18200275		
SN18200276	SN18200280	SN18200285	SN18200287	SN18200307	SN18200309	SN18200311	SN18200312	SN18200316	SN18200317		
SN18200331	SN18200340	SN18200345	SN19300009	SN19300010	SN19300011	SN19300012	SN19300013	SN19300014	SN19300015		
SN19300017	SN19300018	SN19300019	SN19300020	SN19300022	SN19300027	SN19300029	SN19300031	SN19300034	SN19300008		
19300036	19300037	SN19300038	SN19300039	SN19300047	SN19300048	SN19300049	SN19300050	SN19300051	SN19300052		
SN19300053	SN19300054	SN19300056	SN19300057	SN19300058	SN19300060	SN19300061	SN19300065	SN19300068	SN19300069		
SN19300071	SN19300078	SN19300079	SN19300080	SN19300081	SN19300083	SN19300086	SN19300089	SN19300097	SN19300104		
SN19300105	SN19300106	SN19300108	SN19300110	SN19300111	20300001	SN20300002	20300003	SN17200064	SN18300002		
SN19300082	SN18200051	SN18200052	SN18200053	SN18200054	SN18200055	SN18200075	SN18200076	SN18200089	SN18200091		
SN18200092	SN18200128	SN18200129	SN18200130	SN18200134	SN18200135	SN1720026	53	1600026,	16200006		
17200018	17200147	SN16200031	SN16200032	SN17200034	SN17200092	SN17200148	SN17200206	SN18200074	SN19300084		

Nom du modèle : MobileDiagnost wDR R2													
Numéro de modèle : 712004 / 9890-010-89522													
SN16200126	16200138	17200002	17200003	17200004	17200005	17200006	17200007	17200014	17200019				
17200020	17200024	17200025	17200026	17200027	17200030	17200032	17200033	17200037	17200038				
17200043	SN17200049	SN17200055	SN17200056	17200058	17200059	SN17200066	SN17200082	SN17200083	SN17200084				
17200086	SN17200087	SN17200088	SN17200089	SN17200091	SN17200096	SN17200097	SN17200098	SN17200099	SN17200100				
SN17200101	SN17200102	SN17200106	SN17200112	17200114	SN17200115	SN17200121	SN17200127	SN17200129	SN17200131				
SN17200136	SN17200139	SN17200140	SN17200152	SN17200157	SN17200158	SN17200159	SN17200160	SN17200163	SN17200164				
17200165	SN17200166	SN17200167	17200168	SN17200171	SN17200172	SN17200173	SN17200174	SN17200175	SN17200176				
SN17200181	SN17200182	SN17200187	SN17200188	SN17200189	SN17200191	SN17200192	SN17200194	SN17200195	SN17200196				
SN17200197	SN17200198	SN17200200	SN17200201	SN17200202	SN17200204	SN17200205	SN17200207	SN17200217	SN17200219				
SN17200220	SN17200224	17200235	SN17200236	SN17200237	SN17200239	SN18200007	SN18200008	SN18200009	SN18200010				
SN18200011	SN18200012	SN18200013	18200031	SN18200032	18200033	SN18200034	8200039	SN18200035	18200038				
SN18200040	SN18200041	18200042	SN18200043	18200045	18200046	18200047	18200048	SN18200049	18200056				
SN18200057	SN18200061	SN18200067	SN18200068	SN18200070	SN18200071	SN18200072	SN18200081	SN18200082	SN18200084				
SN18200085	SN18200086	SN18200088	SN18200095	SN18200096	SN18200109	SN18200110	SN18200112	SN18200116	SN18200117				
SN18000087	SN18200123	SN18200127	SN18200137	SN18200139	SN18200140	SN18200141	SN18200154	SN18200159	SN18200160				
SN18200161	SN18200165	SN18200166	SN18200169	18200171	SN18200173	SN18200174	SN18200175	SN18200183	SN18200185				
SN18200187	SN18200189	SN18200194	SN19300007	SN18200200	SN18200203	SN18200205	SN18200206	SN18200208	SN18200211				
SN18200215	SN18200216	SN18200217	SN18200219	SN18200222	SN18200232	SN18200233	SN18200234	SN18200237	SN18200244				
SN18200245	SN18200254	SN18200260	SN18200261	SN18200271	SN18200288	SN18200292	SN18200310	SN18200314	SN18200332				
SN18200334	SN18200335	SN18200337	SN18200236	SN19300001	SN19300002	SN19300005	SN19300016	SN19300023	SN19300024				
SN19300026	SN19300028	SN19300030	SN19300032	SN19300035	SN19300043	SN19300044	SN19300063	SN19300066	SN19300067				
SN19300070	SN19300072	SN19300074	SN19300075	SN19300076	SN19300077	SN19300088	SN19300098	SN19300099	SN19300109				
16	17200060	SN17200113	17200011	SN17200072	SN17200162	SN18200218							

Nom du modèle : MobileDiagnost wDR R2

Numéro de modèle : 712005 / 9890-010-89522

SN190001	SN190004	SN170025	SN190019	SN170034	SN170002	SN190011	SN190020	SN170006	SN190016
SN190017	SN180013	SN190008	SN190006	SN190023	SN170017	SN190029	SN170001	SN190040	SN170024
SN180017	SN170004	SN170005	SN170016	SN190022	SN170023	SN180001	SN190030	SN170029	SN180032
SN180033	SN180028	SN170009	SN170010	SN180016	SN190027	SN170028	SN190038	SN190031	SN170007
SN190028	SN190039	SN170003	SN180009	SN180006	SN180004	SN190033	SN190012	SN170018	SN170030
SN190026	SN18200143	SN190035	SN190034	SN190002	SN180015	SN190005	SN180018	SN180023	SN170026
SN170027	SN180011	SN180008	SN180034	SN170020	SN170031	SN180010	SN180012	SN170021	SN170022
SN170008	SN190021	SN170013	SN190024	SN190025	SN190036	SN180031	SN180003	SN190003	SN170032
SN180007									

Nom du modèle : MobileDiagnost wDR R2

Numéro de modèle : 712006 / 9890-010-89522

SN18200290	SN19410001	SN19410002	SN19410003	SN19410004	SN19410005	SN19410006	SN19410007	SN19410008	SN19410010
19410012	SN19410013	SN19410014	SN19410016	SN19410017	SN19410018	SN19410019	SN19410020	SN19410021	SN19410022
SN19410023	SN19410024	SN19410025	SN19410026	SN19410027	SN19410028	SN19410029	SN19410030	SN19410031	SN19410032
SN19410033	SN19410039	SN19410040	SN19410041	SN19410042	SN19410043	SN19410045	SN19410048	SN19410049	SN19410050
SN19410051	SN19410052	SN19410053	SN19410054	SN19410055	SN19410056	SN19410057	SN19410058	SN19410059	SN19410060
SN19410061	SN19410062	SN19410063	SN19410064	SN19410065	SN19410067	SN19410068	SN19410069	SN19410070	SN19410072
SN19410073	SN19410074	SN19410075	SN19410076	SN19410077	SN19410078	SN19410079	SN19410080	SN19410081	SN19410082
SN19410083	SN19410084	SN19410085	SN19410086	SN19410087	SN19410088	SN19410089	SN19410090	SN19410091	SN19410095
SN19410096	SN19410103	SN19410104	SN19410105	SN19410106	SN19410107	SN19410108	SN19410109	SN19410110	SN19410111
SN19410113	SN19410114	SN19410117	SN19410119	SN19410120	SN19410121	SN19410122	SN19410124	SN19410125	SN19410130
19410131	19410133	SN19410134	SN19410140	20410003	SN20410004	SN20410006	SN20410007	20410008	SN20410017
SN20410018	SN20410020	SN20410025	SN20410035	SN19410009	SN18410004	SN18410005	SN18410007	SN18410008	SNZY20410012
SNZY20410013	SNZY20410019	SNZY20410021	SNZY20410024	SNZY20410026	SNZY20410027	SN18410006.	144	SNZY20410004	SN19410044
SN19410046	24	112							

Nom du modèle : MobileDiagnost wDR R2												
Numéro de modèle : 712007 / 9890-010-89522												
SN19410034	SN19410035	SN19410036	SN19410037	19410038	19410044	19410046	SN19410071	SN19410092	SN19410093			
SN19410094	SN19410097	SN19410098	SN19410099	SN19410100	SN19410101	SN19410102	SN19410115	SN19410116	SN19410123			
SN19410126	SN19410127	SN19410129	SN19410135	SN19410136	SN19410137	SNZY20410009	SNZY20410011	SNZY20410014	SNZY204110015			
27	SN20410071	SN20410073										