
URGENT : Avis de Sécurité

Nom commercial/Modèle : BeneHeart CSeries

Identifiant de la FSCA : CP2403-JH04564

Type d'action : Mise à jour logicielle

14/06/2024

Attention : [Nom de l'hôpital/du distributeur]

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la surveillance continue des produits distribués par Mindray, nous avons pris connaissance d'un problème potentiel, pouvant être associé à certains Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries. Cette lettre a pour but de vous fournir les informations suivantes :

Précisions relatives aux appareils concernés :

Les numéros de série (SN) concernés des Défibrillateurs Automatique Externes BeneHeart CSeries figurent sur les étiquettes. Les numéros de série concernés sont énumérés dans **l'annexe 1**.

Description du problème :

Mindray a identifié que les Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries concernés pourraient ne pas assurer le traitement par défibrillation nécessaire au patient. La raison de cette défaillance est liée à des configurations de fonctions incorrectes. Lorsque le problème survient, il n'y a pas de message d'erreur, et le test automatique ne peut pas détecter le problème.

À ce jour, Mindray n'a reçu aucun rapport d'incident grave, tel qu'un décès ou des blessures graves, lié au problème susmentionné.

Avis sur les mesures à prendre par le CLIENT / L'UTILISATEUR :

1. Veuillez transmettre cet Avis de Sécurité (FSN, Field Safety Notice) à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation où les Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries concernées ont été livrés.
2. Après avoir reçu cet avis de sécurité, veuillez suspendre l'utilisation de l'appareil et nous contacter si vous possédez un Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries figurant sur la liste des appareils concernés. L'équipe de maintenance Mindray interviendra dans les meilleurs délais. Cette action résoudra complètement

le problème de configuration du produit avec la mise à jour logicielle, la version du logiciel utilisée pour la mise à jour est V02.09.00 ou ultérieure.

3. Renvoyez à Mindray le formulaire d'accusé de réception de l'Avis de Sécurité confirmant que celui-ci a été lu et compris.

Avis sur les mesures à prendre par le distributeur :

1. Veuillez transmettre cet Avis de Sécurité (FSN, Field Safety Notice) à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation où les Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries concernées ont été livrés.
2. Si votre organisation possède des Défibrillateurs Automatisé Externes BeneHeart CSeries figurant sur la liste des appareils concernés, veuillez ne pas les vendre ou les installer chez vos clients. L'équipe de maintenance de Mindray vous contactera dans les meilleurs délais pour vous fournir les instructions relatives au logiciel et à la mise à jour. Si vous avez des questions concernant le processus de mise à jour du logiciel, veuillez contacter notre équipe de Mindray locale.
3. Renvoyez à Mindray le formulaire d'accusé de réception de l'Avis de Sécurité confirmant que celui-ci a été lu et compris.

Transmission de cet avis de sécurité :

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation où le(s) dispositif(s) potentiellement affecté(s) a/ont été transféré(s).

Nous vous demandons de rester attentifs à cet avis et à l'action qui en découle pendant une période appropriée afin de garantir l'efficacité de la mesure corrective.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer la réception de cette lettre. Veuillez remplir le formulaire d'accusé de réception ci-dessous et le renvoyer par email ou par fax.

Contact de la personne de référence :

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par cette situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'ingénieur du service clientèle compétent de Mindray ou l'ingénieur de l'assistance technique désigné – [Alexandre Noel](#)

liaison: [Alexandre Noel National Service Manager- France](#)
E-mail : vigilance.fr@mindray.com

Le présent avis a été transmis à l'agence réglementaire compétente.

Signature :

Emily Zhao

Représentant du Centre de qualité PMS

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tél. : 0086 755 81887277
E-mail : mr@mindray.com

Formulaire d'accusé de réception

=====

Confirmation de la réception de l'Avis de Sécurité

Nom commercial/Modèle : BeneHeart CSeries

Identifiant de la FSCA : CP2403-JH04564

Type d'action : Mise à jour logicielle

Veillez remplir ce formulaire et renvoyer immédiatement cette confirmation par email ou par fax.

liaison: [Alexandre Noel - National Service Manager - France](#)

E-mail : vigilance.fr@mindray.com

Nom : _____

N° tél. : _____

Adresse e-mail : _____

Date et signature : _____

Adresse de l'organisation :

Annexe 1

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
1	BeneHeart C1A Fully	AF3-1A002614	22	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001226
2	BeneHeart C1A Fully	AF3-1A002618	23	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001227
3	BeneHeart C1A Fully	AF3-1A002638	24	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001230
4	BeneHeart C2	AE7-2A069478	25	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001231
5	BeneHeart C2	AE7-2A069585	26	BeneHeart C2A Fully	AE9-19001335
6	BeneHeart C2	AE7-18021483	27	BeneHeart C2A Fully	AE9-19001345
7	BeneHeart C2	AE7-23040697	28	BeneHeart C2A Fully	AE9-1B001672
8	BeneHeart C2	AE7-23040708	29	BeneHeart C2A Fully	AE9-1B001709
9	BeneHeart C2	AE7-24048407	30	BeneHeart C2A Fully	AE9-1B001719
10	BeneHeart C2	AE7-26052347	31	BeneHeart C2A Fully	AE9-23002476
11	BeneHeart C2	AE7-27054967	32	BeneHeart C2A Fully	AE9-23002492
12	BeneHeart C2	AE7-27055017	33	BeneHeart C2A Fully	AE9-23002510
13	BeneHeart C2	AE7-2A069568	34	BeneHeart C2A Fully	AE9-23002521
14	BeneHeart C2	AE7-2B070674	35	BeneHeart C2A Fully	AE9-23002547
15	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001184	36	BeneHeart C2A Fully	AE9-24002962
16	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001185	37	BeneHeart C2A Fully	AE9-24002988
17	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001199	38	BeneHeart C2A Fully	AE9-24002993
18	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001203	39	BeneHeart C2A Fully	AE9-24003238
19	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001210	40	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003467
20	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001217	41	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003548
21	BeneHeart C2A Fully	AE9-18001223	42	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003570

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
43	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003630	65	BeneHeart C2A Fully	AE9-2A005240
44	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003671	66	BeneHeart C2A Fully	AE9-2A005249
45	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003673	67	BeneHeart C2A Fully	AE9-2B005312
46	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003701	68	BeneHeart C2A Fully	AE9-2B005357
47	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003724	69	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006311
48	BeneHeart C2A Fully	AE9-26003735	70	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006328
49	BeneHeart C2A Fully	AE9-27003930	71	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006362
50	BeneHeart C2A Fully	AE9-27003932	72	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006370
51	BeneHeart C2A Fully	AE9-27003995	73	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006374
52	BeneHeart C2A Fully	AE9-27004010	74	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006413
53	BeneHeart C2A Fully	AE9-27004040	75	BeneHeart C2A Fully	AE9-32006437
54	BeneHeart C2A Fully	AE9-27004051	76	BeneHeart C2A Fully	AE9-34007052
55	BeneHeart C2A Fully	AE9-27004060	77	BeneHeart C2A Fully	AE9-34007275
56	BeneHeart C2A Fully	AE9-27004161	78	BeneHeart C2A Fully	AE9-39008358
57	BeneHeart C2A Fully	AE9-29004965	79	BeneHeart C1A	AF1-13012369
58	BeneHeart C2A Fully	AE9-29004977	80	BeneHeart C1A	AF1-13012555
59	BeneHeart C2A Fully	AE9-29005018	81	BeneHeart C1A	AF1-13012568
60	BeneHeart C2A Fully	AE9-29005028	82	BeneHeart C1A	AF1-1C026527
61	BeneHeart C2A Fully	AE9-29005080	83	BeneHeart C1A	AF1-21027077
62	BeneHeart C2A Fully	AE9-2A005133	84	BeneHeart C1A	AF1-21027104
63	BeneHeart C2A Fully	AE9-2A005152	85	BeneHeart C1A	AF1-21027249
64	BeneHeart C2A Fully	AE9-2A005209	86	BeneHeart C1A	AF1-21027251

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
87	BeneHeart C1A	AF1-21027257	115	BeneHeart C1A	AF1-34066615
88	BeneHeart C1A	AF1-21027344	116	BeneHeart C1A	AF1-34066628
89	BeneHeart C1A	AF1-21027428	117	BeneHeart C1A	AF1-34066676
90	BeneHeart C1A	AF1-21027442	118	BeneHeart C1A	AF1-34066681
91	BeneHeart C1A	AF1-21027634	119	BeneHeart C1A	AF1-34066682
92	BeneHeart C1A	AF1-21027662	120	BeneHeart C1A	AF1-34066711
93	BeneHeart C1A	AF1-22029189	121	BeneHeart C1A	AF1-34066755
94	BeneHeart C1A	AF1-22030115	122	BeneHeart C1A	AF1-36068919
95	BeneHeart C1A	AF1-22030116	123	BeneHeart C1A	AF1-36068922
96	BeneHeart C1A	AF1-22030507	124	BeneHeart C1A	AF1-36069297
97	BeneHeart C1A	AF1-24040410	125	BeneHeart C1A	AF1-36069358
98	BeneHeart C1A	AF1-26045023	126	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001291
99	BeneHeart C1A	AF1-28058220	127	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001309
100	BeneHeart C1A	AF1-28058230	128	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001336
101	BeneHeart C1A	AF1-28058246	123	BeneHeart C1A	AF1-36068922
102	BeneHeart C1A	AF1-28058257	124	BeneHeart C1A	AF1-36069297
103	BeneHeart C1A	AF1-28058295	125	BeneHeart C1A	AF1-36069358
104	BeneHeart C1A	AF1-32062664	126	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001291
105	BeneHeart C1A	AF1-32062671	129	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001355
106	BeneHeart C1A	AF1-34066580	130	BeneHeart C1A Fully	AF3-14001409
107	BeneHeart C1A	AF1-34066583	131	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001489
108	BeneHeart C1A	AF1-34066584	132	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001508
109	BeneHeart C1A	AF1-34066590	133	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001651
110	BeneHeart C1A	AF1-34066591	134	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001693
111	BeneHeart C1A	AF1-34066592	135	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001694
112	BeneHeart C1A	AF1-34066597	136	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001706
113	BeneHeart C1A	AF1-34066602	137	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001729
114	BeneHeart C1A	AF1-34066607	138	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001732

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
139	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001763	161	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003830
140	BeneHeart C1A Fully	AF3-15001785	162	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003871
141	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002049	163	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003878
142	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002052	164	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003888
143	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002085	165	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003897
144	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002101	166	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003912
145	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002124	167	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003919
146	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002128	168	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003925
147	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002131	169	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003990
148	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002142	170	BeneHeart C1A Fully	AF3-21004002
149	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002183	171	BeneHeart C1A Fully	AF3-21004014
150	BeneHeart C1A Fully	AF3-18002205	172	BeneHeart C1A Fully	AF3-21004041
151	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002300	173	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004399
152	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002362	174	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004407
153	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002402	175	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004410
154	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002414	176	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004414
155	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002441	177	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004419
156	BeneHeart C1A Fully	AF3-19002446	178	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004437
157	BeneHeart C1A Fully	AF3-1A002723	179	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004440
158	BeneHeart C1A Fully	AF3-1C003753	180	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004538
159	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003827	181	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004580
160	BeneHeart C1A Fully	AF3-21003828	182	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004638

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
183	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004661	205	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006247
184	BeneHeart C1A Fully	AF3-22004675	206	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006361
185	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005594	207	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006404
186	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005600	208	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006406
187	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005641	209	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006450
188	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005642	210	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006475
189	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005660	211	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006500
190	BeneHeart C1A Fully	AF3-22005675	212	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006542
191	BeneHeart C1A Fully	AF3-23005745	213	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006543
192	BeneHeart C1A Fully	AF3-23005771	214	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006608
193	BeneHeart C1A Fully	AF3-23005798	215	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006624
194	BeneHeart C1A Fully	AF3-23005854	216	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006642
195	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006040	217	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006648
196	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006057	218	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006672
197	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006096	219	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006821
198	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006131	220	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006838
199	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006142	221	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008231
200	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006153	222	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008236
201	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006177	223	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008276
202	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006179	224	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008334
203	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006191	225	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008357
204	BeneHeart C1A Fully	AF3-23006223	226	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008451

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
227	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008529	249	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010797
228	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008534	250	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010834
229	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008547	251	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010849
230	BeneHeart C1A Fully	AF3-25008572	252	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011372
231	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009217	253	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011375
232	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009221	254	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011386
233	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009223	255	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011400
234	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009255	256	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011405
235	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009278	257	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011480
236	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009349	258	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011487
237	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009362	259	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011505
238	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009427	260	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011742
239	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009502	261	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011762
240	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009504	262	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011783
241	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009570	263	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011796
242	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009623	264	BeneHeart C1A Fully	AF3-27011800
243	BeneHeart C1A Fully	AF3-25009627	265	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012452
244	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010428	266	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012476
245	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010580	267	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012489
246	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010702	268	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012493
247	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010759	269	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012531
248	BeneHeart C1A Fully	AF3-27010772	270	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012549

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
271	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012567	293	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017345
272	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012683	294	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017347
273	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012737	295	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017398
274	BeneHeart C1A Fully	AF3-27012755	296	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017400
275	BeneHeart C1A Fully	AF3-28012780	297	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017434
276	BeneHeart C1A Fully	AF3-28012784	298	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017457
277	BeneHeart C1A Fully	AF3-28013750	299	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017458
278	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014421	300	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017461
279	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014449	301	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017487
280	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014450	302	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017513
281	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014494	303	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017517
282	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014515	304	BeneHeart C1A Fully	AF3-29017520
283	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014520	305	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018069
284	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014708	306	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018082
285	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014766	307	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018112
286	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014797	308	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018162
287	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014872	309	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018168
288	BeneHeart C1A Fully	AF3-28014880	310	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018197
289	BeneHeart C1A Fully	AF3-28015038	311	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018202
290	BeneHeart C1A Fully	AF3-28015043	312	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018242
291	BeneHeart C1A Fully	AF3-29016651	313	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018247
292	BeneHeart C1A Fully	AF3-29016696	314	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018257

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
315	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018265	337	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020566
316	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018275	338	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020571
317	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018287	339	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020576
318	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018372	340	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020579
319	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018396	341	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020604
320	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018397	342	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020643
321	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018408	343	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020646
322	BeneHeart C1A Fully	AF3-2B018435	344	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020659
323	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020486	345	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020667
324	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020488	346	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020683
325	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020491	347	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020727
326	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020493	348	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020740
327	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020495	349	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020741
328	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020502	350	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020746
329	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020517	351	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020748
330	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020520	352	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020765
331	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020524	353	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020783
332	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020535	354	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020799
333	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020536	355	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020809
334	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020551	356	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020817
335	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020553	357	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020827
336	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020557	358	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020830

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
359	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020847	368	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020943
360	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020853	369	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020945
361	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020863	370	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020955
362	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020876	371	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020958
363	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020888	372	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020960
364	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020891	373	BeneHeart C1A Fully	AF3-35022505
365	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020900	374	BeneHeart C2	AE7-29069349
366	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020939	375	BeneHeart C1A	AF1-22030463
367	BeneHeart C1A Fully	AF3-34020941	376	BeneHeart C1A	AF1-28053219