

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck

À l'attention des clients utilisateurs du
module de charge Alcotest 7000
(Référence de pièce 3700420)

Arrêt de l'utilisation du module de charge Dräger Alcotest 7000 (3700420) et rappel

Juin 2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre programme de contrôle continu de la qualité, nous avons constaté que le module de charge du Dräger Alcotest 7000 med n'est pas conforme à nos exigences.

Veuillez cesser immédiatement d'utiliser le module de charge du Dräger Alcotest 7000 med et charger le Dräger Alcotest 7000 med uniquement en le connectant directement avec le câble USB-C inclus dans la livraison ou en le branchant à un PC. En outre, nous arrêtons immédiatement la vente du module de charge Dräger Alcotest 7000.

Ces dernières semaines, il a été rapporté des cas isolés de modules de charge ayant provoqué des brûlures dues à des contacts pliés dans le port USB-C des appareils Dräger 7000 med et/ou des modules de charge eux-mêmes. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, nous retirons les modules de charge du marché.



Veuillez mettre au rebut le module de charge Dräger Alcotest 7000 de manière appropriée ou nous le retourner. Vous serez bien entendu remboursé, sur demande, du prix d'achat du module de charge.

À la place du remboursement du prix d'achat, nous pouvons également vous offrir des embouts buccaux gratuits en échange du module de charge Dräger Alcotest 7000 :

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN : DE29 2304 0022 0014 6803 00
Code SWIFT : COBA DE FF 230

Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN : DE75 2307 0710 0030 2109 00
Code SWIFT : DEUTDEHH222

Siège social : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck

HRB 4097 HL
Partenaire général :
Dräger Safety Verwaltungs AG
Siège social : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck

HRB 5036 HL
N° de TVA DE812128834

Président du Conseil de surveillance pour
Dräger Safety AG & Co. KGaA
et Drägerwerk Verwaltungs AG :
Stefan Lauer

Conseil d'administration :
Stefan Dräger (Président)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr Reiner Piske
Anton Schrofner

Offre pour dispositif médical (Alcotest 7000 med ; Référence de pièce 3700399) :

- 200 embouts buccaux Alcomed avec valve pour chaque module de charge retourné

Référence produit 3705618

Votre interlocuteur personnel chez Dräger vous contactera à ce sujet.

Nous regrettons les désagréments que cette mesure peut causer et nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Cordialement,

Robert Betzinger

Product Manager Alcotest Screener
Application Field Alcotest & DrugTest