

Informations importantes de sécurité relatives aux ventilateurs Trilogy Evo et Trilogy Evo O2

8 août 2024

Cher.e Patient.e,

Vous recevez cette lettre car vous êtes équipé.e d'un appareil d'assistance respiratoire Trilogy Evo ou Trilogy Evo O2.

Nous vous informons que Philips Respironics a publié, pour ces dispositifs, une mise à jour du logiciel (version 1.06.10.00) ainsi qu'un addendum au manuel d'utilisation destiné aux professionnels de santé. Ces mises à jour permettent de résoudre les problèmes de sécurité décrits ci-dessous.

En fonction du mode de thérapie utilisé pour votre traitement, il est possible que vous ne soyez pas concerné.es par le problème de logiciel. Cependant, la mise à jour de tous les appareils est obligatoire. Votre prestataire a été informé et organise la mise à jour de vos appareils avec cette dernière version du logiciel qui se fera directement sur l'appareil via une clé USB.

Les problèmes de sécurité résolus par ces mises à jour sont les suivants :

Mise à jour du logiciel

- Déclenchement intempestif de l'alarme de batterie épuisée ou de perte d'alimentation (si l'appareil est configuré en mode PPC* ou AI*)

Addendum au manuel d'utilisation

- Obligation d'utiliser un filtre à particules pour protéger l'appareil de la saleté et de la poussière et éviter l'obstruction du capteur
- Contre-indications complétées : Le mode de traitement AVAPS-AE est contre-indiqué pour une utilisation invasive et chez les patients de moins de 10 kg. La fonction AVAPS est contre-indiquée chez les patients de moins de 10 kg

Mesures à prendre :

- Aucune autre action n'est requise une fois la nouvelle version installée.
- Contactez votre prestataire de santé à domicile pour toute question si nécessaire.

Soyez assuré.es que le maintien d'un niveau élevé de sécurité et de qualité est notre plus grande priorité.

Très sincèrement,

Les équipes PHILIPS

* PPC : Pression Positive Continue ; AI : Aide Inspiratoire