



Marnay 4/7/2024

Informations urgentes sur la sécurité

Désignation du produit : S-Monovette® Héparine de Lithium LH, 4,9 ml, vert
REF : 04.1936.100 Lot
: 4031821
type de mesure: Note de sécurité

Produit concerné :

S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4,9 ml REF : 04.1936.100 Batch : 4031821

Description du problème :

En raison d'une erreur liée à la production, il est possible que l'article S-Monovette® Citrate 9NC 5,4 ml (code couleur UE : vert, REF : 04.1930.001 LOT : 4031721) soit occasionnellement mélangé dans le carton du lot susmentionné de S-Monovette® Héparine de lithium (code couleur ISO : vert) S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4,9 ml REF : 04.1936.100 Lot : 4031821.

L'étiquetage du produit lui-même est clair et correct, et la fonctionnalité des articles est assurée. Comme les deux articles mentionnés ont le même code couleur vert pour le bouchon à vis et l'étiquette, une confusion est possible lors des prélèvements sanguins.

Les analyses diagnostiques effectuées de manière standard avec du sang hépariné peuvent donner des résultats peu plausibles, voire falsifiés, en raison de la présence de citrate dans la préparation. L'échantillon de sang doit être répété et l'analyse effectuée à nouveau.

Action corrective :

Avant d'utiliser le tube S-Monovette® Héparine de lithium LH, 4,9 ml REF : 04.1936.100 Lot : 4031821, veuillez vérifier l'étiquetage du produit afin de vous assurer qu'il s'agit bien de tube S-Monovette® Héparine-Li et non de tube S-Monovette® Citrate.

Si vous trouvez un tube S-Monovette® Citrate 9NC 5.4 ml (REF : 04.1930.001 LOT : 4031721), isolez l'ensemble du lot et contactez le service Marketing de SARSTEDT France :

marketing.fr@sarstedt.com

Matthieu BOYER
Directeur Général Sarstedt France

Stéphanie Legros
Responsable gamme Diagnostic
Sarstedt France.

Route de Gray - Z.I. des Plantes - F 70150 Marnay - Tél. 03 84 31 95 95 - Fax 03 84 31 95 99
Sarl au capital de 159 582 € - R.C.S. 302 638 481 B - SIREN 302 638 481