

Avis d'action urgente sur le terrain pour les dispositifs de cryostat

Mise en garde : Responsable de laboratoire, utilisateurs de cryostat

27 août 2024

Chère cliente, cher client,

Leica Biosystems émet cette lettre de notification pour vous informer d'une action sur le terrain concernant les dispositifs de cryostat. Vous recevez cet avis, car selon nos dossiers, vous avez reçu un ou plusieurs des appareils concernés.

Appareils concernés:

Leica CM1950 : 155, 159, 168, 170, 173, 176, 178, 179, 185, 186, 190, 191, 193, 199, 203, 215, 216, 217, 218, 227, 236, 237, 238, 239, 249, 264, 268, 273, 275, 276, 277, 279, 287, 288, 291, 292, 295, 298, 305, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 322, 324, 328, 330, 332, 335, 337, 340, 343, 351, 354, 356, 357, 358, 364, 365, 367, 369, 373, 374, 380, 382, 383, 387, 389, 391, 395, 398, 399, 407, 420, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 472, 476, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 492, 495, 496, 497, 498, 502, 505, 508, 514, 522, 524, 527, 530, 535, 539, 543, 548, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 576, 577, 579, 581, 585

Leica CM3050 S : 1512, 1531, 1567, 1577, 1579, 1607, 1608, 1622, 1631, 1647, 1731, 1768, 1808, 1864, 1870, 1925, 1943, 1993, 1994, 2005, 2048, 2057, 2093, 2119, 2121, 2235, 2240, 2259, 2269, 2282, 2283, 2334, 2335, 2384, 2392, 2402, 2416, 2418, 2421, 2425, 2431, 2446, 2456, 2461, 2463, 2465, 2469, 2471, 2474, 2490, 2492, 2503, 2506, 2520, 2522, 2524, 2525, 2529, 2533, 2546, 2553, 2558, 2560, 2564, 2571, 2573, 2574, 2580, 2583, 2588, 2592, 2593, 2597, 2605, 2609, 2624, 2627, 2632, 2633, 2636, 2638, 2676, 2691, 2700, 2706, 2707, 2712, 2722, 2724, 2736, 2737, 2742, 2749, 2755, 2774, 2777, 2781, 2791, 2797, 2804, 2805, 2813, 2814, 2840, 2853, 2856, 2857, 2864, 2874, 2885, 2886, 2890, 2891, 2893, 2908, 2909, 2918, 2931, 2932, 2934, 2935, 2936, 2943, 2944, 2964, 2969, 2975, 2978, 2979, 2995, 2996, 2997, 3002, 3004, 3009, 3012, 3018, 3026, 3030, 3037, 3044, 3048, 3052, 3078, 3093, 3097, 3098, 3103, 3116, 3129, 3130, 3136, 3137, 3139, 3141, 3151, 3157, 3162, 3163, 3165, 3168, 3170, 3174, 3187, 3198, 3199, 3201, 3207, 3208, 3210, 3213, 3217, 3218, 3219, 3227, 3229, 3230, 3238, 3240, 3249, 3252, 3257, 3257, 3259, 3260, 3274, 3277, 3285, 3295, 3296, 3303, 3304, 3307, 3317, 3319,

Leica CM3050 S : 3320, 3321, 3322, 3333, 3337, 3338, 3342, 3344, 3346, 3349, 3351, 3352, 3354, 3368, 3372, 3374, 3375, 3376, 3383, 3385, 3386, 3394, 3396, 3398, 3401, 3404, 3417, 3420, 3421, 3424, 3425, 3428, 3430, 3431, 3434, 3436, 3438, 3451, 3456, 3457, 3459, 3466, 3468, 3469, 3482, 3485, 3496, 3507, 3508, 3514, 3515, 3522, 3526, 3533, 3534, 3535, 3540, 3548, 3555, 3557, 3559, 3562, 3564, 3566, 3567, 3568, 3571, 3584, 3585, 3588, 3589, 3593, 3603, 3604, 3606, 3609, 3613, 3616, 3617, 3630, 3633, 3638, 3641, 3644, 3658, 3662, 3668, 3669, 3677, 3683,

3691, 3695, 3699, 3705, 3706, 3710, 3714, 3715, 3716, 3719, 3720, 3729, 3730, 3734, 3738, 3741, 3748, 3755, 3758, 3759, 3773, 3778, 3780, 3783, 3789, 3795, 3801, 3802, 3803, 3821, 3824, 3832, 3838, 3839, 3840, 3847, 3852, 3867, 3869, 3874, 3878, 3881, 3883, 3897, 3901, 3905, 3907, 3908, 3912, 3915, 3917, 3920, 3923, 3932, 3937, 3944, 3945, 3951, 3952, 3954, 3956, 3966, 3970, 3979, 3981, 3994, 3999, 4002, 4004, 4008, 4009, 4011, 4012, 4014, 4020, 4023, 4043, 4044, 4053, 4054, 4056, 4065, 4070, 4085, 4086, 4087, 4094, 4096, 4099, 4113, 4119, 4122, 4124, 4125, 4127, 4137, 4142, 4145, 4149, 4150, 4154, 4155, 4156, 4161, 4162, 4169, 4171, 4174, 4176, 4186, 4193, 4197, 4203, 4204, 4212, 4213, 4223, 4228, 4231, 4237, 4242, 4252, 4263, 4269, 4270, 4278, 4279, 4280, 4282, 4284, 4287, 4293, 4294, 4297, 4299, 4301, 4304, 4307, 4310, 4311, 4317, 4320, 4322, 4326, 4327, 4332, 4335, 4341, 4349, 4351, 4353, 4354, 4366, 4367, 4368, 4369, 4375, 4376, 4378, 4379, 4384, 4387, 4391, 4393, 4394, 4399, 4400, 4401, 4405, 4413, 4415, 4422, 4429, 4445, 4454, 4462, 4463, 4467, 4468, 4476, 4477, 4479, 4483, 4491, 4497, 4498, 4499, 4503, 4507, 4510, 4513, 4514, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4525, 4526, 4527, 4528, 4534, 4535, 4537, 4538, 4547, 4548, 4552, 4557, 4557, 4561, 4565, 4569, 4572, 4573, 4575, 4580, 4585, 4592, 4593, 4599, 4600, 4613, 4615, 4616, 4618, 4620, 4621, 4621, 4622, 4625, 4626, 4641, 4643, 4644, 4649, 4653, 4654, 4655, 4659, 4660, 4664, 4669, 4674, 4675, 4678, 4686, 4693, 4696, 4698, 4701, 4702, 4703, 4706, 4707, 4708, 4713, 4714, 4715, 4716, 4716, 4719, 4721, 4723, 4724, 4727, 4728, 4734, 4735, 4740, 4745, 4753, 4755, 4761, 4764, 4773, 4774, 4775, 4781, 4783, 4792, 4795, 4797, 4801, 4802, 4803, 4804, 4807, 4811, 4816, 4819, 4827, 4833, 4836, 4839, 4845, 4850, 4851, 4852, 4853, 4864, 4868, 4870, 4871, 4875, 4876, 4878, 4879, 4886, 4888, 4896, 4907, 4908, 4909, 4911, 4915, 4916, 4918, 4920, 4921, 4926, 4928, 4933, 4938, 4939, 4940, 4943, 4946, 4948, 4952, 4953, 4958, 4961, 4963, 4966, 4970, 4978, 4979, 4981, 4983, 4985, 4988, 4989, 4991, 4998, 5000, 5003, 5004, 5007, 5008, 5011, 5013, 5015, 5018, 5021, 5025, 5029, 5037, 5042, 5046, 5048, 5049, 5053, 5063, 5065, 5068, 5070, 5072, 5079, 5081, 5082, 5083, 5088, 5104, 5109, 5111, 5112, 5119, 5124, 5126, 5127, 5131, 5141, 5145, 5146, 5147, 5152, 5153, 5155, 5156, 5157, 5159, 5169, 5171, 5179, 5183, 5195, 5197, 5200, 5201, 5202, 5207, 5208, 5212, 5217, 5218, 5221, 5224, 5226, 5227, 5228, 5230, 5234, 5243, 5245, 5246, 5257, 5265

Leica CM1850 UV : 144, 148, 161, 182, 210, 211, 235, 236, 250, 251, 254, 258, 281, 297, 298, 299, 308, 320, 331, 333, 334, 372, 373, 385, 388, 396, 420, 432, 434, 436, 446, 451, 465, 483, 485, 503, 507, 530, 531, 569, 596, 603, 608, 615, 627, 630, 645, 649, 653, 659, 665, 667, 676, 697, 753, 762, 764, 769, 778, 801, 804, 817, 830, 832, 842, 845, 852, 864, 867, 873, 890, 891, 897, 899, 902, 903, 904, 913, 937, 938, 939, 940, 942, 944, 965, 1011, 1034, 1057, 1061, 1085, 1147, 1160, 1174, 1176, 1207, 1219, 1220, 1228, 1232, 1234, 1240, 1249, 1250, 1251, 1258, 1281, 1293, 1298, 1300, 1304, 1309, 1315, 1326,

Leica CM1850 UV : 1329, 1341, 1356, 1358, 1372, 1388, 1409, 1424, 1426, 1430, 1432, 1449, 1473, 1491, 1497, 1526, 1528, 1535, 1537

Leica CM1850 : 154, 156, 165, 175, 189, 189, 190, 201, 210, 216, 217, 236, 237, 253, 260, 265, 267, 301, 302, 304, 329, 332, 332, 333, 345, 349, 370, 370, 376, 378, 381, 382, 400, 411, 416, 417, 429, 447, 453, 454, 454, 455, 457, 461, 469, 472, 475, 482, 494, 497, 511, 513, 514, 517, 526, 573, 576, 597, 598, 602, 608, 610, 626, 646, 655, 658, 671, 672, 684, 693, 698, 702, 702, 703, 708, 709,

711, 729, 730, 757, 765, 771, 772, 776, 777, 786, 792, 794, 798, 802, 811, 860, 868, 870, 871, 885, 894, 895, 896, 904, 915, 917, 917, 923, 949, 952, 960, 961, 970, 979, 987, 991, 997, 1005, 1016, 1017, 1031, 1037, 1044, 1045, 1047, 1055, 1059, 1063, 1067, 1076, 1076, 1095, 1110, 1121, 1128, 1137, 1149, 1153, 1154, 1157, 1164, 1186, 1187, 1196, 1200, 1208, 1255, 1259, 1272, 1278, 1280, 1307, 1310, 1312, 1313, 1315, 1317, 1320, 1321, 1325, 1336, 1340, 1344, 1345, 1347, 1367, 1387, 1389, 1403, 1407, 1439, 1448, 1452, 1453, 1454, 1457, 1474, 1476, 1488, 1492, 1494, 1524, 1527, 1542, 1545, 1561, 1613, 1622, 1630, 1636, 1663, 1678, 1684, 1716, 1727, 1728, 1729, 1742, 1753, 1776, 1784, 1827, 1843, 1850, 1856, 1858, 1874, 1878, 1884, 1885, 1887, 1890, 1922, 1950, 1957, 1963, 1981, 2018, 2020, 2028, 2032, 2033, 2040, 2068, 2089, 2090, 2097, 2115, 2136, 2139, 2144, 2145, 2160, 2172, 2200, 2215, 2227, 2237, 2243, 2260, 2284, 2286, 2310, 2335, 2347, 2363, 2390, 2396, 2402, 2413, 2425, 2461, 2485, 2486, 2503, 2506, 2509, 2524, 2538, 2540, 2567, 2586, 2591, 2599, 2617, 2628, 2632, 2651, 2655, 2675, 2699, 2707, 2717, 2728, 2735, 2736, 2750, 2757, 2780, 2782, 2788, 2794, 2798, 2805, 2812, 2815, 2851, 2861, 2866, 2870, 2873, 2884, 2890, 2903, 2906, 2909, 2911, 2925, 2935, 2936, 2939, 2955, 2968, 2978, 3008, 3017, 3024, 3025, 3030, 3045, 3057, 3063, 3068, 3069, 3080, 3096, 3107, 3134, 3152, 3156, 3168, 3170, 3186, 3187, 3193, 3197, 3199, 3202, 3207, 3211, 3216, 3217, 3222, 3239, 3241, 3242, 3251, 3252, 3255, 3260, 3261, 3269, 3276, 3281, 3296, 3303, 3306, 3316, 3318, 3321, 3322, 3333, 3346, 3354, 3357, 3363, 3367, 3400, 3407, 3408, 3415, 3416, 3421, 3425, 3427, 3435, 3441, 3445, 3471, 3478, 3488, 3493, 3496, 3498, 3499, 3501, 3502, 3508, 3517, 3524, 3527, 3534, 3540, 3558, 3589, 3598, 3600, 3603, 3606, 3611, 3631, 3640, 3642, 3647, 3679, 3680, 3682, 3688, 3689, 3713, 3714, 3728, 3744, 3760, 3786, 3797, 3807, 3817, 3819, 3820, 3824, 3845, 3869, 3874, 3876, 3892, 3897, 3927, 3946, 3948, 3960, 3976, 3980, 3988, 4014, 4040, 4049, 4079, 4113, 4114, 4118, 4129, 4137, 4159, 4160, 4164, 4167, 4171, 4174, 4175, 4180, 4200, 4202, 4211, 4228, 4231, 4234, 4252, 4264, 4267, 4276, 4289, 4334, 4341, 4355, 4358, 4385, 4411, 4414, 4416, 4428, 4439, 4443, 4444, 4444, 4465, 4466, 4471, 4478, 4492, 4502, 4527, 4548, 4551, 4588, 4589, 4593, 4595, 4608, 4619, 4639, 4660, 4670, 4715, 4720, 4721, 4722, 4723, 4728, 4733, 4743, 4774, 4790, 4791, 4797, 4809, 4810, 4816, 4818, 4825, 4827, 4828, 4831, 4833, 4849, 4859, 4861, 4866, 4869, 4870, 4898, 4913, 4925, 4938, 4945, 4947, 4954, 4955, 4960, 4976, 4989, 5001, 5030, 5032, 5036, 5052, 5064, 5081, 5082, 5090, 5095, 5104, 5108, 5158, 5159, 5163, 5185, 5187, 5267, 5280, 5294, 5307, 5315, 5335, 5355, 5361, 5371, 5393, 5396, 5425, 5446, 5461, 5465, 5466, 5469, 5489, 5491, 5495, 5507, 5508, 5517, 5530, 5531, 5534, 5542, 5543, 5564, 5579, 5607, 5620, 5631, 5656, 5659, 5660, 5668, 5674, 5676, 5681, 5716, 5727, 5734, 5740, 5742, 5747, 5755, 5781, 5786, 5787, 5805, 5813, 5814

Leica CM1510 S : 5065, 5075, 5103, 5108, 5138, 5197, 5269, 5305, 5330, 5348, 5359, 5362, 5367, 5400, 5423, 5438, 5457, 5461, 5467, 5478, 5510, 5531, 5537, 5625, 5649, 5667, 5679, 5780, 5804, 5805, 5818, 5886, 5901, 5913, 5966, 5982, 5996

Leica CM1100 : 168, 251, 311, 349, 365, 372, 380, 404, 413, 485, 488, 556, 581, 634, 658, 674, 689, 711, 735, 740, 746, 766, 786, 790, 807, 849, 860, 866, 880, 904, 914, 931, 934, 946, 958, 968, 975, 976, 987, 990, 999

Leica CM1500 : 1177, 1578, 2066, 2301, 2342, 2346, 2369, 2453, 2475, 2508, 2519, 2737, 2836, 2879, 2908, 2972, 2977, 2978, 2982, 2990, 3470, 3840

Leica CM1800 :	0247, 1082, 2792, 2996
Leica CM1900 :	101, 157, 203, 349, 379, 379, 383, 430, 439, 463, 522, 550, 557, 558, 563,617, 629, 652, 657, 684, 703, 794, 808, 842, 845, 849, 850, 856, 870, 871, 876, 880, 881, 884, 908, 911, 916, 925, 932, 939, 941, 957, 960, 963, 974, 994, 995, 1001,1009, 1011, 1018, 1031, 1057, 1071, 1094, 1114, 1159, 1170, 1186, 1187, 1198, 1235, 1236, 1239, 1267, 1295, 1328, 1329,1330, 1331, 1379, 1383, 1393, 1400, 1432, 1452, 1479, 1481,1489, 1491, 1494, 1497, 1508, 1513, 1514, 1520, 1538, 1540,1557, 1558, 1577, 1586, 1591, 1592, 1598, 1601, 1602, 1603,1605, 1606, 1617, 1634, 1636, 1675, 1679, 1691, 1706, 1732,1743, 1747, 1749, 1752, 1753, 1771, 1777, 1783, 1804, 1806,1808, 1809, 1819, 1839, 1885, 1904, 1928, 1952, 1953, 1962, 1986, 1989, 1992, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2020, 2025, 2027, 2028, 2058, 2066, 2068, 2072, 2074, 2116, 2126, 2137, 2143, 2152, 2169, 2173, 2190, 2204, 2213, 2240, 2252, 2255, 2265, 2300, 2306, 2321, 2324, 2336, 2349, 2359, 2361, 2371, 2372, 2376, 2385, 2420, 2428, 2430, 2434, 2459, 2460, 2463, 2472, 2477, 2483, 2496, 2501, 2514, 2523, 2526, 2527,2532, 2534, 2536, 2542, 2550, 2565, 2566, 2572, 2602, 2605, 2610, 2617, 2664, 2666, 2682, 2688, 2691, 2694, 2695, 2717, 2742, 2749, 2765, 2766, 2774, 2797, 2801, 2805, 2807, 2810, 2814, 2832, 2856, 2868, 2871, 2874, 2902, 2915, 2922, 2929, 2954, 2994, 3027, 3037, 3038, 3071, 3072, 3080, 3095, 3178, 3204, 3228, 3243, 3247, 3254, 3269, 3283, 3314, 3358, 3380, 3393, 3469, 3485, 3487, 3510, 3519, 3531, 3561, 3601, 3686, 3691, 3698, 3767, 3779, 3784, 3826, 3833, 3883, 3905, 3906, 3974, 4002, 4009
Leica CM1900 UV :	584, 2023, 2433, 3105, 3113, 3125, 3128, 3129, 3130, 3132, 3193, 3213, 3240, 3241, 3248, 3261, 3279, 3294, 3324, 3326, 3330, 3346, 3349, 3362, 3372, 3377, 3402, 3408, 3409, 3412, 3413, 3415, 3434, 3443, 3450, 3476, 3492, 3493, 3511, 3527, 3528, 3529, 3550, 3552, 3553, 3555, 3557, 3559, 3560, 3571, 3596, 3610, 3615, 3648, 3657, 3658, 3661, 3668, 3670, 3675, 3687, 3702, 3704, 3708, 3709, 3720, 3722, 3733, 3763, 3765, 3816, 3848, 3856, 3869, 3932, 4006
Leica CM3000 :	0932
Leica CM3050 :	1545, 1652, 1672, 1676, 1715, 1715, 1734, 1893, 1901, 1902, 1910, 1935, 1960, 1964, 1966, 1993, 2009, 2026, 2039, 2060, 2074, 2132, 2137, 2146, 2153, 2161, 2172, 2173, 2198, 2214, 2220, 2225, 2251, 2257, 2260, 2261, 2270, 2289, 2307, 2318, 2413, 2445, 2569, 2865, 2930, 4027, 4164

Description du problème :

Dans le cadre de notre surveillance après commercialisation, nous avons reconnu que certains clients utilisent des sprays de congélation inflammables dans la chambre du cryostat. Tous les sprays de congélation inflammables peuvent potentiellement s'enflammer et donc provoquer des blessures graves. L'inflammabilité est indiquée sur l'étiquetage de ces sprays. L'étiquetage du cryostat, cependant, n'incluait aucun avertissement spécifique concernant l'utilisation de sprays de congélation inflammables avant 2019. Dans le cadre de cette

action sur le terrain, nous fournissons un étiquetage mis à jour pour les dispositifs concernés, afin d'ajouter un renforcement visuel clair indiquant qu'aucun spray de congélation inflammable ne doit être utilisé dans la chambre du cryostat.

Conseils sur les mesures immédiates à prendre :

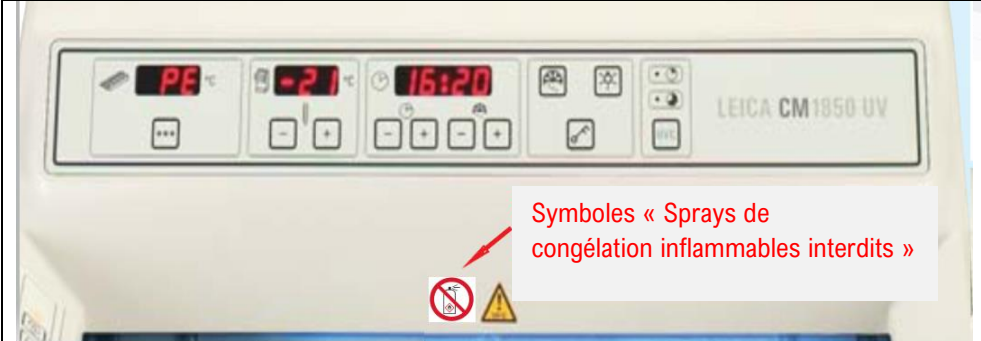
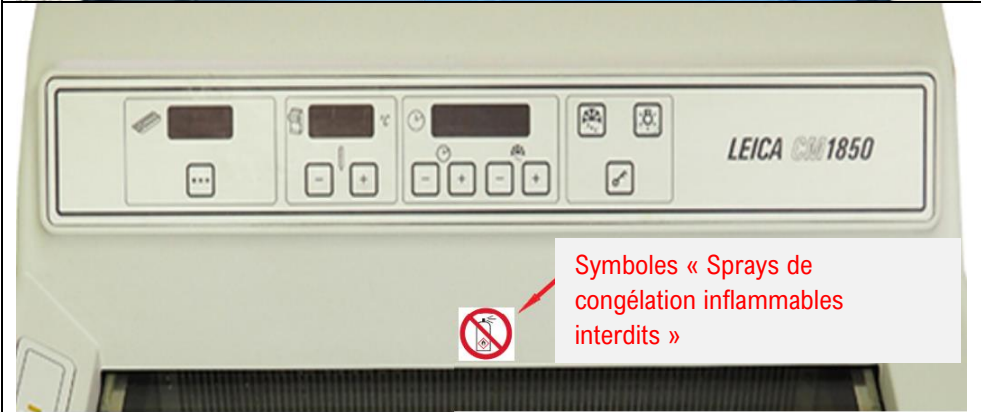
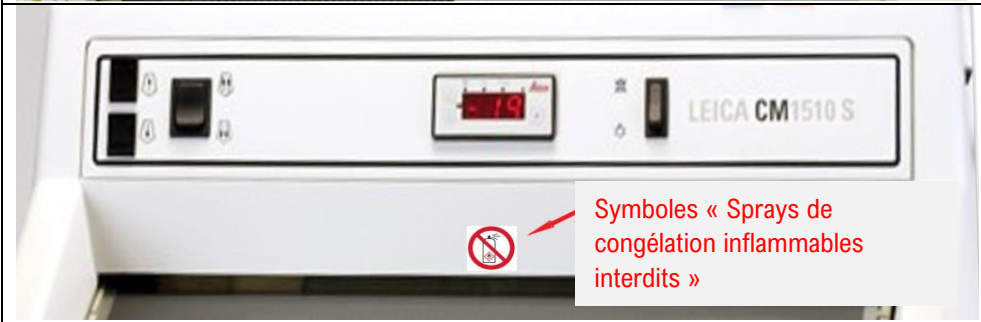
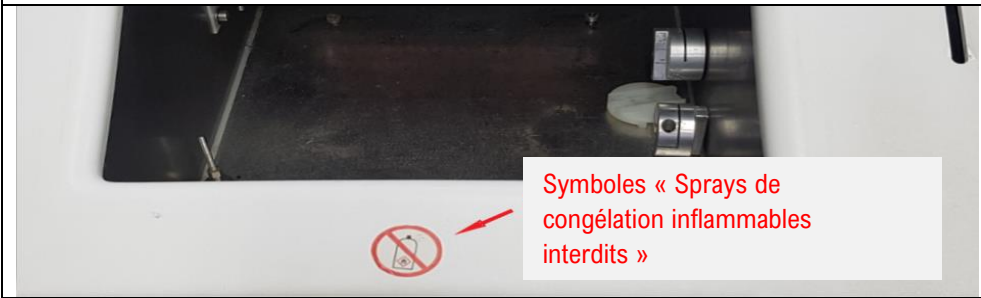
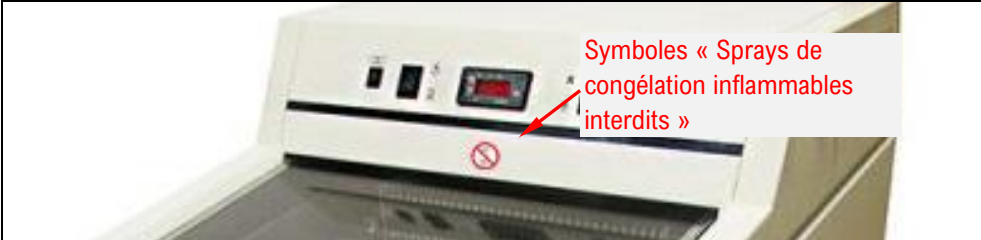
Pour une action immédiate, nous vous demandons de mettre à jour l'étiquetage de l'appareil en plaçant l'étiquette adhésive jointe comme indiqué ci-dessous sur les dispositifs, ainsi qu'en ajoutant une fiche supplémentaire au mode d'emploi (IFU) actuel.



1. Application de l'étiquette adhésive :

Commencez par nettoyer la surface autour de la zone où l'étiquette adhésive doit être placée (sans graisse). Retirez ensuite l'étiquette adhésive fournie de la feuille d'aluminium et placez-la sur la surface comme illustré dans les images ci-dessous.

Symbole de positionnement « Sprays de congélation inflammables interdits »	Dispositif
	<p>Leica CM1950</p>
	<p>Leica CM3050 S</p>

 <p>Symboles « Sprays de congélation inflammables interdits »</p>	<p>Leica CM1850 UV</p>
 <p>Symboles « Sprays de congélation inflammables interdits »</p>	<p>Leica CM1850</p>
 <p>Symboles « Sprays de congélation inflammables interdits »</p>	<p>Leica CM1510 S</p>
 <p>Symboles « Sprays de congélation inflammables interdits »</p>	<p>Leica CM1100</p>
 <p>Symboles « Sprays de congélation inflammables interdits »</p>	<p>Leica CM1500</p>

	Leica CM1800
	Leica CM1900/UV
	Leica CM3000
	Leica CM3050

2. Ajout de l'amendement de sécurité au mode d'emploi (IFU) :

Ajoutez l'amendement relatif à la sécurité, joint à cet avis, au mode d'emploi (IFU) du cryostat.

Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à placer rapidement l'étiquette adhésive fournie à proximité de la chambre du cryostat de l'instrument et à ajouter l'amendement de sécurité dans le mode d'emploi afin d'éviter un éventuel événement indésirable grave.

Transmission de cet avis relatif à l'intervention sur le terrain :

Veuillez transmettre cette lettre de notification aux utilisateurs de ces produits concernés et à tous ceux de votre organisation où les dispositifs concernés ont été transférés.

Veuillez tenir compte de cet avis et de l'action en résultant afin de garantir l'efficacité de l'action corrective.

Personne à contacter :

Pour toute question, veuillez contacter :

Heather Jensen

Leica Biosystems

5205 US Highway 12, Richmond, IL 60071 USA

Tél. : +1-815-298-8371

heather.jensen@leicabiosystems.com

Veuillez signer le formulaire d'accusé de réception ci-joint pour confirmer que vous avez reçu et compris l'avis d'action de sécurité.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément lié à ce problème.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Heather Jensen

Directeur, Surveillance après commercialisation

Leica Biosystems, Qualité et Affaires réglementaires Multifonction/Général - Réglementation mondiale

(Le soussigné confirme que la lettre d'action sur le terrain est faite en connaissance de cause auprès des autorités sanitaires compétentes)

FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Veuillez indiquer le(s) numéro(s) de série de votre(vos) dispositif(s) :

(Le numéro de série se trouve sur la plaque d'identification à l'arrière du dispositif.)

Leica CM1100 _____ Leica CM3050 _____

Leica CM1950 _____ Leica CM1850 _____

Leica CM1850UV _____ Leica CM1510 S _____

Leica CM1500 _____ Leica CM1800 _____

Leica CM1900 _____ Leica CM1900 UV _____

Leica CM3000 _____ Leica CM3050 S _____

- Aucune des unités ci-dessus n'est affectée ou n'est encore utilisée.

Veuillez accuser réception en cochant les cases ci-dessous.

- J'ai lu et compris l'avis d'action sur le terrain.
- J'ai placé l'étiquette adhésive fournie à proximité de la chambre du cryostat comme indiqué dans la section « Conseils sur les mesures immédiates à prendre ».
- J'ai ajouté l'amendement de sécurité fourni au mode d'emploi, comme mentionné dans la section « Conseils sur les mesures immédiates à prendre ».

Nom : _____

Titre : _____

Téléphone : _____

Nom de l'entreprise : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Signature : _____

Veuillez remplir et retourner ce **FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION** dans les 5 jours suivant sa réception à l'adresse e-mail suivante :

LBSNUS.Field-Action@leicabiosystems.com