

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck, Allemagne

À l'attention de nos clients utilisateurs
des stations d'anesthésie Atlan Dräger

Octobre 2024

Consigne importante de sécurité !

**Panne possible de la ventilation automatique
en raison d'un défaut dans l'électronique du moteur**

**Seules les stations d'anesthésie Atlan, dont les numéros de série indiqués dans la liste
ci-jointe, sont concernées.**

Les autres appareils d'anesthésie NE sont PAS concernés !

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de notre observation du marché international, nous avons eu connaissance de cas dans lesquels les stations d'anesthésie Atlan ont indiqué soit une panne du ventilateur piston avant utilisation, soit une panne de la ventilation mécanique survenue pendant l'utilisation. À ce jour, aucun préjudice causé aux patients ne nous a été signalé.

Notre enquête a révélé que ces cas étaient dus à un défaut dans l'électronique du moteur, provoqué par un écart temporaire dans le processus d'assemblage. Nous ne pouvons pas exclure avec certitude que toutes les stations d'anesthésie Atlan produites dans la gamme de numéros de série ci-dessus soient concernées. D'après nos bases de données, votre établissement dispose d'un ou plusieurs appareils appartenant à cette plage de numéros de série concernés.

Si l'erreur se produit avant l'utilisation, par exemple en veille ou lors d'un test système, la ventilation automatique ne peut pas démarrer. Si l'erreur se produit lorsqu'une procédure est en cours, la ventilation mécanique peut tomber en panne et l'appareil génère une alarme avec le message « Ventilateur inop !!! ». Dans ces deux cas, une ventilation manuelle ou une respiration spontanée est toujours possible. Il peut être nécessaire de ventiler manuellement le patient pour éviter tout préjudice. Lorsqu'une alarme d'arrêt de ventilation se déclenche, l'Atlan permet l'utilisation du mode de ventilation Manuel/Spontané sans restriction, le dosage de gaz frais, les agents halogénés ainsi que de toutes les fonctions de monitoring.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
Adresse postale :
23542 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN : DE95 2304 0022 0014 6795 00
Code SWIFT : COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lübeck
IBAN : DE15 2305 0101 0001 0711 17
Code SWIFT : NOLADE21SPL

Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7903
HL
Commandité :
Drägerwerk Verwaltungs AG
Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7395
HL
N° de TVA DE135082211

Président du conseil de
surveillance
Pour Drägerwerk AG & Co. KGaA et
Drägerwerk Verwaltungs AG :
Stefan Lauer

Direction :
Stefan Dräger (Président)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr Reiner Piske

Notre Département Service vous contactera afin de convenir d'un remplacement gratuit du moteur.

Jusque-là, veuillez continuer à utiliser vos appareils avec l'attention habituelle en n'utilisant l'appareil que sous surveillance constante, conformément à la notice d'utilisation Atlan.

Si la ventilation mécanique échoue, utilisez le mode de ventilation pour ventiler le patient manuellement si nécessaire.

Si nécessaire, vous pouvez rétrograder la priorité d'alarme « Ventilateur inop !!! » avec « RÉINITIALISATION ALARMES ».

Nous regrettons les désagréments engendrés dans le cadre de cette information.

Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs de l'Atlan Dräger, ainsi que l'ensemble des personnes concernées dans votre organisation, prennent connaissance de cette consigne importante de sécurité. Veuillez remplir et renvoyer la fiche réponse ci-jointe pour nous le confirmer.

Si vous avez mis les produits à la disposition de tiers, veuillez leur transmettre une copie de cette consigne importante de sécurité.

Veuillez conserver ces informations importantes au moins jusqu'au remplacement du moteur.

Les autorités compétentes sont informées de cette mesure.

Identification des dispositifs médicaux concernés :

Selon nos bases de données, vous avez reçu au moins une station d'anesthésie Atlan qui a été fabriqué par Drägerwerk AG & Co. KGaA et qui pourrait être concerné par ce problème.

Contact :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur local Dräger.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments engendrés dans le cadre de cette mesure.

Sincères salutations

Christoph Marquardt
Product Management
Business Unit Therapy

Oliver Möller
Post Market Surveillance
Quality and Regulatory Affairs

Annexe à Consigne importante de sécurité

liste des appareils concernés

Appareil	Numéro de modèle	Basic UDI DI
Atlan A100	8621100	040486751301035FK19X030W4
Atlan A300	8621300	040486751301035FK 19ZOOOW9
Atlan A300 XL	8621400	
Atlan A350	8621500	040486751301035FK19T010V2
Atlan A350 XL	8621600	

Atlan A100

Mois de fabrication	Numéros de série	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0211
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	0285; 0286
05-2024	ASTE-...	0056; 0083; 0199; 0200; 0245; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375
06-2024	ASTF-...	0155
07-2024	ASTH-...	0023; 0088; 0119; 0209
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0001; 0037

Atlan A300

Mois de fabrication	Numéros de série	
01-2024	ASTA-...	0314; 0315; 0325; 0338; 0340; 0384; 0411; 0425
02-2024	ASTB-...	0002; 0010; 0018; 0151; 0160; 0161; 0165; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0214; 0215; 0218; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0248; 0249; 0250; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280
03-2024	ASTC-...	0008; 0025; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0062; 0063; 0064; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0102; 0103; 0104; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0133; 0139; 0140; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0169; 0176; 0177; 0178; 0179; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0192; 0195; 0196; 0200; 0201; 0202; 0203; 0242
04-2024	ASTD-...	0028; 0051; 0052; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087
05-2024	ASTE-...	0012; 0013; 0014; 0015; 0041; 0042; 0043; 0044; 0063; 0064; 0065; 0084; 0176; 0177; 0178; 0179; 0243; 0244; 0282; 0299
06-2024	ASTF-...	0005; 0006; 0019; 0027; 0028; 0029; 0048; 0049; 0050; 0072; 0073; 0074; 0075; 0082; 0093; 0110; 0111; 0162; 0166; 0167; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0301; 0406; 0434
07-2024	ASTH-...	0001; 0002; 0003; 0024; 0025; 0041; 0042; 0043; 0044; 0097; 0098; 0099; 0115; 0116; 0117; 0118; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0195; 0196; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0227; 0228; 0229; 0230; 0257;

		0258; 0259; 0260; 0261; 0274; 0275; 0276; 0277; 0297; 0298; 0299; 0304; 0305; 0328; 0329; 0355; 0356; 0357; 0393; 0394; 0395; 0396; 0407; 0408; 0409; 0410; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470; 0484; 0485; 0486; 0487
08-2024	ASTJ-...	
09-2024	ASTK-...	0033; 0034; 0035; 0062

Atlan A300 XL

Mois de fabrication	Numéros de série	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0051; 0053; 0054; 0055; 0063; 0065; 0093; 0162
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	-
05-2024	ASTE-...	0219; 0220; 0221; 0222; 0377
06-2024	ASTF-...	0472; 0473
07-2024	ASTH-...	0005; 0006; 0026; 0027; 0047; 0186; 0223; 0224; 0401
08-2024	ASTJ-...	0170
09-2024	ASTK-...	-

Atlan A350

Mois de fabrication	Numéros de série	
01-2024	ASTA-...	0279; 0293; 0302; 0303; 0304; 0306; 0334; 0335; 0336; 0344; 0347; 0348; 0360; 0369; 0373; 0375; 0376; 0377; 0379; 0380; 0381; 0386; 0389; 0390; 0392; 0393; 0399; 0412; 0422; 0433; 0435; 0437; 0438
02-2024	ASTB-...	0009; 0011; 0012; 0015; 0016; 0017; 0019; 0024; 0025; 0026; 0027; 0035; 0036; 0038; 0039; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0050; 0056; 0058; 0059; 0060; 0062; 0067; 0069; 0070; 0072; 0073; 0085; 0086; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0163; 0164; 0166; 0167; 0168; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0207; 0208; 0209; 0210; 0212; 0213; 0221; 0222; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0301; 0302; 0303; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316

03-2024	ASTC-...	0005; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0043; 0044; 0045; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0065; 0066; 0067; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0084; 0085; 0086; 0087; 0088; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0121; 0122; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0134; 0135; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0170; 0171; 0172; 0188; 0189; 0190; 0191; 0193; 0197; 0198; 0199; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277
04-2024	ASTD-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0077; 0078; 0079; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0125; 0126; 0127; 0128; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0155; 0156; 0157; 0158; 0170; 0171; 0177; 0178; 0179; 0180; 0184; 0185; 0186; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0220; 0221; 0222; 0223; 0224; 0234; 0235; 0236; 0237; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284
05-2024	ASTE-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0080; 0081; 0082; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0167; 0168; 0169; 0170; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0251;

		0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0376
06-2024	ASTF-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0083; 0084; 0085; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0152; 0153; 0154; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0163; 0164; 0165; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0391; 0392; 0393; 0394; 0395; 0396; 0397; 0398; 0399; 0400; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0407; 0408; 0412; 0413; 0414; 0415; 0416; 0417; 0418; 0419; 0420; 0421; 0422; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430; 0431; 0432; 0433; 0439; 0440; 0441; 0442; 0443; 0444; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0450; 0451; 0452; 0453; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470
07-2024	ASTH-...	0004; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056;

		0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0077; 0078; 0079; 0080; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0205; 0206; 0207; 0208; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0262; 0263; 0264; 0265; 0268; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0300; 0301; 0321; 0322; 0323; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0391; 0392; 0397; 0398; 0399; 0400; 0402; 0411; 0432; 0433; 0438; 0439; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0471; 0472; 0473; 0474; 0475; 0482; 0483
08-2024	ASTJ-...	0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0073; 0074; 0075; 0076; 0103; 0162; 0197; 0198; 0199; 0200; 0208; 0256
09-2024	ASTK-...	0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009

Atlan A350 XL

Mois de fabrication	Numéros de série	
01-2024	ASTA-...	0253; 0289; 0290; 0307; 0309; 0311; 0327; 0349; 0350; 0351; 0353; 0362; 0363; 0365; 0394; 0404; 0405; 0408; 0409; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430
02-2024	ASTB-...	0003; 0005; 0007; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0048; 0075; 0076; 0077; 0079; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0134; 0195; 0206; 0219; 0220; 0237; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322
03-2024	ASTC-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0007; 0026; 0068; 0069; 0070; 0082; 0083; 0099; 0100; 0101; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0118; 0119; 0136; 0137; 0138; 0163; 0180; 0181; 0194; 0229; 0230; 0243; 0244; 0245
04-2024	ASTD-...	0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0050; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0154; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0169; 0181; 0182; 0183; 0193; 0194; 0195; 0203; 0204; 0205; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0265; 0266; 0267
05-2024	ASTE-...	0016; 0017; 0034; 0035; 0057; 0058; 0059; 0060; 0062; 0077; 0078; 0079; 0085; 0086; 0087; 0108; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0163; 0164; 0165; 0166; 0171; 0172; 0173;

		0174; 0175; 0195; 0196; 0197; 0198; 0202; 0203; 0223; 0224; 0225; 0226; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0278; 0279; 0280; 0281; 0300; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362
06-2024	ASTF-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0062; 0063; 0070; 0071; 0076; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0168; 0169; 0170; 0194; 0195; 0196; 0409; 0410; 0411; 0435; 0436; 0437; 0438; 0471; 0474; 0475; 0476; 0477; 0478
07-2024	ASTH-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0039; 0040; 0045; 0046; 0081; 0082; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0120; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0217; 0218; 0219; 0225; 0226; 0243; 0244; 0245; 0246; 0255; 0256; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0293; 0294; 0295; 0296; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0324; 0325; 0326; 0327; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0403; 0404; 0405; 0406; 0434; 0435; 0436; 0437; 0450; 0451; 0452; 0453; 0476; 0477; 0478; 0479; 0480; 0481; 0488; 0489; 0490; 0491
08-2024	ASTJ-...	0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0089; 0090; 0091; 0092; 0145; 0146; 0147; 0171; 0237
09-2024	ASTK-...	0002; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032

Fiche réponse client

Veillez faxer ou envoyer ce formulaire par e-mail à votre interlocuteur Dräger !

D R Ä G E R	À :	Dräger France SAS	
	Département :	Qualité & Affaires Réglementaires	
	Représentant Dräger	Delphine MARTIN	
	Télécopie :	01 40 96 97 20	
	Tél. :	01 46 11 56 00	
	E-mail :	Qualite-ar-hse@draeger.com	
Re : Consigne de sécurité de la station d'anesthésie Atlan			
D O N N É E S C L I E N T	(Veillez compléter)		
	Établissement :		
	Nom du client :		
	Tél. :		Fax : _____
	E-mail :		
	Adresse :		
	Adresse 2 :		
	Ville :		Pays : _____
	Nombre d'unités concernées : _____		
	☐ Nous accusons réception de la consigne de sécurité et nous confirmons que les informations qu'elle contient ont été transmises à tous les utilisateurs concernés.		
(Veillez compléter et signer)			
Titre/fonction : _____			
Nom : _____ (Veillez écrire en lettres majuscules)			
Signature : _____ Date : _____			