

MISE EN GARDE : Risque de mesure incorrecte de la glycémie

Nom du patient

Attention, certains lecteurs de glycémie ou bandelettes réactives présentent une interférence avec le maltose et ne doivent pas être utilisés en raison du risque de mesure faussement élevée de glycémie chez les patients utilisant EXTRANEAL

(Icodextrine). Ceci pourrait masquer une vraie hypoglycémie ou conduire au diagnostic erroné d'hyperglycémie, pouvant menacer le pronostic vital.

Utilisez **UNIQUEMENT** des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives utilisant une méthode spécifique du glucose.

Vérifiez sur la notice ou l'étiquetage des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives l'absence d'une interférence. Si cette information n'est pas mentionnée, il est probable que ce lecteur soit compatible mais par mesure de précaution, il convient de vérifier auprès du fabricant.

Pour plus d'information, veuillez consulter la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> ou visiter le site www.glucosesafety.com

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

Document diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Vantive et Extraneal sont des marques déposées de Vantive Health LLC ou de ses filiales. FR-RC21-240011-V1- Novembre 2024

Vantive