

[Si vous ne visualisez pas correctement cet email, cliquez-ici.](#)

ViDAL Sécurisation



Rappel d'implémentation

Sécuriser les ordonnances uniquement avec des unités issues du Référentiel VIDAL

Réf. Avis de sécurité FSN n°2025-01

FSCA VIG-2024-11-01

SRN Fabricant : FR-MF-000004612

UDI-DI : 03666075000320, 03666075000696, 03666075000962

Versions (UDI-PI) : 2023.10.16 et antérieures

Dispositif : API VIDAL Sécurisation

Destinataires : Responsables techniques / R&D et correspondants de matériovigilance ou Direction



20 Janvier 2025

Madame, Monsieur,

Nous avons été informés d'un dysfonctionnement sur un contrôle d'ordonnance dans un cas particulier.

Contexte de reproduction :

- Rédaction d'une prescription avec
 - une unité de prescription locale (exemple : créée manuellement par l'utilisateur dans son LAP)
 - une posologie inadaptée (sous dosage ou surdosage)
- Appel à l'API de sécurisation VIDAL avec
 - transmission de cette unité qui n'est pas connue du Référentiel VIDAL
 - transmission d'une dose par 24h (sans dose par prise)

- Résultat : la sécurisation de la posologie n'est pas possible car l'unité n'est pas connue **et il n'y a pas de message d'alerte VIDAL** (ni alerte ni information indiquant que la prescription n'est pas sécurisée)

Nous souhaitons revenir sur les recommandations ci dessous :

1. La sécurisation avec le DM VIDAL Sécurisation impose d'utiliser les référentiels VIDAL prévus à cet effet - dont les unités.
2. Seuls les UNIT ID connus de VIDAL doivent être envoyés à l'API de Sécurisation, afin de permettre le calcul des alertes

Une correction a toutefois été apportée dans la version 2023.10.17 des API VIDAL Sécurisation (sortie janvier 2025) : dans le cas où l'unité envoyée à l'API de sécurisation n'appartient pas au Référentiel VIDAL, l'API renverra toujours une alerte de niveau 1 "Posologie Impossible à vérifier".

Nous vous demandons de vérifier votre implémentation sur ce point, et le cas échéant de la modifier pour envoyer uniquement des UNIT ID connus de VIDAL lors de vos appels à l'API de Sécurisation.

*Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Bien cordialement,*

Nous vous demandons de nous faire un retour de l'accusé de réception en PJ par mail à editeurs@ Vidal.fr

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l'équipe éditeurs : editeurs@ Vidal.fr

Pour la Relation éditeurs

Laura Silvestrini



[Cliquez ici pour vous désinscrire.](#)