

**INFORMATION IMPORTANTE
PRODUIT
CORRECTION**

Guyancourt, le 03 avril 2025

Objet : Moniteur de signes vitaux Connex[®] CVSM/ Electrocardiographe ECG de repos CP 150 / Support mobile avec batterie additionnelle intégrée pour Moniteur Connex[®] Spot (APM)

Fabricant : **Welch Allyn**, Inc. (Numéro d'enregistrement unique : US-MF-000013394)

Fabricant du problème Baxter Healthcare Corporation émet une information de sécurité urgente pour les produits énumérés ci-dessous suite à des signalements de clients faisant état d'incendies liés à la batterie.

L'enquête a révélé que les appareils en question utilisaient des batteries tierces non homologuées Baxter.

Conformément à l'étiquetage des produits Baxter (*voir annexe A*), ces produits ne doivent être utilisés qu'avec la batterie homologuée Baxter / Welch Allyn (**code produit BATT99**).

L'utilisation d'une batterie non homologuée peut entraîner une combustion, un incendie ou des problèmes de performance de l'appareil.

Les produits concernés ont été distribués en France à partir du 25/08/2010. Baxter mettra à jour les notices d'utilisation et les manuels d'entretien afin d'inclure des instructions pour l'utilisation exclusive d'une batterie de remplacement approuvée par Baxter et de souligner les risques associés à l'utilisation d'une batterie non approuvée.

Produit concerné

Code produit	Nom du produit	Numéro de série	Identifiant unique des dispositifs (IUD)
Cf Annexe B	Welch Allyn Moniteur de signes vitaux Connex (Connex VSM)	tous	Cf Annexe B
	Welch Allyn Electrocardiographe CP150		
7000-APM	Welch Allyn Support mobile avec batterie additionnelle intégrée (APM) pour Moniteur Connex Spot		00732094210613

Risque encouru

L'utilisation de batteries non homologuées peut entraîner divers problèmes, notamment le dysfonctionnement de l'appareil et un emballement thermique, pouvant entraîner une surchauffe, un incendie des cellules ou, dans les cas extrêmes, une réaction de combustion.

La plupart des patients ne subiront que des blessures légères, voire aucune, mais les patients à risque (sous oxygène, personnes âgées, immobilisées, etc.) peuvent subir des conséquences graves, voire critiques, dues à des brûlures, à l'inhalation de fumée ou à des lésions musculo-squelettiques.

À ce jour, Baxter a reçu huit incidents concernant ce problème, mais aucune blessure n'a été signalée.

Mesures à prendre par l'utilisateur

Baxter vous demande de bien vouloir prendre les mesures suivantes :

1- N'utilisez pas de batterie non homologuée.

Baxter demande à ses clients d'utiliser exclusivement la batterie **BATT99** approuvée par Baxter / Welch Allyn, conformément à l'étiquetage du produit, en raison de ses tests de sécurité et de performance.

2- Inspectez tous les appareils.

Si vous possédez un appareil identifié dans le tableau des produits concernés ci-dessus, vérifiez qu'il s'agit de la batterie homologuée.

Consultez la figure 1 ci-dessous pour des exemples d'étiquettes de batteries homologuées, portant le code produit **BATT99**, « **Welch Allyn** » et l'adresse de l'usine de fabrication de Skaneateles Falls.

Figure 1 : exemple d'étiquettes des batteries homologuées



3- N'utilisez plus de batterie non homologuée.

4- Remplacez immédiatement les batteries non homologuées par une batterie homologuée.

Vous pouvez contacter votre représentant commercial Baxter pour commander les batteries BATT99 approuvées par Baxter / Welch Allyn.

5- Compléter le formulaire réponse client ci-après et nous le retourner par mail à mv_france@baxter.com ou par fax au numéro suivant : **01 34 61 55 25**. Le fait de nous retourner rapidement votre formulaire de réponse client confirmera la bonne réception de cette notification.

- 6- Si vous avez acheté ce produit auprès d'un distributeur, veuillez noter que le formulaire de réponse de Baxter n'est pas applicable. Si un formulaire de réponse est fourni par votre distributeur ou votre grossiste, veuillez le renvoyer au fournisseur conformément à ses instructions.
- 7- Si vous êtes un grossiste ou un distributeur/prestataire ayant fourni ces dispositifs à d'autres établissements, veuillez informer vos clients de cette communication, conformément à vos procédures.

Si vous avez des questions sur cette notification, nous vous remercions de contacter le service Qualité par mail ou votre contact habituel.

L'ANSM a été informée de cette notification.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments éventuellement causés par cette action.

Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Sandrine DUBOIS
Pharmacien Responsable – Directeur Qualité et Affaires Réglementaires
Baxter SAS France

FORMULAIRE DE REPONSE

(Information Produit Importante du 03 avril 2025 – FA 2025-009)

Moniteur de signes vitaux Connex® CVSM/ Electrocardiographe ECG de repos CP 150 / Moniteur Connex® Spot Support mobile avec batterie additionnelle intégrée (APM)

Codes produits / Numéro de série : cf annexe B

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par FAX au numéro ci-dessous :

01 34 61 55 25 ou par mail **mv_france@baxter.com**

Nom et adresse de l'établissement :	
Réponse complétée par :	
Titre :	
N° de téléphone :	
Adresse mail :	

Nous avons bien reçu la lettre susmentionnée et nous avons diffusé l'information aux personnes concernées.

Les produits présents dans mon établissement sont les suivants *(vous pouvez joindre une liste séparée si besoin)* :

Code produit	Numéro de série

Signature/Date : Champ obligatoire	
--	--

Annexe A : Avertissement de la Notice concernant l'utilisation des accessoires homologués pour les dispositifs Connex VSM, CSM (APM) et CP150**Welch Allyn Moniteur de signes vitaux Connex (Connex VSM)**

Document, DIR 80029742, version B (3^{ème} avertissement en page 16)



AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le Welch Allyn et conformément au mode d'emploi du fabricant. L'utilisation d'accessoires non certifiés avec le moniteur peut affecter la sécurité du patient et de l'utilisateur, mais aussi compromettre les performances et la précision du produit.

Welch Allyn Moniteur spot Connex Support mobile avec batterie supplémentaire intégrée (APM)

Document, DIR 80029765, version A (2^{ème} avertissement en page 11)



AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Welch Allyn et conformément au mode d'emploi du fabricant. L'utilisation d'accessoires non agréés avec le moniteur peut affecter la sécurité du patient et de l'utilisateur, mais aussi compromettre les performances et la précision du produit, et entraîner l'annulation de sa garantie.

Welch Allyn Electrocardiographe ECG de repos CP 150

Document, DIR 80020970, version B
8^{ème} avertissement en page 10



AVERTISSEMENT Des batteries défectueuses peuvent endommager l'électrocardiographe. Procéder à l'inspection visuelle de la batterie au moins une fois par mois. Si la batterie semble endommagée ou fissurée, elle doit être remplacée immédiatement par une batterie approuvée par Welch Allyn.

11^{ème} avertissement en page 11



AVERTISSEMENT Utiliser exclusivement les pièces et accessoires (y compris le papier thermique) fournis avec l'appareil et disponibles auprès de Welch Allyn. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut nuire aux performances du dispositif ou à la sécurité d'utilisation de cet appareil.

Annexe B : Liste des codes produits concernés

Codes produits - Welch Allyn Moniteur de signes vitaux Connex® (CVSM)					
Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD
63MTPX-B	00732094095364	65MXXE-A	00732094189858	67NXXW-4	00732094206432
63MTXX-B	00732094095340	65MXXE-B	00732094088632	67NXXX-2	00732094193275
63MXPE-B	00732094095326	65MXXX-2	00732094088618	67NXXX-4	00732094193268
63MXPX-B	00732094095319	65MXXX-4	00732094088588	67NXXX-6	00732094194272
63MXXE-B	00732094095296	65MXXX-6	00732094148145	67NXXX-7	00732094223576
63MXXX-B	00732094095272	65MXXX-A	00732094189780	67NXXX-B	00732094151107
63NTPX-B	00732094095258	65MXXX-B	00732094088571	68HCXP-B	00732094221763
63NTXX-B	00732094095234	65MXXX-C	00732094199789	68HRTX-B	00732094189322
63NXPE-B	00732094095210	65NTPE-B	00732094088540	68MCEP-2	00732094193251
63NXPX-B	00732094095197	65NTPX-2	00732094088526	68MCEP-4	00732094193244
63NXXE-B	00732094095180	65NTPX-3	00732094088502	68MCEP-6	00732094194265
63NXXX-B	00732094095159	65NTPX-4	00732094088380	68MCEP-B	00732094151084
63XTPX-B	00732094095111	65NTPX-7	00732094088366	68MCEX-2	00732094193237
63XTXX-B	00732094095098	65NTPX-B	00732094088359	68MCEX-B	00732094151077
63XXPE-B	00732094191714	65NTXE-B	00732094088311	68MCTP-2	00732094193213
63XXPX-B	00732094095081	65NTXX-2	00732094088304	68MCTP-4	00732094193206
63XXXE-B	00732094095050	65NTXX-3	00732094189698	68MCTP-B	00732094151060
63XXXX-B	00732094095036	65NTXX-4	00732094088182	68MCTP-B-ECG3A	00732094345919
64HTPX-2	00732094092745	65NTXX-6	00732094088175	68MCTW-B	00732094206258
64HTPX-4	00732094092738	65NTXX-B	00732094088151	68MCTX-2	00732094193190
64HTPX-B	00732094092714	65NTXX-N	00732094189643	68MCTX-6	00732094194234
64HTXX-2	00732094092578	65NXPE-2	00732094088120	68MCTX-B	00732094151053
64HTXX-6	00732094191608	65NXPE-4	00732094088106	68MCXX-2	00732094193152
64HTXX-7	00732094191592	65NXPE-5	00732094088090	68MCXX-7	00732094224634
64HTXX-B	00732094092554	65NXPE-B	00732094088076	68MCXX-B	00732094151039
64HXPE-4	00732094191530	65NXPX-2	00732094088052	68MREP-2	00732094193138
64HXPE-7	00732094191509	65NXPX-4	00732094088038	68MREP-4	00732094193121
64HXXX-B	00732094123906	65NXPX-B	00732094087895	68MREP-B	00732094151022
64MTPE-B	00732094092370	65NXXE-2	00732094087871	68MREX-7	00732094224627
64MTPX-2	00732094092356	65NXXE-4	00732094087857	68MREX-B	00732094151015
64MTPX-4	00732094092332	65NXXE-5	00732094189490	68MRTP-B	00732094151008
64MTPX-6	00732094148169	65NXXE-6	00732094087833	68MRTW-2	00732094205831
64MTPX-B	00732094092295	65NXXE-A	00732094189476	68MRTX-4	00732094193060
64MTPX-C	00732094199840	65NXXE-B	00732094087819	68MRTX-7	00732094224610
64MTXE-B	00732094092240	65NXXX-2	00732094087697	68MRTX-B	00732094150995
64MTXX-2	00732094092226	65NXXX-4	00732094087673	68MRXX-B	00732094150971
64MTXX-4	00732094092202	65NXXX-6	00732094087642	68MSEP-B	00732094189315
64MTXX-6	00732094092080	65NXXX-B	00732094087611	68MSEX-B	00732094189308
64MTXX-7	00732094092073	65NXXX-K	00732094213478	68MSTP-6	00732094194128
64MTXX-B	00732094092059	65XTPX-B	00732094087581	68MSTP-B	00732094189292
64MTXX-C	00732094199826	65XTXX-B	00732094087574	68MSTX-6	00732094194111
64MXPE-2	00732094092035	65XXPE-B	00732094123715	68MSTX-B	00732094189285
64MXPE-4	00732094191080	65XXXE-B	00732094087536	68MSXX-B	00732094189261
64MXPE-6	00732094092011	65XXXX-2	00732094189377	68MXDX-B	00732094249187
64MXPE-B	00732094091991	65XXXX-B	00732094087512	68MXEP-2	00732094193015
64MXPX-4	00732094091953	67MCEP-2	00732094193855	68MXEP-4	00732094193008
64MXPX-6	00732094177107	67MCEP-B	00732094151398	68MXEP-6	00732094194081
64MXPX-B	00732094091939	67MCEX-2	00732094193831	68MXEP-B	00732094150964

Codes produits - Welch Allyn Moniteur de signes vitaux Connex® (CVSM)

Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD
64MXPX-C	00732094199819	67MCTP-4	00732094193800	68MXEW-2	00732094205558
64MXXE-2	00732094091908	67MCTP-B	00732094151374	68MXEX-2	00732094192995
64MXXE-6	00732094091779	67MCTP-B-ECG3A	00732094323795	68MXEX-4	00732094192988
64MXXE-7	00732094091755	67MCTX-2	00732094193794	68MXEX-6	00732094194074
64MXXE-B	00732094091724	67MCTX-4	00732094193787	68MXEX-7	00732094224740
64MXXX-2	00732094091700	67MCTX-6	00732094194654	68MXEX-B	00732094150957
64MXXX-3	00732094091588	67MCTX-B	00732094151367	68MXEY-2	00732094205510
64MXXX-4	00732094091564	67MCXP-B	00732094151350	68MXTP-2	00732094192971
64MXXX-6	00732094091540	67MCXX-B	00732094151343	68MXTP-4	00732094192964
64MXXX-B	00732094091526	67MREP-B	00732094151336	68MXTP-6	00732094194067
64MXXX-C	00732094199802	67MREX-B	00732094151329	68MXTP-B	00732094150940
64NTPÉ-B	00732094091502	67MRTP-B	00732094151312	68MXTP-B-ECG3A	00732094345902
64NTPX-2	00732094091489	67MRX-B	00732094151305	68MXTW-4	00732094205466
64NTPX-4	00732094091472	67MRXP-4	00732094193640	68MXTW-B	00732094205442
64NTPX-6	00732094091441	67MRXP-B	00732094151299	68MXTX-2	00732094192957
64NTPX-7	00732094091434	67MRXX-B	00732094151282	68MXTX-4	00732094199741
64NTPX-B	00732094091410	67MSTP-6	00732094194548	68MXTX-6	00732094194050
64NTPX-G	00732094091274	67MSTP-B	00732094177541	68MXTX-B	00732094150933
64NTXE-B	00732094091236	67MSTX-6	00732094194531	68MXTX-BR	00732094322613
64NTXX-2	00732094091229	67MSTX-B	00732094177558	68MXTX-BT	00732094319002
64NTXX-4	00732094091205	67MXDX-B	00732094249163	68MXXP-2	00732094192940
64NTXX-6	00732094091182	67MXEP-2	00732094193619	68MXXP-4	00732094192933
64NTXX-7	00732094091168	67MXEP-4	00732094193602	68MXXP-B	00732094150926
64NTXX-B	00732094091144	67MXEP-6	00732094194500	68MXXX-2	00732094192926
64NTXX-G	00732094091120	67MXEP-B	00732094151275	68MXXX-4	00732094192919
64NTXX-N	00732094190748	67MXEW-2	00732094207415	68MXXX-6	00732094194036
64NXPE-2	00732094091106	67MXEX-2	00732094193596	68MXXX-B	00732094150919
64NXPE-4	00732094090987	67MXEX-4	00732094193589	68NCEP-2	00732094192902
64NXPE-5	00732094090963	67MXEX-6	00732094194494	68NCEP-4	00732094192896
64NXPE-6	00732094090949	67MXEX-B	00732094151268	68NCEP-6	00732094194029
64NXPE-7	00732094090925	67MXTP-2	00732094193572	68NCEP-B	00732094150902
64NXPE-B	00732094090901	67MXTP-4	00732094193565	68NCEX-2	00732094192889
64NXPE-G	00732094090789	67MXTP-6	00732094194487	68NCEX-4	00732094192872
64NXPE-Z	00732094223590	67MXTP-B	00732094151251	68NCEX-6	00732094194012
64NXPX-2	00732094090765	67MXTP-B-ECG3A	00732094323788	68NCEX-B	00732094150896
64NXPX-4	00732094090758	67MXTX-2	00732094193558	68NCEY-B	00732094205244
64NXPX-5	00732094190670	67MXTX-4	00732094193541	68NCTP-4	00732094192858
64NXPX-6	00732094090734	67MXTX-6	00732094194470	68NCTP-6	00732094194005
64NXPX-7	00732094090710	67MXTX-B	00732094151244	68NCTP-B	00732094150889
64NXPX-B	00732094090697	67MXTX-BR	00732094322651	68NCTP-B-ECG3A	00732094345896
64NXXE-2	00732094090673	67MXXP-2	00732094193534	68NCTW-B	00732094205206
64NXXE-4	00732094090659	67MXXP-4	00732094193527	68NCTX-2	00732094192841
64NXXE-6	00732094090635	67MXXP-B	00732094151237	68NCTX-4	00732094192834
64NXXE-7	00732094090611	67MXXW-2	00732094207255	68NCTX-6	00732094193992
64NXXE-B	00732094090499	67MXXX-2	00732094193510	68NCTX-B	00732094150872
64NXXE-G	00732094090475	67MXXX-4	00732094193503	68NCXP-B	00732094150865
64NXXE-N	00732094190595	67MXXX-6	00732094194456	68NCXX-6	00732094193978
64NXXE-Z	00732094223675	67MXXX-7	00732094224818	68NCXX-B	00732094150858
64NXXX-2	00732094090451	67MXXX-B	00732094151220	68NSEP-6	00732094193961
64NXXX-4	00732094090437	67NCEP-2	00732094193497	68NSEP-B	00732094189254
64NXXX-6	00732094090406	67NCEP-6	00732094194449	68NSTP-6	00732094193947

Codes produits - Welch Allyn Moniteur de signes vitaux Connex® (CVSM)

Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD
64NXXX-7	00732094090390	67NCEP-B	00732094151213	68NSTP-B	00732094189230
64NXXX-B	00732094090369	67NCEX-4	00732094193466	68NSTX-6	00732094193930
64XTPX-B	00732094090185	67NCTP-B	00732094151190	68NSTX-B	00732094189223
64XTXX-B	00732094090161	67NCTP-B-ECG3A	00732094323771	68NSTY-6	00732094204797
64XXPE-B	00732094090147	67NCTX-B	00732094151183	68NSXP-B	00732094189216
64XXPX-2	00732094190519	67NCXP-2	00732094193411	68NSXX-B	00732094189209
64XXPX-B	00732094090123	67NCXP-6	00732094194401	68NXDX-B	00732094249170
64XXXE-B	00732094090109	67NCXP-B	00732094151176	68NXEP-2	00732094192780
64XXXX-2	00732094190502	67NCXX-4	00732094193381	68NXEP-4	00732094192773
64XXXX-B	00732094089981	67NCXX-6	00732094194395	68NXEP-6	00732094193909
65HTPX-2	00732094089820	67NCXX-B	00732094151169	68NXEP-7	00732094224696
65HTPX-4	00732094190489	67NSEP-B	00732094189339	68NXEP-B	00732094150841
65HTPX-7	00732094089806	67NSTP-6	00732094194364	68NXEW-4	00732094204728
65HTPX-B	00732094089684	67NSTW-B	00732094206678	68NXEX-2	00732094192766
65HTXX-2	00732094089646	67NSTX-B	00732094177503	68NXEX-4	00732094199703
65HTXX-4	00732094089622	67NSXX-B	00732094177534	68NXEX-5	00732094214062
65HTXX-B	00732094089608	67NXDX-B	00732094249149	68NXEX-6	00732094192599
65HXPE-2	00732094089585	67NXEP-2	00732094193374	68NXEX-B	00732094150834
65HXPE-4	00732094089561	67NXEP-4	00732094193367	68NXEX-K	00732094314304
65HXPE-5	00732094184341	67NXEP-6	00732094194326	68NXTP-2	00732094192759
65HXPX-4	00732094089523	67NXEP-B	00732094151152	68NXTP-4	00732094192742
65MTPE-B	00732094089332	67NXEW-2	00732094206609	68NXTP-6	00732094192582
65MTPX-2	00732094089318	67NXEX-2	00732094193350	68NXTP-B	00732094150827
65MTPX-4	00732094089189	67NXEX-4	00732094193343	68NXTP-B-ECG3A	00732094345889
65MTPX-6	00732094089165	67NXEX-6	00732094194319	68NXTW-4	00732094204643
65MTPX-7	00732094089141	67NXEX-7	00732094224795	68NXTW-B	00732094204629
65MTPX-A	00732094190151	67NXEX-B	00732094151145	68NXTX-2	00732094192735
65MTPX-B	00732094089127	67NXTP-2	00732094193336	68NXTX-4	00732094198799
65MTXE-B	00732094089080	67NXTP-4	00732094193329	68NXTX-6	00732094192575
65MTXX-2	00732094089066	67NXTP-6	00732094194302	68NXTX-B	00732094150810
65MTXX-3	00732094190113	67NXTP-7	00732094224788	68NXTX-BR	00732094322590
65MTXX-4	00732094089042	67NXTP-B	00732094151138	68NXTX-BT	00732094318999
65MTXX-6	00732094089011	67NXTP-B-ECG3A	00732094323764	68NXTY-B	00732094204582
65MTXX-B	00732094088892	67NXTW-B	00732094206494	68NXXP-2	00732094192728
65MTXX-C	00732094199796	67NXTX-2	00732094193312	68NXXP-4	00732094192711
65MTXX-Z	00732094223583	67NXTX-4	00732094193305	68NXXP-6	00732094192568
65MXPE-2	00732094088878	67NXTX-6	00732094194296	68NXXP-B	00732094150803
65MXPE-4	00732094190038	67NXTX-7	00732094224771	68NXXW-4	00732094204568
65MXPE-B	00732094088854	67NXTX-B	00732094151121	68NXXX-2	00732094192704
65MXPX-2	00732094088830	67NXXP-2	00732094193299	68NXXX-4	00732094192698
65MXPX-B	00732094088823	67NXXP-4	00732094193282	68NXXX-6	00732094192551
65MXXE-2	00732094088809	67NXXP-6	00732094194289	68NXXX-B	00732094150797
65MXXE-4	00732094088687	67NXXP-7	00732094224764		
65MXXE-6	00732094088656	67NXXP-B	00732094151114		

Code produit - Welch Allyn CP150 Electrocardiographe

Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD	Code produit	Identifiant IUD
CP150-1EN2	00732094185171	CP150A-2DE2	00732094192018	CP150A-4ZHC-CN	00732094213539
CP150-1EN66	00732094179750	CP150A-2DE5	00732094192001	CP150AD-1ENB	00732094237580
CP150-1ENB	00732094177640	CP150A-2EN2	00732094177626	CP150AD-2DE2	00732094237573
CP150-1FRB	00732094192254	CP150A-2EN3	00732094179620	CP150AD-2ES2	00732094237559
CP150-2DE2	00732094192162	CP150A-2EN4	00732094177619	CP150ADS-1EN66	00732094242171
CP150-2EN2	00732094179743	CP150A-2EN7	00732094191998	CP150AS-1EN66	00732094333244
CP150-2EN4	00732094179729	CP150A-2ES2	00732094191981	CP150AS-1ENB	00732094185133
CP150-2EN7	00732094192148	CP150A-2FR2	00732094191974	CP150AW-1EN66	00732094237511
CP150-2ES2	00732094192131	CP150A-2FR5	00732094191967	CP150AW-1ENB	00732094237504
CP150-2FR2	00732094192124	CP150A-2NL2	00732094191950	CP150AW-2DE2	00732094237498
CP150-2FR5	00732094192117	CP150A-2NO2	00732094191943	CP150AW-2EN4	00732094237481
CP150-2NL2	00732094192100	CP150A-2SV2	00732094191929	CP150AW-2ES2	00732094237474
CP150-2PT2	00732094192087	CP150A-3BPZ	00732094212938	CP150AW-2NL2	00732094237467
CP150-2SV2	00732094192070	CP150A-3EN2	00732094179613	CP150AW-3ENB	00732094242003
CP150-3ENB	00732094179705	CP150A-3EN3	00732094179606	CP150AWD-1EN66	00732094237436
CP150-3ESB	00732094179682	CP150A-3EN4	00732094184815	CP150AWD-1ENB	00732094237429
CP150-4DE2	00732094192063	CP150A-3ENB	00732094179590	CP150AWD-2DE2	00732094237412
CP150-4EN2	00732094179675	CP150A-3ES2	00732094179583	CP150AWD-2EN4	00732094237405
CP150-4EN4	00732094179668	CP150A-3ESB	00732094177602	CP150AWD-2ES2	00732094237399
CP150-4PT2	00732094192025	CP150A-3ZHC-CN	00732094213515	CP150AWD-2NL2	00732094237382
CP150A-1EN2	00732094185157	CP150A-4BPZ	00732094212952	CP150AWD-4EN4	00732094237368
CP150A-1EN4	00732094185140	CP150A-4DE2	00732094191912	CP150AWDS-1ENB	00732094241686
CP150A-1EN66	00732094179644	CP150A-4EN2	00732094177596	CP150AWDS-3ENB	00732094241662
CP150A-1ENB	00732094177633	CP150A-4EN4	00732094177589	CP150AWS-1ENB	00732094243437
CP150A-1ENBR	00732094322415	CP150A-4ES2	00732094177572	CP150S-1ENB	00732094222302
CP150A-1ESB	00732094192230	CP150A-4FR5	00732094189186	CP150W-1ENB	00732094232837
CP150A-1FRB	00732094179637	CP150A-4PT2	00732094189179		