

Mauvaise DC associée lors d'une copie depuis le thésaurus de référence Logipren

Une anomalie nécessite votre attention :

Médecins et Pharmaciens référents qui paramètrent le thésaurus Logipren.

Versions concernées :

- Logipren v2.5.3 ; UDI : (01)03770024749052(11)241231(21)V2.5.3

Contexte : Lors de la copie d'un médicament depuis le thésaurus de référence : avant de créer la DC du nouveau médicament, une recherche est effectuée pour voir si la DC existe déjà dans le thésaurus local (afin d'éviter de créer des doublons de DC).

Bug : Au lieu de rechercher une DC strictement identique, une DC qui contient le mot recherché est considérée équivalente. Le risque est donc une mauvaise identification du médicament prescrit.

Exemple : Lors de la copie depuis le thésaurus de référence du médicament "Adrénaline" (DC) - "ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/mL sol inj sans sulfite" (spécialité), si la DC "Noradrénaline" (contient le mot "adrénaline") existe déjà dans le thésaurus du service, il est alors possible que la DC "Noradrénaline" soit associée à la spécialité " ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/mL sol inj sans sulfite".

Marche à suivre :

Dans le thésaurus du service, pour chaque médicament importé depuis le thésaurus de référence v2.5.3 :

Vérifier que les DC sont correctes.

Un correctif est en cours et sera disponible pour déploiement prochainement.

Merci de confirmer bonne réception et compréhension de cet avis.

Veillez-vous assurer que toutes les personnes concernées ont pris connaissance de cette information et des actions à réaliser.