

15 mai 2025

URGENT : AVIS DE SÉCURITÉ – MDS-24-5154-C

4Fr Single Lumen PowerPICC (versions SOLO et non-SOLO)

REF : Voir Pièce Jointe 1 - Numéros de lot : Voir Pièce Jointe 1

Type d'action : Rappel produit

Attention : Le personnel clinique impliqué dans la mise en place des dispositifs vasculaires centraux, y compris, mais sans s'y limiter : anesthésiste, urgentiste, radiologie interventionnelle, spécialistes et équipes d'accès vasculaire, gestionnaires de risques, directeurs des achats

REMARQUE : *Cette lettre contient des numéros de lot supplémentaires et constitue une extension de la lettre que vous avez reçue en mars 2025.*

Si vous n'êtes pas impacté par le retrait des lots spécifiques conformément à l'annexe 1, cet avis de sécurité contient des informations et des actions importantes pour TOUS les clients de cathéters PowerPICC à lumière unique 4Fr.

Cher client,

Description du problème

En mars 2025, BD a procédé à un retrait global de son produit en raison d'une augmentation des fuites d'usure sur les **cathéters PowerPICC à lumière unique 4Fr**, versions SOLO et non-SOLO, dans des zones géographiques spécifiques. Ces fuites sont principalement caractérisées par une fissure transversale/circonférentielle dans la tubulure du cathéter (Image 1).

Sur la base des commentaires des clients et des enquêtes poursuivies, BD a encore renforcé les spécifications associées à l'indice de fluidité à chaud (MFI) pour assurer la performance du produit, ce qui a entraîné l'augmentation du scope de l'avis (voir pièce jointe 1) et clarifie ses instructions pour les clients.



Image 1 : Exemple de fissure transversale/circonférentielle dans la tubulure du cathéter

L'enquête de BD a permis d'identifier certains facteurs qui contribuent aux fuites d'usure des matériaux dans la tubulure du cathéter PowerPICC à lumière unique 4 Fr, en particulier :

- La résine utilisée pour extruder le tube du cathéter a dépassé les spécifications de notre fournisseur pour une propriété matérielle appelée indice de fluidité à chaud (MFI). L'enquête de BD a conclu qu'un MFI plus élevé pourrait rendre le tube du cathéter PowerPICC plus vulnérable aux fuites lorsqu'il est soumis à une contrainte.
- Des techniques d'insertion et de fixation qui contredisent les exigences du mode d'emploi PowerPICC, telles que l'insertion du cathéter aussi près que possible du repère zéro.
 - Les BD PICCline ont une conception conique dont le diamètre augmente près du repère à zéro centimètre sur le dispositif.
 - Lors de l'utilisation d'un BD PICCline, assurez-vous que la pratique est conforme à celle des IFU (instructions d'utilisation) de BD en ce qui concerne la profondeur d'insertion et la fixation, y compris l'insertion jusqu'à la marque zéro. Insérez complètement le PICCline aussi près que possible du repère de zéro centimètre (position B sur l'image 2). Cela permet d'utiliser la région effilée et résistante au pliage et s'associe à des taux de fuite de cathéter plus faibles.
 - Choisissez des dispositifs de sécurisation qui peuvent être utilisés conformément à la notice d'utilisation du BD PICCline.

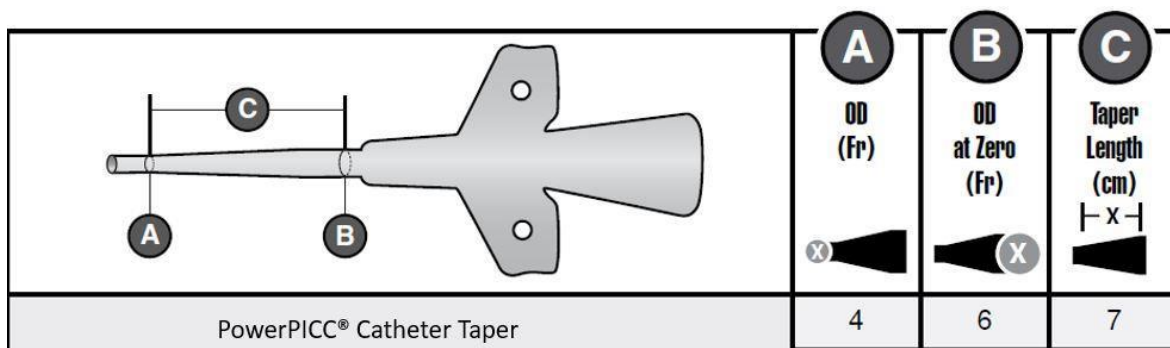


Image 2 : Image de la région de conicité du PowerPICC

Risque clinique

Les risques associés aux fuites d'usure sont les suivants : infiltration, extravasation, inconfort, phlébite, hémorragie, embolie gazeuse, embolie sur corps étranger, infection et interruption du traitement.

Les risques décrits ci-dessus peuvent nécessiter des interventions médicales futures, telles que l'extraction d'une embolie sur corps étranger, le remplacement du cathéter PICCline et d'autres traitements jugés appropriés par le fournisseur de soins de santé.

Les patients et les utilisateurs doivent observer tout signe ou symptôme sur les PICCline pouvant correspondre à une fracture du cathéter. Ces signes et symptômes peuvent se manifester, sans s'y limiter, par : une douleur lors de la perfusion, un gonflement du bras non lié à la thrombose veineuse profonde, une incapacité à prélever du sang et une fuite de perfusion autour du site d'insertion. Faites preuve de jugement clinique pour déterminer si le retrait du dispositif est nécessaire. Tous les dispositifs restant in situ doivent continuer à être surveillés en recherche des signes et symptômes



mentionnés ci-dessus. Si une fracture du cathéter est identifiée, le PICCline doit être retiré dès que médicalement possible pour le patient.

Depuis juin 2023, une augmentation des fuites d'usure des dispositifs a été identifiée. De juin 2023 à mars 2025, le taux mondial des réclamations pour fuites d'usure était de 0,065 %. Toutes les réclamations ont été évaluées pour déterminer si elles pouvaient faire l'objet d'une déclaration réglementaire et des rapports ont été produits, le cas échéant.

Actions cliniques de l'utilisateur

Tenez compte des besoins du patient en matière de perfusion, des autres options d'accès vasculaires et des risques et avantages de l'utilisation continue du cathéter. BD ne recommande pas de retirer le dispositif in situ des lots rappelés à moins que l'on soupçonne que des dommages au cathéter ne soient catégoriques, comme il est indiqué ci-dessous :

Mesures à prendre si aucun dommage au cathéter n'est suspecté :

1. Examinez soigneusement la partie visible du cathéter pour évaluer tout signe de dommage à la tige du cathéter.
2. Surveillez de près le patient pour détecter des signes et des symptômes de lésions du cathéter, tels qu'une augmentation de la circonférence des extrémités, une fuite de perfusion ou des rapports de douleur.
3. Lors de l'utilisation d'un BD PICCline, assurez-vous que la pratique est conforme aux instructions d'utilisation de BD pour la profondeur d'insertion et la fixation, y compris l'insertion jusqu'au repère zéro. Si le mode d'emploi d'un autre dispositif de fixation contredit le mode d'emploi d'un PICCline BD, suivez le mode d'emploi des PICCline de BD.

Mesures à prendre en cas de suspicion de dommages au cathéter :

1. Arrêtez immédiatement toute perfusion si l'on soupçonne des dommages au cathéter.
2. Suivez les directives de votre établissement pour les cathéters dont on soupçonne qu'ils sont endommagés.
3. S'il est confirmé que le cathéter présente une fracture, il faut le retirer et trouver une autre voie d'accès.

Mesures prises par BD

- BD a mis en place des contrôles supplémentaires autour du MFI qui offrent un niveau accru d'assurance du produit.

Actions de BD

- BD retire des lots supplémentaires non périmés de 4Fr Single Lumen PowerPICC, versions SOLO et non-SOLO, comme décrit dans la pièce jointe 1.
- BD informe les utilisateurs de s'assurer que la pratique est conforme aux instructions d'utilisation (IFU) de BD pour la profondeur d'insertion et la fixation.
- BD fournira un remplacement de produit ou un crédit pour tous les produits détruits.



Actions du client :

- Cessez d'utiliser tout numéro de lot affecté inutilisé de **4Fr Single Lumen PowerPICC**.
- Identifiez et mettez en quarantaine tous les numéros de lot affectés inutilisés de **4Fr Single Lumen PowerPICC**.
- Notez les numéros de lot et détruisez immédiatement toutes les unités affectées inutilisées.
- Remplissez et renvoyez le formulaire de réponse client **même si vous n'avez plus de stock dans votre établissement d'ici le 16 juin 2025**.
- Faites circuler cet avis à toutes les personnes qui doivent en être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation où les produits potentiellement concernés ont été transférés.
- Veuillez signaler tous les incidents liés au dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité compétente nationale le cas échéant, car cela fournit un retour d'information important.

Actions du distributeur :

- Cessez la distribution de tous les numéros de lot touchés inutilisés de **4Fr Single Lumen PowerPICC**.
- Identifiez, mettez en quarantaine, notez les numéros de lot, puis détruisez tous les numéros de lot affectés non distribués de **4Fr Single Lumen PowerPICC**.
- Identifiez les établissements où vous avez distribué le produit visé et informez-les immédiatement de cet avis.
 - Demandez à vos clients de remplir et de renvoyer le formulaire de réponse client à votre organisation à des fins de rapprochement avant le **16 juin**.
- Remplissez et retournez le formulaire de réponse du client une fois vos activités de rapprochement terminées.
- Veuillez signaler tous les incidents liés au dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité compétente nationale le cas échéant, car cela fournit un retour d'information important.

	Utilisateur final avec inventaire	Utilisateur final avec un stock ZÉRO	Où envoyer le formulaire dûment rempli
Acheté directement auprès de BD	Remplissez le formulaire dans son intégralité Dès réception, BD traitera la réponse et vous recevrez des produits de remplacement pour les produits inutilisés	Remplissez le formulaire et cochez la case indiquant « pas d'inventaire »	BDFieldActions@bd.com
Acheté auprès d'un distributeur/tiers	Remplissez tous les champs du formulaire et contactez votre distributeur pour organiser les remplacements	Remplissez le formulaire et cochez la case indiquant « pas d'inventaire »	Retournez le formulaire à votre distributeur



Personne-ressource de référence

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter votre représentant BD local ou le bureau BD local.

Nous confirmons que les organismes de réglementation compétents ont été informés de ces mesures.

BD s'engage à *faire progresser le monde de la santé*™. Nos objectifs principaux sont la sécurité des patients et des utilisateurs et la fourniture de produits de qualité. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par cette situation et vous remercions d'avance d'aider BD à résoudre cette affaire le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Sincèrement

Kinga Stolinska
Directrice, Qualité post-commercialisation
Qualité EMEA



Formulaire de réponse du client - MDS-24-5154-C

4Fr Single Lumen PowerPICC (versions SOLO et non-SOLO)

REF : Voir Pièce Jointe 1 - Numéros de lot : Voir Pièce Jointe 1

Retournez à BDFieldActions@bd.com dès que possible ou **au plus tard le 16 juin.**

Je confirme que cet avis de sécurité sur le terrain a été lu et compris et que toutes les mesures recommandées ont été mises en œuvre au besoin.

Cochez la case appropriée ci-dessous

☐ Nous n'avons aucun des produits visés énumérés à la **Pièce jointe 1** dans notre établissement. Le produit visé a été utilisé.

Tous les produits qui ne sont pas disponibles pour la destruction seront considérés comme éliminés dans votre établissement et donc physiquement indisponibles, sauf indication contraire.

OU

☐ Nous avons les unités suivantes du produit visé, comme indiqué dans la **Pièce jointe 1**, en notre possession et je confirme que les unités ont été détruites (*Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec le numéro de lot et le nombre d'unités détruites. Remplacement Le produit ne sera envoyé qu'après avoir rempli et renvoyé ce formulaire.*)

REF:	Numéro(s) de lot :	Unités détruites (indiquer la quantité ci-dessous)

Nom du compte/de l'organisation :	
Service (le cas échéant) :	
Adresse:	
CP:	Ville:
Nom de la personne-ressource :	
Titre du poste :	
Numéro de téléphone de la personne: Adresse e-mail de contact :	
Nom de votre fournisseur pour ce produit (s'il n'est pas directement de BD)	
Signature:	Date:

Ce formulaire doit être renvoyé à BD avant que cette action puisse être considérée comme fermée pour votre compte. *Si vous avez reçu cet avis de sécurité par l'intermédiaire d'un distributeur/tiers, veuillez renvoyer votre formulaire rempli à cette organisation à des fins de rapprochement.

pièce jointe 1 – codes produit et numéros de lot impactés

numéro unique d'enregistrement du fabricant (SRN): US-MF-000017720

Code Produit (ref)	Nom produit	Lot number	Expiry date (DD-MMM-YYYY)	UDI-DI
1174118	PowerPICC SV 4F SL 3CG - Kit basique	REHY2815	31/05/2025	(01)00801741034466(17)250531(10)REHY2815
		REJN1443	31/08/2025	(01)00801741034466(17)250831(10)REJN1443
		REGW0694		
2174108	4Fr Simple lumière PowerPICC	REGW0694	31/08/2025	(01)00801741138966(17)250831(10)REGW0694
		REGW2224	31/08/2025	(01)00801741138966(17)250831(10)REGW2224
		REGY0761	31/08/2025	(01)00801741138966(17)250831(10)REGY0761
		REHN1462	31/12/2025	(01)00801741138966(17)251231(10)REHN1462
		REHP0166	31/10/2025	(01)00801741138966(17)251031(10)REHP0166
		REHP2638	31/01/2026	(01)00801741138966(17)260131(10)REHP2638
		REHQ3104	28/02/2026	(01)00801741138966(17)260228(10)REHQ3104
		REHR0091	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REHR0091
		REHR0128	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REHR0128
		REHS1073	31/12/2025	(01)00801741138966(17)251231(10)REHS1073
		REHS1084	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REHS1084
		REHT0625	31/05/2026	(01)00801741138966(17)260531(10)REHT0625
		REHT1173	31/05/2026	(01)00801741138966(17)260531(10)REHT1173
		REHT2245	31/05/2026	(01)00801741138966(17)260531(10)REHT2245
		REHT3444	31/05/2026	(01)00801741138966(17)260531(10)REHT3444
		REHU1037	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHU1037
		REHU1038	31/01/2026	(01)00801741138966(17)260131(10)REHU1038
		REHU2499	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHU2499
		REHU2504	31/12/2025	(01)00801741138966(17)251231(10)REHU2504
		REHU3327	30/09/2025	(01)00801741138966(17)250930(10)REHU3327
		REHU3330	31/12/2025	(01)00801741138966(17)251231(10)REHU3330
		REHV0282	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHV0282
		REHV3682	31/07/2026	(01)00801741138966(17)260731(10)REHV3682
		REHV3738	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHV3738
		REHV3742	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHV3742
		REHW1387	30/06/2026	(01)00801741138966(17)260630(10)REHW1387
		REHX2948	30/09/2026	(01)00801741138966(17)260930(10)REHX2948
		REHY2847	31/10/2026	(01)00801741138966(17)261031(10)REHY2847
		REHZ0481	31/10/2026	(01)00801741138966(17)261031(10)REHZ0481
		REHZ1905	30/09/2026	(01)00801741138966(17)260930(10)REHZ1905
		REJN1097	30/11/2026	(01)00801741138966(17)261130(10)REJN1097
		REJN1621	31/08/2026	(01)00801741138966(17)260831(10)REJN1621
		REJN3028	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REJN3028
		REJN4165	31/10/2026	(01)00801741138966(17)261031(10)REJN4165
		REJP0873	31/01/2027	(01)00801741138966(17)270131(10)REJP0873
		REJP0874	31/01/2027	(01)00801741138966(17)270131(10)REJP0874
		REJP0875	31/01/2027	(01)00801741138966(17)270131(10)REJP0875
		REJQ1630	28/02/2027	(01)00801741138966(17)270228(10)REJQ1630
		REJQ1631	28/02/2027	(01)00801741138966(17)270228(10)REJQ1631
		REJQ1633	28/02/2027	(01)00801741138966(17)270228(10)REJQ1633
		REJR1413	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REJR1413
		REJR1430	30/11/2026	(01)00801741138966(17)261130(10)REJR1430
		REJR2210	30/11/2025	(01)00801741138966(17)251130(10)REJR2210
		REJR2229	31/10/2026	(01)00801741138966(17)261031(10)REJR2229
		REJR2678	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REJR2678
		REJS0267	31/08/2026	(01)00801741138966(17)260831(10)REJS0267
		REJS1271	31/08/2026	(01)00801741138966(17)260831(10)REJS1271
		REJS1322	31/01/2027	(01)00801741138966(17)270131(10)REJS1322
		REJS2197	31/08/2026	(01)00801741138966(17)260831(10)REJS2197
		REJS2593	31/03/2027	(01)00801741138966(17)270331(10)REJS2593
		REJS2606	30/04/2027	(01)00801741138966(17)270430(10)REJS2606
		REJS4771	30/11/2025	(01)00801741138966(17)251130(10)REJS4771
		REJT1381	31/03/2027	(01)00801741138966(17)270331(10)REJT1381
		REJU2497	31/03/2026	(01)00801741138966(17)260331(10)REJU2497
		REHT2986	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHT2986
		REHT3382	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHT3382
		REHT3396	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHT3396
		REHT3411	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHT3411
		REHT3426	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHT3426
		REHU0973	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHU0973
		REHU1028	31/05/2025	(01)00801741138973(17)250531(10)REHU1028
		REHU1501	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHU1501
		REHU1509	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHU1509
		REHU1518	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHU1518
		REHU3280	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHU3280
		REHV0246	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHV0246
		REHV0252	30/06/2025	(01)00801741138973(17)250630(10)REHV0252
		REHV1398	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV1398
		REHV1409	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV1409
		REHV2199	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV2199
		REHV2773	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV2773
		REHV2776	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV2776
		REHV3495	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV3495
		REHV3525	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV3525

2194108

4Fr Simple
lumière
PowerPICC

REHV3611	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV3611
REHV3668	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV3668
REHV3669	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHV3669
REHW0666	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHW0666
REHW0667	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHW0667
REHW0674	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHW0674
REHW0681	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHW0681
REHW0683	31/07/2025	(01)00801741138973(17)250731(10)REHW0683
REHW1335	31/08/2025	(01)00801741138973(17)250831(10)REHW1335
REHW1370	31/08/2025	(01)00801741138973(17)250831(10)REHW1370
REHW1381	31/08/2025	(01)00801741138973(17)250831(10)REHW1381
REHX1443	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX1443
REHX1458	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX1458
REHX1467	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX1467
REHX2140	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX2140
REHX2158	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX2158
REHX2293	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX2293
REHX2919	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHX2919
REHY2785	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHY2785
REHY3918	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHY3918
REHY3931	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHY3931
REHY3945	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHY3945
REHZ0382	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0382
REHZ0408	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0408
REHZ0432	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0432
REHZ0703	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHZ0703
REHZ0705	30/09/2025	(01)00801741138973(17)250930(10)REHZ0705
REHZ0707	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0707
REHZ0708	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0708
REHZ0711	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0711
REHZ0713	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REHZ0713
REJN1057	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN1057
REJN1077	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN1077
REJN1535	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN1535
REJN1597	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN1597
REJN3014	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN3014
REJN4107	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN4107
REJN4123	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJN4123
REJP0841	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJP0841
REJP0853	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJP0853
REJP0866	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJP0866
REJP0867	31/12/2025	(01)00801741138973(17)251231(10)REJP0867
REJQ0393	31/01/2026	(01)00801741138973(17)260131(10)REJQ0393
REJQ0403	31/01/2026	(01)00801741138973(17)260131(10)REJQ0403
REJQ0404	31/01/2026	(01)00801741138973(17)260131(10)REJQ0404
REJQ0416	31/01/2026	(01)00801741138973(17)260131(10)REJQ0416
REJQ0429	31/01/2026	(01)00801741138973(17)260131(10)REJQ0429
REJQ1560	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1560
REJQ1562	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1562
REJQ1569	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1569
REJQ1570	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1570
REJQ1571	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1571
REJQ1572	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1572
REJQ1578	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1578
REJQ1579	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1579
REJQ1580	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1580
REJQ1581	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1581
REJQ1586	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1586
REJQ1587	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1587
REJQ1588	30/11/2025	(01)00801741138973(17)251130(10)REJQ1588
REJQ1589	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1589
REJQ1594	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1594
REJQ1625	28/02/2026	(01)00801741138973(17)260228(10)REJQ1625
REJR1237	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJR1237
REJR1269	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJR1269
REJR1274	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJR1274
REJR1409	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJR1409
REJR1410	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJR1410
REJS1083	31/03/2026	(01)00801741138973(17)260331(10)REJS1083
REJS1130	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS1130
REJS1175	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS1175
REJS1199	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS1199
REJS2000	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2000
REJS2061	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2061
REJS2167	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2167
REJS2416	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2416
REJS2454	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2454
REJS2543	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS2543
REJS3330	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3330
REJS3335	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3335
REJS3497	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3497
REJS3694	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3694
REJS3695	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3695
REJS3732	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3732

		REJS3753	31/10/2025	(01)00801741138973(17)251031(10)REJS3753
		REJS3849	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS3849
		REJS4558	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJS4558
		REJT0830	30/04/2026	(01)00801741138973(17)260430(10)REJT0830
		REJT1242	31/05/2026	(01)00801741138973(17)260531(10)REJT1242
		REJT1307	31/05/2026	(01)00801741138973(17)260531(10)REJT1307
		REJT1329	31/05/2026	(01)00801741138973(17)260531(10)REJT1329
		REJU1064	30/06/2026	(01)00801741138973(17)260630(10)REJU1064
		REJU1610	30/06/2026	(01)00801741138973(17)260630(10)REJU1610
		REJU1647	30/06/2026	(01)00801741138973(17)260630(10)REJU1647
		REJU2424	30/06/2026	(01)00801741138973(17)260630(10)REJU2424
22184118	4Fr Simple lumière PowerPICC	REJN1448	31/03/2027	(01)00801741121579(17)270331(10)REJN1448
		REJN4121	31/12/2026	(01)00801741121579(17)261231(10)REJN4121
		REJP2009	30/06/2027	(01)00801741121579(17)270630(10)REJP2009
		REJR2086	31/08/2027	(01)00801741121579(17)270831(10)REJR2086
		REJT0730	30/09/2027	(01)00801741121579(17)270930(10)REJT0730
6174108	4Fr Simple lumière PowerPICC	REHP0141	31/12/2025	(01)00801741139000(17)251231(10)REHP0141
		REHP1799	31/01/2026	(01)00801741139000(17)260131(10)REHP1799
		REHU1520	30/06/2026	(01)00801741139000(17)260630(10)REHU1520
		REHU2483	30/06/2026	(01)00801741139000(17)260630(10)REHU2483
		REHU3320	30/06/2026	(01)00801741139000(17)260630(10)REHU3320
		REHV2219	31/07/2026	(01)00801741139000(17)260731(10)REHV2219
		REHW1368	31/08/2026	(01)00801741139000(17)260831(10)REHW1368
		REHY1106	31/10/2026	(01)00801741139000(17)261031(10)REHY1106
		REHY1269	31/10/2026	(01)00801741139000(17)261031(10)REHY1269
		REHY3911	31/10/2026	(01)00801741139000(17)261031(10)REHY3911
		REHZ0433	31/03/2026	(01)00801741139000(17)260331(10)REHZ0433
		REJN0014	31/12/2026	(01)00801741139000(17)261231(10)REJN0014
		REJN1061	31/05/2025	(01)00801741139000(17)250531(10)REJN1061
		REJN1604	31/12/2026	(01)00801741139000(17)261231(10)REJN1604
		REJN4129	31/12/2026	(01)00801741139000(17)261231(10)REJN4129
		REJQ1573	28/02/2027	(01)00801741139000(17)270228(10)REJQ1573
		REJR2595	31/03/2027	(01)00801741139000(17)270331(10)REJR2595
		REJS0042	30/04/2027	(01)00801741139000(17)270430(10)REJS0042
		REJS2048	30/04/2027	(01)00801741139000(17)270430(10)REJS2048
		REJS3700	30/04/2027	(01)00801741139000(17)270430(10)REJS3700
		REJS4563	31/03/2027	(01)00801741139000(17)270331(10)REJS4563
		REJT0690	31/05/2027	(01)00801741139000(17)270531(10)REJT0690
6174118	4Fr Simple lumière PowerPICC	REHN1727	31/10/2025	(01)00801741139017(17)251031(10)REHN1727
		REHN2549	31/12/2025	(01)00801741139017(17)251231(10)REHN2549
		REHR0031	31/12/2025	(01)00801741139017(17)251231(10)REHR0031
		REHT2984	31/01/2026	(01)00801741139017(17)260131(10)REHT2984
		REHT3398	31/05/2026	(01)00801741139017(17)260531(10)REHT3398
		REHU1504	31/12/2025	(01)00801741139017(17)251231(10)REHU1504
		REHV1758	31/07/2026	(01)00801741139017(17)260731(10)REHV1758
		REHV3012	31/05/2025	(01)00801741139017(17)250531(10)REHV3012
		REHW1332	31/08/2026	(01)00801741139017(17)260831(10)REHW1332
		REHX2933	30/09/2026	(01)00801741139017(17)260930(10)REHX2933
		REHY2687	31/10/2026	(01)00801741139017(17)261031(10)REHY2687
		REHY2702	31/10/2026	(01)00801741139017(17)261031(10)REHY2702
		REHZ1880	30/11/2026	(01)00801741139017(17)261130(10)REHZ1880
		REJN2989	31/12/2026	(01)00801741139017(17)261231(10)REJN2989
		REJP0858	31/01/2027	(01)00801741139017(17)270131(10)REJP0858
		REJQ2262	28/02/2027	(01)00801741139017(17)270228(10)REJQ2262
		REJR2570	31/03/2027	(01)00801741139017(17)270331(10)REJR2570
		REJS3350	30/04/2027	(01)00801741139017(17)270430(10)REJS3350
6174335	4Fr Simple lumière PowerPICC	REJT0738	31/05/2027	(01)00801741139017(17)270531(10)REJT0738
		REGX1044	30/09/2025	(01)00801741139024(17)250930(10)REGX1044
		REHU2461	30/06/2026	(01)00801741139024(17)260630(10)REHU2461
		REHW1814	31/08/2026	(01)00801741139024(17)260831(10)REHW1814
		REHY2806	31/10/2026	(01)00801741139024(17)261031(10)REHY2806
		REJN1445	31/12/2026	(01)00801741139024(17)261231(10)REJN1445
		REJN2982	31/12/2026	(01)00801741139024(17)261231(10)REJN2982
		REJS0210	30/04/2027	(01)00801741139024(17)270430(10)REJS0210
6174355	4Fr Simple lumière PowerPICC	REJS3460	30/04/2027	(01)00801741139024(17)270430(10)REJS3460
		REGS2793	31/08/2025	(01)00801741139031(17)250831(10)REGS2793
		REHP1791	30/06/2026	(01)00801741139031(17)260630(10)REHP1791
		REHQ1850	30/11/2025	(01)00801741139031(17)251130(10)REHQ1850
		REHR1490	31/07/2026	(01)00801741139031(17)260731(10)REHR1490
		REHT2159	30/06/2026	(01)00801741139031(17)260630(10)REHT2159
		REHT2950	30/06/2026	(01)00801741139031(17)260630(10)REHT2950
		REHU2363	30/11/2026	(01)00801741139031(17)261130(10)REHU2363
		REHV2230	31/12/2026	(01)00801741139031(17)261231(10)REHV2230
		REHW1347	31/12/2026	(01)00801741139031(17)261231(10)REHW1347
		REHY2698	28/02/2027	(01)00801741139031(17)270228(10)REHY2698
		REHY3951	31/03/2027	(01)00801741139031(17)270331(10)REHY3951
		REJP1997	30/06/2027	(01)00801741139031(17)270630(10)REJP1997
		REJQ0396	31/07/2027	(01)00801741139031(17)270731(10)REJQ0396
		REJR1241	31/08/2027	(01)00801741139031(17)270831(10)REJR1241
		REJR2619	31/08/2027	(01)00801741139031(17)270831(10)REJR2619
		REJS2577	31/10/2027	(01)00801741139031(17)271031(10)REJS2577
		REHV1380	31/05/2025	(01)00801741139048(17)250531(10)REHV1380
		REHX1470	30/09/2025	(01)00801741139048(17)250930(10)REHX1470

6194108	4Fr Simple lumière PowerPICC SOLO	REHY1261	31/10/2025	(01)00801741139048(17)251031(10)REHY1261
		REJP2066	31/01/2026	(01)00801741139048(17)260131(10)REJP2066
		REJR2094	31/03/2026	(01)00801741139048(17)260331(10)REJR2094
		REJS0115	31/03/2026	(01)00801741139048(17)260331(10)REJS0115
		REJS2549	30/04/2026	(01)00801741139048(17)260430(10)REJS2549
		REJS4604	30/04/2026	(01)00801741139048(17)260430(10)REJS4604
		REJY2686	31/10/2026	(01)00801741139048(17)261031(10)REJY2686
6194118	4Fr Simple lumière PowerPICC SOLO	REHT2215	31/05/2025	(01)00801741139055(17)250531(10)REHT2215
		REHX2160	31/05/2025	(01)00801741139055(17)250531(10)REHX2160
		REHY3938	31/10/2025	(01)00801741139055(17)251031(10)REHY3938
		REHZ1022	31/10/2025	(01)00801741139055(17)251031(10)REHZ1022
		REJQ2275	28/02/2026	(01)00801741139055(17)260228(10)REJQ2275
		REJR2161	31/03/2026	(01)00801741139055(17)260331(10)REJR2161
		REJS0043	31/03/2026	(01)00801741139055(17)260331(10)REJS0043
		REJS3341	30/04/2026	(01)00801741139055(17)260430(10)REJS3341
6194335	4Fr Simple lumière PowerPICC SOLO	REHT2989	31/05/2025	(01)00801741139062(17)250531(10)REHT2989
		REHU0936	31/05/2025	(01)00801741139062(17)250531(10)REHU0936
		REHV1740	31/07/2025	(01)00801741139062(17)250731(10)REHV1740
		REHW0688	31/07/2025	(01)00801741139062(17)250731(10)REHW0688
		REHY2703	31/10/2025	(01)00801741139062(17)251031(10)REHY2703
		REHZ0998	31/10/2025	(01)00801741139062(17)251031(10)REHZ0998
		REJN3010	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJN3010
		REJN4140	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJN4140
		REJP2048	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJP2048
		REJR2017	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJR2017
		REJS2069	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJS2069
		REJT0760	30/04/2026	(01)00801741139062(17)260430(10)REJT0760
		REJU1309	31/12/2025	(01)00801741139062(17)251231(10)REJU1309
		REHT3385	31/05/2025	(01)00801741139079(17)250531(10)REHT3385
6194355	4Fr Simple lumière PowerPICC	REHV2203	31/07/2025	(01)00801741139079(17)250731(10)REHV2203
		REHW1341	31/08/2025	(01)00801741139079(17)250831(10)REHW1341
		REHY2807	31/10/2025	(01)00801741139079(17)251031(10)REHY2807
		REHY2822	31/10/2025	(01)00801741139079(17)251031(10)REHY2822
		REHZ1872	30/11/2025	(01)00801741139079(17)251130(10)REHZ1872
		REHZ1899	30/11/2025	(01)00801741139079(17)251130(10)REHZ1899
		REJN1573	31/12/2025	(01)00801741139079(17)251231(10)REJN1573
		REJP0825	31/12/2025	(01)00801741139079(17)251231(10)REJP0825
		REJP1981	31/12/2025	(01)00801741139079(17)251231(10)REJP1981
		REJR1280	31/12/2025	(01)00801741139079(17)251231(10)REJR1280
		REJR2066	31/03/2026	(01)00801741139079(17)260331(10)REJR2066
		REJS2422	30/04/2026	(01)00801741139079(17)260430(10)REJS2422
		REJT1334	30/06/2026	(01)00801741139079(17)260630(10)REJT1334
CK000375	4Fr Simple lumière PowerPICC	REJN2629	31/05/2025	(01)00801741102660(17)250531(10)REJN2629
		REJN2636	31/05/2025	(01)00801741102660(17)250531(10)REJN2636
		REJN3802	31/05/2025	(01)00801741102660(17)250531(10)REJN3802
		REJQ0779	31/08/2025	(01)00801741102660(17)250831(10)REJQ0779
		REJQ0846	31/08/2025	(01)00801741102660(17)250831(10)REJQ0846
		REJQ0852	31/08/2025	(01)00801741102660(17)250831(10)REJQ0852
		REJQ0853	31/08/2025	(01)00801741102660(17)250831(10)REJQ0853
		REJQ1564	31/05/2025	(01)00801741102660(17)250531(10)REJQ1564
		REJR1385	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJR1385
		REJR2525	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJR2525
		REJR4080	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJR4080
		REJR4081	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJR4081
		REJS0058	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJS0058
CK000388	4Fr Simple lumière PowerPICC	REJS0140	30/09/2025	(01)00801741102660(17)250930(10)REJS0140
		REJN2619	31/05/2025	(01)00801741102790(17)250531(10)REJN2619
		REJP1669	31/05/2025	(01)00801741102790(17)250531(10)REJP1669
		REJP1910	31/07/2025	(01)00801741102790(17)250731(10)REJP1910
		REJQ0854	31/08/2025	(01)00801741102790(17)250831(10)REJQ0854