

Date : 25/06/2025

Référence : DIA-60028

Fiche d'avertissement

A l'attention de nos clients et utilisateurs : Correspondant matériovigilance, Directeur d'établissement, Personnel soignant, Directeur des Systèmes d'Information.

Type de dispositif : Logiciel d'Aide à la Prescription (LAP)

Produit : DIANE **Versions impactées :** DIANE versions 4.12.12.5 et 4.13.6

UDI-DI : (01)3760404900005


Objet : La "non-réalisation" de la première occurrence d'une ligne de plan de soins décale la planification des occurrences suivantes.

Madame, Monsieur


BOW MEDICAL vous informe qu'un problème lors de la saisie des occurrences dans le plan de soin a été détecté.

Contexte :

- A. Une prescription est saisie avec une planification x fois/jour à partir de l'heure H.
- B. Le plan de soin fait bien apparaître les occurrences attendues aux heures prévues.

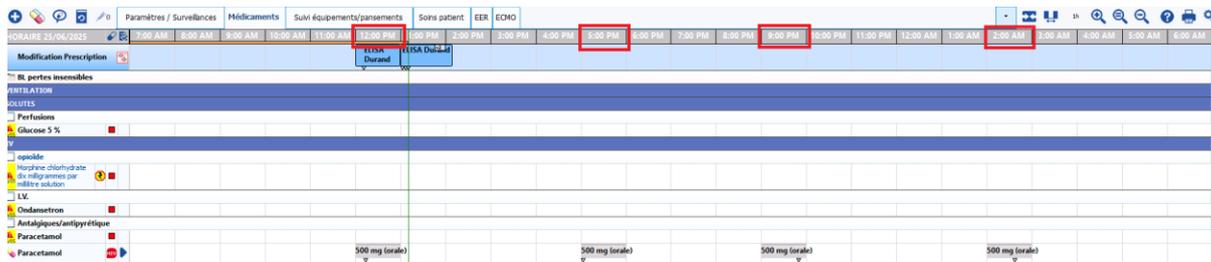

- C. Le soignant renseigne la première occurrence en sélectionnant le statut « Non réalisé »

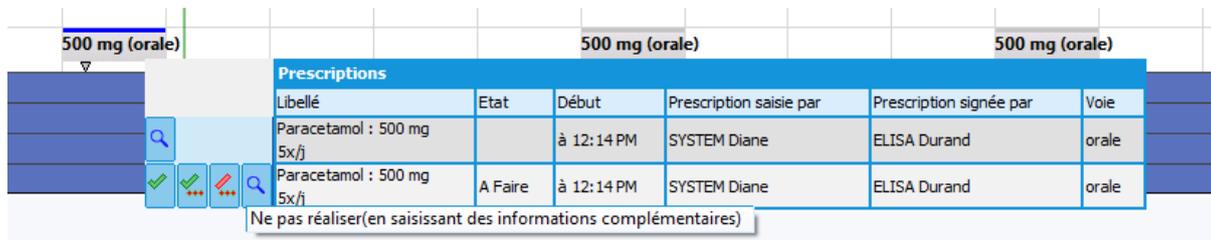

Conséquence :

- 1. L'occurrence non réalisée est positionnée à une heure antérieure à l'heure initiale de cette occurrence.

Formulaire d'accusé de réception et de réponse client

Nom et adresse du client :

.....
.....
.....

J'accuse réception des informations contenues dans la fiche d'avertissement **DIA-60028 « la non réalisation" de la première occurrence d'une ligne de plan de soins décale la planification des occurrences suivantes. »** concernant le logiciel d'aide à la prescription DIANE et certifie que ces informations ont été communiquées à l'ensemble des utilisateurs.

Rempli par :

NOM et Prénom :

Fonction :

Date (JJ/MM/AAAA) :

Nous vous remercions de nous envoyer le formulaire de confirmation dûment rempli par mail à l'adresse materiovigilance@bowmedical.com ou par courrier à BOW MEDICAL - Service Qualité - 43 Avenue d'Italie, 80090 Amiens.