

URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ MISE À JOUR



Date de diffusion de la lettre

GE Healthcare Réf. n° 85480-2B

À l'attention des personnes suivantes :

- Directeur/Administrateur du service de radiologie
- Directeur/Administrateur du service de cardiologie
- Gestionnaire des risques/Administrateur d'hôpital
- Chef du service de radiologie
- Chef du service de cardiologie
- Administrateur du système PACS
- Directeur du service des technologies de l'information
- Chef du service génie biomédical
- Chef du service de l'informatique d'imagerie

OBJET : Mise à jour de l'avis urgent précédent Action corrective de sécurité concernant un dispositif médical (ci-joint), relatif à la ligne de produits Centricity Radiology RA600 (RA600) et Centricity Cardiology CA1000 (CA1000)

Chère Cliente, Cher Client,

Dans le cadre du suivi de l'Avis urgent de sécurité n° 85480-2 de GE HealthCare, nous fournissons un addendum du manuel d'installation, qui contient des instructions sur la modification des mots de passe.

Ce problème potentiel peut être résolu en deux étapes :

Étape 1 : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour télécharger l'addendum du manuel d'installation.

1. Accédez à la page du portail de documentation client de GE HealthCare à l'adresse suivante : <https://www.gehealthcare.com/support/manuals>
2. Entrez le numéro de pièce dans le champ de recherche Enter Product Info (Entrer info produit) : **5981182**
3. Appuyez sur Enter (Entrer) ou cliquez sur l'icône Magnifying Glass (Loupe) dans le champ de recherche pour lancer la recherche. « Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum-<langue par défaut> » (Addendum du manuel d'installation des systèmes Centricity Radiology RA600 et Centricity Cardiology CA1000) s'affiche dans les résultats de la recherche.
 - (a) Les versions traduites sont disponibles à partir du menu déroulant de sélection de la langue, situé tout à fait à droite du champ de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Download (Télécharger) ↓ à droite du résultat « Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum-<langue> » (Addendum du manuel d'installation des systèmes Centricity Radiology RA600 et Centricity Cardiology CA1000).
5. Cliquez sur Accept (Accepter) pour confirmer que vous avez pris note des restrictions de copyright. Le document « Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum-<langue> » (Addendum du manuel d'installation des systèmes Centricity Radiology RA600 et Centricity Cardiology CA1000) s'affiche.
6. Cliquez sur l'icône Save (Enregistrer) ou Download (Télécharger) en fonction du navigateur utilisé.

7. Enregistrez le document « Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum-<langue> » (Addendum du manuel d'installation des systèmes Centricity Radiology RA600 et Centricity Cardiology CA1000) sur le système local et sur un emplacement central approprié accessible par tous les utilisateurs.

Étape 2 : Suivez les instructions fournies dans l'addendum pour modifier les mots de passe.

Veillez remplir et renvoyer l'accusé de réception de l'avis de sécurité.

Coordonnées Pour toute question ou préoccupation concernant cet avis de sécurité, veuillez contacter le service de maintenance de GE HealthCare ou votre représentant local.

Vous pouvez joindre votre Centre de Service Client au : 0800 044 800.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en utilisant les informations de contact ci-dessus.

Cordialement,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'AVIS DE SÉCURITÉ
RÉPONSE REQUISE – FORMULAIRE REMPLI**

Veillez remplir ce formulaire et le renvoyer à GE HealthCare dans les 30 jours suivant sa réception ou complétez le formulaire de réponse en ligne en cliquant sur le lien en bas de la page. Ce faisant, vous confirmerez que vous avez bien reçu et compris le présent Avis de sécurité.

Nom de l'établissement : _____

Adresse : _____
Ville/Département/Code postal/Pays : _____

Adresse e-mail du client : _____
Numéro de téléphone du client : _____

En signant ce formulaire, nous accusons réception de l'avis de sécurité ci-joint et en comprenons la signification. Nous avons téléchargé l'addendum et suivi ses instructions pour modifier les mots de passe, conformément à cet avis.

Veillez indiquer le nom du responsable qui a rempli ce formulaire.

Signature : _____

Nom en majuscules : _____

Poste/titre du poste : _____

Date (JJ/MM/AAAA) : _____

Une fois le formulaire rempli, veuillez le scanner ou le prendre en photo et l'envoyer par e-mail à l'adresse Recall.85480_2@gehealthcare.com ou remplissez le formulaire de réponse en ligne.



QR Code pour e-mail



QR Code pour le formulaire de réponse en ligne