

Ardon, le 30 septembre 2025
Lettre recommandée avec accusé de réception

Destinataires :

Correspondant Local de Matéiovigilance.

↳ Diffusion à réaliser pour information auprès :
du Directeur de l'Etablissement de Santé,
du Service Biomédical,
de tous les utilisateurs.

Dispositifs médicaux concernés :

Réchauffeur HU 35, 230 V
Numéros de série spécifiques

Objet :

Potentielle contamination mycobactérienne.

Division ACT - Acute Care Therapies



- Réchauffeur HU 35 -

Madame, Monsieur,

Par la présente nous souhaitons vous informer de l'action initiée par le fabricant Maquet Cardiopulmonary GmbH, Allemagne, concernant certains numéros de série de Réchauffeurs HU 35.

En effet d'après nos bases de traçabilité, nous avons déterminé que votre établissement avait réceptionné un ou plusieurs de ces dispositifs.

Nous vous transmettons par conséquent cette notification de sécurité (traduction en français) : vous pourrez ainsi prendre connaissance des informations relatives aux mesures à prendre par votre établissement, et aux actions prévues par le fabricant.

Par ailleurs, nous vous saurions gré de bien vouloir **compléter le formulaire de Réponse Client** ci-joint, et **nous le retourner dans les meilleurs délais** par courrier électronique (qrc.fr@getinge.com) ; même si vous ne possédez plus de produits concernés par cette notification.

Pour le cas où certains dispositifs aient été transmis à une autre organisation, veuillez lui faire suivre ce courrier et en informer *Getinge France* par le biais de ce même formulaire.

A titre d'information, les établissements de santé concernés par la présente notification de sécurité recevront ce courrier de *Getinge France* en recommandé, avec accusé de réception.

Cette notification a également fait l'objet d'une information auprès de l'ANSM.

L'ensemble de l'équipe *Getinge France - Division Acute Care Therapies* reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire relatif au contenu de cette lettre.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Bénédicte Parisot

Directrice QRC France

Getinge France

Pièces jointes :

- Notification de sécurité (FSCA) – Maquet Cardiopulmonary GmbH - FSCA-1365554 (traduction)
- Formulaire de Réponse Client (traduction)
- Annexe I Liste des produits concernés (traduction)

2025-09-30

NOTIFICATION DE SÉCURITÉ URGENTE

SRN fabricant :	DE-MF-000020091
Référence FSCA :	1365554 HU 35 – Potentielle contamination mycobactérienne
Type de notification de sécurité :	Nouveau
Produits concernés :	Réchauffeur HU 35, 230 V (réf. 701072162) Réchauffeur HU 35, 110-115 V (réf. 701072163)
Identifiant unique du dispositif :	04058863041193 (réf. 701072162) 04058863041308 (réf. 701072163)
N° de série concernés :	Voir Annexe I
À l'attention des :	Utilisateurs du dispositif médical indiqué ci-dessus

Chers clients,

Maquet Cardiopulmonary GmbH (MCP) souhaite informer les utilisateurs du réchauffeur HU 35 d'une potentielle contamination par des mycobactéries non tuberculeuses (MNT).

Le HU 35 agit comme une unité de réchauffage afin de maintenir la température du corps du patient via l'échangeur thermique de l'oxygénateur PLS ou du module HLS ou d'autres échangeurs thermiques d'oxygénateurs dans le cadre de circuits extracorporels.

Description du problème

Les unités HU 35 sont désinfectées à la fin de la production ; toutefois, elles ne sont pas produites dans un environnement stérile. Il est important de noter que ces unités ne sont pas classées comme des dispositifs médicaux stériles. Le mode d'emploi et le manuel d'entretien mentionnent ces informations.

En raison du récent déménagement du site de production en juin 2024, il a été décidé de fabriquer des unités HU 35 supplémentaires par anticipation pour atténuer des potentielles perturbations d'approvisionnement. Par conséquent, la durée de stockage réelle des unités concernées a été étendue de 4 à 12 mois.

Une période de stockage prolongée augmente le risque de prolifération bactérienne. Bien que la désinfection en fin de production réduise la charge microbienne, il est possible qu'elle n'élimine pas toutes les bactéries présentes dans les circuits. Les bactéries présentes dans les dispositifs peuvent proliférer au cours d'une période de stockage prolongée, contribuant à la contamination.

Au cours d'un retravail fabricant, initiée le 21 juillet 2025, des unités HU 35 du stock ont été désinfectées et échantillonnées avant distribution. Le 12 août 2025, MCP a pris connaissance d'une unité testée positive pour les mycobactéries après désinfection. À la suite de cela, d'autres unités ont été testées positives pour les mycobactéries. En outre, MCP a reçu quatre réclamations concernant des contaminations du circuit d'eau de dispositifs HU 35 qui faisaient partie du stock pré-produit contaminé de *Mycobacteria chimaera*.

Par conséquent, le champ d'application de cette action sur le terrain est limité à tous les dispositifs livrés après le 1er juin 2024.

Situation dangereuse

Une évaluation des risques pour la santé (HHE) est actuellement en cours. Sur la base des évaluations actuelles :

Le circuit d'eau du HU 35 est un système fermé, ce qui signifie que l'eau n'entre pas en contact direct avec le patient. Une transmission potentielle peut se produire indirectement, par exemple en raison de pratiques d'hygiène insuffisantes du personnel clinique. Le circuit de l'oxygénateur est également un système fermé. Son intégrité est vérifiée avant utilisation par un processus de débullage. Il a été confirmé que le dispositif n'émet pas d'aérosols, ce qui exclut effectivement la transmission bactérienne par voie aérienne.

Compte tenu de ces constatations, MCP a provisoirement identifié les situations dangereuses potentielles suivantes :

- Exposition à des agents pathogènes (patient, utilisateur, tiers)

Danger potentiel

Les conséquences sanitaires et les niveaux de risque possibles, immédiats et/ou à long terme, de la non-conformité sont les suivants :

- Infection

Comme mentionné, Maquet Cardiopulmonary GmbH a identifié quatre réclamations de clients (correspondant à un total de huit dispositifs impactés), mais aucun préjudice pour le patient, blessure grave ou décès n'a été signalé.

Dans ce contexte, il convient de mentionner que depuis la mise sur le marché du HU 35, aucune infection chez un patient causée par une contamination bactérienne du dispositif n'a été signalée à MCP dans le monde entier.

Action corrective à entreprendre par l'utilisateur :**Pour les dispositifs actuellement utilisés dans le cadre d'un traitement :**

- À la fin du traitement, le client doit mettre les dispositifs HU 35 concernés hors service dans les meilleurs délais et procéder aux opérations suivantes :
 - Détartrage du circuit d'eau avec de l'acide citrique à 2 % conformément au chapitre 8.2.1 du mode d'emploi (y compris 3 rinçages ultérieurs du dispositif)
 - Désinfection de haut niveau du circuit d'eau avec une concentration de 5 % de chloramine T conformément au chapitre 8.2.3 du mode d'emploi.
- En outre, il est recommandé aux clients de tester les unités concernées pour établir la présence de MNT une fois la désinfection de haut niveau effectuée, avant de réutiliser le dispositif sur un patient.
- Veuillez noter qu'en utilisant une analyse PCR commune, des fragments de MNT ou d'ADN morts donnent également des résultats positifs. Cela n'indique pas nécessairement une désinfection inadéquate. Par conséquent, MCP recommande d'effectuer des tests de détection sur culture pour établir la présence de MNT.
- Si des mycobactéries atypiques sont toujours détectables dans le système d'eau, veuillez répéter la désinfection de haut niveau.
- Ensuite, il convient de suivre le protocole de désinfection habituel tel que décrit dans le mode d'emploi.

Pour les dispositifs qui ne sont pas actuellement utilisés dans le cadre d'un traitement/non installés :

- Le client doit immédiatement procéder aux opérations suivantes :
 - Détartrage du circuit d'eau avec de l'acide citrique à 2 % conformément au chapitre 8.2.1 du mode d'emploi (y compris 3 rinçages ultérieurs du dispositif)
 - Désinfection de haut niveau du circuit d'eau avec une concentration de 5 % de chloramine T conformément au chapitre 8.2.3 du mode d'emploi.
- En outre, il est recommandé aux clients de tester les unités concernées pour établir la présence de MNT, une fois la désinfection de haut niveau effectuée, avant de réutiliser le dispositif sur un patient.
- Veuillez noter qu'en utilisant une analyse PCR commune, des fragments de MNT ou d'ADN morts donnent également des résultats positifs. Cela n'indique pas nécessairement une désinfection inadéquate. Par conséquent, MCP recommande d'effectuer des tests de détection sur culture pour établir la présence de MNT.
- Si des mycobactéries atypiques sont toujours détectables dans le système d'eau, veuillez répéter la désinfection de haut niveau.
- Ensuite, il convient de suivre le protocole de désinfection habituel tel que décrit dans le mode d'emploi.

Mesures à prendre par l'utilisateur :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Identifier le dispositif | <input type="checkbox"/> Placer le dispositif en quarantaine |
| <input type="checkbox"/> Retourner le dispositif | <input type="checkbox"/> Détruire le dispositif |

Détails concernant d'autres actions :

- Selon notre documentation de surveillance post-commercialisation, il est possible que vous disposiez de dispositifs affectés par cette action. Veuillez examiner **immédiatement** votre stock pour déterminer si vous disposez de produits concernés dans votre stock.
- Que vous ayez ou non les produits concernés, veuillez remplir dûment le formulaire de réponse client ci-joint et le renvoyer à votre représentant Getinge local dès **que possible, au plus tard le 10 octobre 2025**, en mentionnant **FSCA-1365554** comme référence dans l'objet de votre courrier.
- Dès réception du formulaire de réponse client signé, Getinge fournira une note de crédit pour l'agent de détartrage et de désinfection nécessaire.
- Veuillez **toujours** signaler tout événement indésirable, par exemple des infections potentiellement liées aux produits concernés, à votre représentant Getinge.
- Les patients doivent faire l'objet d'une surveillance appropriée, conformément aux normes de soins en vigueur dans votre établissement.

Mesures à prendre par le fabricant :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Élimination du produit | <input type="checkbox"/> Modification/inspection sur place du dispositif |
| <input type="checkbox"/> Mise à niveau logicielle | <input type="checkbox"/> Changement du mode d'emploi ou de l'étiquetage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autre | <input type="checkbox"/> Sans objet |

- Informer **immédiatement** tous les clients possédant les produits concernés de cette action sur le terrain en envoyant la Notification de Sécurité.
- Dès réception du formulaire de réponse client signé, fournir une note de crédit pour l'agent de détartrage et de désinfection nécessaire.
- Finaliser l'enquête sur les causes profondes pour déterminer si d'autres actions sont nécessaires.

Documents joints :

- Formulaire de réponse client
- Annexe I Liste des produits concernés

Transmission de cette Notification de Sécurité :

- Veuillez vous assurer que, dans votre établissement, tous les utilisateurs des produits susmentionnés et les autres personnes devant être informées ont pris connaissance de cette Notification de Sécurité urgente.
- Veuillez transmettre cette notification à toutes les autres organisations sur lesquelles cette action a des conséquences.
- Si vous avez donné les produits à des tiers, veuillez transmettre une copie de ces informations ou informer la personne de contact indiquée ci-dessous.

- Gardez toujours cette notification à l'esprit ainsi que toutes actions résultantes, et ce, pendant un certain temps, afin de garantir l'efficacité de l'action corrective.

Nous tenons à nous excuser pour la gêne susceptible d'être occasionnée et ferons tout notre possible pour que cette action soit effectuée le plus rapidement possible.

Comme exigé, nous avons fourni cette notification aux Autorités Compétentes appropriées.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Getinge local.

Cordialement,

Vice President

**Person Responsible for Regulatory
Compliance (PRRC)**

Coordonnées du fabricant

Maquet Cardiopulmonary GmbH
Kehler Str. 31
76437 Rastatt
ALLEMAGNE
Tél. : +49 7222 932 - 0
E-mail : FSCA.cp@getinge.com

FORMULAIRE DE RÉPONSE CLIENT

Référence FSCA : 1365554 HU 35 – Potentielle contamination mycobactérienne

Produits concernés : Réchauffeur HU 35, 230 V (réf. 701072162)
Réchauffeur HU 35, 110-115 V (réf. 701072163)

N° de série concernés : Voir Annexe I

Veuillez envoyer ce formulaire à votre représentant Getinge local avant le **10 octobre 2025**.

En remplissant ce document et en le signant, je reconnais avoir lu et compris les points associés suivants :

- J'ai lu et compris cette Notification de Sécurité. Nous prendrons des mesures dès que possible en fonction des instructions données.
 - Je confirme également avoir distribué la présente Notification de Sécurité au personnel concerné.
- Je n'ai pas de produits concernés dans mon stock :
- J'ai les produits suivants dans mon stock :

Référence	Description	Numéro de série	Quantité
701072162	Réchauffeur HU35, 230V		
701072162	Réchauffeur HU35, 230V		
701072162	Réchauffeur HU35, 230V		

Vos commentaires :

Pays

Hôpital/clinique (adresse complète)

Date

Nom (fonction)

Signature

Veuillez renvoyer le formulaire complété à votre représentant Getinge local par e-mail à l'adresse qrc.fr@getinge.com. (CV-2025-27)

Annexe I Liste des produits concernés

La présente Annexe I Liste des produits concernés est considérée comme une pièce jointe supplémentaire à la Notification de Sécurité 1365554.

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les lots de produits concernés et qui ont été distribués.

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
AE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034641	1
AE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034893	1
AE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034995	1
AE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035015	1
AE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035082	1
AL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034890	1
AM	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034950	1
AT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034925	1
AT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034929	1
AT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034933	1
AT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034999	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034596	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034597	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034598	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034642	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034644	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034672	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034690	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034692	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034694	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034703	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034705	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034706	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034710	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034714	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034715	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034723	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034875	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034889	1
AU	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034909	1
BH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034828	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034748	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034749	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034750	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034751	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034752	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034753	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034755	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034758	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034762	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034763	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034765	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034766	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034767	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034768	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034783	1
CA	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034785	1
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034662	1
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034667	1
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034695	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034696	1
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034699	1
CH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034704	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034634	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034638	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034639	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034640	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034653	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034654	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034658	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034660	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034663	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034664	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034666	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034670	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034671	1
CN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034675	1
CO	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034712	1
CR	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034760	1
CR	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034761	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034701	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034713	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034720	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034631	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034636	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034637	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034830	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034846	1
CZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035093	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034786	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034633	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034635	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034643	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034646	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034674	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034677	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034683	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034685	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034687	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034691	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034693	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034717	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034787	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034788	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034790	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034794	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034795	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034796	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034797	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034798	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034799	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034802	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034803	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034805	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034806	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034808	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034809	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034810	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034811	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034812	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034813	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034814	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034815	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034816	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034821	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034825	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034829	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034831	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034832	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034833	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034834	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034835	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034841	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034842	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034844	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034845	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034847	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034877	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034882	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034885	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034886	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034888	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034892	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034894	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034896	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034899	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034908	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034910	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034915	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034916	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034918	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034920	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034921	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034926	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034936	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034937	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034938	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034939	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034940	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034941	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034942	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034944	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034948	1
DE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035089	1
DZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034959	1
DZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034963	1
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034895	1
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034903	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034907	1
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034949	1
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034954	1
ES	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034966	1
FI	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034665	1
FI	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034676	1
FI	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034686	1
FI	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035091	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034657	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034700	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034708	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034718	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034719	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034721	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034817	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034818	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034820	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034822	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034826	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034827	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034836	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034837	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034838	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034848	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034854	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034856	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034859	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034862	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034863	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034865	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034866	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034867	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034869	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034871	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034874	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034881	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034883	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034884	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034913	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034930	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034945	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034951	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034984	1
FR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035037	1
GB	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034887	1
GB	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034891	1
GB	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034900	1
GB	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034912	1
HR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034722	1
HR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034876	1
HR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034880	1
ID	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034901	1
IL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034648	1
IL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034655	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
IL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034804	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034645	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034688	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034931	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034934	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034935	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034947	1
IT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034958	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034587	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034588	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034589	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034590	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034591	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034592	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034599	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034668	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034669	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034673	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034689	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034697	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034707	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034711	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034824	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034850	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034851	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034852	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034853	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034857	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034858	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034860	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034861	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034872	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034873	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034878	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034879	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034902	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034946	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034956	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034957	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034967	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034968	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034994	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035001	1
KR	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035004	1
KW	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034855	1
KW	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034923	1
KW	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034927	1
KW	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034964	1
KW	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034965	1
LY	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034839	1
LY	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034969	1
MA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034911	1
MA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034955	1
MA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034962	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
MA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034983	1
MX	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034786	1
MX	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034779	1
MX	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034780	1
MX	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034782	1
MX	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034784	1
MY	701072162	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034975	1
NI	701072163	Heater Unit HU 35, 110-115V	90034757	1
NZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034698	1
NZ	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034716	1
OM	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035002	1
PL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034840	1
PL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034843	1
PL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034981	1
PL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034996	1
PL	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035000	1
PT	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034943	1
RO	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034924	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034647	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034650	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034651	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034652	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034656	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034659	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034849	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034864	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034898	1

Pays	Référence	Description	Numéro de série	Quantité
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034904	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034905	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034906	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034919	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034960	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035011	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035032	1
SA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035033	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034702	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034979	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034985	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034986	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034987	1
SE	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034988	1
SV	701072163	Heater Unit HU 35, 230V	90034777	1
TH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035079	1
TH	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035107	1
UA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034819	1
VN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034649	1
VN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034709	1
VN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034897	1
VN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034922	1
VN	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90035092	1
ZA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034789	1
ZA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034791	1
ZA	701072162	Heater Unit HU 35, 230V	90034792	1