

18 décembre 2025

À : Hôpitaux et chirurgiens

Objet : MESURE CORRECTIVE URGENTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UN DISPOSITIF MÉDICAL (RETRAIT)

Produit concerné : Zimmer® Air Dermatome & Zimmer® Dermatome AN

Référence du matériel	Description du matériel	Numéro GTIN	Numéros de série
00-8801-001-00	Zimmer® Air Dermatome	00889024375901	Voir l' annexe 2 – Liste des produits concernés pour les numéros de série.
88710100	Zimmer® Dermatome AN	00889024484834	



Zimmer Surgical, Inc. procède actuellement à une action corrective de sécurité sur le terrain par étapes pour les dispositifs médicaux spécifiques Zimmer Air Dermatome et Zimmer Dermatome AN répertoriés dans **l'Annexe 2 – Liste des produits concernés**. De nombreuses réclamations ont été reçues concernant des Dermatome Pneumatiques qui coupaient au-delà de la profondeur appropriée. L'inspection des équipements retournés dans le cadre de ces réclamations a confirmé que les équipements concernés pouvaient présenter un mauvais alignement de la barre de contrôle d'épaisseur de prise de greffe. Si l'équipement présente un mauvais alignement de la barre de contrôle dès sa fabrication, on peut s'attendre à ce que cela se manifeste de telle sorte que tout effet négatif potentiel se produise dès les premières utilisations.

Risques		
Décrivez les conséquences immédiates pour la santé (blessures ou maladies) pouvant résulter de l'utilisation ou de l'exposition au dispositif concerné.	Les plus probables	Les plus graves
	Lésions tissulaires mineures.	Lésions tissulaires, modérées.
Décrivez les conséquences à long terme sur la santé (blessures ou maladies) pouvant résulter de l'utilisation ou de l'exposition au dispositif concerné.	Les plus probable	Les plus graves
	Risque de cicatrices dues à des entailles.	Risque de cicatrices dues à des entailles et/ou à un deuxième prélèvement de greffon.

Nos registres indiquent que vous pourriez avoir reçu un ou plusieurs des produits concernés. Les produits concernés ont été distribués entre le septembre 2023 et novembre 2025.

Responsabilités de l'hôpital

1. Lisez attentivement la présente notification de sécurité et assurez-vous que le personnel concerné en connaît le contenu.
2. Si un produit concerné a déjà été distribué, veuillez fournir à vos clients la présente notification de sécurité et vous assurer qu'ils ont bien connaissance des documents.
3. Remplissez **l'Annexe 1 – Formulaire d'accusé de réception** et envoyez-le à fieldaction.france@zimmerbiomet.com.
 - a. Votre représentant Zimmer Biomet vous informera dès que vous pourrez retourner les produits concernés depuis votre établissement.
4. Conservez un exemplaire de **l'Annexe 1 - Formulaire d'accusé de réception** dans vos dossiers en cas d'audit de conformité au sein de votre établissement.
5. Veuillez contacter votre représentant Zimmer Biomet local si vous avez des questions ou des doutes après examen de cette notification de sécurité.

Responsabilités du chirurgien

1. Lisez la présente notification de sécurité et assurez-vous que le personnel concerné en connaît le contenu.
2. Le problème étant susceptible de se produire lors des premières utilisations, les dispositifs concernés qui n'ont pas présenté ce problème peuvent continuer à être utilisés jusqu'au début de la phase n°2 (retrait) pour votre établissement, qui vous sera communiquée par Zimmer Biomet dans un avis de sécurité distinct.
 - a. Déclarer une matériovigilance à votre représentant Zimmer Biomet local si un incident survient avec l'un des dispositifs concernés.
3. Veuillez contacter votre représentant Zimmer Biomet local si vous avez d'autres questions ou doutes après examen de cette avis notification de sécurité.

Autres informations

La présente notification d'action corrective de sécurité a été communiquée à toutes les autorités de santé compétentes et organismes notifiés concernés, comme l'exige la réglementation en vigueur en matière de dispositifs médicaux conformément au règlement (UE) 2017/745 et recommandations du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux GCDM 2023-3. Le soussigné confirme que la présente notification de sécurité a été transmise aux organismes de réglementation concernés. Veuillez noter que les noms des établissements utilisateurs notifiés sont régulièrement transmis aux autorités de santé compétentes à des fins de contrôle.

Veuillez informer Zimmer Biomet de tout événement indésirable associé à ce dispositif ou à tout autre produit Zimmer Biomet par e-mail à l'adresse per.fr@zimmerbiomet.com.

Nous vous remercions d'avance de votre coopération et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette action corrective de sécurité.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués,

Francis Moloney, vice-président QA/RC EMEA

ANNEXE 1 - Formulaire d'accusé de réception

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE EST REQUISE – UNE ACTION RAPIDE EST NÉCESSAIRE

Numéro de référence de l'action corrective de sécurité : ZFA-2025-00141
Produits concernés : Zimmer® Air Dermatome & Zimmer® Dermatome AN

<u>Accusé de réception de l'hôpital</u>					
En signant ci-dessous, j'atteste avoir reçu, lu et compris le contenu de cette notification de sécurité, et avoir mises en œuvre toutes actions sous ma responsabilité.					
Nom de l'établissement					
Adresse de l'établissement					
Code postal		Ville		Pays	
Nom en lettres majuscules					
Titre					
Date		Signature			

ANNEXE 2 - Liste des produits concernés

Tous les équipements fabriqués entre mars 2023 et avril 2025 qui n'ont pas été équipements retournés pour réparation ou maintenance préventive sont concernés.

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
65944745	115821	65944750	115865	66053364	115907
65944745	115824	65944750	115866	66053364	115909
65944745	115826	65944750	115868	66053364	115910
65944745	115827	65944750	115869	66053364	115911
65944745	115829	65944750	115872	66053364	115912
65944745	115831	65944750	115873	66053364	115913
65944745	115832	65944750	115874	66053364	115914
65944745	115834	65944750	115875	66053364	115916
65944745	115835	65944750	115877	66053364	115917
65944745	115836	65944752	115879	66053364	115918
65944745	115838	65944752	115882	66053365	115919
65944748	115839	65944752	115883	66053365	115920
65944748	115841	65944752	115884	66053365	115922
65944748	115842	65944752	115885	66053365	115923
65944748	115843	65944752	115886	66053365	115924
65944748	115845	65944752	115887	66053365	115925
65944748	115846	65944752	115889	66053365	115926
65944748	115847	65944752	115890	66053365	115927
65944748	115848	65944752	115891	66053365	115928
65944748	115850	65944752	115892	66053365	115929
65944748	115853	65944752	115893	66053365	115930
65944748	115854	65944752	115894	66053365	115931
65944748	115855	65944752	115896	66053365	115932
65944748	115856	65944752	115897	66053365	115933
65944748	115857	65944752	115898	66053365	115934
65944748	115858	66053364	115900	66053365	115935
65944750	115859	66053364	115903	66053365	115936
65944750	115860	66053364	115904	66053365	115938
65944750	115861	66053364	115905	66121180	115939
65944750	115864	66053364	115906	66121180	115940

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66121180	115942	66121182	115984	66121184	116020
66121180	115944	66121182	115985	66121184	116022
66121180	115945	66121182	115986	66121184	116023
66121180	115946	66121182	115987	66121184	116025
66121180	115948	66121182	115988	66121184	116026
66121180	115949	66121182	115989	66121184	116027
66121180	115950	66121182	115990	66121184	116028
66121180	115951	66121182	115991	66121184	116029
66121180	115952	66121182	115992	66121184	116031
66121180	115953	66121182	115993	66121184	116032
66121180	115954	66121182	115994	66121184	116033
66121180	115955	66121182	115995	66121184	116034
66121180	115956	66121182	115996	66121184	116035
66121180	115957	66121182	115997	66121184	116036
66121180	115958	66121182	115998	66121184	116037
66121181	115962	66121183	115999	66121184	116038
66121181	115963	66121183	116000	66185343	116039
66121181	115964	66121183	116001	66185343	116040
66121181	115965	66121183	116002	66185343	116042
66121181	115966	66121183	116003	66185343	116044
66121181	115968	66121183	116004	66185343	116045
66121181	115969	66121183	116005	66185343	116046
66121181	115970	66121183	116006	66185343	116049
66121181	115971	66121183	116007	66185343	116050
66121181	115972	66121183	116008	66185343	116051
66121181	115973	66121183	116010	66185343	116052
66121181	115974	66121183	116011	66185343	116053
66121181	115975	66121183	116012	66185343	116054
66121181	115976	66121183	116013	66185343	116055
66121181	115977	66121183	116014	66185343	116056
66121181	115978	66121183	116016	66185344	116057
66121182	115981	66121183	116017	66185344	116058
66121182	115982	66121183	116018	66185344	116060
66121182	115983	66121184	116019	66185344	116061

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66185344	116064	66252795	116123	66360519	116143
66185344	116066	66252795	116124	66360519	116145
66185344	116067	66252795	116125	66360519	116146
66185344	116068	66252795	116126	66360519	116147
66185344	116069	66252795	116127	66360519	116148
66185344	116070	66252795	116128	66360519	116150
66185344	116071	66252795	116129	66360519	116151
66185344	116072	66252795	116130	66360519	116152
66185344	116073	66252795	116131	66360519	116153
66185344	116074	66252795	116132	66360519	116155
66185344	116075	66252795	116133	66360519	116156
66185344	116076	66252795	116134	66360519	116157
66185345	116077	66252795	116135	66360519	116158
66185345	116078	66252795	116136	66360519	116159
66185345	116079	66252795	116137	66360519	116160
66185345	116080	66252795	116138	66360519	116161
66185345	116081	66252795	116139	66427989	116163
66185345	116082	66252795	116140	66427989	116164
66185345	116083	66252795	116141	66427989	116165
66185345	116084	66252795	116142	66427989	116167
66185345	116085	66360518	116103	66427989	116168
66185345	116086	66360518	116106	66427989	116169
66185345	116088	66360518	116111	66427989	116170
66185345	116091	66360518	116112	66427989	116171
66185345	116092	66360518	116113	66427989	116172
66185345	116093	66360518	116114	66427989	116173
66185345	116094	66360518	116115	66427989	116174
66185345	116095	66360518	116116	66427989	116175
66252794	116097	66360518	116117	66427989	116176
66252794	116098	66360518	116118	66427989	116177
66252794	116099	66360518	116119	66427989	116178
66252794	116100	66360518	116120	66427989	116179
66252794	116101	66360518	116121	66427989	116180
66252794	116102	66360518	116122	66427989	116181

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66427989	116182	66488262	116230	66531523	116279
66428246	116183	66488262	116231	66531525	116283
66428246	116188	66488262	116232	66531525	116284
66428246	116189	66488262	116233	66531525	116286
66428246	116191	66488262	116234	66531525	116288
66428246	116192	66488262	116235	66531525	116289
66428246	116193	66488262	116236	66531525	116291
66428246	116194	66488262	116237	66531525	116292
66428246	116195	66488262	116238	66531525	116293
66428246	116196	66488262	116240	66531525	116294
66428246	116197	66488262	116241	66531525	116295
66428246	116198	66488262	116242	66531525	116296
66428246	116199	66531522	116244	66531525	116297
66428246	116200	66531522	116246	66531525	116299
66428246	116201	66531522	116248	66531525	116300
66428246	116202	66531522	116249	66531525	116301
66472343	116209	66531522	116250	66531525	116302
66472343	116210	66531522	116252	66588831	116304
66472343	116211	66531522	116253	66588831	116305
66472343	116212	66531522	116254	66588831	116306
66472343	116214	66531522	116255	66588831	116307
66472343	116215	66531522	116256	66588831	116309
66472343	116216	66531522	116257	66588831	116310
66472343	116217	66531522	116262	66588831	116311
66472343	116219	66531523	116263	66588831	116313
66472343	116221	66531523	116264	66588831	116316
66472343	116222	66531523	116266	66588831	116317
66488262	116223	66531523	116267	66588831	116318
66488262	116224	66531523	116268	66588831	116319
66488262	116225	66531523	116269	66588831	116321
66488262	116226	66531523	116270	66588832	116324
66488262	116227	66531523	116271	66588832	116327
66488262	116228	66531523	116276	66588832	116328
66488262	116229	66531523	116278	66588832	116329

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66588832	116330	66609569	116380	66620922	116421
66588832	116331	66609569	116381	66620923	116425
66588832	116337	66609569	116382	66620923	116426
66588832	116338	66609570	116383	66620923	116427
66588832	116339	66609570	116384	66620923	116428
66588832	116340	66609570	116385	66620923	116429
66588832	116342	66609570	116386	66620923	116430
66609568	116343	66609570	116387	66620923	116431
66609568	116344	66609570	116388	66620923	116433
66609568	116345	66609570	116389	66620923	116434
66609568	116346	66609570	116390	66620923	116435
66609568	116347	66609570	116391	66620923	116437
66609568	116350	66609570	116392	66620923	116438
66609568	116355	66609570	116394	66620923	116439
66609568	116356	66609570	116395	66620923	116441
66609568	116357	66609570	116396	66620924	116443
66609568	116358	66609570	116397	66620924	116446
66609568	116360	66609570	116398	66620924	116449
66609568	116361	66609570	116401	66620924	116450
66609568	116362	66609570	116402	66620924	116451
66609569	116364	66620922	116403	66620924	116452
66609569	116365	66620922	116404	66620924	116453
66609569	116366	66620922	116405	66620924	116454
66609569	116367	66620922	116407	66620924	116455
66609569	116368	66620922	116408	66620924	116456
66609569	116370	66620922	116409	66620924	116457
66609569	116371	66620922	116410	66620924	116462
66609569	116372	66620922	116411	66694114	116463
66609569	116373	66620922	116412	66694114	116464
66609569	116375	66620922	116414	66694114	116465
66609569	116376	66620922	116415	66694114	116466
66609569	116377	66620922	116416	66694114	116467
66609569	116378	66620922	116417	66694114	116468
66609569	116379	66620922	116420	66694114	116470

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66694114	116471	66694116	116514	66799188	116558
66694114	116473	66694116	116515	66799188	116559
66694114	116475	66694116	116516	66799188	116560
66694114	116476	66694116	116518	66799188	116561
66694114	116479	66694116	116519	66847657	116563
66694114	116480	66694116	116520	66847657	116564
66694114	116481	66694116	116521	66847657	116565
66694115	116483	66694116	116522	66847657	116566
66694115	116484	66799187	116523	66847657	116567
66694115	116487	66799187	116524	66847657	116568
66694115	116488	66799187	116525	66847657	116569
66694115	116489	66799187	116526	66847657	116570
66694115	116490	66799187	116527	66847657	116572
66694115	116491	66799187	116529	66847657	116574
66694115	116492	66799187	116530	66847657	116575
66694115	116493	66799187	116534	66847657	116576
66694115	116494	66799187	116535	66847657	116577
66694115	116495	66799187	116536	66847657	116578
66694115	116496	66799187	116538	66847657	116579
66694115	116497	66799187	116539	66847657	116580
66694115	116498	66799187	116540	66847657	116581
66694115	116500	66799187	116542	66847657	116582
66694115	116501	66799188	116543	66847658	116603
66694116	116503	66799188	116544	66847658	116605
66694116	116504	66799188	116545	66847658	116607
66694116	116505	66799188	116546	66847658	116608
66694116	116506	66799188	116547	66847658	116609
66694116	116507	66799188	116549	66847658	116610
66694116	116508	66799188	116550	66847658	116612
66694116	116509	66799188	116551	66847658	116613
66694116	116510	66799188	116553	66847658	116614
66694116	116511	66799188	116555	66847658	116615
66694116	116512	66799188	116556	66847658	116616
66694116	116513	66799188	116557	66847658	116618

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66847658	116619	66995359	116656	67044537	116712
66847658	116620	66995359	116657	67044537	116713
66847658	116621	66995359	116659	67044537	116714
66847658	116622	66995359	116660	67044537	116715
66886861	116600	66995359	116661	67044537	116716
66995358	116623	66995359	116662	67044537	116717
66995358	116625	66995360	116664	67044537	116718
66995358	116627	66995360	116665	67044537	116719
66995358	116628	66995360	116666	67044537	116720
66995358	116629	66995360	116667	67044537	116721
66995358	116630	66995360	116668	67044538	116723
66995358	116631	66995360	116669	67044538	116724
66995358	116632	66995360	116670	67044538	116725
66995358	116633	66995360	116671	67044538	116726
66995358	116634	66995360	116673	67044538	116727
66995358	116635	66995360	116677	67044538	116728
66995358	116636	66995360	116679	67044538	116729
66995358	116637	66995360	116680	67044538	116730
66995358	116638	66995360	116681	67044538	116731
66995358	116639	66995360	116682	67044538	116733
66995358	116640	66995361	116685	67044538	116734
66995358	116641	66995361	116691	67044538	116735
66995358	116642	66995361	116699	67044538	116737
66995359	116644	66995361	116700	67044538	116738
66995359	116645	66995361	116701	67044538	116739
66995359	116647	67044537	116703	67044538	116740
66995359	116648	67044537	116704	67044538	116741
66995359	116649	67044537	116705	67044538	116742
66995359	116650	67044537	116706	67044539	116743
66995359	116651	67044537	116707	67044539	116745
66995359	116652	67044537	116708	67044539	116746
66995359	116653	67044537	116709	67044539	116747
66995359	116654	67044537	116710	67044539	116748
66995359	116655	67044537	116711	67044539	116749

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
67044539	116750	67080656	116799	67139327	116840
67044539	116751	67080656	116800	67139327	116841
67044539	116752	67080656	116801	67139327	116842
67044539	116753	67080656	116802	67139328	116844
67044539	116754	67080657	116803	67139328	116846
67044539	116755	67080657	116804	67139328	116848
67044539	116756	67080657	116805	67139328	116853
67044539	116757	67080657	116806	67139329	116863
67044539	116758	67080657	116807	67139329	116864
67044539	116760	67080657	116808	67139329	116865
67044539	116762	67080657	116809	67139329	116867
67044540	116763	67080657	116810	67139329	116868
67044540	116764	67080657	116811	67139329	116869
67044540	116765	67080657	116812	67139329	116870
67044540	116766	67080657	116815	67139329	116871
67044540	116767	67080657	116816	67139329	116873
67044540	116768	67080657	116817	67139329	116875
67044540	116769	67080657	116818	67139329	116876
67044540	116770	67080657	116819	67139329	116877
67044540	116771	67080657	116820	67139329	116879
67044540	116772	67080657	116821	67139329	116880
67044540	116774	67080657	116822	67139329	116881
67044540	116775	67139327	116825	67139329	116882
67044540	116776	67139327	116826	67198239	116904
67044540	116777	67139327	116827	67198239	116905
67044540	116778	67139327	116828	67198239	116906
67044540	116779	67139327	116829	67198239	116908
67044540	116780	67139327	116830	67198239	116909
67044540	116781	67139327	116832	67198239	116910
67044540	116782	67139327	116834	67198239	116911
67080656	116787	67139327	116836	67198239	116912
67080656	116789	67139327	116837	67198239	116913
67080656	116791	67139327	116838	67198239	116914
67080656	116798	67139327	116839	67198239	116915

Référence du matériel : 00-8801-001-00			Description du matériel : Zimmer® Air Dermatome		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
67198239	116917	67198240	116935	67198241	116895
67198239	116918	67198240	116936	67198241	116896
67198239	116919	67198240	116937	67198241	116897
67198239	116920	67198240	116938	67198241	116899
67198239	116921	67198240	116939	67198241	116900
67198239	116922	67198240	116940	67198241	116901
67198240	116923	67198240	116941	67199552	116944
67198240	116924	67198240	116942	67199552	116945
67198240	116925	67198241	116883	67199552	116946
67198240	116926	67198241	116886	67199552	116948
67198240	116927	67198241	116887	67199552	116949
67198240	116929	67198241	116889	67199552	116950
67198240	116930	67198241	116890	67199552	116951
67198240	116931	67198241	116891	67199552	116954
67198240	116932	67198241	116892	67199552	116955
67198240	116933	67198241	116893	67199552	116957
67198240	116934	67198241	116894	67199552	116959

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
65900465	701341	65944825	701361	65944825	701376
65900465	701343	65944825	701362	65944825	701377
65900465	701344	65944825	701363	65944825	701378
65900465	701345	65944825	701364	65944825	701379
65900465	701346	65944825	701365	65944825	701380
65900465	701350	65944825	701366	66016265	701381
65900465	701351	65944825	701367	66016265	701386
65900465	701352	65944825	701368	66016265	701387
65900465	701353	65944825	701369	66016265	701388
65900465	701354	65944825	701370	66016265	701390
65900465	701355	65944825	701371	66016265	701391
65900465	701356	65944825	701372	66016265	701393
65900465	701357	65944825	701374	66016265	701395
65900465	701359	65944825	701375	66016265	701396

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66016265	701397	66252848	701445	66252850	701483
66016265	701398	66252848	701447	66252850	701484
66016265	701399	66252849	701451	66252850	701485
66016265	701400	66252849	701452	66252850	701486
66121190	701402	66252849	701453	66252850	701487
66121190	701403	66252849	701454	66252850	701488
66121190	701404	66252849	701455	66252850	701489
66121190	701405	66252849	701456	66252850	701490
66121190	701406	66252849	701457	66342488	701491
66121190	701410	66252849	701458	66342488	701493
66121190	701411	66252849	701459	66342488	701494
66121190	701413	66252849	701460	66342488	701495
66121190	701415	66252849	701461	66342488	701497
66121190	701416	66252849	701462	66342488	701498
66121190	701417	66252849	701463	66342488	701499
66121190	701418	66252849	701464	66342488	701500
66121190	701419	66252849	701465	66342488	701501
66121191	701426	66252849	701466	66342488	701502
66121191	701427	66252849	701467	66342488	701503
66121191	701428	66252849	701468	66342488	701504
66121191	701429	66252849	701469	66342488	701505
66121191	701430	66252849	701470	66342488	701506
66121191	701431	66252850	701471	66342488	701507
66121191	701432	66252850	701472	66342488	701509
66121191	701433	66252850	701473	66342488	701510
66121191	701434	66252850	701474	66531526	701511
66121191	701435	66252850	701475	66531526	701512
66121191	701436	66252850	701476	66531526	701513
66121191	701437	66252850	701477	66531526	701514
66121191	701440	66252850	701478	66531526	701515
66252848	701441	66252850	701479	66531526	701516
66252848	701442	66252850	701480	66531526	701517
66252848	701443	66252850	701481	66531526	701518
66252848	701444	66252850	701482	66531526	701520

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66531526	701521	66531528	701582	66609571	701602
66531526	701523	66531528	701583	66609571	701603
66531526	701524	66531528	701584	66609571	701604
66531526	701525	66531528	701585	66609571	701605
66531526	701526	66531528	701586	66609571	701606
66531526	701527	66531528	701589	66609571	701607
66531526	701528	66531528	701590	66609571	701609
66531527	701531	66531529	701552	66609571	701610
66531527	701532	66531529	701553	66620981	701611
66531527	701533	66531529	701554	66620981	701612
66531527	701534	66531529	701555	66620981	701613
66531527	701535	66531529	701556	66620981	701614
66531527	701536	66531529	701557	66620981	701615
66531527	701537	66531529	701560	66620981	701617
66531527	701538	66531529	701561	66620981	701618
66531527	701539	66531529	701562	66620981	701619
66531527	701540	66531529	701563	66620981	701620
66531527	701541	66531529	701564	66620981	701621
66531527	701542	66531529	701565	66620981	701622
66531527	701543	66531529	701566	66620981	701623
66531527	701544	66531529	701567	66620981	701624
66531527	701545	66531529	701568	66620981	701625
66531527	701546	66531529	701569	66620981	701626
66531527	701548	66531529	701570	66620981	701627
66531527	701549	66609571	701591	66620981	701628
66531527	701550	66609571	701592	66620981	701629
66531528	701571	66609571	701593	66620981	701630
66531528	701573	66609571	701594	66620983	701632
66531528	701574	66609571	701595	66620983	701633
66531528	701575	66609571	701596	66620983	701634
66531528	701576	66609571	701597	66620983	701635
66531528	701578	66609571	701599	66620983	701636
66531528	701580	66609571	701600	66620983	701637
66531528	701581	66609571	701601	66620983	701638

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66620983	701639	66751093	701674	66849859	701713
66620983	701640	66751093	701675	66849859	701714
66620983	701641	66751093	701676	66849859	701715
66620983	701642	66751093	701677	66849859	701716
66620983	701643	66751093	701678	66849859	701717
66620983	701644	66751093	701679	66849859	701718
66620983	701645	66751093	701680	66849859	701719
66620983	701646	66751093	701681	66849859	701720
66620983	701647	66751093	701682	66849859	701721
66620983	701648	66751093	701683	66849859	701722
66620983	701650	66751093	701684	66849859	701723
66751092	701651	66751093	701685	66849859	701724
66751092	701652	66751093	701686	66849859	701725
66751092	701653	66751093	701687	66849859	701726
66751092	701654	66751093	701688	66849859	701727
66751092	701655	66751093	701689	66849859	701728
66751092	701656	66751093	701690	66849859	701729
66751092	701657	66849858	701693	66849859	701730
66751092	701658	66849858	701694	66995362	701731
66751092	701659	66849858	701695	66995362	701732
66751092	701660	66849858	701696	66995362	701733
66751092	701661	66849858	701697	66995362	701734
66751092	701662	66849858	701698	66995362	701735
66751092	701663	66849858	701699	66995362	701736
66751092	701664	66849858	701700	66995362	701737
66751092	701665	66849858	701702	66995362	701738
66751092	701666	66849858	701703	66995362	701739
66751092	701667	66849858	701704	66995362	701740
66751092	701668	66849858	701706	66995362	701741
66751092	701669	66849858	701707	66995362	701742
66751092	701670	66849858	701709	66995362	701743
66751093	701671	66849858	701710	66995362	701744
66751093	701672	66849859	701711	66995362	701745
66751093	701673	66849859	701712	66995362	701746

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
66995362	701747	67044648	701804	67198242	701843
66995362	701748	67044648	701805	67198242	701844
66995362	701749	67044648	701806	67198242	701845
66995362	701750	67044648	701807	67198242	701847
67025608	701752	67044648	701808	67198242	701848
67025608	701753	67044648	701809	67198242	701849
67025608	701754	67044648	701810	67198242	701850
67025608	701755	67080990	701771	67198243	701871
67025608	701756	67080990	701772	67198243	701872
67025608	701758	67080990	701773	67198243	701873
67025608	701759	67080990	701774	67198243	701874
67025608	701760	67080990	701775	67198243	701875
67025608	701761	67080990	701777	67198243	701876
67025608	701762	67080990	701778	67198243	701877
67025608	701763	67080990	701779	67198243	701878
67025608	701764	67080990	701780	67198243	701879
67025608	701765	67080990	701781	67198243	701880
67025608	701766	67080990	701782	67198243	701881
67025608	701767	67080990	701784	67198243	701882
67025608	701768	67080990	701785	67198243	701883
67025608	701769	67080990	701786	67198243	701884
67025608	701770	67080990	701787	67198243	701885
67044648	701791	67080990	701788	67198243	701886
67044648	701792	67080990	701790	67198243	701887
67044648	701793	67198242	701831	67198243	701888
67044648	701794	67198242	701832	67198243	701889
67044648	701795	67198242	701833	67198243	701890
67044648	701796	67198242	701835	67198249	701891
67044648	701797	67198242	701836	67198249	701892
67044648	701798	67198242	701837	67198249	701893
67044648	701799	67198242	701839	67198249	701894
67044648	701800	67198242	701840	67198249	701895
67044648	701802	67198242	701841	67198249	701896
67044648	701803	67198242	701842	67198249	701897

Référence du matériel : 88710100			Description du matériel : Zimmer® Dermatome AN		
Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série	Numéro de lot	Numéro de série
67198249	701898	67214429	701816	67277943	701853
67198249	701899	67214429	701817	67277943	701855
67198249	701900	67214429	701818	67277943	701856
67198249	701901	67214429	701819	67277943	701857
67198249	701902	67214429	701820	67277943	701858
67198249	701903	67214429	701821	67277943	701859
67198249	701904	67214429	701822	67277943	701860
67198249	701905	67214429	701823	67277943	701861
67198249	701906	67214429	701824	67277943	701862
67198249	701907	67214429	701825	67277943	701863
67198249	701908	67214429	701826	67277943	701864
67198249	701909	67214429	701827	67277943	701865
67198249	701910	67214429	701828	67277943	701866
67214429	701811	67214429	701829	67277943	701867
67214429	701812	67214429	701830	67277943	701868
67214429	701813	67277943	701851	67277943	701869
67214429	701814	67277943	701852	67277943	701870
67214429	701815				