

Mesdames, Messieurs,

Chez Coloplast, nous mettons tout en œuvre pour faciliter la vie des personnes souffrant d'altérations physiques et intimes. Nous innovons régulièrement dans la prise en charge des troubles colorectaux pour aider les patients qui en souffrent à retrouver confiance et liberté.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de la solution Peristeen Obtal® pour lutter contre les fuites de selles chez les patients atteints d'incontinence fécale sévère liée à des pathologies d'origine neurologique.


Ce dispositif est un tampon obturateur anal, en mousse de polyuréthane, il agit comme une barrière pour lutter contre les fuites de selles du rectum.

Pour s'adapter à l'anatomie de chaque utilisateur, Peristeen Obtal® existe en deux tailles, petit et grand.

Laboratoires Coloplast
38 rue Roger Salengro,
94120 Fontenay-sous-Bois
France
Tel. +33 1 56 63 17 00
www.coloplastprofessional.fr



Appliquer un peu de gel aqueux Peristeen, fourni dans la boîte, sur l'extrémité du tampon. D'autres lubrifiants aqueux peuvent être utilisés. Ne pas utiliser de corps gras ⁽²⁾.

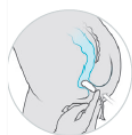

Insérer doucement le tampon dans l'anus. Ne pas garder le même tampon plus de 12h. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.



Tirer doucement sur le cordon pour retirer le tampon

Peristeen Obtal® agit comme une barrière efficace pour lutter contre les fuites de selles du rectum ²



Tampon en mousse de polyuréthane comprimée par un film hydrosoluble



Insertion identique à celle d'un suppositoire à l'aide du lubrifiant hydrophile fourni (pas de corps gras)



Ouverture en corolle au contact de la muqueuse anale



Fermeture mécanique du canal anal tout en laissant passer les gaz



Disponible en 2 tailles : Ø 37 mm et Ø 45 mm

Ces dispositifs viendront compléter le portefeuille Peristeen®, à compter du 2 février 2026 avec 2 références disponibles (boîtes de 20 unités):

Libellé long	Référence	GTIN13	ACL
PERISTEEN OBTAL PETIT 37MM	014500	5701780678117	7456269
PERISTEEN OBTAL GRAND 45MM	014510	5701780678124	7456275

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Manon Kieffer
Chef de marché Troubles Colorectaux
Laboratoires Coloplast

Conformément à notre Contrat 2025, et notamment aux obligations de confidentialité qu'il contient, nous vous rappelons que les informations divulguées dans cette communication sont strictement confidentielles et ne doivent pas être partagées avant la date officielle de lancement commercial du produit, fixée au 2 février 2026. En cas de violation de cette obligation de confidentialité, Laboratoires Coloplast se réserve le droit d'engager toute action appropriée, y compris judiciaire, en vue d'obtenir réparation intégrale de tout préjudice subi.

Mentions Légales

Peristeen Obtal® Dispositif médical destiné à lutter contre les fuites de selles, de classe IIb, marqué CE 2460. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Le tampon obturateur anal ne doit pas être utilisé en cas de :- d'hémorroïdes (3e et 4e degrés)- de sténose anale.

Intégralement remboursé dans l'indication incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire : Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72,68 € TTC, remb. Sec. Soc. 72,68 €.