

Information urgente de sécurité

Systèmes de pompe à insuline MiniMed™ Paradigm™, MiniMed™ 600 et MiniMed™ 700

Positionnement de la pompe par rapport au site de perfusion Notification

Produits concernés :

Pompe à insuline	Modèle/numéro CFN
Paradigm™	MMT-554, MMT-754
Pompe à insuline MiniMed™ 640G	MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751, MMT-1752
Pompe à insuline MiniMed™ 740G	MMT-1811, MMT-1812, MMT-1861, MMT-1862
Pompe à insuline MiniMed™ 780G	MMT-1885, MMT-1886, MMT-1895, MMT-1896

Février 2026

Référence Medtronic : FA1514

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant de l'UE : US-MF-000023100>

Cher Professeur, cher Docteur,

Nous tenons à vous communiquer cette information de sécurité destinée à vos patients utilisateurs d'une pompe à insuline de la série MiniMed™ Paradigm, MiniMed™ 600 séries, ou MiniMed™ 700. Cette notification spécifie que la quantité d'insuline administrée peut être légèrement variable lorsque la pompe est portée à distance au-dessus ou au-dessous de l'emplacement du cathéter.

Nous vous envoyons cette notification à titre d'information uniquement. Aucune action n'est nécessaire de votre part. Les patients reçoivent en parallèle cette information par le biais de leur Prestataires de Santé habituel. Nous vous invitons à prendre connaissance des informations figurant dans le courrier Patient joint afin d'être en mesure de renforcer ces recommandations lors de vos rendez-vous de suivi avec vos patients si vous l'estimez nécessaire. Dans l'intervalle si votre patient souhaite une information complémentaire, nous l'invitons à contacter son Prestataire de Santé.

L'ANSM a été informée de cette mesure.

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Pour Medtronic, la sécurité est notre priorité absolue et nous nous engageons à fournir des thérapies sûres et efficaces. Nous apprécions le temps et l'attention que vous consacrez à lire cette notification importante. Pour plus d'informations et les dernières mises à jour, veuillez-vous adresser à votre contact Medtronic Minimed local ou nous contacter sur savdiabete@medtronic.com.

Cordialement,

Guillaume Innocenti
Senior Directeur Diabetes

Pièce jointe : Courrier destiné aux patients