

Information urgente de sécurité

Retrait des ventilateurs Newport™ HT70 et Newport™ HT70 Plus

Notification

Août 2026

Référence Medtronic : FA1479

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant de l'UE : US-MF-000028763

À l'attention des Professionnels de santé et Correspondants de matériovigilance,

Cette lettre fait suite aux précédentes communications de Medtronic concernant l'action corrective sur le terrain relative à certains ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus et fournit des informations sur les produits supplémentaires concernés identifiés depuis la première communication. D'après nos registres, un ou plusieurs de ces produits ajoutés ont été livrés à votre établissement.

La lettre initiale avait pour objet de vous informer que Medtronic procédait au rappel de certains ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus portant des numéros de série spécifiques, ainsi que de certains ensembles de cartes de circuits imprimés (PCBA) de rechange Newport™ associés, et contenait des directives visant à cesser l'utilisation clinique. Dans le cadre de cette mise à jour du rappel, Medtronic continue de recommander de cesser toute utilisation clinique des dispositifs concernés, qu'ils aient été identifiés précédemment ou qu'ils viennent de l'être.

Description du problème :

Notre enquête menée à la suite de réclamations de clients a permis d'identifier deux condensateurs distincts sur l'un des ensembles de cartes de circuits imprimés (PCBA) du ventilateur qui, en cas de panne, peuvent entraîner l'un des deux scénarios suivants : l'arrêt du ventilateur en cours d'utilisation, nécessitant alors un mode de ventilation alternatif, ou le non-déclenchement de l'alarme d'arrêt en cas d'arrêt du ventilateur. Aucun cas de défaillance simultanée des deux condensateurs sur une même carte n'a été observé, ni prévu, car les causes sont distinctes et non corrélées.

Risque pour la santé :

Des blessures graves et/ou des décès peuvent survenir en raison des modes de panne impliqués dans ce rappel. L'arrêt du fonctionnement du ventilateur ou l'absence d'alarme sonore lors de l'arrêt chez un patient ventilé mécaniquement peuvent provoquer une insuffisance respiratoire, une hypoventilation, une faible saturation en oxygène, une hypoxie, un retard de traitement, voire des conséquences graves telles qu'une lésion cérébrale et/ou le décès. Lors de la surveillance après commercialisation en cours, Medtronic a identifié 73 réclamations et signalements d'événements indésirables associés à ces problèmes, dont une blessure grave et deux décès.

Prise en charge des patients :

Les professionnels de santé dont les patients sont actuellement ventilés à l'aide des ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus concernés, ou dont les ventilateurs contiennent des PCBA de rechange concernés, doivent évaluer le risque global et déterminer le moment approprié pour procéder à leur remplacement. En attendant de mettre en place un mode de ventilation alternatif, continuer de suivre les politiques et procédures de votre établissement ainsi que les avertissements généraux figurant dans les manuels d'utilisation, notamment :

- Un patient connecté à un ventilateur nécessite une surveillance constante par du personnel formé à son état clinique.
- Toujours prévoir une source d'alimentation et un mode de ventilation de secours lorsque le ventilateur est en fonctionnement, en cas de problème mécanique ou système.
- Toujours utiliser des dispositifs de surveillance appropriés pour garantir une oxygénation et une ventilation suffisantes (par exemple un oxymètre de pouls et/ou un capnographe) lors de l'utilisation du ventilateur Newport™ HT70 sur un patient.
- Si à tout moment le patient ne réagit pas correctement à la ventilation, le déconnecter immédiatement du ventilateur et le raccorder à un autre mode de ventilation. Contacter immédiatement le médecin ou professionnel de santé du patient.

Medtronic recommande également de suivre la procédure de configuration patient décrite dans les manuels d'utilisation pour vérifier le bon fonctionnement de l'alarme d'arrêt avant toute utilisation, bien que cette vérification ne garantisse pas l'absence de panne future.

Mesures prises par Medtronic :

- Medtronic a précédemment identifié les numéros de série des ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus concernés. Veuillez vous reporter aux annexes A d'information urgente de sécurité initial.
- Pour votre information, Medtronic a également identifié un nombre limité de produits concernés dont la grande majorité a été fabriquée dans un établissement qui n'est plus opérationnel. En raison de l'ancienneté des produits et des limites des registres historiques de distribution, il n'a pas été possible de confirmer l'identité du destinataire final. Ces produits figurent à l'annexe D de la présente lettre.
- Medtronic ne procédera pas à la réparation des ventilateurs ou des PCBA de rechange concernés. Medtronic n'assurera plus la maintenance des ventilateurs concernés identifiés dans cette notification.

Mesures à prendre :

- Examiner les annexes C et D afin d'identifier les ventilateurs ou les PCBA de rechange concernés, y compris les ventilateurs sur lesquels les PCBA concernés ont été installés lors d'une intervention de maintenance.
- Si les mesures décrites dans la lettre précédente n'ont pas encore été mises en oeuvre, consulter l'annexe A de la lettre initiale afin d'identifier les produits susceptibles d'être concernés.
- Si un ventilateur ou un PCBA de rechange concerné est actuellement utilisé en milieu clinique, mettre le dispositif hors service et le remplacer par un mode de ventilation alternatif.
- Une fois la transition vers le ou les ventilateurs de substitution effectuée, mettre en quarantaine tous les ventilateurs et PCBA de rechange concernés identifiés, puis suivre les procédures de votre établissement pour retirer et éliminer les appareils concernés.
- Remplir le formulaire d'accusé de réception client joint et l'envoyer par e-mail à votre représentant Medtronic local sur le terrain à l'adresse information-securite@medtronic.com
- Pour toute question ou remarque supplémentaire, contacter votre représentant Medtronic.
- Diffuser cet avis à tout le personnel concerné au sein de votre établissement et à toute autre structure à laquelle ces ventilateurs ou PCBA de rechange ont pu être cédés ou distribués.
- Remettre la lettre jointe à tous vos patients utilisant ce ventilateur à domicile afin de les informer de ce rappel.
- Signaler à votre représentant Medtronic local tout incident connu en lien avec ces défaillances.

Informations supplémentaires

Medtronic a notifié l'ANSM de cette mesure.

Medtronic a procédé à une revue exhaustive des dossiers d'expédition, de vente et de maintenance disponibles afin d'identifier tous les destinataires susceptibles d'avoir reçu des ventilateurs ou des PCBA de rechange associés concernés. Sur la base de cette évaluation, Medtronic informe directement tous les destinataires identifiables des produits concernés. Pour le nombre limité de produits concernés dont l'identité du destinataire final n'a pas pu être confirmée, Medtronic publiera également les informations relatives aux produits concernés sur le site Web de Medtronic afin de favoriser une plus large diffusion de cette mesure. Voir la section Références.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous nous engageons à assurer la sécurité des patients et vous remercions de l'attention particulière que vous porterez à cette information. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant sur le terrain Medtronic.

Cordialement,

Frédéric VERBIST

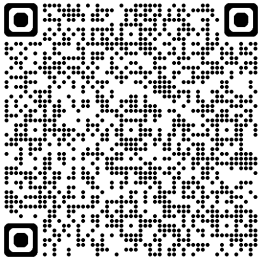
Product Manager RI

Pièces jointes :

Annexe D – Ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus et PCBA de rechange concernés sans destinataire identifiable
Formulaire d'accusé de réception client

Références :

Scanner le code-barres ou suivre le lien pour consulter la liste des ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus et PCBA de rechange concernés sans destinataire identifiable

Lien vers la page Web	Code QR
https://medtronic.com/NewportUpdate	

Annexe D:

Ventilateurs Newport™ HT70 et HT70 Plus et PCBA de rechange concernés sans destinataire identifiable

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série				
HT70P CONTROL BOARD ROHS X1	GR105795	GR105795	1750DA473	1525DA373	1526DA158	1546DA133	1701DA064
			1850DA057	1525DA375	1526DA172	1546DA153	1701DA072
			1502DA065	1525DA379	1526DA191	1549DA070	1701DA094
			1511DA019	1525DA382	1526DA202	1549DA078	1701DA100
			1523DA196	1525DA391	1526DA203	1549DA238	1701DA102
			1523DA197	1525DA397	1526DA227	1549DA262	1701DA110
			1523DA229	1525DA399	1526DA228	1549DA327	1706DA009
			1525DA038	1525DA413	1529DA081	1605DA012	1706DA024
			1525DA139	1525DA415	1530DA023	1605DA021	1706DA028
			1525DA212	1525DA426	1530DA025	1605DA037	1706DA038
			1525DA251	1525DA428	1530DA028	1605DA066	1706DA039
			1525DA253	1525DA430	1530DA035	1605DA092	1706DA042
			1525DA254	1525DA433	1530DA037	1605DA107	1706DA068
			1525DA258	1525DA435	1530DA044	1605DA113	1706DA072
			1525DA259	1525DA440	1530DA048	1605DA152	1706DA107
			1525DA262	1525DA446	1530DA051	1626DA050	1706DA116
			1525DA271	1525DA453	1530DA054	1626DA064	1706DA155
			1525DA275	1525DA454	1530DA064	1626DA078	1706DA157
			1525DA285	1525DA455	1530DA083	1626DA114	1706DA162
			1525DA287	1525DA459	1530DA088	1626DA116	1706DA175
			1525DA289	1525DA464	1530DA106	1626DA125	1804DA024
			1525DA291	1526DA011	1530DA116	1647DA022	1804DA159
			1525DA300	1526DA012	1530DA126	1647DA059	1741DA018
			1525DA302	1526DA021	1530DA129	1647DA078	1741DA029
			1525DA303	1526DA022	1530DA134	1647DA092	1741DA030
			1525DA311	1526DA023	1530DA160	1701DA008	1741DA036
			1525DA327	1526DA028	1530DA162	1701DA009	1750DA387
			1525DA329	1526DA029	1545DA063	1701DA010	1750DA391
			1525DA337	1526DA030	1545DA118	1701DA020	1750DA595
			1525DA340	1526DA033	1545DA213	1701DA023	1751DA035
			1525DA341	1526DA034	1546DA016	1701DA031	1751DA167
			1525DA343	1526DA046	1546DA027	1701DA039	1804DA014
			1525DA344	1526DA050	1546DA031	1701DA045	1806DA055
			1525DA348	1526DA051	1546DA035	1701DA053	1806DA168
			1525DA352	1526DA076	1546DA045	1701DA054	1850DA006
			1525DA356	1526DA091	1546DA052	1701DA056	
			1525DA357	1526DA093	1546DA066	1701DA057	
			1525DA360	1526DA108	1546DA072	1701DA061	
			1525DA365	1526DA110	1546DA126	1701DA063	

Medtronic

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série				
HT70-2 CONTROL BOARD ROHS X1	GR105796	GR105796	1806DA141	1545DA040	1546DA075	1549DA049	1549DA236
			1531DA200	1546DA005	1546DA077	1549DA051	1549DA239
			1531DA234	1546DA010	1546DA092	1549DA061	1549DA245
			1533DA020	1546DA012	1546DA102	1549DA063	1549DA252
			1533DA068	1546DA014	1546DA107	1549DA079	1549DA255
			1533DA099	1546DA015	1546DA108	1549DA085	1549DA267
			1533DA235	1546DA018	1546DA113	1549DA086	1549DA269
			1537DA042	1546DA023	1546DA123	1549DA101	1744DA208
			1537DA110	1546DA032	1546DA144	1549DA106	1804DA005
			1537DA127	1546DA038	1546DA145	1549DA136	1804DA190
			1537DA209	1546DA057	1546DA146	1549DA163	1804DA195
			1538DA095	1546DA058	1546DA150	1549DA168	1806DA092
			1538DA147	1546DA063	1546DA157	1549DA169	
			1538DA165	1546DA073	1546DA161	1549DA233	
HT70 + CNTRL BOARD, ROHS	GR- PCB3252A	GR- PCB3252A	1751DA043				
			1751DA096				

Medtronic

HT70 Conversion Kit	GRFSKHT7 0M-2	GRFSKHT70M -2	1529DE015	1736DE380	1739DE005	1734DE023	1736DE248
			1529DE074	1736DE384	1739DE046	1734DE031	1736DE261
			1529DE075	1736DE388	1739DE101	1734DE040	1736DE266
			1529DE087	1736DE390	1743DE058	1734DE043	1736DE267
			1533DE156	1736DE391	1743DE075	1734DE046	1736DE273
			1536DE113	1736DE392	1743DE098	1734DE051	1736DE278
			1713DE147	1736DE406	1743DE102	1734DE052	1736DE316
			1717DE056	1736DE425	1743DE111	1734DE054	1736DE321
			1717DE076	1736DE431	1743DE113	1734DE059	1736DE340
			1717DE092	1736DE433	1745DE023	1734DE062	1736DE358
			1717DE096	1736DE437	1745DE063	1734DE076	1736DE373
			1717DE097	1736DE442	1745DE079	1734DE078	1736DE376
			1717DE098	1736DE447	1745DE110	1734DE080	1736DE399
			1717DE108	1736DE459	1745DE113	1734DE081	1736DE401
			1717DE185	1736DE472	1745DE122	1734DE085	1736DE420
			1719DE053	1736DE473	1745DE131	1734DE086	1736DE421
			1719DE201	1736DE475	1747DE034	1734DE088	1736DE444
			1734DE007	1736DE483	1747DE064	1734DE089	1736DE461
			1734DE020	1736DE493	1747DE124	1734DE090	1736DE463
			1734DE035	1738DE011	1749DE105	1734DE091	1736DE497
			1734DE057	1738DE013	1750DE014	1734DE100	1736DE501
			1734DE058	1738DE043	1801DE009	1734DE114	1738DE025
			1734DE095	1738DE068	1801DE040	1734DE116	1738DE038
			1734DE096	1738DE076	1801DE116	1734DE119	1738DE042
			1734DE105	1738DE085	1801DE189	1734DE123	1738DE070
			1734DE120	1738DE139	1803DE003	1734DE134	1738DE071
			1734DE124	1738DE141	1803DE069	1734DE145	1738DE090
			1734DE162	1738DE143	1803DE125	1734DE151	1738DE095
			1734DE168	1738DE146	1803DE145	1734DE152	1738DE109
			1734DE180	1738DE155	1713DE235	1734DE179	1738DE110
			1734DE221	1738DE156	1734DE004	1734DE185	1738DE140
			1734DE226	1738DE160	1734DE155	1734DE186	1738DE151
			1734DE237	1738DE161	1734DE187	1734DE188	1738DE152
			1734DE250	1738DE164	1738DE310	1734DE194	1738DE191
			1736DE012	1738DE173	1738DE474	1734DE196	1738DE206
			1736DE025	1738DE174	1739DE167	1734DE197	1738DE208
			1736DE040	1738DE181	1745DE270	1734DE213	1738DE209
			1736DE084	1738DE188	1803DE045	1734DE217	1738DE214
			1736DE119	1738DE205	1803DE101	1734DE232	1738DE242
			1736DE123	1738DE225	1803DE114	1734DE233	1738DE248
			1736DE131	1738DE227	1804DE011	1734DE239	1738DE252
			1736DE255	1738DE236	1804DE024	1734DE257	1738DE315
			1736DE264	1738DE276	1804DE034	1736DE037	1738DE365
			1736DE269	1738DE303	1804DE037	1736DE046	1738DE484
			1736DE275	1738DE332	1804DE056	1736DE049	1738DE503
			1736DE284	1738DE360	1804DE065	1736DE067	1738DE591

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série
			1736DE289 1738DE369 1804DE093 1736DE083 1738DE603 1736DE300 1738DE393 1804DE101 1736DE127 1738DE609 1736DE302 1738DE405 1804DE116 1736DE141 1738DE612 1736DE307 1738DE410 1804DE123 1736DE142 1739DE081 1736DE313 1738DE426 1804DE131 1736DE152 1739DE088 1736DE323 1738DE430 1804DE136 1736DE160 1739DE114 1736DE327 1738DE436 1804DE138 1736DE169 1739DE181 1736DE330 1738DE446 1804DE143 1736DE187 1739DE200 1736DE338 1738DE447 1804DE154 1736DE188 1741DE107 1736DE346 1738DE464 1804DE159 1736DE194 1741DE129 1736DE347 1738DE496 1807DE093 1736DE199 1745DE006 1736DE363 1738DE511 1717DE052 1736DE209 1745DE146 1736DE365 1738DE552 1717DE102 1736DE223 1747DE046 1736DE366 1738DE561 1717DE109 1736DE229 1803DE139 1736DE374 1738DE567 1734DE015 1736DE239 1803DE167 1736DE375 1738DE582 1734DE018 1736DE244 1804DE096
Newport™ HT70 Ventilator	HT70M- CN-NA	HT70M-CN- NA	N15HT700617415 N15HT700817466 N15HT700917528 N15HT701017555 N17HT700117709 N15HT700917529 N15HT700917510 N15HT700917532 N15HT701017556 N17HT700117710 N15HT700616245 N15HT700917511 N15HT700917533 N15HT701017558 N17HT700117712 N15HT700616247 N15HT700917512 N15HT700917534 N15HT701017560 N17HT700117714 N15HT700616248 N15HT700917513 N15HT700917535 N15HT701017563 N17HT700117718 N15HT700817458 N15HT700917522 N15HT700917536 N15HT701017564 N17HT701218077 N15HT700817460 N15HT700917523 N15HT700917537 N17HT700117685 N18HT700318081 N15HT700817462 N15HT700917524 N15HT701017549 N17HT700117686 N18HT700318102 N15HT700817463 N15HT700917525 N15HT701017550 N17HT700117692 N15HT700817464 N15HT700917526 N15HT701017551 N17HT700117695 N15HT700817465 N15HT700917527 N15HT701017554 N17HT700117700
Newport™ HT70 Ventilator	HT70M-SY- EU	HT70M-SY-EU	N15HT700817449 N16HT701114645

Medtronic

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série
Newport™ HT70 Ventilator	HT70M-WW-NA	HT70M-WW-NA	HT7P180191
Newport™ HT70Plus Ventilator	HT70PM-ES-NA	HT70PM-ES-NA	N16HT720119047 N16HT720919614 N17HT720620427 N17HT720920920 N17HT720620429 N16HT720319396 N16HT720919616 N17HT720620428 N17HT721021096 N17HT720620431 N16HT720919612 N16HT720919619 N17HT720620430 N16HT720119052 N18HT720321908
Newport™ HT70Plus Ventilator	HT70PM-ES-EU	HT70PM-ES-EU	N16HT720219069
Newport™ HT70Plus Ventilator	HT70PM-JP-NA	HT70PM-JP-NA 10884521542 198	N16HT720319429 N17HT720420218

Medtronic

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série
Newport™ HT70Plus Ventilator	HT70PM- SY-EU	HT70PM-SY- EU 10884521542 228	N15HT720818463 N16HT720419447 N16HT720419524 N17HT720920788 N18HT720121470 N15HT720918549 N16HT720419474 N16HT720419527 N17HT720920793 N18HT720121568 N15HT721018670 N16HT720419475 N16HT720419528 N17HT720920794 N18HT720121570 N15HT721018674 N16HT720419476 N16HT720419529 N17HT720920807 N18HT720121572 N15HT720818471 N16HT720419477 N16HT721019713 N17HT720920808 N18HT720121573 N15HT721018641 N16HT720419484 N17HT720720439 N17HT720920811 N18HT720121578 N15HT721118779 N16HT720419486 N17HT720720490 N17HT720920846 N18HT720221772 N15HT721118782 N16HT720419487 N17HT720720492 N17HT720920851 HT7P170845 N15HT721218942 N16HT720419488 N17HT720720493 N17HT720920852 N15HT721016859 N16HT720219105 N16HT720419492 N17HT720720495 N17HT720920864 N15HT721118768 N16HT720219120 N16HT720419496 N17HT720720511 N17HT720920865 N17HT720920701 N16HT720319193 N16HT720419499 N17HT720720513 N17HT720920875 N18HT701118056 N16HT720319208 N16HT720419503 N17HT720920763 N17HT721020953 N16HT720519544 N16HT720319269 N16HT720419504 N17HT720920768 N17HT721020955 N18HT721021608 N16HT720319271 N16HT720419508 N17HT720920770 N17HT721021037 N16HT720319285 N16HT720419522 N17HT720920775 N17HT721021038
HT70PM- WW-EU	HT70PM- WW-NA	HT70PM-WW- NA 10884521544 413	HT7P160020 HT7P160074 HT7P150652 HT7P150046 HT7P160044 HT7P180418 HT7P180569 HT7P170008

Medtronic

Unknown	Unknown	Unknown	1502DA067	1529DA138	1540DA067	1608DA016	1736DA147
			1502DA068	1529DA141	1540DA074	1608DA017	1736DA216
			1507DA003	1529DA168	1540DA092	1608DA019	1736DA303
			1507DA009	1529DA181	1540DA112	1608DA021	1736DA323
			1507DA015	1529DA195	1540DA125	1608DA027	1736DA341
			1507DA020	1530DA015	1540DA130	1608DA030	1736DA358
			1507DA025	1530DA017	1540DA142	1608DA031	1736DA399
			1507DA038	1530DA032	1540DA147	1608DA033	1736DA423
			1507DA039	1530DA105	1540DA179	1608DA035	1736DA474
			1507DA042	1530DA108	1540DA181	1608DA039	1736DA489
			1507DA045	1530DA135	1540DA200	1615DA028	1736DA499
			1507DA057	1530DA156	1540DA205	1615DA030	1736DE080
			1511DA020	1531DA013	1540DA211	1615DA033	1738DA036
			1519DA037	1531DA022	1540DA213	1617DA021	1738DA043
			1519DA060	1531DA024	1540DA225	1617DA028	1738DA100
			1519DA063	1531DA027	1540DA228	1617DA029	1738DA135
			1519DA087	1531DA031	1540DA229	1617DA039	1738DA167
			1519DA096	1531DA038	1540DA236	1617DA074	1738DA169
			1523DA003	1531DA045	1540DA257	1626DA004	1738DA193
			1523DA009	1531DA049	1540DA260	1626DA007	1738DA211
			1523DA014	1531DA072	1540DA265	1626DA012	1738DA239
			1523DA025	1531DA076	1540DA271	1626DA019	1738DA249
			1523DA042	1531DA077	1540DA274	1626DA023	1739DA107
			1523DA050	1531DA079	1540DA277	1626DA026	1739DA114
			1523DA059	1531DA083	1540DA286	1626DA029	1739DA172
			1523DA062	1531DA130	1545DA005	1626DA032	1744DA139
			1523DA065	1531DA132	1545DA015	1626DA039	1744DA151
			1523DA087	1531DA142	1545DA025	1626DA041	1744DA262
			1523DA093	1531DA146	1545DA029	1626DA043	1744DA265
			1523DA133	1531DA152	1545DA047	1626DA046	1744DA297
			1523DA143	1531DA157	1545DA053	1626DA051	1744DA301
			1523DA152	1531DA165	1545DA079	1626DA054	1744DA325
			1523DA166	1531DA184	1545DA081	1626DA062	1745DA266
			1523DA177	1531DA207	1545DA082	1626DA067	1750DA423
			1523DA192	1531DA208	1545DA094	1626DA073	1750DA439
			1523DA209	1531DA228	1545DA108	1626DA079	1750DA622
			1523DA214	1531DA253	1545DA112	1626DA082	1751DA028
			1523DA269	1533DA101	1545DA127	1626DA099	1751DA049
			1523DA272	1533DA109	1545DA143	1626DA108	1751DA062
			1523DA279	1533DA138	1545DA155	1626DA123	1751DA080
			1523DA280	1533DA140	1545DA156	1647DA004	1801DA006
			1524DA040	1533DA141	1545DA161	1647DA026	1801DA019
			1524DA043	1533DA149	1545DA164	1647DA029	1801DA026
			1524DA045	1533DA154	1545DA196	1647DA032	1801DA030
			1524DA064	1533DA193	1546DA002	1647DA035	1801DA044
			1524DA066	1533DA195	1546DA021	1647DA038	1801DA058

Medtronic

			1524DA072	1533DA205	1546DA025	1647DA044	1801DA059
			1524DA076	1533DA229	1546DA037	1647DA061	1801DA063
			1524DA093	1535DA051	1546DA062	1647DA062	1801DA064
			1525DA003	1535DA085	1546DA115	1647DA079	1801DA068
			1525DA024	1535DA101	1546DA121	1647DA082	1801DA070
			1525DA046	1535DA107	1546DA124	1701DA002	1801DA073
			1525DA082	1535DA112	1546DA139	1701DA032	1801DA075
			1525DA095	1535DA128	1546DA158	1701DA062	1801DA076
			1525DA096	1535DA134	1546DA164	1701DA073	1801DA078
			1525DA116	1535DA144	1549DA059	1701DA096	1801DA081
			1525DA125	1535DA146	1549DA090	1702DA008	1801DA085
			1525DA141	1535DA153	1549DA109	1702DA013	1801DA095
			1525DA147	1535DA157	1549DA110	1702DA039	1801DA098
			1525DA152	1535DA160	1549DA113	1702DA042	1801DE049
			1525DA160	1535DA166	1549DA129	1702DA057	1803DA222
			1525DA171	1535DA169	1549DA138	1702DA061	1803DA224
			1525DA201	1535DA173	1549DA142	1702DA074	1803DA318
			1525DA210	1535DA174	1549DA147	1702DA079	1803DA328
			1525DA227	1535DA177	1549DA173	1702DA089	1804DA070
			1525DA272	1535DA188	1549DA180	1702DA104	1804DA111
			1525DA273	1537DA003	1549DA186	1702DA114	1804DA128
			1525DA297	1537DA012	1549DA195	1702DA119	1804DA155
			1525DA353	1537DA018	1549DA196	1702DA123	1806DA045
			1525DA364	1537DA054	1549DA217	1706DA020	1806DA078
			1525DA366	1537DA064	1549DA240	1706DA022	1830DA052
			1525DA393	1537DA081	1549DA247	1706DA025	1838DA012
			1525DA410	1537DA090	1549DA268	1706DA046	1838DA028
			1525DA434	1537DA098	1549DA299	1706DA050	1838DA031
			1525DA460	1537DA099	1549DA300	1706DA061	1838DA037
			1525DA463	1537DA101	1549DA303	1706DA075	1838DA047
			1526DA006	1537DA112	1549DA320	1706DA076	1838DA048
			1526DA027	1537DA120	1549DA322	1706DA087	1838DA051
			1526DA077	1537DA153	1605DA006	1706DA106	1838DA052
			1526DA078	1537DA181	1605DA008	1706DA137	1843DA141
			1526DA085	1537DA191	1605DA015	1706DA144	1843DA146
			1526DA087	1537DA195	1605DA030	1706DA186	1848DA005
			1526DA105	1537DA202	1605DA038	1707DA011	1848DA006
			1526DA109	1537DA205	1605DA048	1707DA014	1848DA016
			1526DA151	1537DA207	1605DA051	1707DA021	1848DA028
			1526DA157	1537DA215	1605DA064	1707DA041	1850DA007
			1526DA210	1538DA006	1605DA079	1707DA052	1850DA024
			1529DA007	1538DA066	1605DA105	1707DA073	1850DA030
			1529DA013	1538DA099	1605DA114	1707DA081	1850DA055
			1529DA018	1538DA111	1605DA135	1707DA092	1901DA002
			1529DA045	1538DA131	1605DA140	1707DA097	1901DA005
			1529DA064	1538DA139	1605DA150	1707DA107	1901DA015

Nom du produit	N° de modèle/ CFN	GTIN	Numéro de série				
			1529DA075	1538DA140	1608DA002	1707DA133	1901DA021
			1529DA091	1538DA142	1608DA005	1707DA161	1901DA023
			1529DA105	1540DA003	1608DA007	1707DA166	1901DA025
			1529DA107	1540DA034	1608DA009	1707DA175	1901DA028
			1529DA116	1540DA057	1608DA011	1707DA179	
			1529DA135	1540DA062	1608DA015	1736DA030	